


Ersatzteilliste Heidelberger Stehgerät Impuls

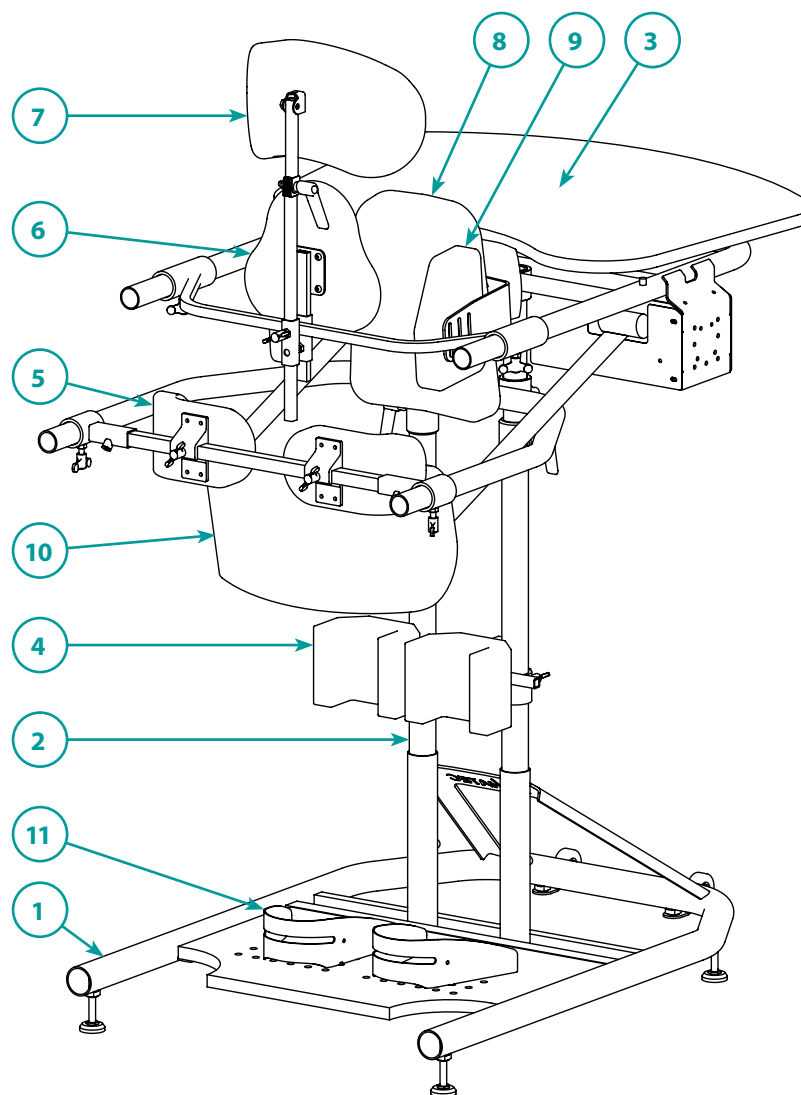

Baugruppen			
Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
1	Untergestell	7	Kopfstütze
2	Mittelsäulen	8	Brustpelotte
3	Tisch	9	Seitenführungspelotten
4	Kniepelotten	10	Gesäßgurt
5	Beckenrahmen und -pelotten	11	Fußschalen
6	Rückenpelotte		

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Gestellfarben und Stoffe	3
1.1 Untergestell Standard	4
1.2 Untergestell Multi	5
2. Mittel- und Tischsäulen	6
3.1 Tischaufnahme	7
3.2 Tisch	8
4.1 Kniepelottenhalter	9
4.2 Kniepelotten	10
5. Beckenrahmen	11
6. Rückenpelotte	14
7. Kopfstütze	15
8. Brustpelotte	16
9. Seitenführungspelotten	17
10. Gesäßgurt	18
11. Fußschalen	19
Notizen	20

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller























Datum

Seriennummer

Kommission

**Bitte geben Sie bei Bestellungen von Rahmenteilen
immer die Gestellfarbe und bei Bezügen die Stofffarbe an!**

Gestellfarben

 Reinweiß	(RAL 9010)	 Perlnachtblau matt	(RAL 5026)
 Narzissengelb	(RAL 1007)	 Wasserblau	(RAL 5021)
 Leuchtgelb	(RAL 1026)	 Lichtgrün	(RAL 6027)
 Reinorange	(RAL 2004)	 Gelbgrün	(RAL 6018)
 Leuchtorange	(RAL 2005)	 Perlgrün matt	(RAL 6035)
 Rubinrot	(RAL 3003)	 Leuchtgrün	(RAL 6038)
 Perlrubinrot matt	(RAL 3032)	 Anthrazitgrau matt	(RAL 7016m)
 Erikaviolett	(RAL 4003)	 Silber metallic ¹	
 Bordeauxviolett	(RAL 4004)	 Anthrazit metallic ¹	
 Ultramarinblau	(RAL 5002)	 Graphitschwarz matt	(RAL 9011m)
 Verkehrsblau	(RAL 5017)	 Tiefschwarz glanz	(RAL 9005g)

Farbdarstellungen nur als Übersicht.

¹ keine RAL Farben

Bezugsfarben einfarbig

Hochwertige Kunstlederbezüge

 Lichtgrau	(N20057)
 Anthrazit	(N20058)

Sonderfarben auf Anfrage

1.1 Untergestell Standard

Ersatzteilliste Heidelberger Stehgerät Impuls

REHATEC®

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse


Besteller

Datum


Seriennummer

Kommission

Tiefer Einstieg*

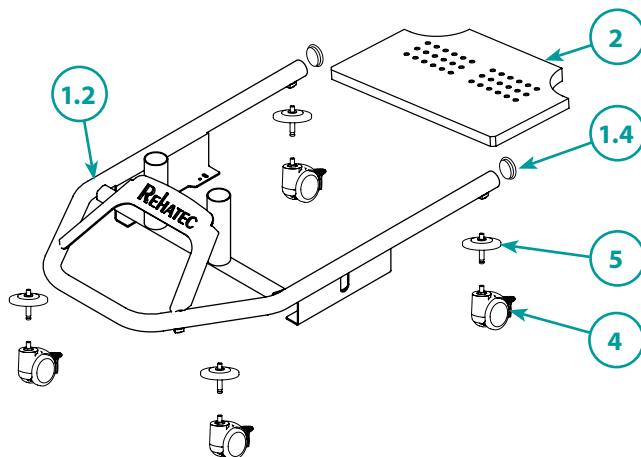

Standard Einstieg

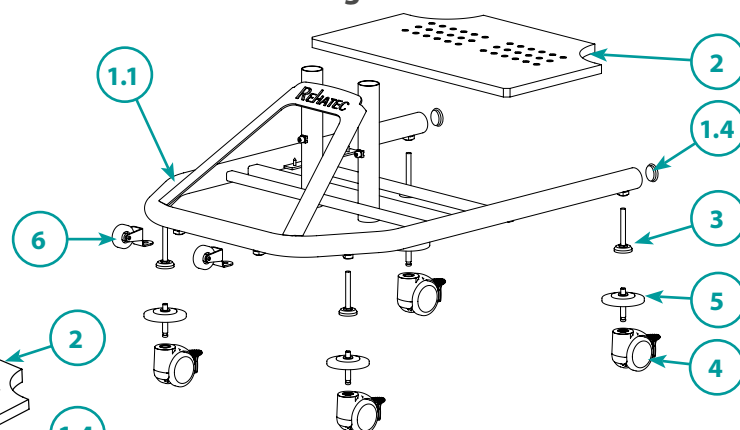

Alle Untergestelle müssen mit Standfüßen oder Transportrollen ausgeliefert werden!

1.1 Untergestell Standard					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1.1	Stück	1008208	1 / 2	Untergestell Standard, inkl. Beschichtung, ohne Zubehör
	1.2	Stück	1010727	1 / 2	Untergestell Standard mit tiefem Einstieg, inkl. Beschichtung, ohne Zubehör*
	1.3.	Stück	1022235-ET-AP	1 / 2	Untergestell verbreitert inkl. verbreitertes Fußbrett (Innenmaß bei 75 mm Rollen = 68 cm) *Aufpreis zu Pos. 1.1. oder 1.2.)
	1.4	Stück	E910018	1 / 2	Gleiter/Stopfen GL 45 S
	2	Stück	1004543	1 / 2	Fußbrett mit Ausschnitt
	2.1.	Stück	1022236	1 / 2	Fußbrett verbreitert mit Ausschnitt (Nur für Untergestell verbreitert möglich)
	3	Stück	1005504	1 / 2	Standfuß
	4	Stück	1005593-ET	1 / 2	Transportrolle, 75 mm mit Feststeller
	5	Stück	1018607-ET	1 / 2	Wand- und Möbelschutz für 75 mm Transportrollen
	6	Stück	1023432	1 / 2	Ankipprolle 50 mm

*Nur in Verbindung mit Transportrollen möglich. Die Maße der min. Einstiegshöhe verändern sich um 5 cm (Kniehöhe und Beckenhöhe).

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 4

08.12.25

1023933_2.10

1.2 Untergestell Multi

Ersatzteilliste Heidelberger Stehgerät Impuls

REHATEC®

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

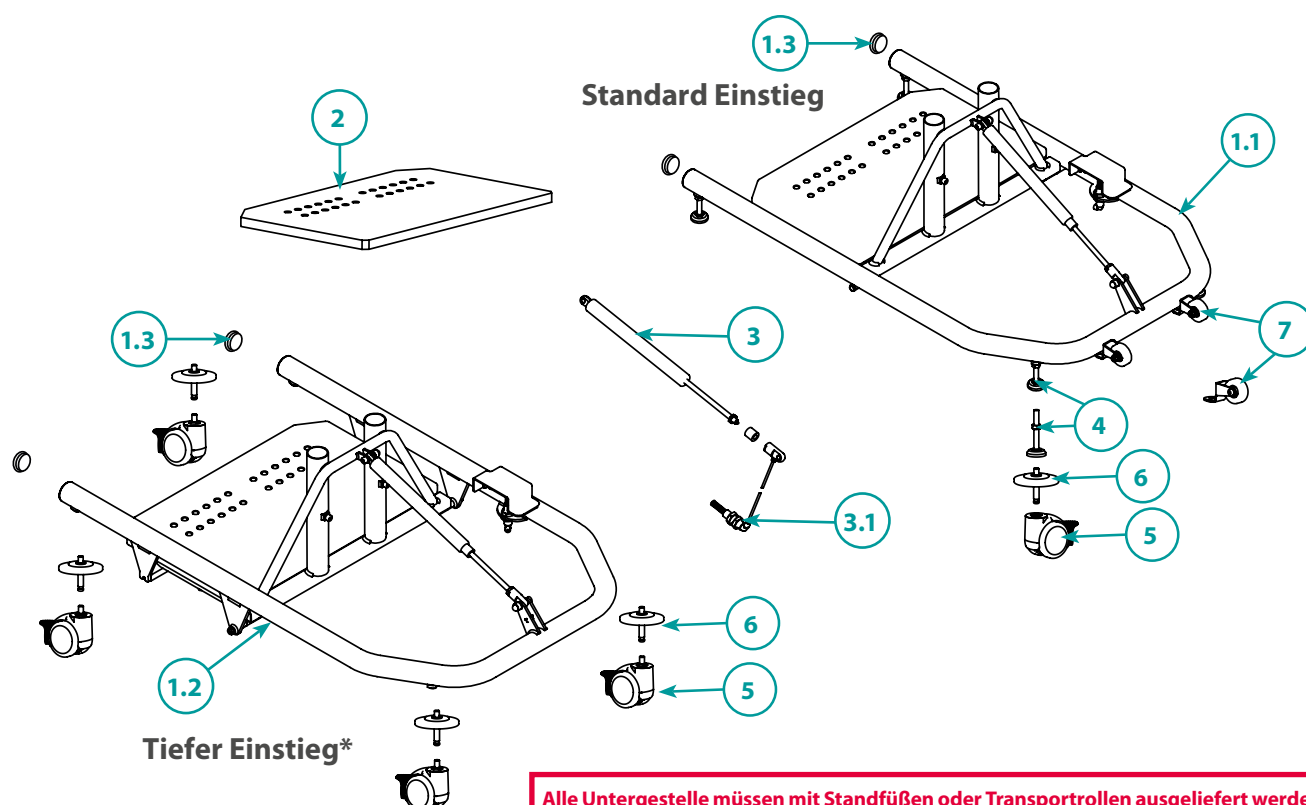

Alle Untergestelle müssen mit Standfüßen oder Transportrollen ausgeliefert werden!

1.2 Untergestell Multi					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1.1	Stück	1010342	1/2	Untergestell Multi, inkl. Beschichtung, ohne Zubehör
	1.2	Stück	1013714	1/2	Untergestell Multi mit tiefem Einstieg, inkl. Beschichtung, ohne Zubehör*
	1.3	Stück	E910018	1/2	Gleiter/Stopfen GL 45 S
	2	Stück	1014904	1/2	Fußbrett, mit Ausschnitt für Untergestell Multi und Multi mit tiefem Einstieg
	3	Stück	1014426	1/2	Gasdruckfeder
	3.1	Stück	1014415	1/2	Hydraulische Auslösung, 800 mm
	4	Stück	1005504	1/2	Standfuß
	5	Stück	1005593-ET	1/2	Transportrollen, 75 mm mit Feststeller
	6	Stück	1018607-ET	1/2	Wand- und Möbelschutz für 75 mm Transportrollen
	7	Stück	1023432	1/2	Ankipprollen 50 mm

*Nur in Verbindung mit Transportrollen möglich. Die Maße der min. Einstiegshöhe verändern sich um 5 cm (Kniehöhe und Beckenhöhe).

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 5

08.12.25

1023933_2.10

2. Mittel- und Tischsäulen

Ersatzteilliste Heidelberger Stehgerät Impuls

REHATEC®

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

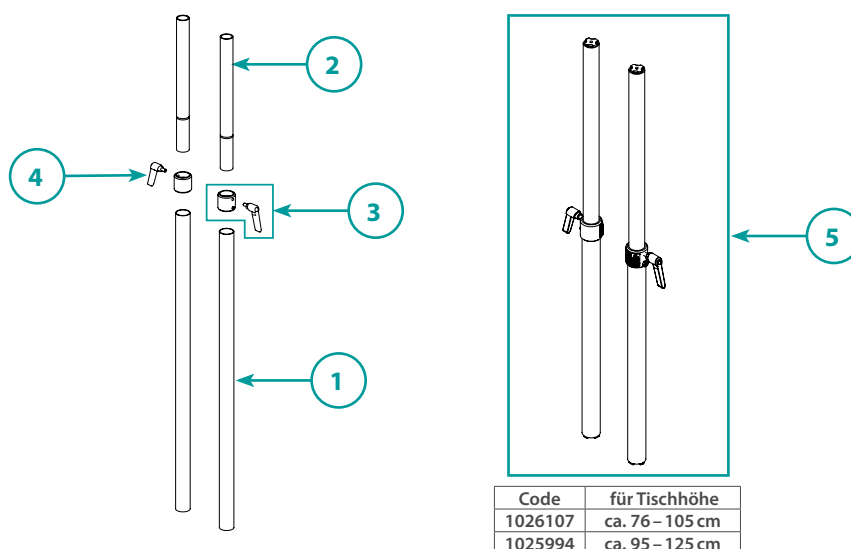

2. Mittel- und Tischsäulen

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1014672	1/2	Mittelsäule, 400 mm, ohne Muffe
	1	Stück	1014673	1/2	Mittelsäule, 450 mm, ohne Muffe
	1	Stück	1004528	1/2	Mittelsäule, 500 mm, ohne Muffe
	1	Stück	1008148	1/2	Mittelsäule, 550 mm, ohne Muffe
	1	Stück	1014675	1/2	Mittelsäule, 600 mm, ohne Muffe
	1	Stück	1007878	1/2	Mittelsäule, 650 mm, ohne Muffe
	1	Stück	1014676	1/2	Mittelsäule, 700 mm, ohne Muffe
	1	Stück	1008147	1/2	Mittelsäule, 750 mm, ohne Muffe
	1	Stück	1014677	1/2	Mittelsäule, 800 mm, ohne Muffe
	1	Stück	1007877	1/2	Mittelsäule, 850 mm, ohne Muffe
	1	Stück	1004530	1/2	Mittelsäule, 900 mm, ohne Muffe
	1	Stück	1008146	1/2	Mittelsäule, 950 mm, ohne Muffe
	2	Stück	1009609	1/2	Tischsäule 600 mm, mit Auszugsmarkierung
	3	Stück	1004584	1/2	Muffe für Mittelsäule, inkl. Klemmhebel
	4	Stück	1014668	1/2	Klemmhebel M8x15
	5	Stück	1026107-ET	1	Tischhöhenverstellung durch Gasdruckfeder KIT für Tischhöhe ca. 76-105 cm
	5	Stück	1025994-ET	2	Tischhöhenverstellung durch Gasdruckfeder KIT für Tischhöhe ca. 95-125 cm

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 6

08.12.25

1023933_2.10

3.1 Tischaufnahme

Ersatzteilliste Heidelberger Stehgerät Impuls

REHATEC®

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

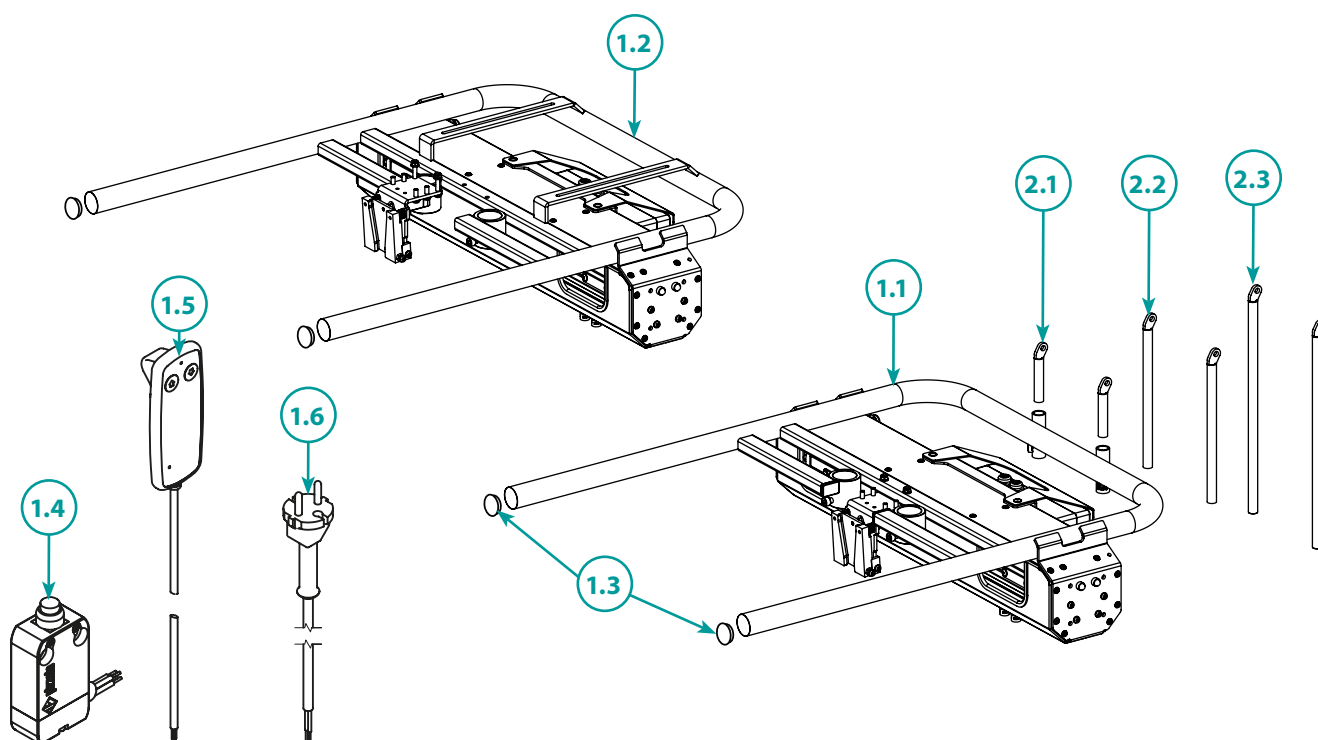

3.1 Tischaufnahme inkl. elektrischem Antrieb

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1.1	Stück	1023355	1/2	Tischaufnahme Standard, inkl. elektrischem Antrieb
	1.2	Stück	1023580	1/2	Tischaufnahme mit Tiefenverstellung, inkl. elektrischem Antrieb
	1.3	Stück	E910016	1/2	Gleiter/Stopfen GL 34 S
	1.4.	Stück	1022151-ET	1/2	Endschalter KIT
	1.5.	Stück	1023569-ET	1/2	Handschalter KIT
	1.6.	Stück	1023551-ET	1/2	Netzkabel KIT
	2.1	Stück	1004394	1/2	Tischplattenschrägverstellung kurz, 70 mm
	2.2	Stück	1004393	1/2	Tischplattenschrägverstellung mittel, 225 mm
	2.3	Stück	1002041	1/2	Tischplattenschrägverstellung lang, 334 mm

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 7

08.12.25

1023933_2.10

3.2 Tisch

Ersatzteilliste Heidelberger Stehgerät Impuls

REHATEC®

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

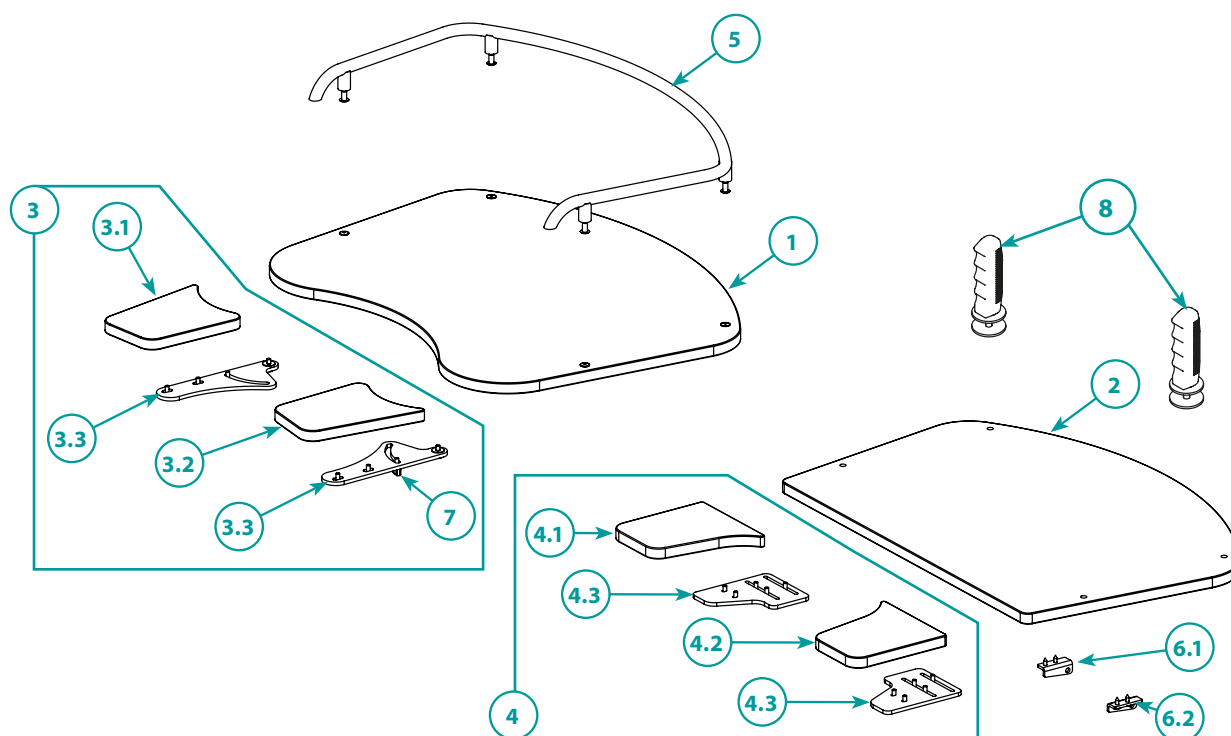

3.2 Tisch					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1007741	1/2	Tischplatte Standard
	2	Stück	1017866	1/2	Tischplatte gerade
	3	Paar	1022255-ET	1/2	Armauflagen für Standardtisch KIT inkl. Holzteil, Lochplatten und Schraubenmaterial
	3.1	Stück	1004567	1/2	Armauflage für Standardtisch, links
	3.2	Stück	1004568	1/2	Armauflage für Standardtisch, rechts
	3.3	Stück	1004476	1/2	Lochplatte für Befestigung der Armauflagen Standard
	4	Paar	1018737-ET	1/2	Armauflagen für geraden Tisch KIT inkl. Holzteil, Lochplatten und Schraubenmaterial
	4.1	Stück	1017867	1/2	Armauflage gerade, links
	4.2	Stück	1017868	1/2	Armauflage gerade, rechts
	4.3	Stück	1016760	1/2	Lochplatte für Befestigung der Armauflagen gerade
	5	Stück	1018799-ET	1/2	Tischumrandung inkl. Befestigungsmaterial
	6.1	Stück	1002044	1/2	Halterung für Tischplatte links
	6.2	Stück	1002045	1/2	Halterung für Tischplatte rechts
	7	Stück	1005701	1/2	Miniwing M6x15 mm
	8	Paar	1027066-ET	1/2	Haltegriffe (vertikal)

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 8

08.12.25

1023933_2.10

4.1 Kniepelottenhalter

Ersatzteilliste Heidelberger Stehgerät Impuls

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller


Datum

Seriennummer

Kommission

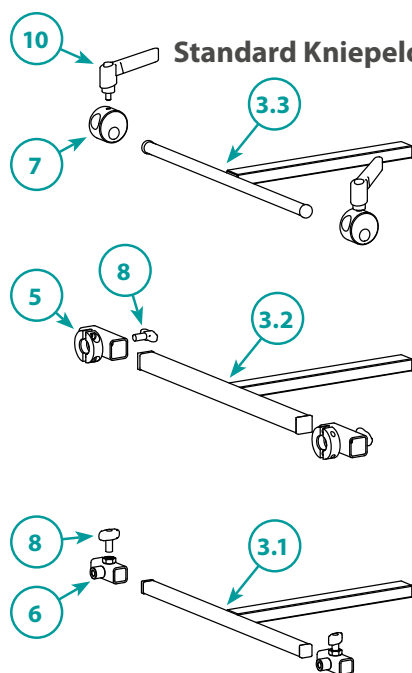

Standard Kniepelottenhalter

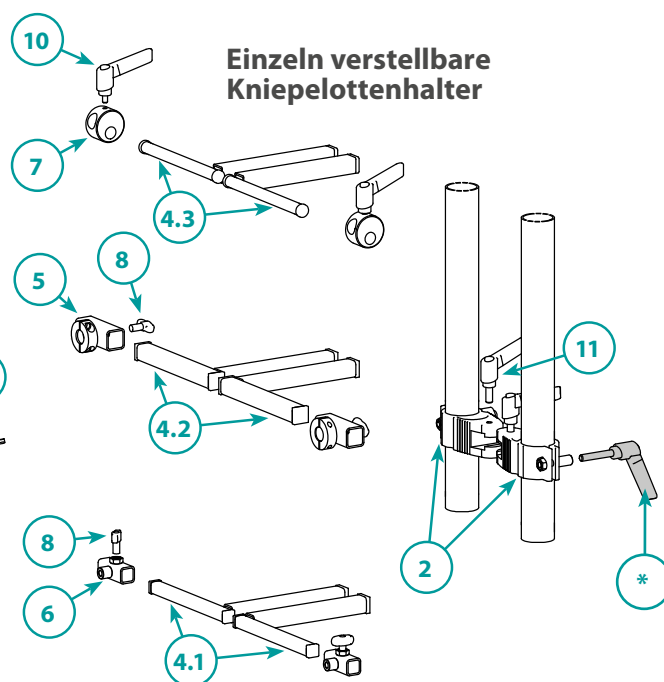

Einzel verstellbare Kniepelottenhalter

* Klemmhebel nicht einzeln lieferbar!

4.1 Kniepelottenhalter

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1004380	1/2	Kniepelottenhalter Standard KIT inkl. Schraubenmaterial
	2	Stück	1004635	1/2	Kniepelottenhalter einzeln verstellbar KIT inkl. Schraubenmaterial
	3.1	Stück	1025743	1/2	T-Stück für Standard-Kniepelotte
	3.2	Stück	1025744	1/2	T-Stück 3-Ebenen-Verstellung für Standard Kniepelotte
	3.3	Stück	1025742	1/2	T-Stück 3-Ebenen-Verstellung für anatomische Kniepelotte
	4.1	Stück	1004384	1/2	Winkel für Kniepelotten einzeln verstellbar
	4.2	Stück	1004385	1/2	Winkel für Kniepelotten einzeln verstellbar + 3-Ebenen
	4.3	Stück	1004386	1/2	Winkel einzeln verstellbar + 3-Ebenen für anatomische Kniepelotte
	5	Stück	1000944	1/2	Halterung Kniepelotte für Kugelgelenk
	6	Stück	1004411	1/2	Unihalter für anatomische Kniepelotten inkl. Flügelschraube M8x12
	7	Stück	1006004	1/2	Knieverstellung 3-Ebenen-Verstellung für anatomische Kniepelotte inkl. Klemmhebel M6x10
	8	Stück	1005188	1/2	Flügelschraube M8x12
	9	Stück	1007657	1/2	Flügelschraube M8x15
	10	Stück	1005032	1/2	Klemmhebel M6x10
	11	Stück	1014668	1/2	Klemmhebel M8x15

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

4.2 Kniepelotten

Ersatzteilliste Heidelberger Stehgerät Impuls

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

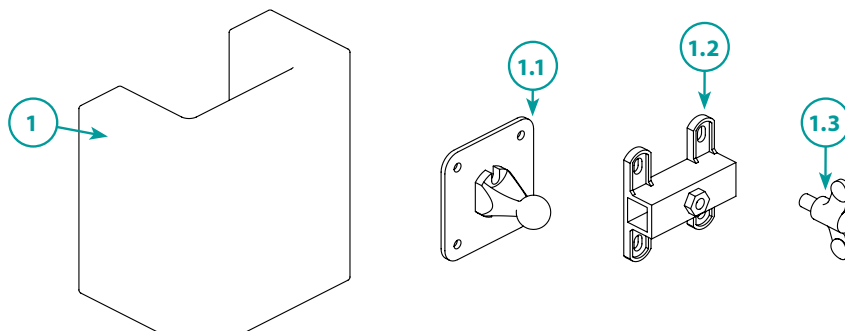

4.2 Kniepelotten					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1022354 - ET	1	Kniepelotte Standard (Kniebreite 6+7 cm) inkl. Blech, Polster und Bezug - ohne Unihalter
	1	Stück	1022355 - ET	2	Kniepelotte Standard (Kniebreite 8-9 cm) inkl. Blech, Polster und Bezug - ohne Unihalter
	1	Stück	1016730 - ET	2	Kniepelotte Standard (Kniebreite 10-12 cm) inkl. Blech, Polster und Bezug - ohne Unihalter
	1	Stück	1025443 - ET	2	Kniepelotte Standard (Kniebreite 13+14 cm) inkl. Blech, Polster und Bezug - ohne Unihalter
	1	Paar	10045-2-ET	1 / 2	Kniepelotte Standard nach Maß (ab 15 cm) inkl. Blech, Polster und Bezug - ohne Unihalter *Aufpreis zur Standard-Kniepelotte* (Sonderbau) Kniebreite: _____ cm
	1.1	Stück	1008488	1 / 2	Kniepelottenhalter für 3-Ebenen-Verstellung ab Kniepelotten Gr. 1
	1.2	Stück	1001057-ET	1 / 2	Unihalter (aus Stahl) für Standard-Halterung für Kniepelotten 6-12 cm inkl. Flügelschraube M8x12
	1.2	Stück	1001057-ET	1 / 2	Unihalter (aus Stahl) für Kniepelotten 13+14 cm und nach Maß (ab 15 cm) inkl. Flügelschraube M8x12
	1.3	Stück	1005188	1 / 2	Flügelschraube M8x12
		Stück	1014734	1 / 2	Bezug für Kniepelotte 6+7 cm
		Stück	1014736	1 / 2	Bezug für Kniepelotte 8-9 cm
		Stück	1014737	1 / 2	Bezug für Kniepelotte 10-12 cm
		Stück	1025442	1 / 2	Bezug für Kniepelotte 13+14 cm

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

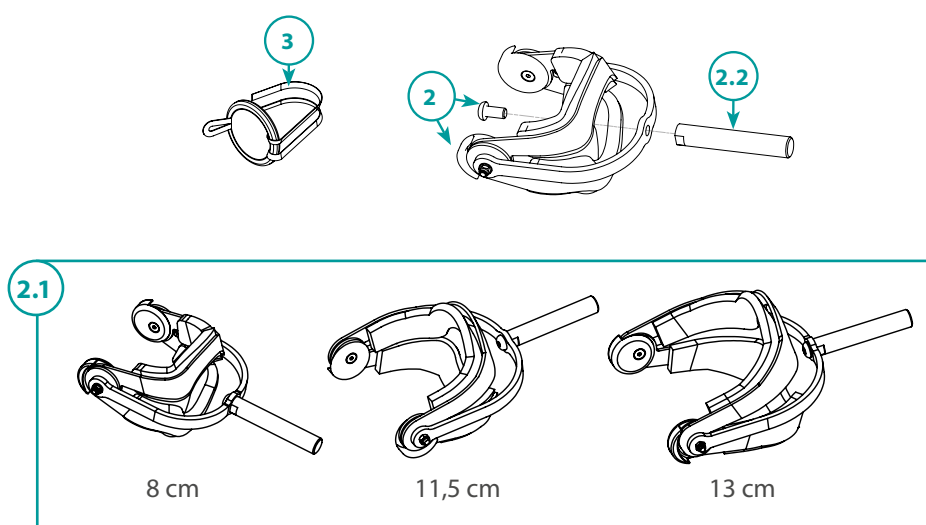

4.2 Kniepelotten

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	2	Stück	1005171-ET	1	Anatomische Kniepelotte inkl. Schraube für Standard- und einzel-verstellbare Halterung, (8 cm)
	2	Stück	1016748-ET	1	Anatomische Kniepelotte inkl. Schraube für Standard- und einzel-verstellbare Halterung (11,5 cm)
	2	Stück	1016747-ET	2	Anatomische Kniepelotte inkl. Schraube für Standard- und einzel-verstellbare Halterung (13 cm)
	2.1	Stück	1018752-ET	1	Anatomische Kniepelotte inkl. Anschraubbolzen für 3-Ebenen Verstellung (8 cm)
	2.1	Stück	1018753-ET	1	Anatomische Kniepelotte inkl. Anschraubbolzen für 3-Ebenen Verstellung (11,5 cm)
	2.1	Stück	1018754-ET	2	Anatomische Kniepelotte inkl. Anschraubbolzen für 3-Ebenen Verstellung (13 cm)
	2.2	Stück	1019925	1 / 2	Anschraubbolzen für 3-Ebenen-Verstellung bei anatomischen Kniepelotten
	3	Satz	1018713-ET	1 / 2	4x Abpolsterung für Drehgelenke der anatomischen Kniepelotten Stoff: Schwarz Neopren. (Es werden 2 Stück pro Seite benötigt!)

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

5. Beckenrahmen

Ersatzteilliste Heidelberger Stehgerät Impuls

REHATEC®

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

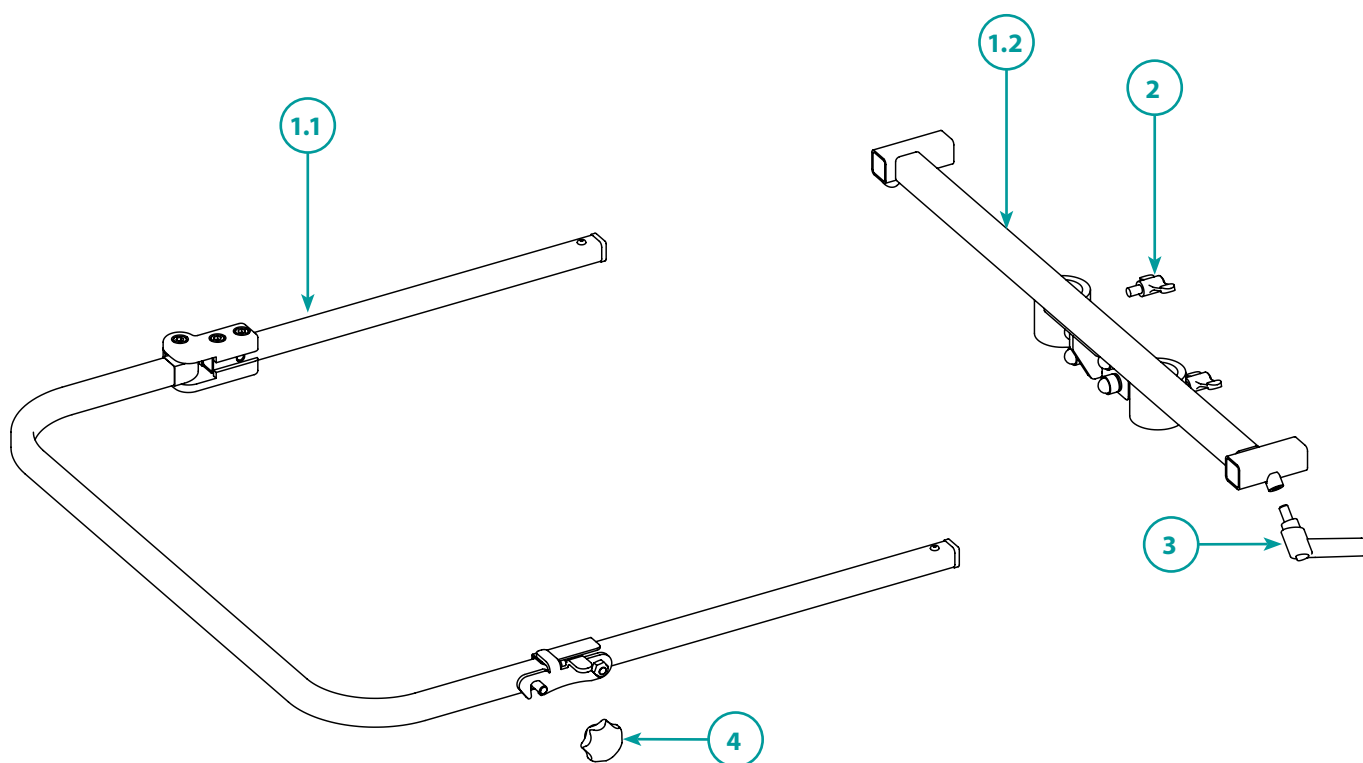

5.1 Schwenkarmbeckenrahmen

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1.1	Stück	1023691	1/2	Schwenkarmbeckenrahmen inkl. Schraubenmaterial
	1.2	Stück	1023689	1/2	Halter Schwenkarmbeckenrahmen inkl. Schraubenmaterial
	2	Stück	1005188	1/2	Flügelschraube M8x12
	3	Stück	1014668	1/2	Klemmhebel M8x15
	4	Stück	1021722	1/2	Fünfsterngriff, Innengewinde M8

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 12

08.12.25

1023933_2.10

5. Beckenrahmen

Ersatzteilliste Heidelberger Stehgerät Impuls

REHATEC®

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

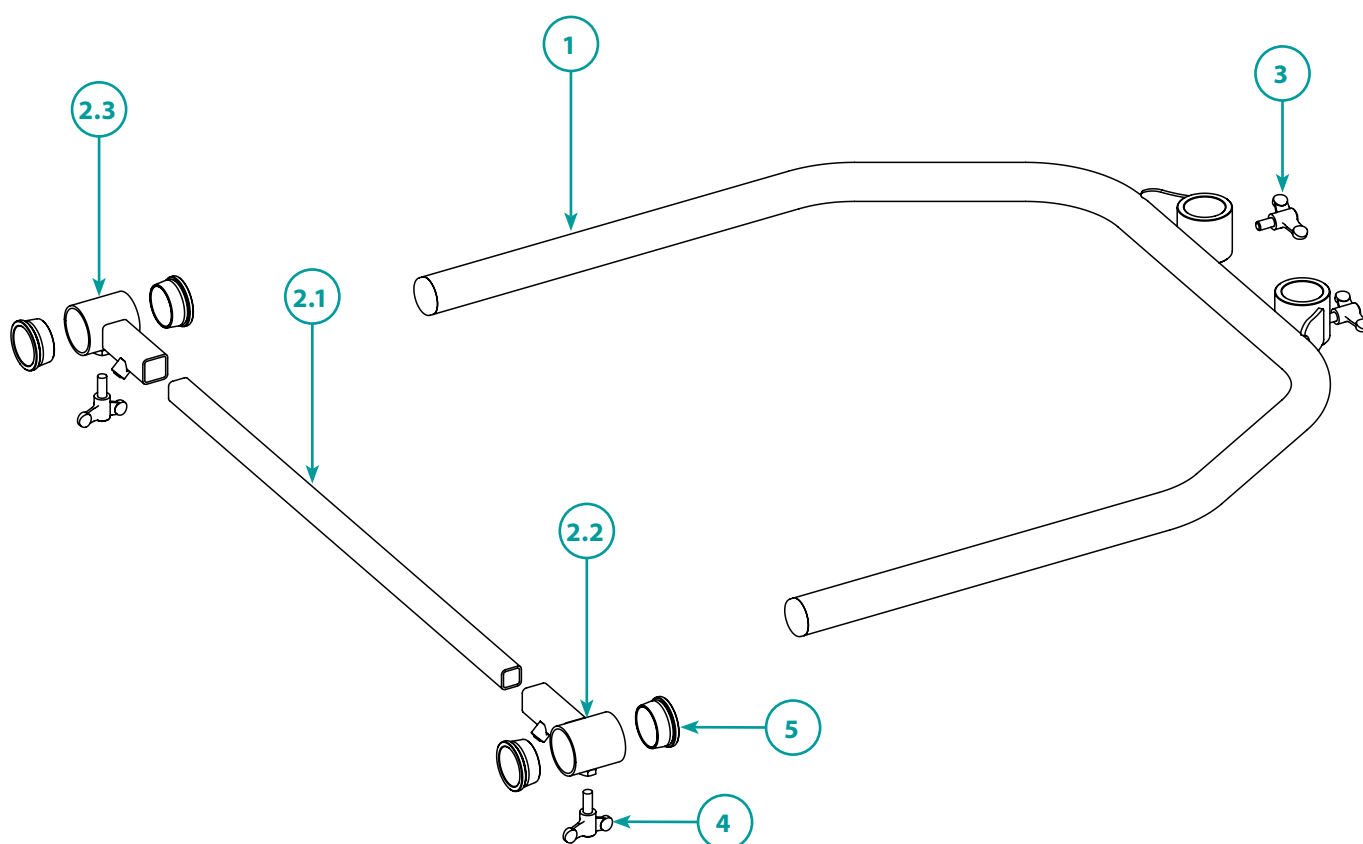

5.2 Barrenholm

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1001433-ET	1 / 2	Barrenholm inkl. Flügelschraube M8x15, ohne weiteres Zubehör
	2.1	Stück	1004681	1 / 2	Vierkantverbindungsrohr für Beckenpelottenhalter aufsteckbar
	2.2	Stück	1018830-L	1 / 2	Befestigung für Beckenpelottenhalter aufsteckbar, links inkl. Flügelschraube M8x20 und Buchse
	2.3	Stück	1018830-R	1 / 2	Befestigung für Beckenpelottenhalter aufsteckbar, rechts inkl. Flügelschraube M8x20 und Buchse
	3	Stück	1017675	1 / 2	Flügelschraube M8x15
	4	Stück	1017837	1 / 2	Flügelschraube M8x20
	5	Stück	1004610	1 / 2	Buchse für Befestigung Beckenpelottenhalter

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 13

08.12.25

1023933_2.10

5. Beckenrahmen

Ersatzteilliste Heidelberger Stehgerät Impuls

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

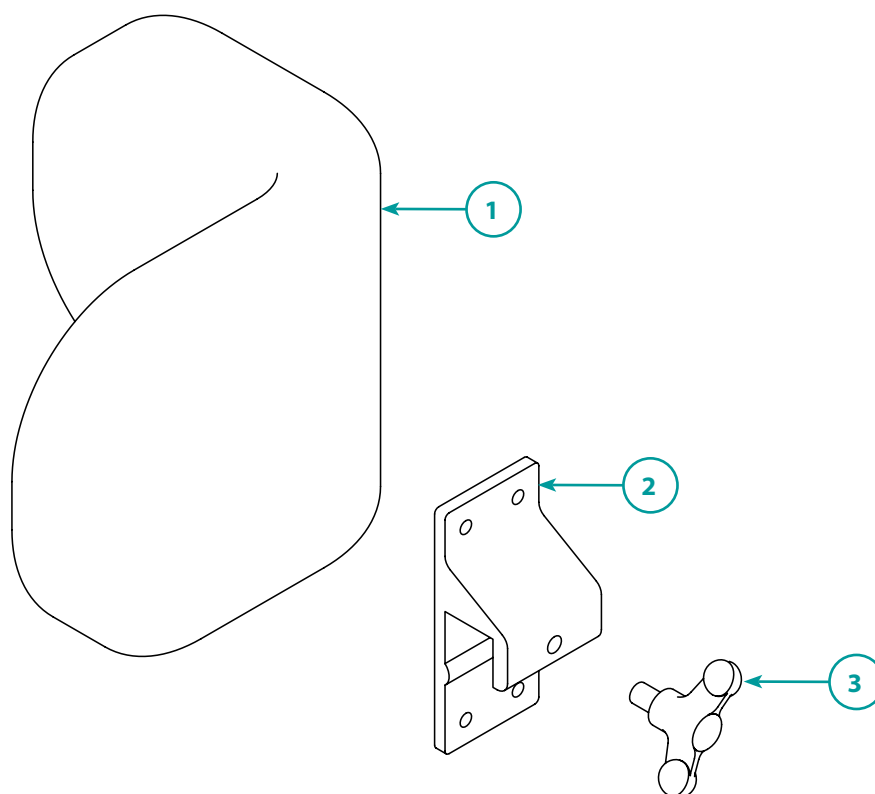

5.3 Beckenpelotten

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1016725	1	Beckenpelotte rechts inkl. Blech, Polster und Bezug - ohne Unihalter
	1	Stück	1016724	2	Beckenpelotte rechts inkl. Blech, Polster und Bezug - ohne Unihalter
	1	Stück	1016725	1	Beckenpelotte links inkl. Blech, Polster und Bezug - ohne Unihalter
	1	Stück	1016724	2	Beckenpelotte links inkl. Blech, Polster und Bezug - ohne Unihalter
		Stück	1014757	1	Bezug für Beckenpelotte Gr. 1
		Stück	1014754	2	Bezug für Beckenpelotte Gr. 2
	2	Stück	1004609	1 / 2	Unihalter Beckenpelotte inkl. Flügelschraube M8x15
	3	Stück	1007657	1 / 2	Flügelschraube M8x15

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

6. Rückenpelotte

Ersatzteilliste Heidelberger Stehgerät Impuls

REHATEC®

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

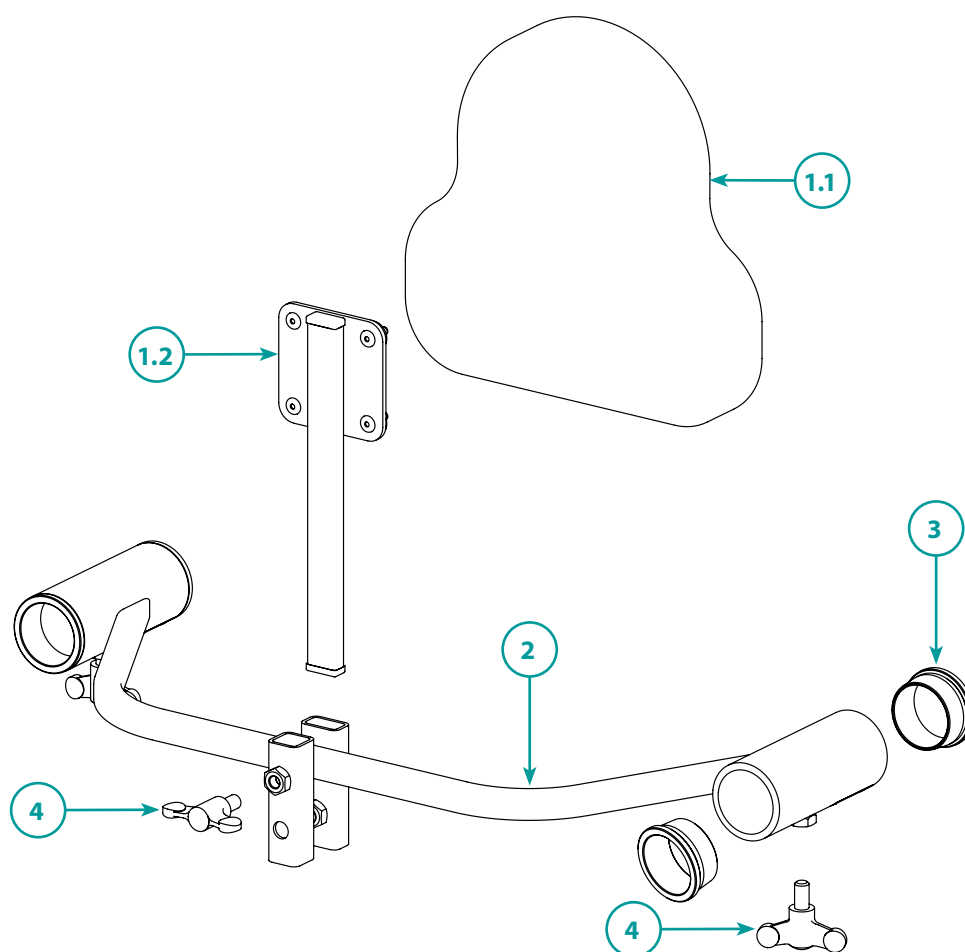

6. Rückenpelotte

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1.1	Stück	1023846	1	Rückenpelotte für Größe 1 inkl. Blech, Polster und Bezug - ohne Unihalter
	1.1	Stück	1023847	2	Rückenpelotte für Größe 2 inkl. Blech, Polster und Bezug - ohne Unihalter
	1.2	Stück	1004391	1 / 2	Halter Rückenpelotte (Höhenverstellung)
		Stück	1004704	1	Bezug Rückenpelotte Gr. 1
		Stück	1016721	2	Bezug Rückenpelotte Gr. 2
	2	Stück	1006791	1 / 2	Rückenpelottenhalter 610 mm mit Aufnahme für Kopfstütze inkl. Flügelschrauben und Buchsen
	3	Stück	1004610	1 / 2	Buchse für Rückenhalterung
	4	Stück	1017837	1 / 2	Flügelschraube M8x20

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 15

08.12.25

1023933_2.10

7. Kopfstütze

Ersatzteilliste Heidelberger Stehgerät Impuls

REHATEC®

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

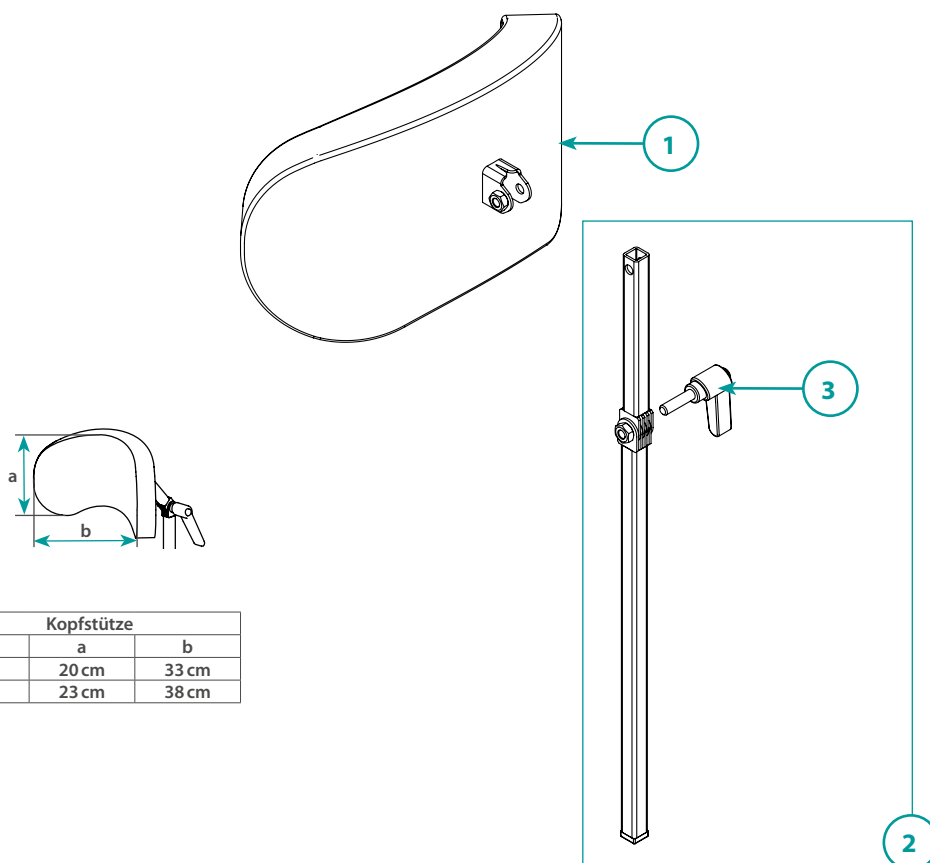

Kopfstütze		
Gr.	a	b
2	20 cm	33 cm
3	23 cm	38 cm

7. Kopfstütze					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1018807-ET	1	Kopfsütze muschelform Gr. 2 inkl. Winkel, Bezug, Schaumstoff und Korpus - ohne Kopfstützenhalter
	1	Stück	1018808-ET	2	Kopfsütze muschelform Gr. 3 inkl. Winkel, Bezug, Schaumstoff und Korpus - ohne Kopfstützenhalter
		Stück	1016743	1	Bezug Kopfstütze Gr. 2
		Stück	1016744	2	Bezug Kopfstütze Gr. 3
	2	Stück	1013142	1	Kopfstützenhalter mit Lamellengelenk inkl. Klemmhebel
	2	Stück	1013146	2	Kopfstützenhalter mit Lamellengelenk inkl. Klemmhebel
	3	Stück	1005034	1	Klemmhebel M8x30

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 16

08.12.25

1023933_2.10

8. Brustpelotte

Ersatzteilliste Heidelberger Stehgerät Impuls

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

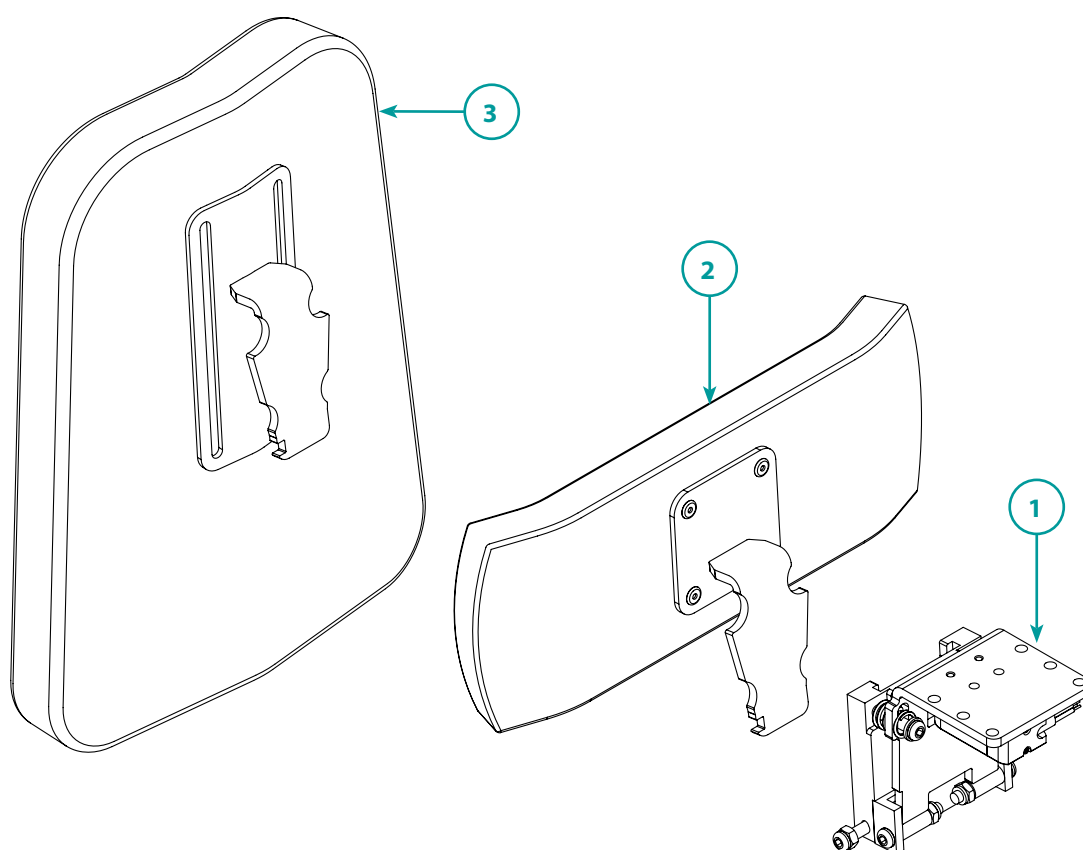

8. Brustpelotte

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1023505	1 / 2	Notausmechanik
	2	Stück	1017833	1 / 2	Notauspuffer gepolstert inkl. Blech, Polster und Bezug
		Stück	E911014	1 / 2	Bezug Notauspuffer
	3	Stück	1010324	1	Brustpelotte mit Halterung für Gr. 1 inkl. Blech, Polster und Bezug
	3	Stück	1020490	2	Brustpelotte mit Halterung für Gr. 2 inkl. Blech, Polster und Bezug
		Stück	1017736	1	Bezug Brustpelotte Gr. 1
		Stück	1004701	2	Bezug Brustpelotte Gr. 2

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9. Seitenführungspelotten

Ersatzteilliste Heidelberger Stehgerät Impuls

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

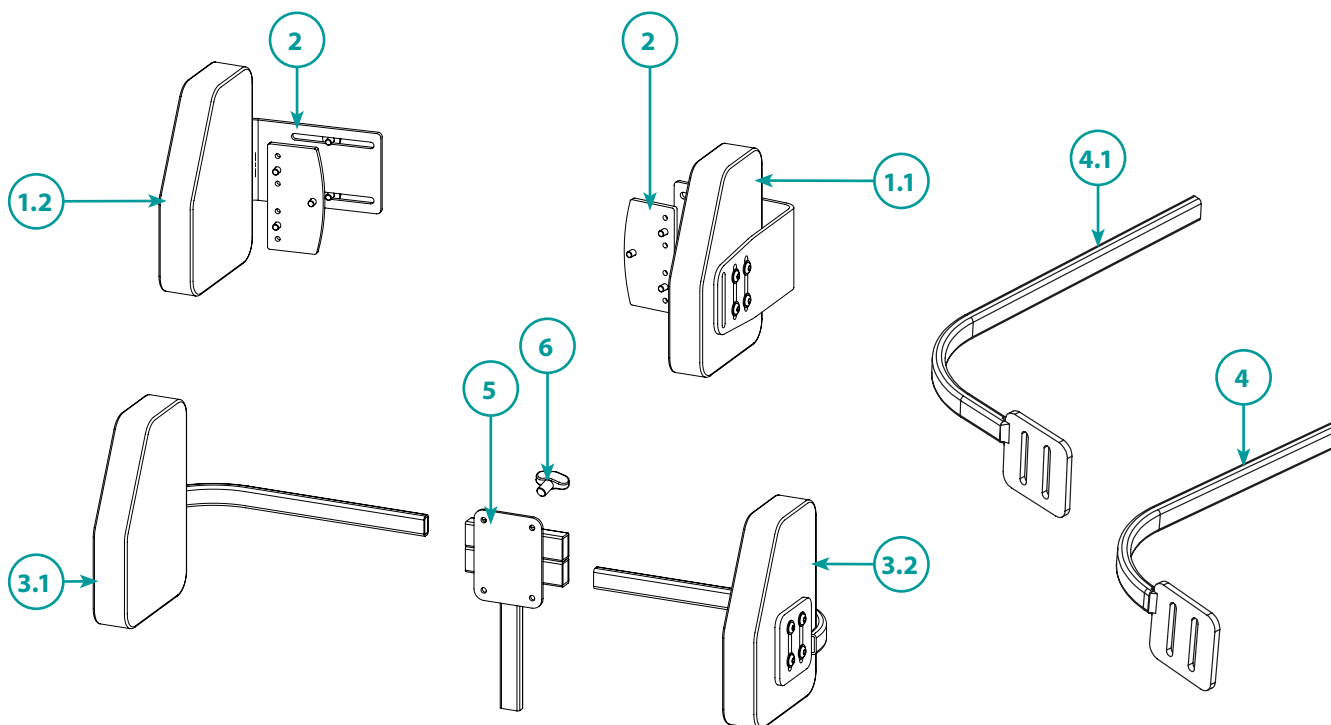

9. Seitenführungspelotten

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1.1	Stück	1016728	1/2	Seitenführungspelotte für Brustpelotte, rechts inkl. Pelottenhalter, Blech, Polster und Bezug
	1.2	Stück	1018811	1/2	Seitenführungspelotte für Brustpelotte, links inkl. Pelottenhalter, Blech, Polster und Bezug
	2	Stück	1006012	1/2	Anschraubplatte Seitenführungspelotte
	3.1	Stück	1018814	1/2	Seitenführungspelotte für Rückenpelotte, rechts inkl. Pelottenhalter, Blech, Polster und Bezug
	3.2	Stück	1017815	1/2	Seitenführungspelotte für Rückenpelotte, links inkl. Pelottenhalter, Blech, Polster und Bezug
	4	Stück	1016161	1/2	Bügel für Seitenführungspelotte kurz (für Rückenpelotte) für Brustkorbbreite bis 44 cm
	4.1	Stück	1016150	1/2	Bügel für Seitenführungspelotte lang (für Rückenpelotte) für Brustkorbbreite bis 54 cm
		Stück	1004192	1/2	Bezug für Seitenführungspelotte
	5	Stück	1004349	1/2	Halter für Rücken- und Seitenführungspelotte inkl. Miniwing
	6	Stück	1019005	1/2	Miniwing M8x12

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.


Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

10. Gesäßgurt

Ersatzteilliste Heidelberger Stehgerät Impuls

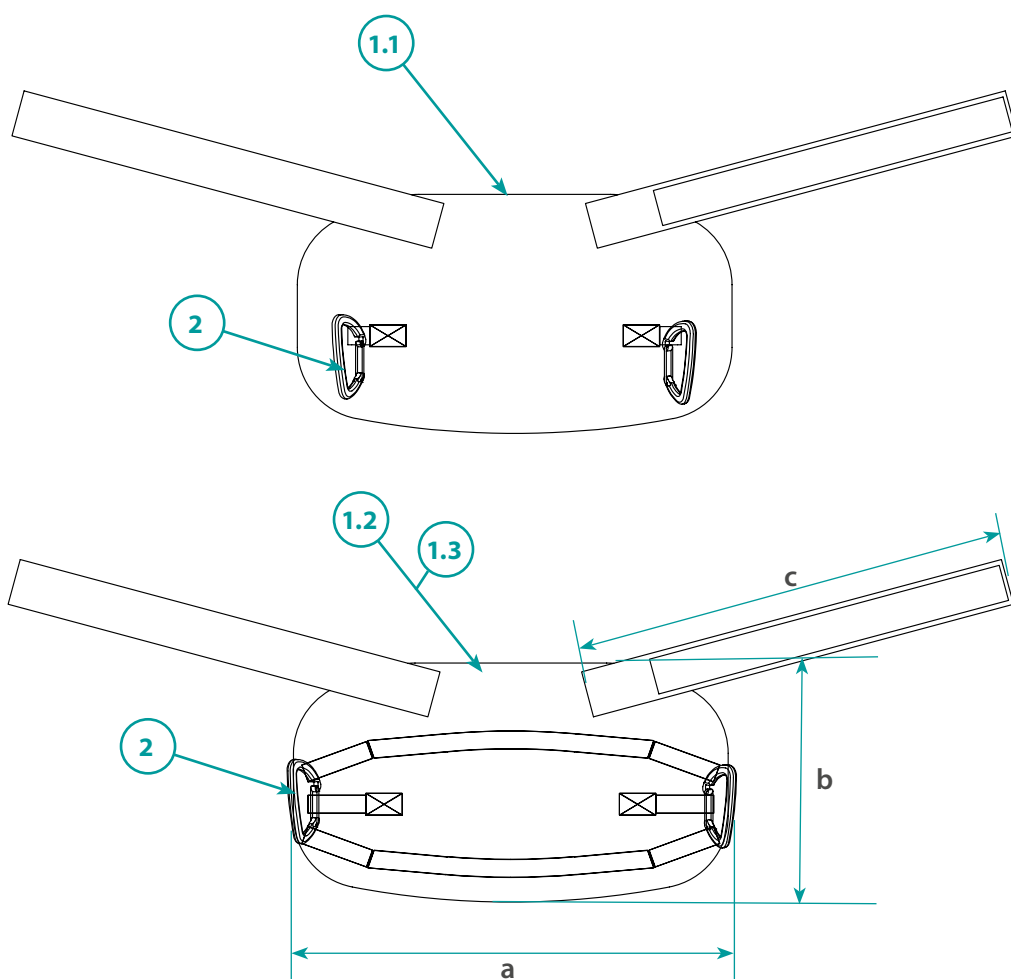

Bezugsfarben einfarbig

Hochwertige Kunstlederbezüge

■ Lichtgrau (N20057)

■ Anthrazit (N20058)

Sonderfarben auf Anfrage

10. Gesäßgurt					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1.1	Stück	1004418-ET	1	Gesäßgurt Standard für Gr. 1
	1.1	Stück	1004417-ET	2	Gesäßgurt Standard für Gr. 2
	1.2	Stück	1008694-ET	1	Gesäßgurt angeformt für Gr. 1
	1.2	Stück	1008692-ET	2	Gesäßgurt angeformt für Gr. 2
	1.3	Stück	1010841-ET	1 / 2	Gesäßgurt angeformt nach Maß, a = ____ cm, b = ____ cm, c = ____ cm
	2	Stück	1017836-ET	1 / 2	Schnappkarabiner für Gesäßgurt

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.


Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

11. Fußschalen

Ersatzteilliste Heidelberger Stehgerät Impuls

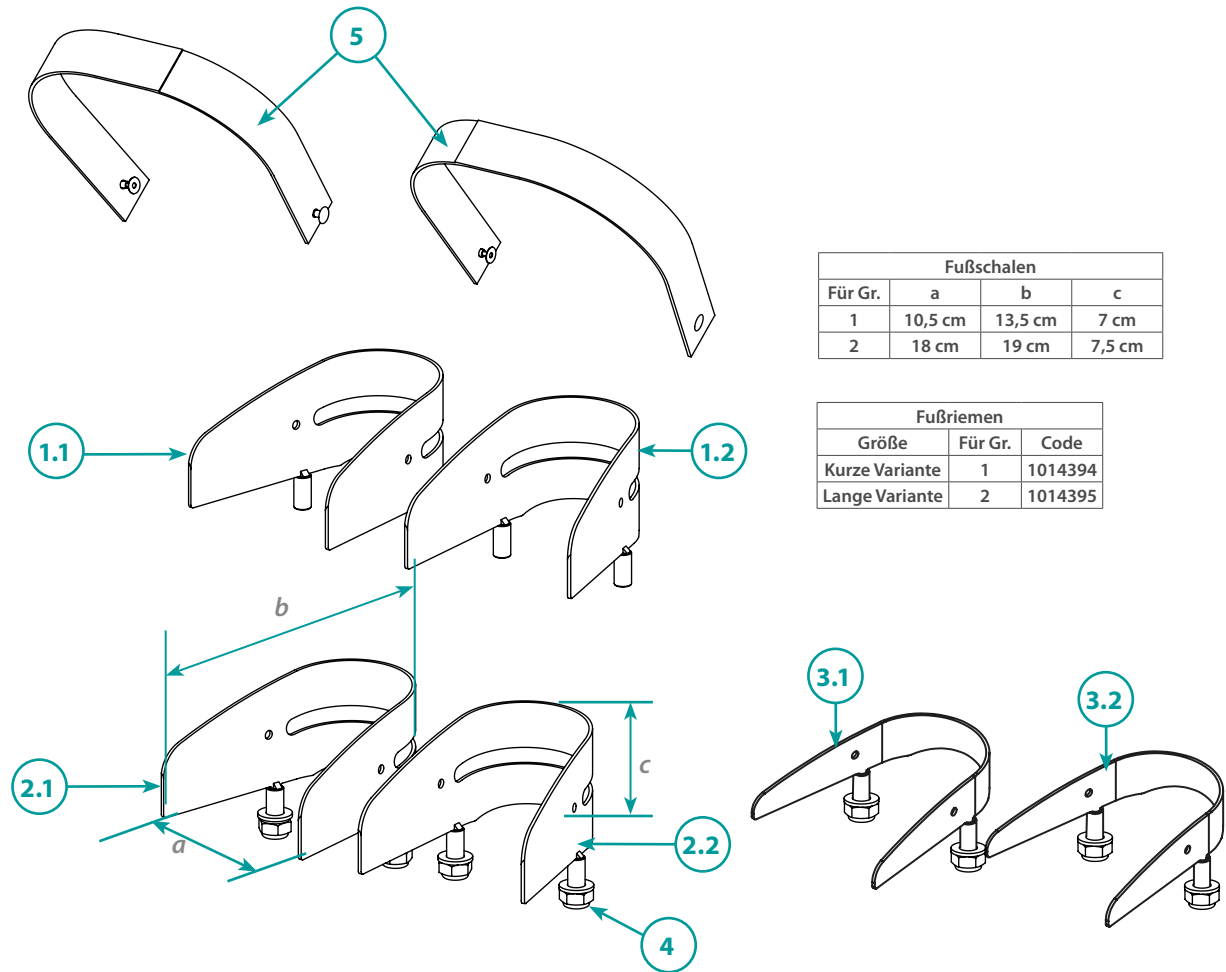

10. Fußschalen					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1.1	Stück	1007307	1	Fußschalen steckbar, rechts
	1.1	Stück	1007309	2	Fußschalen steckbar, rechts
	1.2	Stück	1007306	1	Fußschalen steckbar, links
	1.2	Stück	1007308	2	Fußschalen steckbar, links
	2.1	Stück	1004399	1	Fußschale verschraubbar, rechts
	2.1	Stück	1004401	2	Fußschale verschraubbar, rechts
	2.2	Stück	1004398	1	Fußschale verschraubbar, links
	2.2	Stück	1004400	2	Fußschale verschraubbar, links
	3.1	Stück	1022628	1	Fußschalen verschraubbar halbhoch inkl. Mutter und Scheibe, rechts
	3.1	Stück	1022625	2	Fußschalen verschraubbar halbhoch inkl. Mutter und Scheibe, rechts
	3.2	Stück	1022629	1	Fußschalen verschraubbar halbhoch inkl. Mutter und Scheibe, links
	3.2	Stück	1022624	2	Fußschalen verschraubbar halbhoch inkl. Mutter und Scheibe, links
	4	Stück	E910601-2	1/2	Halbhohe Mutter M10x1 für verschraubbare Fußschalen
	5	Stück	1014394-ET	1	Fußriemen kurz inkl. Befestigungsnieten
	5	Stück	1014395-ET	2	Fußriemen lang inkl. Befestigungsnieten

Empfohlen bei verschraubbaren Fußschalen

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

[illegible]

Zeichnung

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 20 rows of squares, intended for drawing a picture. The grid is bounded by a thick black line on the top and a thick black line on the bottom. The top edge of the grid is adjacent to a thick black horizontal bar. The grid is composed of thin gray lines forming the squares.