


Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele und Nele Classic

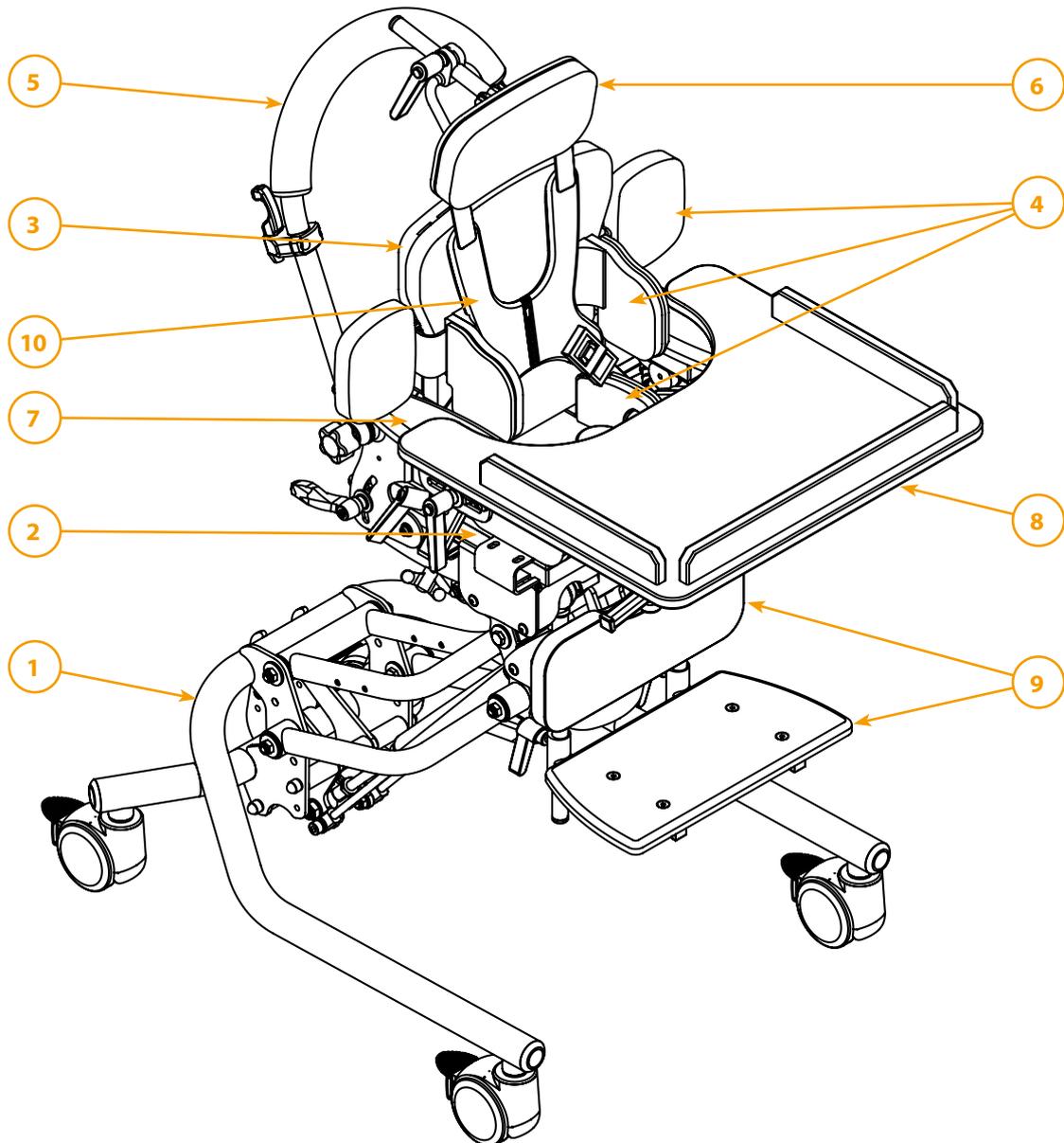

Baugruppen			
Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
1	Untergestell	6	Kopfstützen
2	Sitz	7	Armlehnen
3	Rücken	8	Therapietisch
4	Pelotten	9	Fußbank
5	Schiebebogen	10	Begurtung

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Gestellfarben und Stoffe	3
1.1 Untergestell Nick	4
1.2 Untergestell Noah für Nele Gr. Mini	6
1.3 Untergestell Noah mit Gasfeder	8
1.4 Untergestell Noah mit Hydraulik	10
1.5 Untergestell Noah mit Motor	11
1.6 Untergestell Noah Outdoor	12
1.7 Untergestell Noah Outdoor mit Motor	13
1.8 Zusätzliche Gasdruckfedern	14
1.9 Kippsicherung	15
1.10 Radstandverlängerung	16
2. Sitz	17
3. Rücken	19
4. Pelotten	23
5. Schiebebogen am Sitz	31
6. Kopfstützen	32
7.1 Armlehne-ALTE VERSION	34
7.2 Armlehnen - NEUE VERSION	37
8. Therapietisch	41
9.1 Fußbank	45
9.2 Fußbrett	47
9.3 Fußbankpolster	48
9.4 Kniewinkel	49
9.5 Wadenpolster	50
9.6 Fußwinkel	52
9.7 Fersenkante	53
9.8 Fußschalen	54
10.1 Begurtungssystem	55
10.2 Gurte für Brust- & Schulterbereich	56
10.3 Gurte für Beckenbereich	58
10.4 Sitzhose	59
Notizen	60

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Bitte geben Sie bei Bestellungen von Rahmenteilen immer die Gestellfarbe und bei Bezügen die Stofffarbe an!

Gestellfarben

	Reinweiß (RAL 9010)		Perlnachtblau matt (RAL 5026)
	Narzissengelb (RAL 1007)		Wasserblau (RAL 5021)
	Leuchtgelb (RAL 1026)		Lichtgrün (RAL 6027)
	Reinorange (RAL 2004)		Gelbgrün (RAL 6018)
	Leuchtorange (RAL 2005)		Perlgrün matt (RAL 6035)
	Rubinrot (RAL 3003)		Leuchtgrün (RAL 6038)
	Perlrubinrot matt (RAL 3032)		Anthrazitgrau matt (RAL 7016m)
	Erikaviolett (RAL 4003)		Silber metallic ¹
	Bordeauxviolett (RAL 4004)		Anthrazit metallic ¹
	Ultramarinblau (RAL 5002)		Graphitschwarz matt (RAL 9011m)
	Verkehrsblau metallic ¹		Tiefschwarz glanz (RAL 9005g)

Farbdarstellungen nur als Übersicht.

¹ keine RAL Farben

Bezugsfarben einfarbig

Hochwertige Microfaserbezüge

Waschbar bis 40 Grad

	Flieder (N20080)
	Blau (N20081)
	Grün (N20082)

Hochwertiger Trevira® CS

Bezug, universalgestrickt

	Rot ² (GU703)
	Grau ² (GU709)

Hochwertige Skaibezüge

	Rot ² (N6461454)
	Blau ² (N6461453)

² Sonderfarben gegen Aufpreis

1.1 Untergestell Nick

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

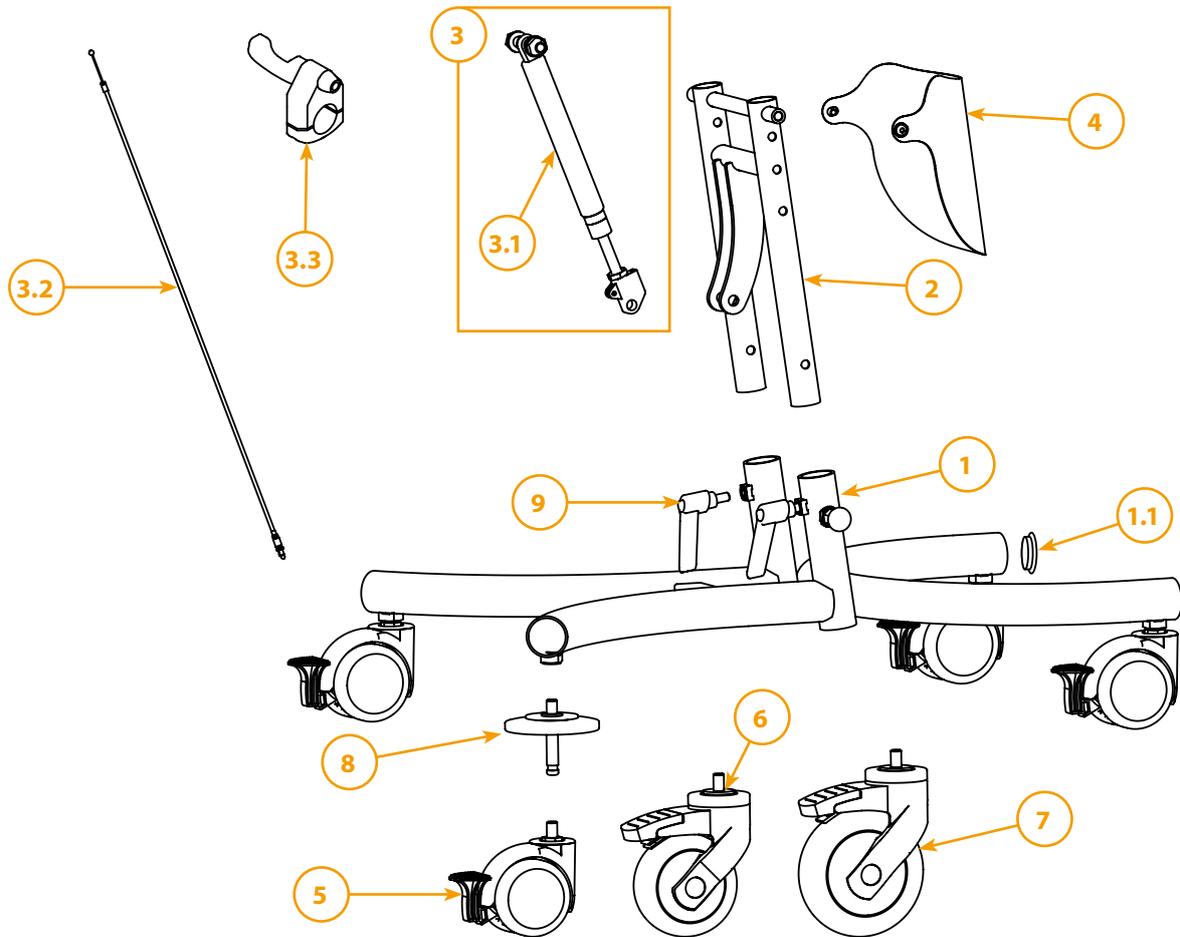


Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1.1 Untergestell Nick

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

1.1 Untergestell Nick					
Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1015005	0	Untergestell Nick ohne Aufnahme, Gr. 1* inkl. Beschichtung, Stopfen und Klemmhebel - ohne Aufnahme
	1	Stück	1015010	1	Untergestell Nick ohne Aufnahme, Gr. 2* inkl. Beschichtung, Stopfen und Klemmhebel - ohne Aufnahme
	1	Stück	1015025	2	Untergestell Nick ohne Aufnahme, Gr. 3* inkl. Beschichtung, Stopfen und Klemmhebel - ohne Aufnahme
	1.1	Stück	E912066	0-2	Gleiter/Stopfen für Untergestell
	2	Stück	1021758	0	Aufnahme für Gasdruckfeder (Einschub), Gr. 1
	2	Stück	1021758	1	Aufnahme für Gasdruckfeder (Einschub), Gr. 2
	2	Stück	1021808	2	Aufnahme für Gasdruckfeder (Einschub), Gr. 3
	3	Stück	1020751	0-2	Gasdruckfeder für Sitzkantelung 400 N - KIT (ohne Bowdenzug und Auslösehebel)
	3.1	Stück	1020636	0-2	Gasdruckfeder für Sitzkantelung 400 N
	3.2	Stück	1008174	0-2	Bowdenzug für Sitzkantelung mit Standard Schiebebogen (700 mm)
	3.3	Stück	1000862	0-2	Auslösehebel Gasdruckfeder
	4	Stück	1001742	0	Abdeckblech (Graphitschwarz matt RAL9011m) inkl. Beschriftung, Gr. 1
	4	Stück	1001452	1	Abdeckblech (Graphitschwarz matt RAL9011m) inkl. Beschriftung, Gr. 2
	4	Stück	1009614	2	Abdeckblech (Graphitschwarz matt RAL9011m) inkl. Beschriftung, Gr. 3
	5	Stück	1005593-ET	0-2	Transportrolle 75 mm mit Feststeller
	6	Stück	1022143-ET	0-2	Transportrolle 100 mm mit Totalfeststeller
	7	Stück	1014946-ET	0-2	Transportrolle 125 mm mit Feststeller
	8	Satz	1018607-ET	0-2	Wand- und Möbelschutz für 75 mm Transportrollen
	8	Satz	1022293-ET	0-2	Wand- und Möbelschutz für 100 mm Transportrollen
	8	Satz	1018698-ET	0-2	Wand- und Möbelschutz für 125 mm Transportrollen
	9	Stück	1014668	0-2	Klemmhebel M815

* Geben Sie bitte die Gestellfarbe auf Seite 2 an!

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1.2 Untergestell Noah für Nele Gr. Mini

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

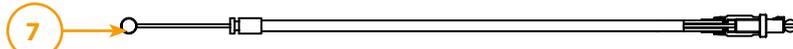
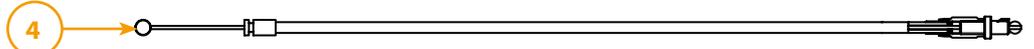
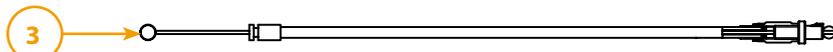
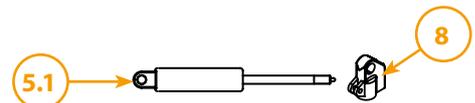
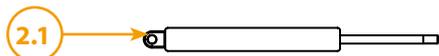
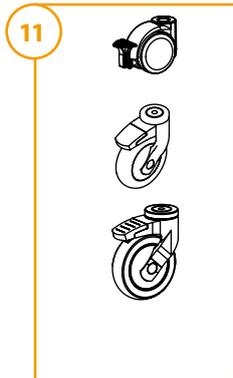
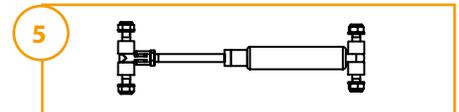
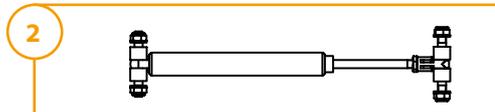
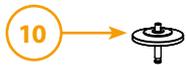
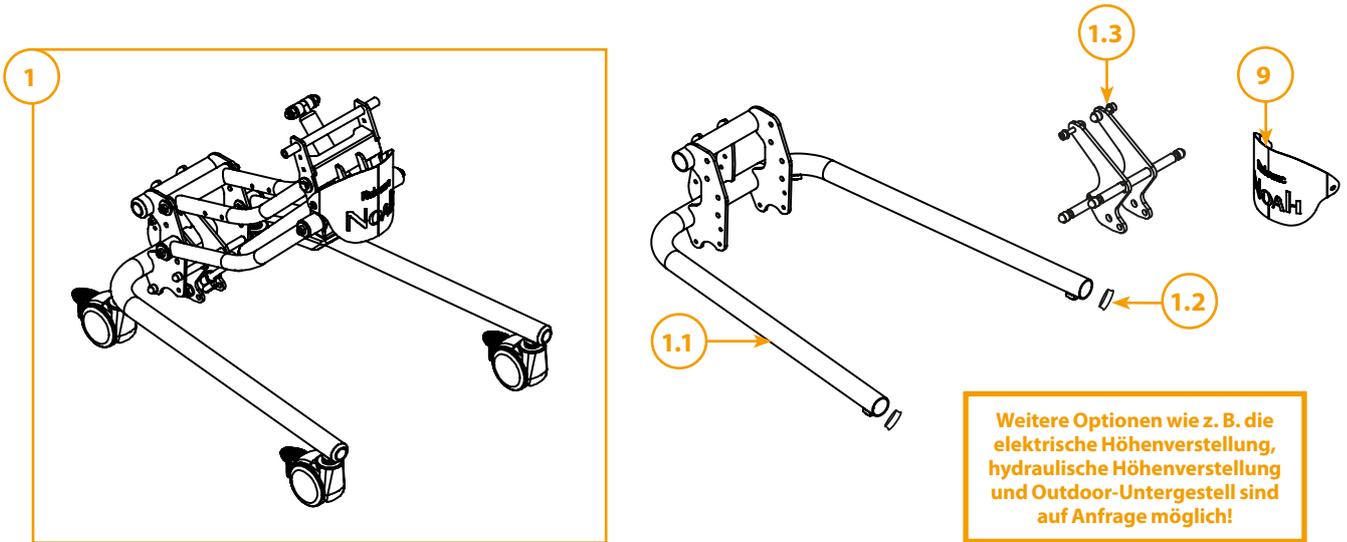


Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1.2 Untergestell Noah für Nele Gr. Mini

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

***Notwendig für die Umrüstung von hydraulischer oder elektrischer Höhenverstellung auf Standard (Gasdruckfeder)**

1.2 Untergestell Noah Gr. Mini mit Gasfeder Höhenverstellung für Nele Gr. Mini

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1025897-KIT	Mini	Untergestell Noah - Umrüstkit von Nele Gr. Mini (2019 und 2020) auf Nele 2024
	1.1.	Stück	1025895	Mini	Untergestell Noah Gr. Mini inkl. Stopfen, ohne weiteres Zubehör
	1.2.	Stück	1020546	Mini	Gleiter/Stopfen für Untergestell
	1.3.	Stück	1025840	Mini	Gasfederaufnahme KIT*
	2	Stück	1020769	Mini	Gasdruckfeder Höhenverstellung 800 N - KIT (ohne Bowdenzug und Auslösehebel)
	2.1.	Stück	1020597	Mini	Gasdruckfeder Höhenverstellung 800 N
	3	Stück	1008173	Mini	Bowdenzug für Höhenverstellung mit Standard Schiebepogen (1 m)
	4	Stück	1008183	Mini	Bowdenzug für Höhenverstellung mit Schiebepogen höhenverstellbar (1,30 m)
	5	Stück	1020751	Mini	Gasdruckfeder Sitzkantelung 400 N - KIT (ohne Bowdenzug und Auslösehebel)
	5.1.	Stück	1020636	Mini	Gasdruckfeder 400 N
	6	Stück	1008174	Mini	Bowdenzug für Sitzkantelung mit Standard Schiebepogen (700 mm)
	7	Stück	1014023	Mini	Bowdenzug für Sitzkantelung mit Schiebepögen höhenverstellbar (950 mm)
	8	Stück	1000862	Mini	Auslösehebel für Gasdruckfeder
	9	Stück	1020764	Mini	Abdeckblech (in Graphitschwarz matt RAL9011m) inkl. Beschriftung
	10	Satz	1005593-ET	Mini	Transportrolle 75 mm mit Feststeller
	10	Satz	1026094-ET	Mini	Transportrolle 100 mm mit Totalfeststellung
	10	Satz	1014946-ET	Mini	Transportrolle 125 mm mit Feststeller
	11	Stück	1018607-ET	Mini	Wand- und Möbelschutz für 75 mm Rollen
	11	Stück	1022293-ET	Mini	Wand- und Möbelschutz für 100 mm Rollen
	11	Stück	1018698-ET	Mini	Wand- und Möbelschutz für 125 mm Rollen

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1.3 Untergestell Noah mit Gasfeder

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

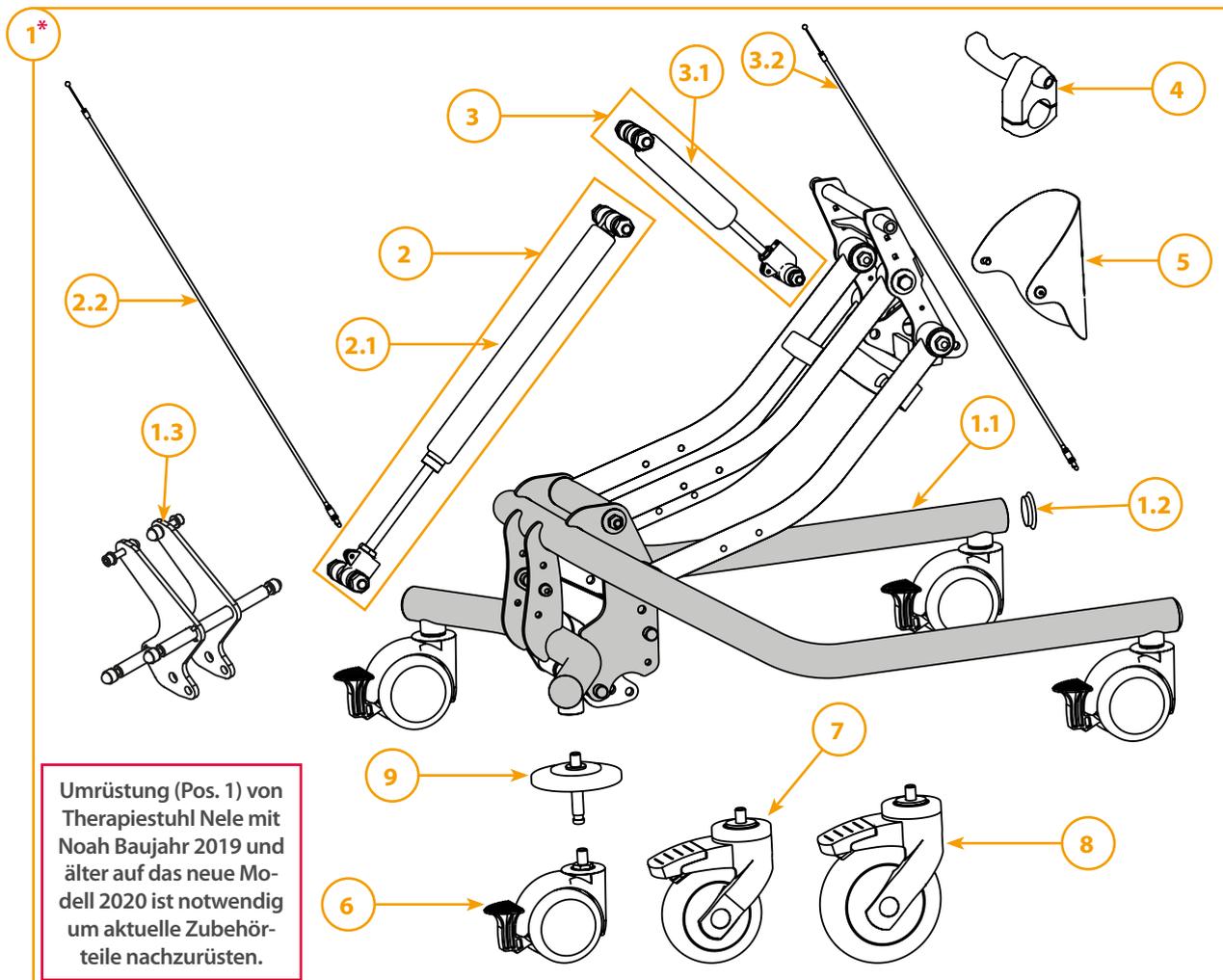

Umrüstung (Pos. 1) von Therapiestuhl Nele mit Noah Baujahr 2019 und älter auf das neue Modell 2020 ist notwendig um aktuelle Zubehörteile nachzurüsten.

* Position 6-8 (Transportrollen) und Position 9 (Wand- und Möbelschutz) sind nicht im Umrüstkit enthalten

Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1.3 Untergestell Noah mit Gasfeder

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

1.3 Untergestell Noah mit Gasfeder					
Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1020544-KIT	0/ 1	Untergestell Noah - Umrüstkit von Nele Modell 2019 auf Nele Modell 2020*
	1	Stück	1020924-KIT	2	Untergestell Noah - Umrüstkit von Nele Modell 2019 auf Nele Modell 2020*
	1.1	Stück	1020541	0/ 1	Untergestell Noah Gr. 0+1*1
	1.1	Stück	1020618	2	Untergestell Noah Gr. 2*1
* Geben Sie bitte die Gestellfarbe auf Seite 2 an! - inkl. Beschichtung, Stopfen und Schraubenmaterial, ohne weiteres Zubehör					
	1.2	Stück	1020546	0/ 1	Gleiter/Stopfen für Untergestell
	1.2	Stück	E912066	2	Gleiter/Stopfen für Untergestell
	1.3	Stück	1025840	2	Gasfederaufnahme KIT*2
	2	Stück	1020769	0	Gasdruckfeder Höhenverstellung 800 N - KIT ³
	2.1	Stück	1020597	0/ 1	Gasdruckfeder Höhenverstellung 800 N
	2	Stück	1020750	2	Gasdruckfeder Höhenverstellung 1200 N - KIT ³
*2Notwendig für die Umrüstung von hydraulischer oder elektrischer Höhenverstellung auf Standard (Gasdruckfeder) ³ Ohne Bowdenzug und Auslösehebel					
	2.1	Stück	1020565	1/ 2	Gasdruckfeder Höhenverstellung 1200 N
	2.2	Stück	1008173	0/ 1	Bowdenzug für Höhenverstellung mit Standard Schiebebogen (1 m)
	2.2	Stück	1008176	2	Bowdenzug für Höhenverstellung mit Standard Schiebebogen (1,10 m)
	2.2	Stück	1008183	2	Bowdenzug für Höhenverstellung mit Schiebebogen höhenverstellbar (1,30 m)
	3	Stück	1020751	0-2	Gasdruckfeder Sitzkantelung 400 N - KIT ³
³ Ohne Bowdenzug und Auslösehebel					
	3.1	Stück	1020636	0-2	Gasdruckfeder 400 N
	3.2	Stück	1008174	0/ 1	Bowdenzug für Sitzkantelung mit Standard Schiebebogen (700 mm)
	3.2	Stück	1010532	2	Bowdenzug für Sitzkantelung mit Standard Schiebebogen (820 mm)
	3.2	Stück	1014023	0/ 1	Bowdenzug für Sitzkantelung mit Schiebebögen höhenverstellbar (950mm)
	3.2	Stück	1008176	2	Bowdenzug für Sitzkantelung mit Schiebebogen höhenverstellbar (1,10 m)
	3.2	Stück	1021774	0-2	Bowdenzüge für Sitzkantelung und Höhenverstellung für Outdoor-Gestell
	4	Stück	1000862	0-2	Auslösehebel für Gasdruckfeder
	5	Stück	1020764	0-2	Abdeckblech (Graphitschwarz matt RAL9011m) inkl. Beschriftung
	6	Stück	1005593-ET	0-2	Transportrolle 75 mm mit Feststeller
	7	Stück	1022143-ET	0-2	Transportrolle 100 mm mit Totalfeststellung
	8	Stück	1014946-ET	0-2	Transportrolle 125 mm mit Feststeller
	9	Satz	1018607-ET	0-2	Wand- und Möbelschutz für 75 mm Rollen
	9	Satz	1022293-ET	0-2	Wand- und Möbelschutz für 100 mm Rollen
	9	Satz	1018698-ET	0-2	Wand- und Möbelschutz für 125 mm Rollen

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1.4 Untergestell Noah mit Hydraulik

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

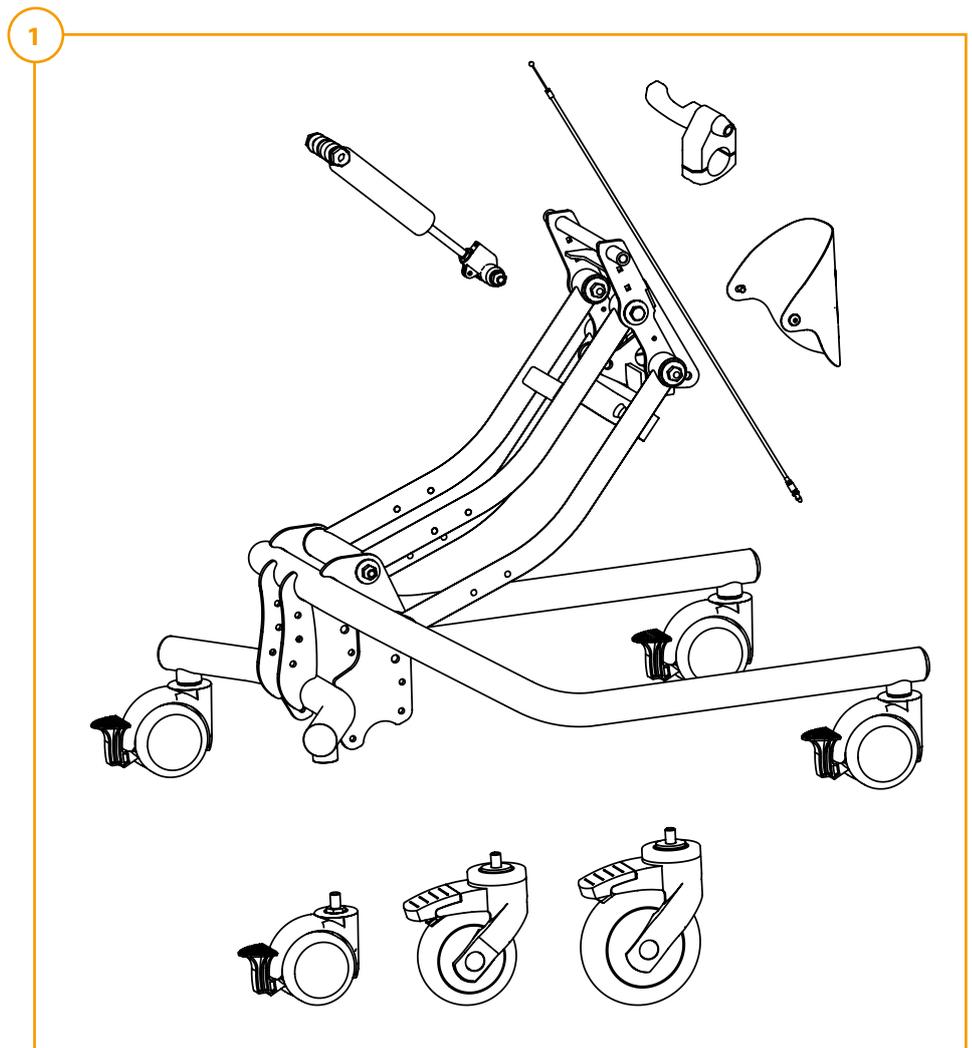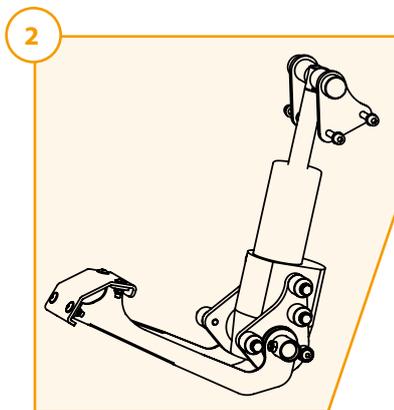

Umrüstung (Pos. 1) von Noah Baujahr 2019 und älter auf das neue Modell 2020 ist notwendig um aktuelle Zubehöreile nachzurüsten.

1.4 Untergestell mit hydraulischer Auslösung

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1020544-KIT	0/ 1	Untergestell Noah - Umrüstkit von Modell 2019 auf Modell 2020 (ohne Pos. 2)
	1	Stück	1020924-KIT	2	Untergestell Noah - Umrüstkit von Modell 2019 auf Modell 2020 (ohne Pos. 2)
	2	Stück	1020648	0-2	Hydraulische Höhenverstellung für Modell 2020

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1.5 Untergestell Noah mit Motor

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

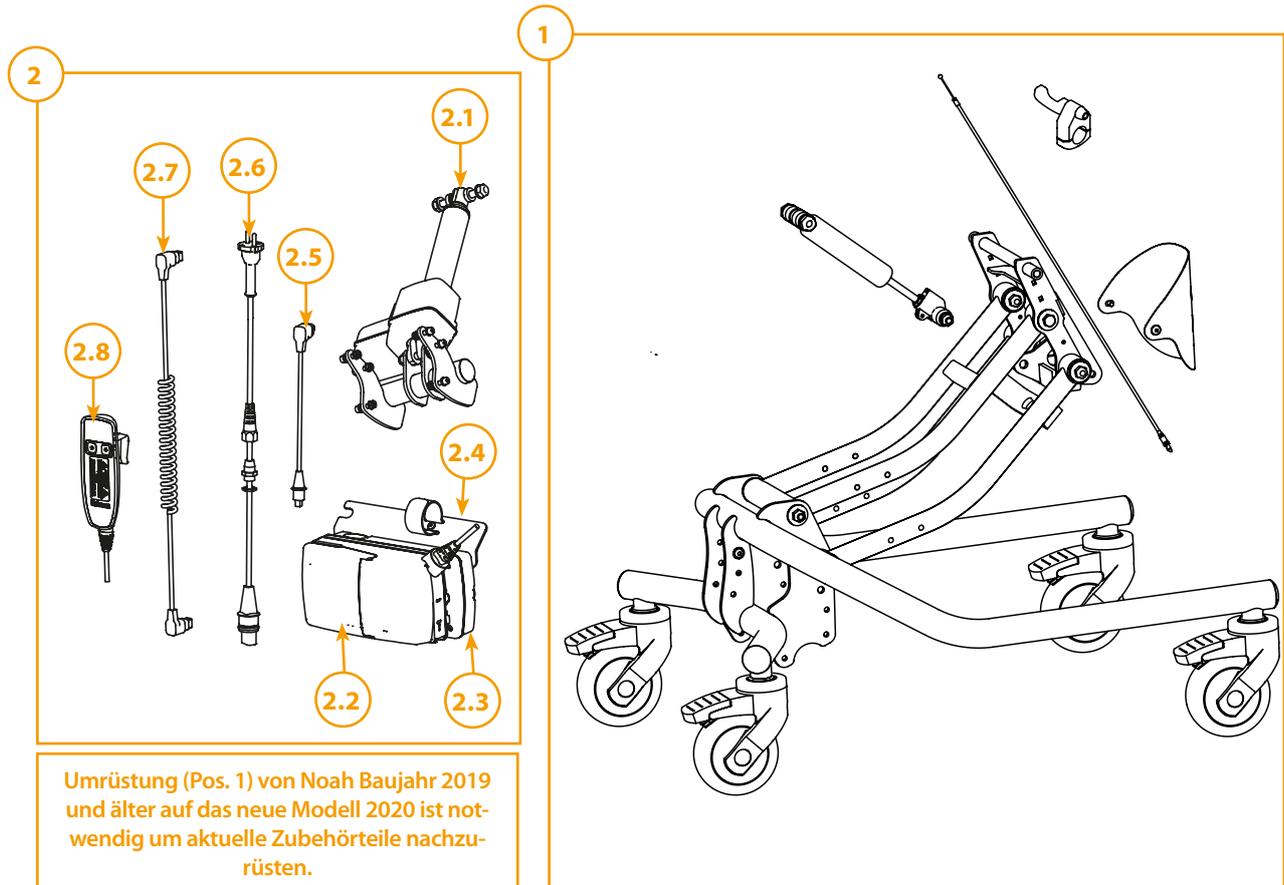

1.5 Untergestell mit elektrischer Höhenverstellung					
Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1020544-KIT	0/ 1	Untergestell Noah - Umrüstkit von Modell 2019 auf Modell 2020 (ohne Pos. 2)
	1	Stück	1020924-KIT	2	Untergestell Noah - Umrüstkit von Modell 2019 auf Modell 2020 (ohne Pos. 2)
	2	Satz	1023827	0 - 2	Elektrische Höhenverstellung für Noah 2020 (KIT)
	2.1.	Satz	1023428	0 - 2	Motor (KIT)
	2.2.	Stück	1022940-1	0 - 2	Steuereinheit
	2.3.	Satz	1026018	0 - 2	Akku
	2.4.	Satz	1023414	0 - 2	Halterung (KIT)
	2.5.	Stück	1025250	0 - 2	Batterieanschlußkabel
	2.6.	Stück	1023363	0 - 2	Netzkabel
	2.7.	Stück	1023383	0 - 2	Motorkabel
	2.8.	Stück	1023826	0 - 2	Handbedienung

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1.6 Untergestell Noah Outdoor

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

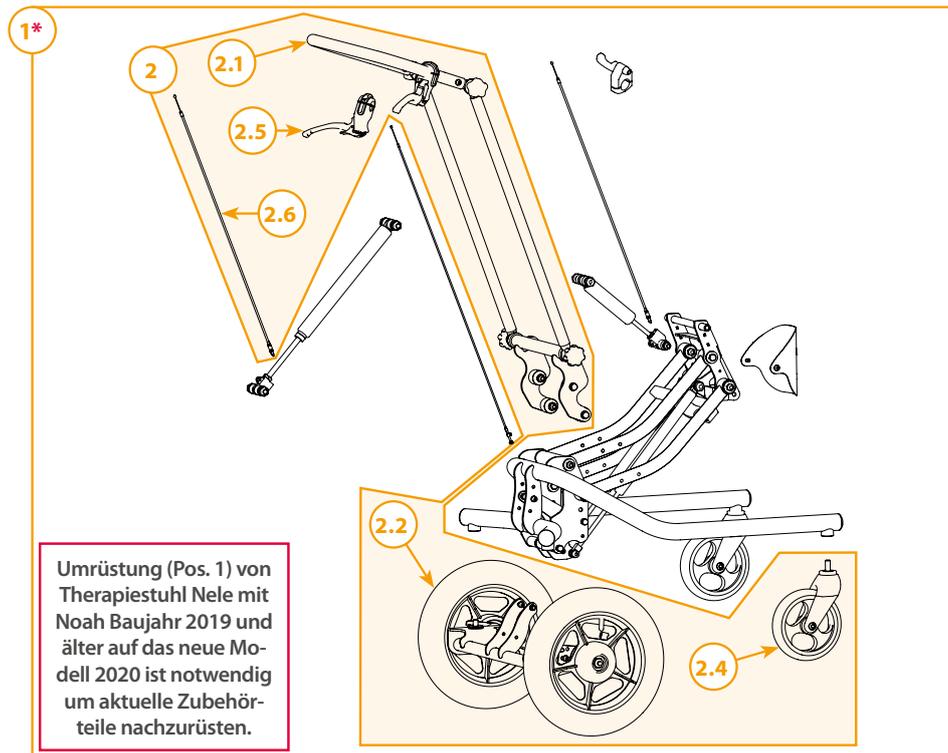

* Lenk- und Antriebsräder sind nicht im Umrüstkit enthalten

1.6 Untergestell Noah Outdoor					
Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1020544-KIT	0/ 1	Untergestell Noah - Umrüstkit von Nele Modell 2019 auf Nele Modell 2020 (ohne Pos. 2)*
	1	Stück	1020924-KIT	2	Untergestell Noah - Umrüstkit von Nele Modell 2019 auf Nele Modell 2020 (ohne Pos. 2)*
	2	Stück	1021734	0/ 1	Outdoor-Umrüstkit inkl. Antriebsräder, Lenkräder, Schiebebogen am Gestell und Bowdenzüge
	2	Stück	1021733	2	Outdoor-Umrüstkit inkl. Antriebsräder, Lenkräder, Schiebebogen am Gestell und Bowdenzüge
	2.1	Stück	1020918-ET	0-2	Schiebebogen am Gestell
	2.2	Stück	E30043-AT	0-2	Antriebsräder 12" Luft, schwarz
	2.3	Stück	1003711	0-2	Trommelbremsträger 12", rechts
	2.3	Stück	1003710	0-2	Trommelbremsträger 12", links
		Stück	1003771	0-2	Steckachse 12"
	2.4	Stück	1013730	0-2	Lenkrad 6" Vollgummi, schwarz
	2.5	Stück	1000576	0-2	Bremsgriff, automatisch rastend
	2.6	Stück	1021774	0-2	Bowdenzug für Bremse (1,15 m)

* Geben Sie bitte die Gestellfarbe auf Seite 2 an!

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1.7 Untergestell Noah Outdoor mit Motor **REHATEC**[®]

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

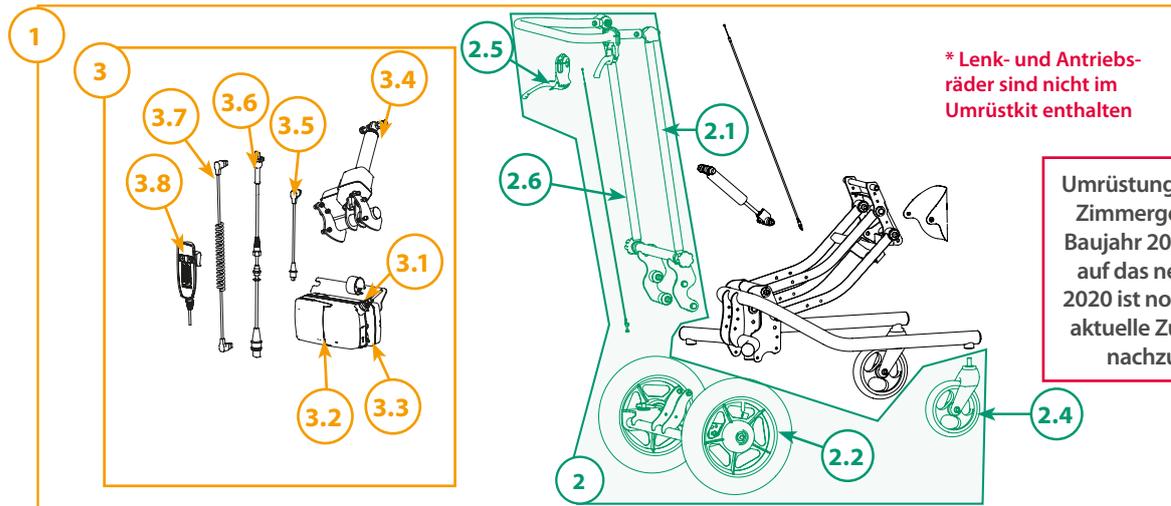

1.5 Untergestell Outdoor mit elektrischer Höhenverstellung

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1020544-KIT	0-1	Untergestell Noah - Umrüstkit von Nele 2019 auf Nele 2020
	1	Stück	1020924-KIT	2	Untergestell Noah - Umrüstkit von Nele 2019 auf Nele 2020
	2	Stück	1020853-ET	0-2	Outdoor-Umrüstkit inkl. Antriebsräder, Lenkräder, Schiebepogen am Gestell und Bowdenzüge - für elektrische Höhenverstellung
	2.1	Stück	1020918-ET	0-2	Schiebepogen am Gestell
	2.2	Stück	E30043-AT	0-2	Antriebsräder 12" Luft, schwarz
	2.3	Stück	1003711	0-2	Trommelbremsträger 12", rechts
	2.3	Stück	1003710	0-2	Trommelbremsträger 12", links
		Stück	1003771	0-2	Steckachse 12"
	2.4	Stück	1013730	0-2	Lenkrad 6" Vollgummi, schwarz
	2.5	Stück	1000576	0-2	Bremsgriff, automatisch rastend
	2.6	Stück	1011163	0-2	Bowdenzug für Bremse (1,15 m)
	3	Satz	1023827	0-2	Elektrische Höhenverstellung für Noah 2020 (KIT)
	3.1.	Satz	1023428	0-2	Motor (KIT)
	3.2.	Stück	1022940-1	0-2	Steuereinheit
	3.3.	Stück	1026018	0-2	Akku
	3.4.	Satz	1023414	0-2	Halterung (KIT)
	3.5.	Stück	1025250	0-2	Batterieanschlusskabel
	3.6.	Stück	1023363	0-2	Netzkabel
	3.7.	Stück	1023383	0-2	Motorkabel
	3.8.	Stück	1023826	0-2	Handbedienung

* Geben Sie bitte die Gestellfarbe auf Seite 2 an!

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 13

17.06.25

1025286_0.8

1.8 Zusätzliche Gasdruckfedern

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse


Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Ab einer Gesamtbelastung von 35 kg wird die hydraulische oder elektrische Höhenverstellung empfohlen!

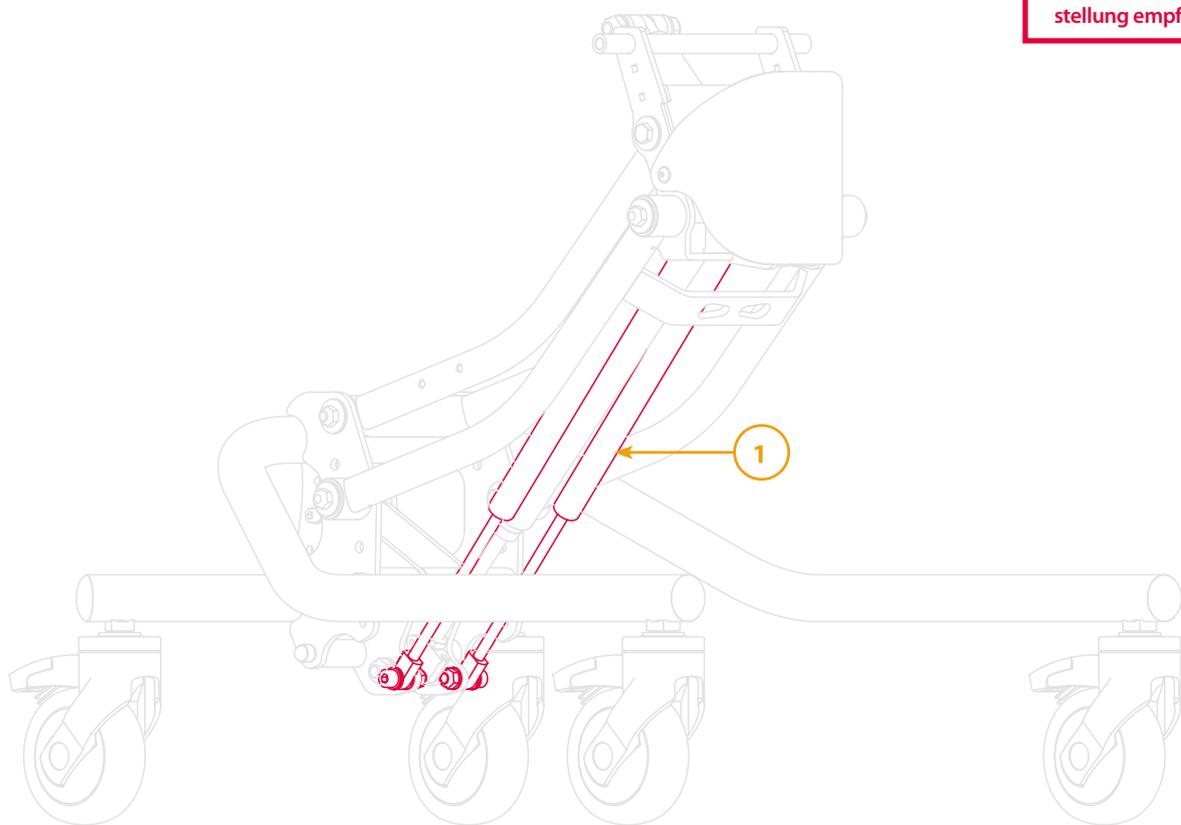

1.8 Zusätzliche Gasdruckfedern

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1020693-ET	0-2	Zusätzliche Gasdruckfedern, 2 x 200 N - KIT (ohne Bowdenzug)
	1	Stück	1020690	0-2	Gasdruckfeder 200 N

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1.9 Kippsicherung

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

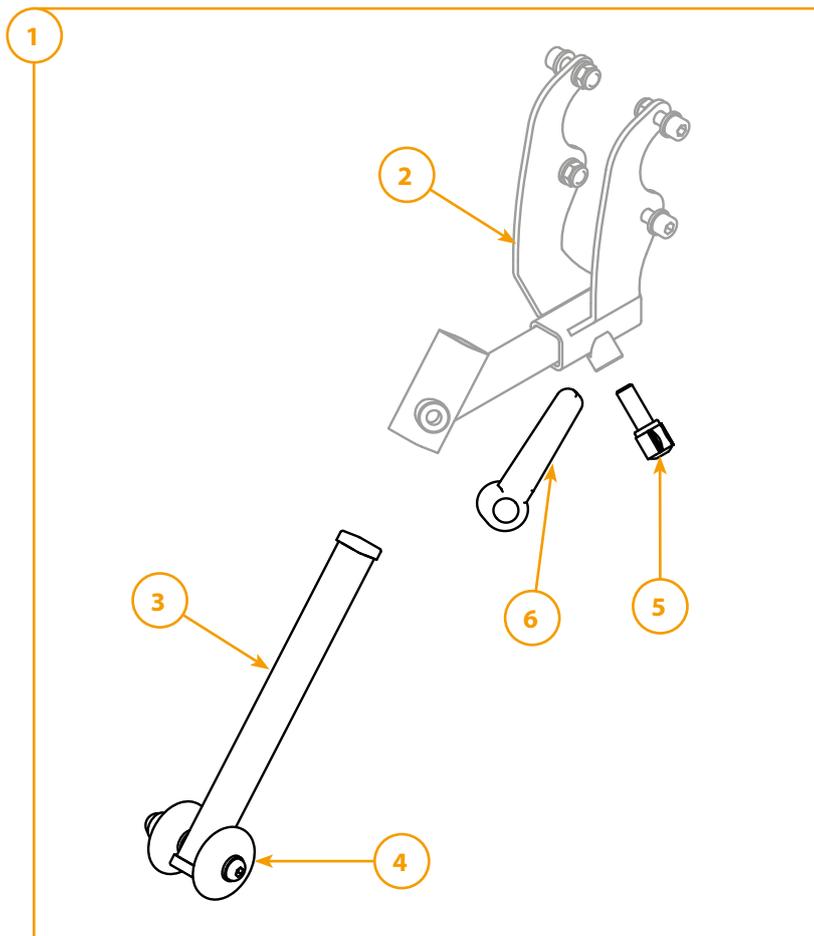

Nicht bei Nele
Classic möglich.

Nicht bei hydraulischer
Höhenverstellung
möglich.

1.9 Kippsicherung für Untergestell Noah

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1021592-ET	0-2	Kippsicherung komplett
	2	Stück	1021568	0-2	Aufnahme/Halterung für Kippsicherung inkl. Schrauben- und Befestigungsmaterial
	3	Stück	1021582	0-2	Kippsicherungsrohr für 75+100 mm Transportrollen inkl. Kippsicherungsräder
	3	Stück	1021663	0-2	Kippsicherungsrohr für 125 mm Transportrollen und 12" inkl. Kippsicherungsräder
	4	Stück	1004049	0-2	Kippsicherungsrad
	5	Stück	1005054	0-2	Miniwing M8x20
	6	Stück	1014668	0-2	Klemmhebel M8x15

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1.10 Radstandverlängerung

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

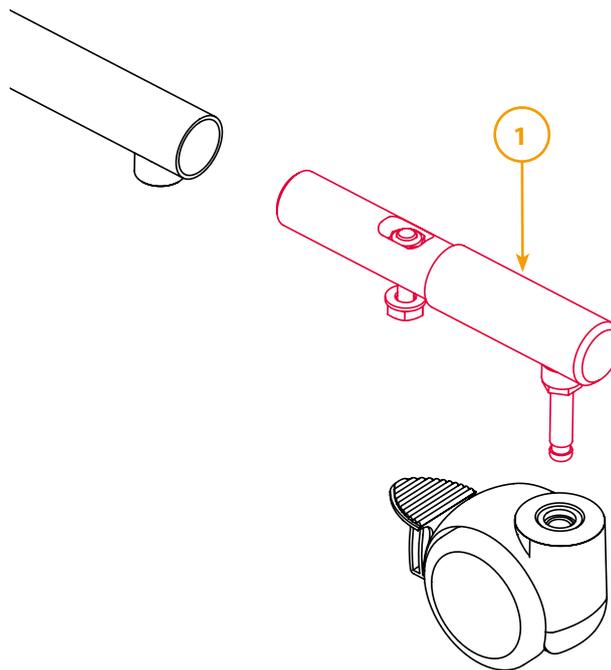

In Rahmenfarbe

1.10 Radstandverlängerung					
Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Paar	1021762-ET	0/ 1	Radstandverlängerung* um 10 cm bei 75 mm Transportrollen für Nele Gr. 0 + 1
	1	Paar	1021764-ET	0/ 1	Radstandverlängerung* um 10 cm bei 100 mm Transportrollen für Nele Gr. 0 + 1
	1	Paar	1021764-ET	0/ 1	Radstandverlängerung* um 10 cm bei 125 mm Transportrollen für Nele Gr. 0 + 1
	1	Paar	1021768-ET	0/ 1	Radstandverlängerung* um 10 cm bei Outdoor-Untergestell für Nele Gr. 0 + 1
	1	Paar	1021765-ET	2	Radstandverlängerung* um 10 cm bei 75 mm Transportrollen für Nele Gr. 2
	1	Paar	1021767-ET	2	Radstandverlängerung* um 10 cm bei 100 mm Transportrollen für Nele Gr. 2
	1	Paar	1021767-ET	2	Radstandverlängerung* um 10 cm bei 125 mm Transportrollen für Nele Gr. 2
	1	Paar	1021769-ET	2	Radstandverlängerung* um 10 cm bei Outdoor-Untergestell für Nele Gr. 2

* Geben Sie bitte die Gestellfarbe auf Seite 2 an!

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.


Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

2. Sitz

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

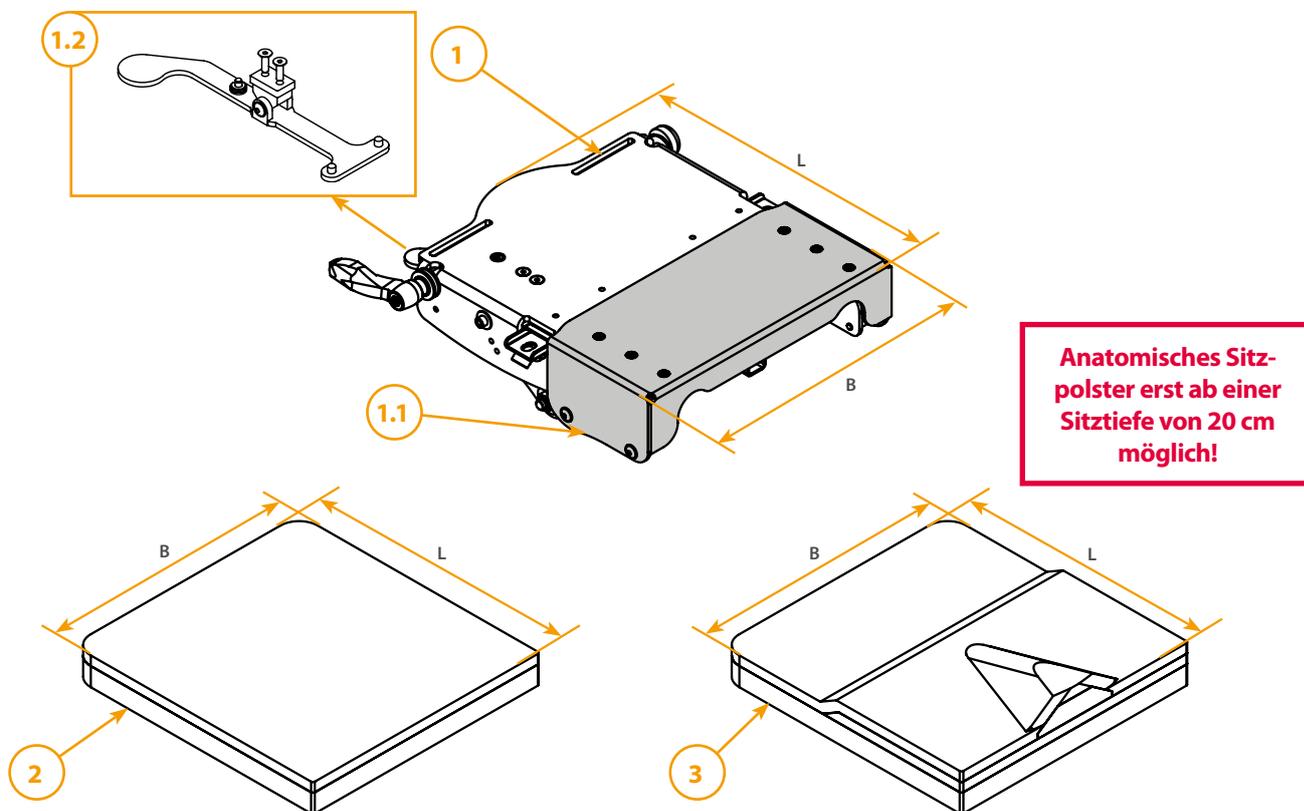

1 Sitzplatte

	Breite (B)	Tiefe (L)
Standard Gr. 0	26 cm	29 cm
Standard Gr. 1	31 cm	31,5 cm
Standard Gr. 2	35,5 cm	39,5 cm
Verlängert Gr. 1	31 cm	40 cm
Verlängert Gr. 2	35,7 cm	47 cm

2 Sitzpolster

	Breite (B)	Tiefe (L)
Standard Gr. 0	24,5 cm	26 cm
Standard Gr. 1	29 cm	29,5 cm
Standard Gr. 2	33,5 cm	41 cm
Verlängert Gr. 1	29 cm	34,5 cm
Verlängert Gr. 2	33,5 cm	46 cm

3 Sitzpolster anatomisch

	Breite (B)	Tiefe (L)
Standard Gr. 0	24,5 cm	26 cm
Standard Gr. 1	29 cm	29,5 cm
Standard Gr. 2	33,5 cm	41 cm
Verlängert Gr. 1	29 cm	34,5 cm
Verlängert Gr. 2	33,5 cm	46 cm

Table auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

2. Sitz

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Bestellung

Besteller

Datum

Absender/Rechnungsadresse

Versandadresse

Seriennummer

Kommission

2. Sitz

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1020622	Mini/0	Sitzplatte Standard Gr. 0 - KIT
	1	Stück	1020624	1	Sitzplatte Standard Gr. 1 - KIT
	1	Stück	1020628	2	Sitzplatte Standard Gr. 2 - KIT
	1	Stück	1020624-1	1	Sitzplatte verlängert Gr. 1 - KIT
	1	Stück	1020628-1	2	Sitzplatte verlängert Gr. 2 - KIT
	1.1	Stück	1009195	Mini/0	Sitztiefenblech für Sitztiefenverkürzung und Standardsitztiefe inkl. Schraubenmaterial
	1.1	Stück	1009426	1	Sitztiefenblech für Sitztiefenverkürzung und Standardsitztiefe inkl. Schraubenmaterial
	1.1	Stück	1009571	2	Sitztiefenblech für Sitztiefenverkürzung und Standardsitztiefe inkl. Schraubenmaterial
	1.1	Stück	1010910	1	Sitztiefenblech für Sitztiefenverlängerung inkl. Schraubenmaterial
	1.1	Stück	1015248	2	Sitztiefenblech für Sitztiefenverlängerung inkl. Schraubenmaterial
	1.2	Stück	1020872	Mini/0	Auslösehebel KIT
	1.2	Stück	1020828	1	Auslösehebel KIT
	1.2	Stück	1020833	2	Auslösehebel KIT
	2	Stück	1009384	Mini/0	Sitzpolster Standard Gr. 0
	2	Stück	1009549	1	Sitzpolster Standard Gr. 1
	2	Stück	1009630	2	Sitzpolster Standard Gr. 2
	2	Stück	1021077	1	Sitzpolster verlängert Gr. 1
	2	Stück	1021078	2	Sitzpolster verlängert Gr. 2
		Stück	1019107	Mini/0	Bezug Sitzpolster Standard (ohne Abbildung)*
		Stück	1019108	1	Bezug Sitzpolster Standard (ohne Abbildung)*
		Stück	1019109	2	Bezug Sitzpolster Standard (ohne Abbildung)*
		Stück	1021143	1	Bezug Sitzpolster verlängert (ohne Abbildung)*
		Stück	1021144	2	Bezug Sitzpolster verlängert (ohne Abbildung)*
	3	Stück	1017988-ET	Mini/0	Sitzpolster+Bezug anatomisch Standard Gr. 0*
	3	Stück	1017991-ET	1	Sitzpolster+Bezug anatomisch Standard Gr. 1*
	3	Stück	1017992-ET	2	Sitzpolster+Bezug anatomisch Standard Gr. 2*
	3	Stück	1021142-ET	1	Sitzpolster+Bezug anatomisch verlängert Gr. 1*
	3	Stück	1021140-ET	2	Sitzpolster+Bezug anatomisch verlängert Gr. 2*
		Stück	1019153	Mini/0	Bezug Sitzpolster anatomisch Standard (ohne Abbildung)*
		Stück	1019162	1	Bezug Sitzpolster anatomisch Standard (ohne Abbildung)*
		Stück	1019163	2	Bezug Sitzpolster anatomisch Standard (ohne Abbildung)*
		Stück	1019164	1	Bezug Sitzpolster anatomisch verlängert (ohne Abbildung)*
		Stück	1019165	2	Bezug Sitzpolster anatomisch verlängert (ohne Abbildung)*

* Geben Sie bitte die Stofffarbe auf Seite 2 an!

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

3. Rücken

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse


Besteller

Datum


Seriennummer

Kommission


Becken Größe Mini

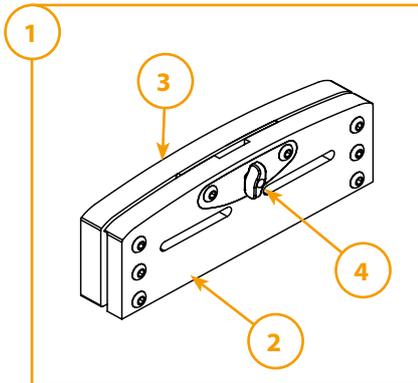

Becken Größe 1

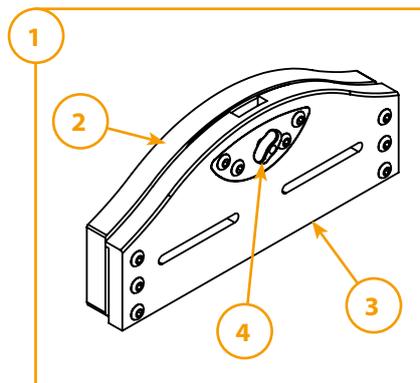

Becken Größe 2

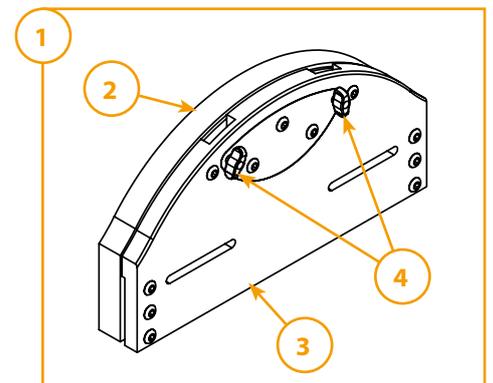

3.1 Beckenteil für Rücken

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1010417-ET	Mini/0	Becken Gr. Mini inkl. Anbauteile, Polster und Bezug*
	1	Stück	1010148-ET	Mini/0	Becken Gr. 0 inkl. Anbauteile, Polster und Bezug*
	1	Stück	1010175-ET	1	Becken Gr. 1 inkl. Anbauteile, Polster und Bezug*
	1	Stück	1010174-ET	2	Becken Gr. 2 inkl. Anbauteile, Polster und Bezug*
	1	Stück	1021076-ET	2	Becken Gr. 2 für Rücken Gr. 1 inkl. Anbauteile, Polster und Bezug*
	2	Stück	1010417-ET-1	Mini/0	Becken Gr. Mini inkl. Anbauteile, ohne Polster und Bezug
	2	Stück	1010148-ET-1	Mini/0	Becken Gr. 0 inkl. Anbauteile, ohne Polster und Bezug
	2	Stück	1010175-ET-1	1	Becken Gr. 1 inkl. Anbauteile, ohne Polster und Bezug
	2	Stück	1010174-ET-1	2	Becken Gr. 2 inkl. Anbauteile, ohne Polster und Bezug
	2	Stück	1021076-ET-1	2	Becken Gr. 2 für Rücken Gr. 1 inkl. Anbauteile, ohne Polster und Bezug
	3	Stück	1010744	Mini/0	Polster Becken Gr. Mini
	3	Stück	1009383	Mini/0	Polster Becken Gr. 0
	3	Stück	1009550	1	Polster Becken Gr. 1
	3	Stück	1009628	2	Polster Becken Gr. 2
	3	Stück	1014537	2	Polster Becken Gr. 2 für Rücken Gr. 1
		Stück	1019118	Mini/0	Bezug Becken Gr. Mini*
		Stück	1019119	Mini/0	Bezug Becken Gr. 0*
		Stück	1019120	1	Bezug Becken Gr. 1*
		Stück	1019121	2	Bezug Becken Gr. 2*
		Stück	1019122	2	Bezug Becken Gr. 2 für Rücken Gr. 1*
	4	Stück	1005701	Mini-2	Miniwing M6x15** (für einfachere Abnahme vom Rücken)

* Geben Sie bitte die Stofffarbe auf Seite 2 an! ** für Becken Größe 2 werden 2 Miniwing benötigt.

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

3. Rücken

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse


Besteller

Datum


Seriennummer

Kommission


Rücken Größe 2

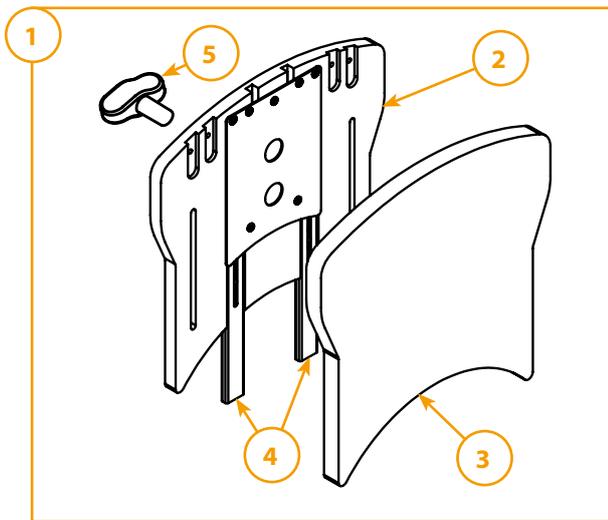


Rücken Größe Mini

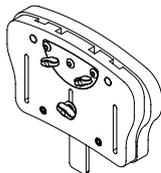

Rücken Größe 1

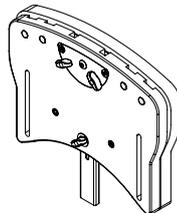


Rücken Mini

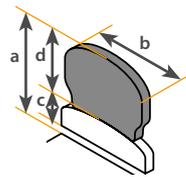


Gr.	a	b	c	d
Mini	24-27,5cm	23cm	8,5cm	14,5cm

Rücken extra kurz

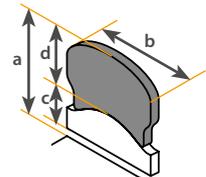


Gr.	a	b	c	d
0	28-32,5 cm	25 cm	12 cm	13 cm
1	29-32 cm	25 cm	13 cm	13 cm

Rücken kurz

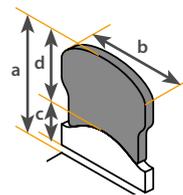

Gr.	a	b	c	d
0	32,5-39 cm	25 cm	12 cm	18 cm
1	33-41 cm	29 cm	13 cm	18 cm
2	43-53 cm	39 cm	18 cm	23,5 cm

Rücken lang

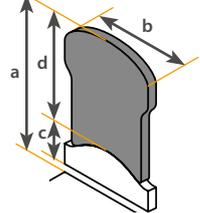

Gr.	a	b	c	d
0	41,5-51 cm	25 cm	12 cm	27 cm
1	42-51,5 cm	29 cm	13 cm	27 cm
2	50-60 cm	39 cm	18 cm	31 cm

3.2 Rücken

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1009325-ET	Mini / 0	Rücken Gr. Mini inkl. Anbauteile, Polster und Bezug*
	1	Stück	1019514-0-ET	Mini / 0	Rücken extra kurz Gr. 0 inkl. Anbauteile, Polster und Bezug*
	1	Stück	1019514-1-ET	1	Rücken extra kurz Gr. 0 inkl. Anbauteile, Polster und Bezug*
	1	Stück	1009747-ET	Mini - 1	Rücken kurz, Gr. 0 inkl. Anbauteile, Polster und Bezug*
	1	Stück	1009791-ET	1 / 2	Rücken kurz, Gr. 1 inkl. Anbauteile, Polster und Bezug*
	1	Stück	1009575-ET	2	Rücken kurz, Gr. 2 inkl. Anbauteile, Polster und Bezug*
	1	Stück	1010149-ET	Mini / 0	Rücken lang Gr. 0 inkl. Anbauteile, Polster und Bezug*
	1	Stück	1009441-ET	1	Rücken lang Gr. 1 inkl. Anbauteile, Polster und Bezug*
	1	Stück	1009805-ET	2	Rücken lang Gr. 2 inkl. Anbauteile, Polster und Bezug*

* Geben Sie bitte die Stofffarbe auf Seite 2 an!

Fortsetzung auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

3. Rücken

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung und Pos. 1 auf vorheriger Seite

3.2 Rücken					
Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	2	Stück	1009325-ET-1	Mini / 0	Rücken Gr. Mini inkl. Anbauteile, ohne Polster und Bezug
	2	Stück	1019514-0-ET-1	Mini / 0	Rücken extra kurz Gr. 0 inkl. Anbauteile, ohne Polster u. Bezug
	2	Stück	1019514-1-ET	1	Rücken extra kurz Gr. 0 inkl. Anbauteile, ohne Polster und Bezug
	2	Stück	1009747-ET-1	Mini – 1	Rücken kurz, Gr. 0 inkl. Anbauteile, ohne Polster u. Bezug
	2	Stück	1009791-ET-1	1 / 2	Rücken kurz, Gr. 1 inkl. Anbauteile, ohne Polster u. Bezug
	2	Stück	1009575-ET-1	2	Rücken kurz, Gr. 2 inkl. Anbauteile, ohne Polster u. Bezug
	2	Stück	1010149-ET-1	Mini / 0	Rücken lang Gr. 0 inkl. Anbauteile, ohne Polster u. Bezug
	2	Stück	1009441-ET-1	1	Rücken lang Gr. 1 inkl. Anbauteile, ohne Polster u. Bezug
	2	Stück	1009805-ET-1	2	Rücken lang Gr. 2 inkl. Anbauteile, ohne Polster u. Bezug
	3	Stück	1010743	Mini / 0	Polster Rücken Gr. Mini
	3	Stück	1017084	Mini – 1	Polster Rücken extra kurz Gr. 0
	3	Stück	1009382	Mini / 0	Polster Rücken kurz
	3	Stück	1009544	1	Polster Rücken kurz
	3	Stück	1009629	2	Polster Rücken kurz
	3	Stück	1009374	Mini / 0	Polster Rücken lang
	3	Stück	1009551	1	Polster Rücken lang
	3	Stück	1009735	2	Polster Rücken lang
		Stück	1019117	Mini / 0	Bezug Rücken Gr. Mini*
		Stück	1019116	Mini – 1	Bezug Rücken Gr. extra kurz*
		Stück	1019115	Mini / 0	Bezug Rücken kurz*
		Stück	1019114	1	Bezug Rücken kurz*
		Stück	1019113	2	Bezug Rücken kurz*
		Stück	1019112	Mini / 0	Bezug Rücken lang*
		Stück	1019111	1	Bezug Rücken lang*
		Stück	1019110	2	Bezug Rücken lang*
	4	Stück	1010620	Mini / 0	Höhenverstellrohr Rücken Gr. Mini
	4	Stück	1009754	Mini / 0	Höhenverstellrohr Rücken kurz
	4	Stück	1009564	1	Höhenverstellrohr Rücken kurz
	4	Stück	1009593	2	Höhenverstellrohr Rücken kurz
	4	Stück	1009287	Mini / 0	Höhenverstellrohr Rücken lang
	4	Stück	1009794	1	Höhenverstellrohr Rücken lang
	4	Stück	1009763	2	Höhenverstellrohr Rücken lang
	5	Stück	1007557	Mini – 2	Miniwing M6x10

* Geben Sie bitte die Stofffarbe auf Seite 2 an!

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

3. Rücken

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

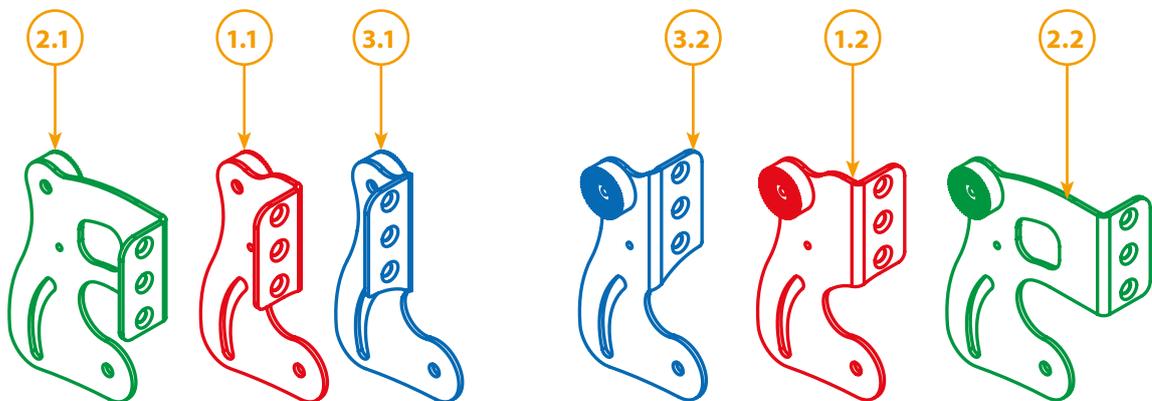

	Sitztiefe	
	Standard	verlängert
17 - 27 cm	12 - 22 cm	—
19,5 - 29,5 cm	15 - 25 cm	29,5 - 36 cm
26 - 39 cm	22 - 35 cm	38 - 44 cm

3.3 Rückenverstellplatten

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1.1.	Stück	1010711	Mini – 2	Rückenverstellplatte Standard, rechts
	1.2.	Stück	1010712	Mini – 2	Rückenverstellplatte Standard, links
	2.1.	Stück	1010415	Mini – 2	Rückenverstellplatte für Sitztiefenverkürzung, rechts
	2.2.	Stück	1010416	Mini – 2	Rückenverstellplatte für Sitztiefenverkürzung, links
	3.1.	Stück	1009560	1 / 2	Rückenverstellplatte für Sitztiefenverlängerung, rechts
	3.2.	Stück	1009561	1 / 2	Rückenverstellplatte für Sitztiefenverlängerung, links

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

4. Pelotten

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

4.1 Oberschenkelführung

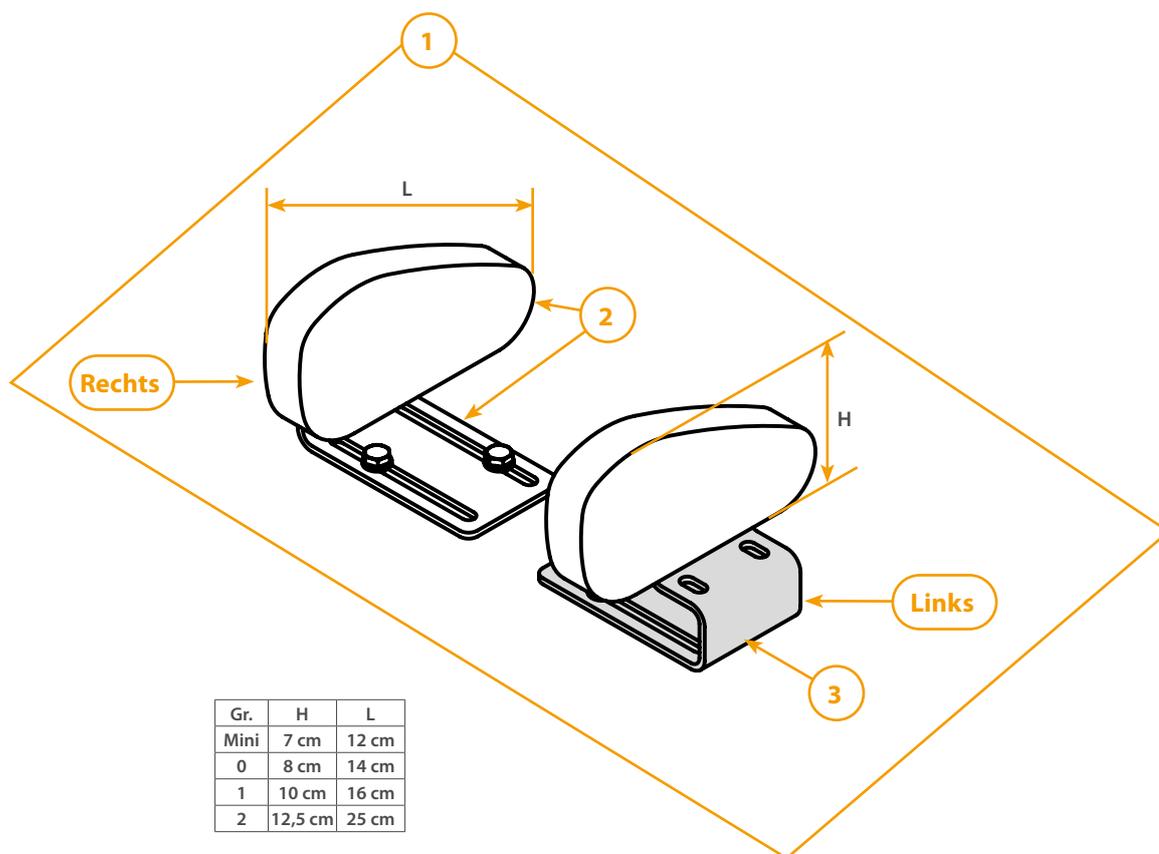


Tabelle auf nachfolgender Seite

4. Pelotten

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

4.1 Oberschenkelführung

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Paar	1010754-ET	Mini / 0	Oberschenkelführung Gr. Mini - komplett*
	1	Paar	1009181-ET	Mini / 0	Oberschenkelführung Gr. 0 - komplett*
	1	Paar	1010153-ET	1	Oberschenkelführung Gr. 1 - komplett*
	1	Paar	1010658-ET	2	Oberschenkelführung Gr. 2 - komplett*
	2	Stück	1014580	Mini / 0	Oberschenkelführung Gr. Mini, rechte Seite , inkl. Winkel für Std. Sitzpolster , Anbauteile, Blech u. Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014580-A	Mini / 0	Oberschenkelführung Gr. Mini, rechte Seite , inkl. Winkel für anat. Sitzpolster , Anbauteile, Blech u. Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014581	Mini / 0	Oberschenkelführung Gr. Mini, linke Seite , inkl. Winkel für Std. Sitzpolster , Anbauteile, Blech u. Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014581-A	Mini / 0	Oberschenkelführung Gr. Mini, linke Seite , inkl. Winkel für anat. Sitzpolster , Anbauteile, Blech u. Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014582	Mini / 0	Oberschenkelführung Gr. 0, rechte Seite , inkl. Winkel für Std. Sitzpolster , Anbauteile, Blech u. Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014582-A	Mini / 0	Oberschenkelführung Gr. 0, rechte Seite , inkl. Winkel für anat. Sitzpolster , Anbauteile, Blech u. Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014583	Mini / 0	Oberschenkelführung Gr. 0, linke Seite , inkl. Winkel für Std. Sitzpolster , Anbauteile, Blech u. Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014583-A	Mini / 0	Oberschenkelführung Gr. 0, linke Seite , inkl. Winkel für anat. Sitzpolster , Anbauteile, Blech u. Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014584	1	Oberschenkelführung Gr. 1, rechte Seite , inkl. Winkel für Std. Sitzpolster , Anbauteile, Blech u. Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014584-A	1	Oberschenkelführung Gr. 1, rechte Seite , inkl. Winkel für anat. Sitzpolster , Anbauteile, Blech u. Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014585	1	Oberschenkelführung Gr. 1, linke Seite , inkl. Winkel für Std. Sitzpolster , Anbauteile, Blech u. Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014585-A	1	Oberschenkelführung Gr. 1, linke Seite , inkl. Winkel für anat. Sitzpolster , Anbauteile, Blech u. Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014586	2	Oberschenkelführung Gr. 2, rechte Seite , inkl. Winkel für Std. Sitzpolster , Anbauteile, Blech u. Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014586-A	2	Oberschenkelführung Gr. 2, rechte Seite , inkl. Winkel für anat. Sitzpolster , Anbauteile, Blech u. Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014587	2	Oberschenkelführung Gr. 2, linke Seite , inkl. Winkel für Std. Sitzpolster , Anbauteile, Blech u. Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014587-A	2	Oberschenkelführung Gr. 2, linke Seite , inkl. Winkel für anat. Sitzpolster , Anbauteile, Blech u. Polster - ohne Bezug
	3	Stück	1010118	Mini – 2	Halter für Oberschenkelführung für Std. Sitzpolster
	3	Stück	1015456	Mini – 2	Halter für Oberschenkelführung für anat. Sitzpolster
		Stück	1019141	Mini / 0	Bezug für Oberschenkelführung Gr. Mini*
		Stück	1019142	Mini / 0	Bezug für Oberschenkelführung*
		Stück	1019143	1	Bezug für Oberschenkelführung*
		Stück	1019144	2	Bezug für Oberschenkelführung*

* Geben Sie bitte die Stofffarbe auf Seite 2 an!

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99**, info@rehatec.com, www.rehatec.com

4. Pelotten

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

4.2 Beckenpelotten

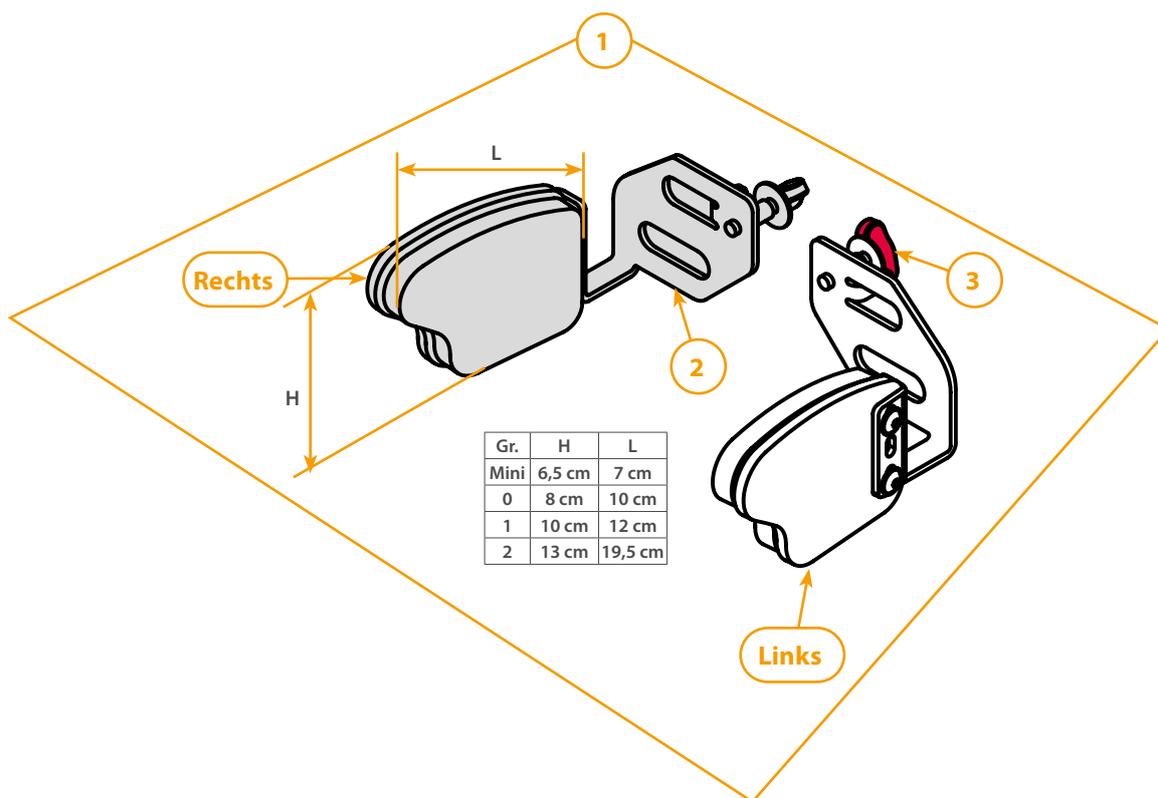


Tabelle auf nachfolgender Seite

4. Pelotten

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung und Maße auf vorheriger Seite

4.2 Beckenpelotten					
Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Paar	1010752-ET	Mini / 0	Beckenpelotten Gr. Mini - komplett
	1	Paar	1010168-ET	Mini / 0	Beckenpelotten Gr. 0 - komplett
	1	Paar	1010176-ET	1	Beckenpelotten Gr. 1 - komplett
	1	Paar	1010958-ET	2	Beckenpelotten Gr. 2 - komplett
	2	Stück	1014578	Mini / 0	Beckenpelotte Gr. Mini, rechte Seite , inkl. Halterung, Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014579	Mini / 0	Beckenpelotte Gr. Mini, linke Seite , inkl. Halterung, Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1010057	Mini / 0	Beckenpelotte Gr. 0, rechte Seite , inkl. Halterung, Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1010058	Mini / 0	Beckenpelotte Gr. 0, linke Seite , inkl. Halterung, Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1010059	1	Beckenpelotte Gr. 1, rechte Seite , inkl. Halterung, Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1010060	1	Beckenpelotte Gr. 1, linke Seite , inkl. Halterung, Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1010061	2	Beckenpelotte Gr. 2, rechte Seite , inkl. Halterung, Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1010062	2	Beckenpelotte Gr. 2, linke Seite , inkl. Halterung, Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	3	Stück	1021106	0-2	Miniwing M6x25
		Stück	1019129	Mini / 0	Bezug für Beckenpelotte Gr. Mini*
		Stück	1019130	Mini / 0	Bezug für Beckenpelotte*
		Stück	1019131	1	Bezug für Beckenpelotte*
		Stück	1019132	2	Bezug für Beckenpelotte*

* Geben Sie bitte die Stofffarbe auf Seite 2 an!

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99**, info@rehatec.com, www.rehatec.com

4. Pelotten

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

4.3 Seitenführungspelotten

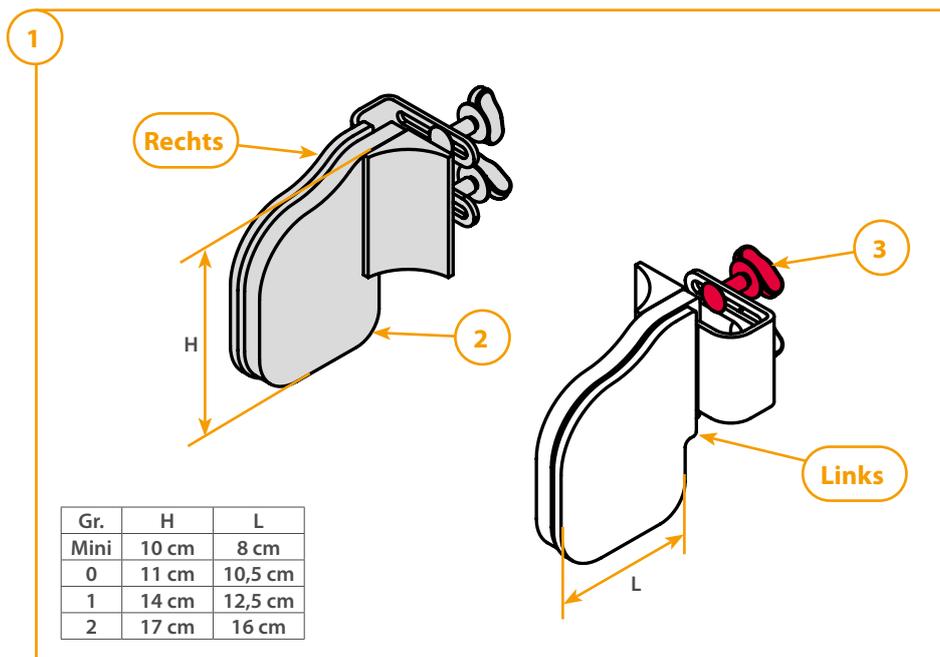


Tabelle auf nachfolgender Seite

4. Pelotten

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung und Maße auf vorheriger Seite

4.3 Seitenführungspelotten					
Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Paar	1010749-ET	Mini / 0	Seitenführungspelotte Gr. Mini - komplett
	1	Paar	1010169-ET	Mini / 0	Seitenführungspelotte Gr. 0 - komplett
	1	Paar	1010177-ET	1	Seitenführungspelotte Gr. 1 - komplett
	1	Paar	1010692-ET	2	Seitenführungspelotte Gr. 2 - komplett
	2	Stück	1014575	Mini / 0	Seitenführungspelotte Gr. Mini, rechte Seite , inkl. Halterung, Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014576	Mini / 0	Seitenführungspelotte Gr. Mini, linke Seite , inkl. Halterung, Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1009751	Mini / 0	Seitenführungspelotte Gr. 0, rechte Seite , inkl. Halterung, Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1009752	Mini / 0	Seitenführungspelotte Gr. 0, linke Seite , inkl. Halterung, Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1009821	1	Seitenführungspelotte Gr. 1, rechte Seite , inkl. Halterung, Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1009822	1	Seitenführungspelotte Gr. 1, linke Seite , inkl. Halterung, Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1009825	2	Seitenführungspelotte Gr. 2, rechte Seite , inkl. Halterung, Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1009826	2	Seitenführungspelotte Gr. 2, linke Seite , inkl. Halterung, Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	3	Stück	1005054	Mini – 2	Miniwing M8 Innengewinde
		Stück	1019133	Mini / 0	Bezug für Seitenführungspelotte Gr. Mini*
		Stück	1019134	Mini / 0	Bezug für Seitenführungspelotte*
		Stück	1019135	1	Bezug für Seitenführungspelotte*
		Stück	1019136	2	Bezug für Seitenführungspelotte*

* Geben Sie bitte die Stofffarbe auf Seite 2 an!

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99**, info@rehatec.com, www.rehatec.com

4. Pelotten

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

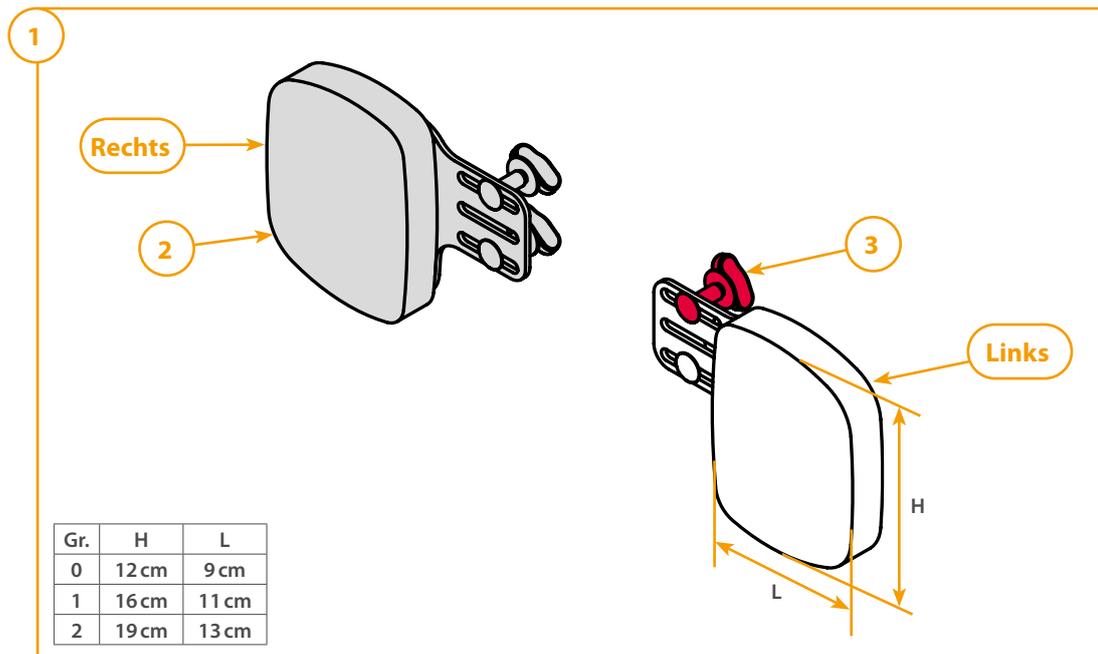

4.4 Armführung

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Paar	1010598-ET	Mini/0	Armführung Gr. 0 - komplett
	1	Paar	1010599-ET	1	Armführung Gr. 1 - komplett
	1	Paar	1010693-ET	2	Armführung Gr. 2 - komplett
	2	Stück	1014592	Mini/0	Armführung Gr. 0, rechte Seite , inkl. Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014593	Mini/0	Armführung Gr. 0, linke Seite , inkl. Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014594	1	Armführung Gr. 1, rechte Seite , inkl. Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014595	1	Armführung Gr. 1, linke Seite , inkl. Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014596	2	Armführung Gr. 2, rechte Seite , inkl. Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1014597	2	Armführung Gr. 2, linke Seite , inkl. Anbauteile, Miniwing, Blech und Polster - ohne Bezug
	3	Stück	1005054	Mini - 2	Miniwing M8 Innengewinde
		Stück	1019147	Mini/0	Bezug Armführung*
		Stück	1019148	1	Bezug Armführung*
		Stück	1019149	2	Bezug Armführung*

* Geben Sie bitte die Stofffarbe auf Seite 2 an!

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

4. Pelotten

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

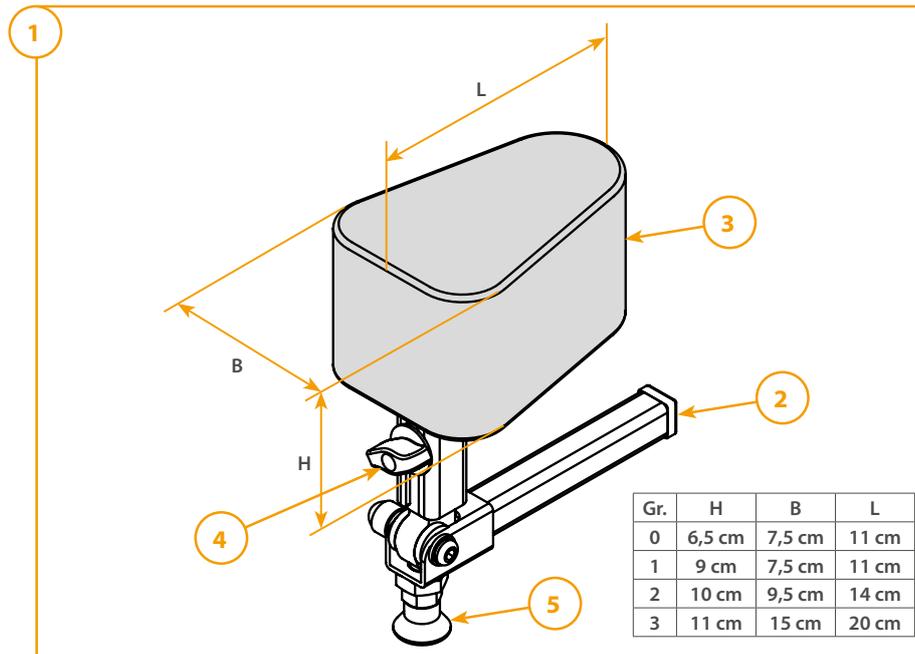

4.5 Abduktionskeil

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1010854-ET	Mini - 2	Abduktionskeil Gr. 0 - komplett*
	1	Stück	1009973-ET	Mini - 2	Abduktionskeil Gr. 1- komplett*
	1	Stück	1010271-ET	Mini - 2	Abduktionskeil Gr. 2 - komplett*
	1	Stück	1010697-ET	Mini - 2	Abduktionskeil Gr. 3 - komplett*
	2	Stück	1010855	Mini - 1	Abduktionskeilhalter, abschwenkbar inkl. Miniwing und Arretierbolzen (ohne Polster und Bezug)
	2	Stück	1010327	2	Abduktionskeilhalter, abschwenkbar inkl. Miniwing und Arretierbolzen (ohne Polster und Bezug)
	3	Stück	1021147	Mini - 2	Abduktionskeil Gr. 0 mit Blech, Polster und Bezug* - ohne Halter
	3	Stück	1018993	Mini - 2	Abduktionskeil Gr. 1 mit Blech, Polster und Bezug* - ohne Halter
	3	Stück	1018996	Mini - 2	Abduktionskeil Gr. 2 mit Blech, Polster und Bezug* - ohne Halter
	3	Stück	1018998	Mini - 2	Abduktionskeil Gr. 3 mit Blech, Polster und Bezug* - ohne Halter
		Stück	1019137	Mini - 2	Bezug Abduktionskeil Gr. 0*
		Stück	1019138	Mini - 2	Bezug Abduktionskeil Gr. 1*
		Stück	1019139	Mini - 2	Bezug Abduktionskeil Gr. 2*
		Stück	1019140	Mini - 2	Bezug Abduktionskeil Gr. 3*
	4	Stück	1007557	Mini - 2	Miniwing M6x10
	5	Stück	1021084	Mini - 2	Arretierbolzen Form A

* Geben Sie bitte die Stofffarbe auf Seite 2 an!

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

5. Schiebebogen am Sitz

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

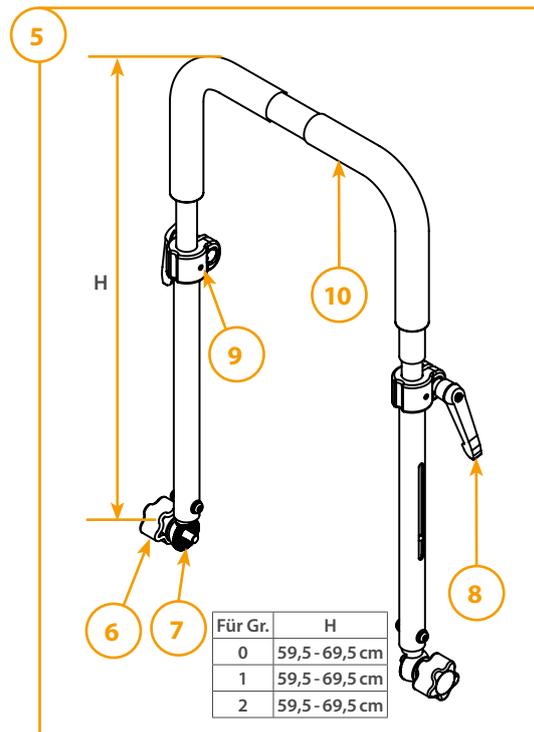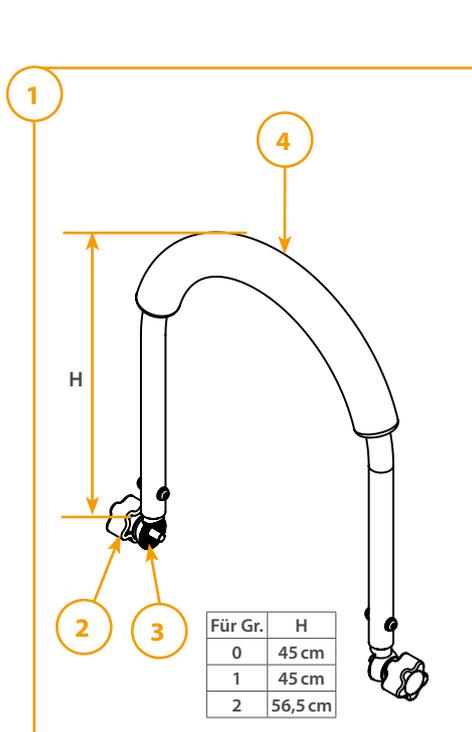

5. Schiebebogen am Sitz

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1009459-ET	Mini / 0	Schiebebogen winkelverstellbar -KIT
	1	Stück	1009562-ET	1	Schiebebogen winkelverstellbar -KIT
	1	Stück	1009589-ET	2	Schiebebogen winkelverstellbar -KIT
	2	Stück	1003309	Mini - 2	Fünfsterngriff - Soft M6x25
	3	Stück	1004938	Mini - 2	Zahnsegment
	4	Stück	1014237	Mini - 2	Schiebebogenüberzug Moosgummi 680 mm
	5	Stück	1010564-ET	Mini / 0	Schiebebogen höhen- und winkelverstellbar -KIT
	5	Stück	1010583-ET	1	Schiebebogen höhen- und winkelverstellbar -KIT
	5	Stück	1010691-ET	2	Schiebebogen höhen- und winkelverstellbar -KIT
	6	Stück	1003309	Mini - 2	Fünfsterngriff - Soft M6x25
	7	Stück	1004194	Mini - 2	Zahnsegment
	8	Stück	1021225	Mini - 2	Klemmhebel M8 Innengewinde (für Schiebebogen höhen- und winkelverstellbar)
	9	Stück	1002615	Mini / 0	Überwurf Höhenverstellung inkl. Klemmhebel
	10	Stück	1019336	Mini - 2	Schiebebogenüberzug PVC 260 mm für Schiebebogen höhen- und winkelverstellbar (es werden 2 Stück pro Schiebebogen benötigt)

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.



Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

6. Kopfstützen

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

6. Kopfstützen

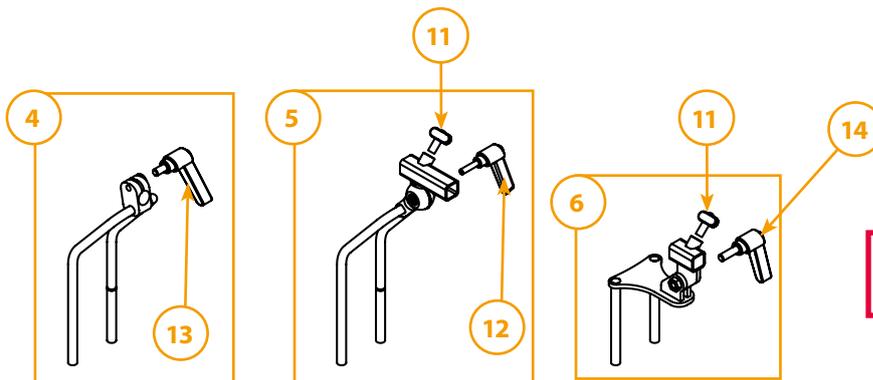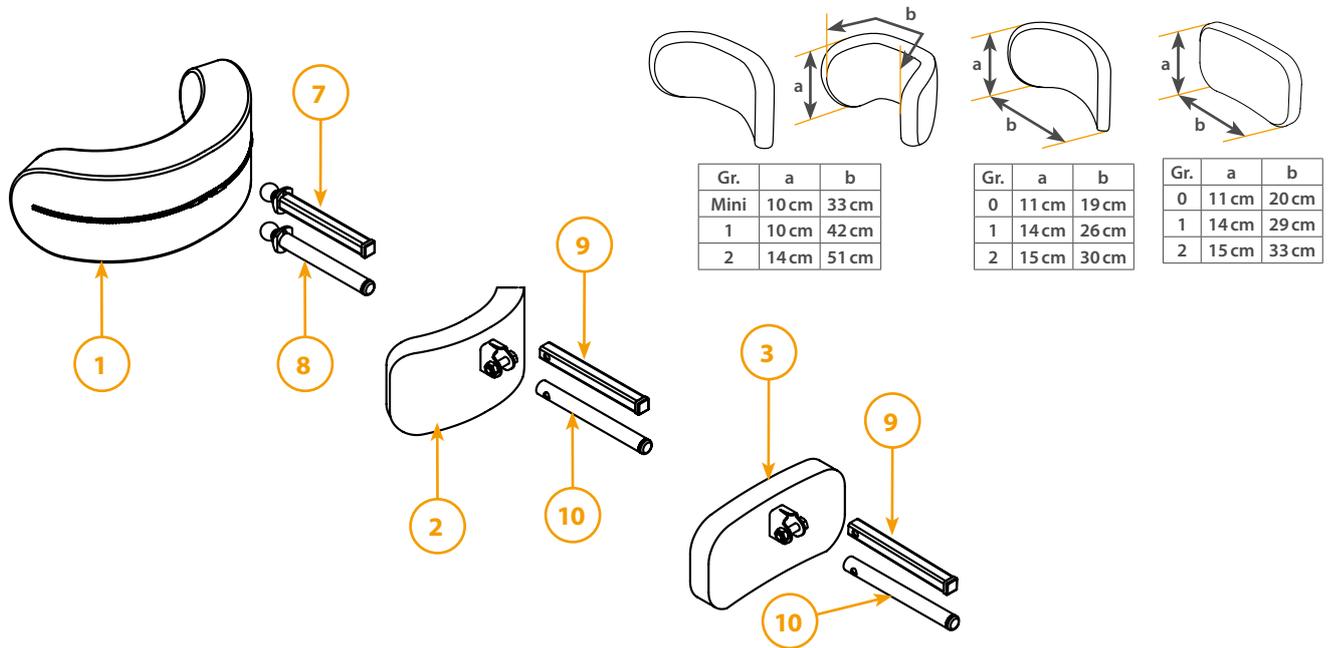

Angabe der vorhandenen Kopfstützenhalterung notwendig!

Weitere Tabelle auf der folgenden Seite.

Vorhandene Halterung
 Vierkantröhr Rundröhr

6. Kopfstützen					
Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1018345-ET	Mini-2	Kopfstütze verstellbar Gr. Mini inkl. Blech, Polster, Bezug und Tiefenverstellrohr <i>(Halterung oben angeben!)</i>
		Stück	1018344	Mini-2	Bezug Kopfstütze verstellbar Gr. Mini (schwarz Neopren)
	1	Stück	1018338-ET	0-2	Kopfstütze verstellbar Gr. 1 inkl. Blech, Polster, Bezug und Tiefenverstellrohr <i>(Halterung oben angeben!)</i>
		Stück	1017784	0-2	Bezug Kopfstütze verstellbar Gr. 1 (schwarz Neopren)
	1	Stück	1018343-ET	0-2	Kopfstütze verstellbar Gr. 2 inkl. Blech, Polster, Bezug und Tiefenverstellrohr <i>(Halterung oben angeben!)</i>
		Stück	1017787	0-2	Bezug Kopfstütze verstellbar Gr. 2 (schwarz Neopren)

6. Kopfstützen

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung und Maße auf vorheriger Seite

Vorhandene Halterung

Vierkantrohr

Rundrohr

6. Kopfstützen					
Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	2	Stück	1009693-ET	Mini-2	Kopfstütze Muschelform Gr. 0 inkl. Blech, Polster, Bezug und Tiefenverstellrohr <i>(Halterung oben angeben!)</i>
		Stück	1019126	Mini-2	Bezug Kopfstütze Muschelform Gr. 0 (in Bezugsfarbe)*
	2	Stück	1009695-ET	0-2	Kopfstütze Muschelform Gr. 1 inkl. Blech, Polster, Bezug und Tiefenverstellrohr <i>(Halterung oben angeben!)</i>
		Stück	1019127	0-2	Bezug Kopfstütze Muschelform Gr. 1 (in Bezugsfarbe)*
	2	Stück	1010684-ET	0-2	Kopfstütze Muschelform Gr. 2 inkl. Blech, Polster, Bezug und Tiefenverstellrohr <i>(Halterung oben angeben!)</i>
		Stück	1019128	0-2	Bezug Kopfstütze Muschelform Gr. 2 (in Bezugsfarbe)*
	3	Stück	1010166-ET	Mini-2	Kopfstütze gerade Gr. 0 inkl. Blech, Polster, Bezug und Tiefenverstellrohr <i>(Halterung oben angeben!)</i>
		Stück	1019123	Mini-2	Bezug Kopfstütze gerade Gr. 0 (in Bezugsfarbe)*
	3	Stück	1010180-ET	0-2	Kopfstütze gerade Gr. 1 inkl. Blech, Polster, Bezug und Tiefenverstellrohr <i>(Halterung oben angeben!)</i>
		Stück	1019124	0-2	Bezug Kopfstütze gerade Gr. 1 (in Bezugsfarbe)*
	3	Stück	1010683-ET	0-2	Kopfstütze gerade Gr. 2 inkl. Blech, Polster, Bezug und Tiefenverstellrohr <i>(Halterung oben angeben!)</i>
		Stück	1019125	0-2	Bezug Kopfstütze gerade Gr. 2 (in Bezugsfarbe)*
	4	Stück	1025560-ET	Mini	Kopfstützenhalter Standard inkl. Schraubenmaterial
	4	Stück	1010410-ET	0-2	Kopfstützenhalter Standard inkl. Schraubenmaterial
	5	Stück	1013253-ET	0-2	Kopfstützenhalter mit Zahnsegmentverstellung inkl. Schraubenmaterial
	6	Stück	1014903-ET	0-2	Kopfstützenhalter mit Klemmverstellung inkl. Schraubenmaterial
	7	Stück	1019448	Mini-2	Tiefenverstellrohr mit Kugelkopf, Vierkant (für Kopfstütze verstellbar)
	8	Stück	1015020	Mini-2	Tiefenverstellrohr mit Kugelkopf, Rundrohr (für Kopfstütze verstellbar)
	9	Stück	1005099-ET	Mini-2	Tiefenverstellrohr ohne Kugelkopf, Vierkantrohr (für Kopfstütze Muschelform und gerade)
	10	Stück	1016275	Mini-2	Tiefenverstellrohr ohne Kugelkopf, Rundrohr (für Kopfstütze Muschelform und gerade)
	11	Stück	1005054	Mini-2	Miniwing M8x15
	12	Stück	1007656	Mini-2	Klemmhebel M6x25
	13	Stück	1014668	Mini-2	Klemmhebel M8x15
	14	Stück	1007549	Mini-2	Klemmhebel M8x25

* Geben Sie bitte die Stofffarbe auf Seite 2 an!

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.


Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

7.1 Armlehne - ALTE VERSION

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

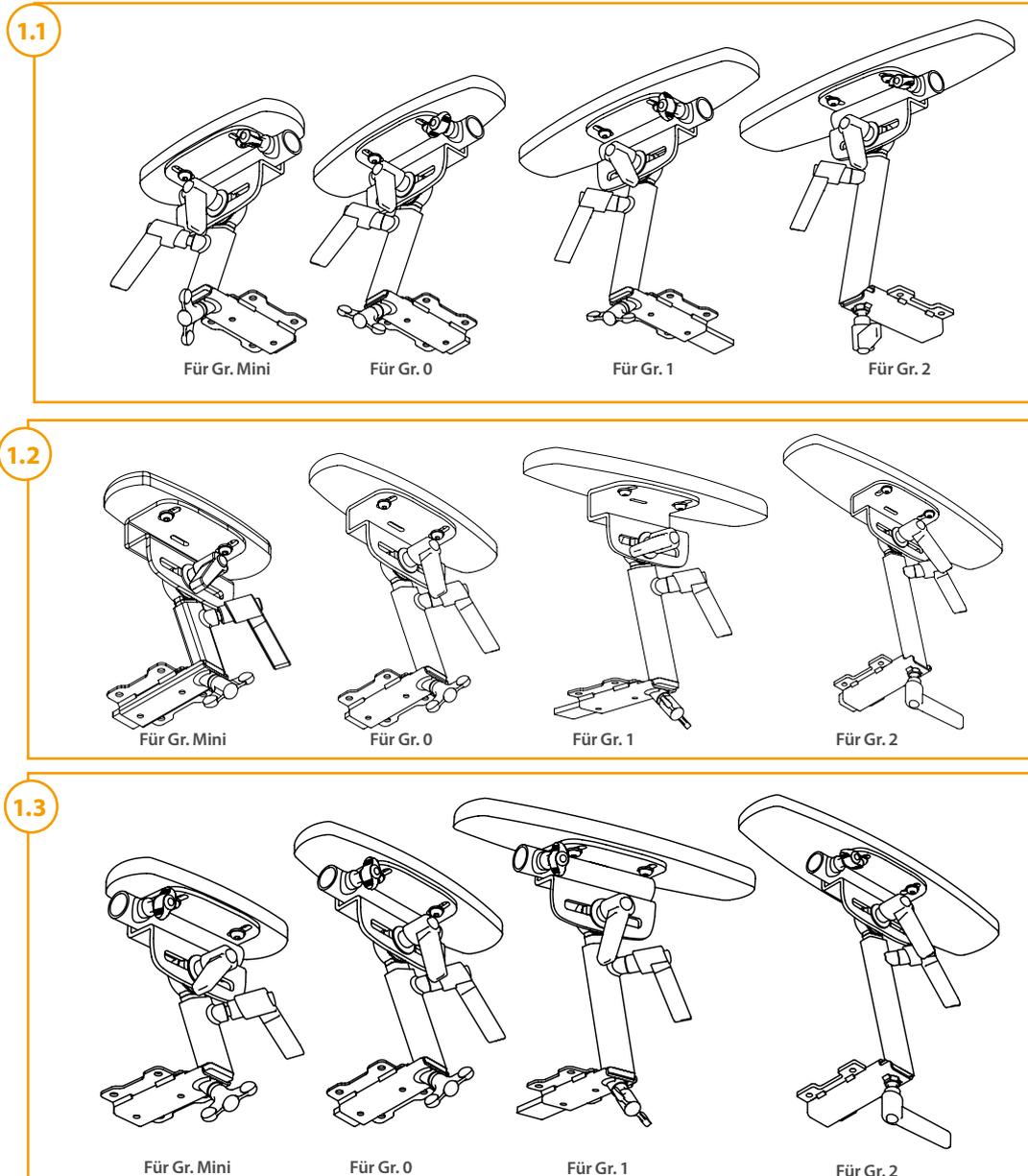

7.1 Armlehne-ALTE VERSION					
Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1.1	Stück	1018919	Mini	Armlehne komplett mit Tischaufnahme Gr. Mini, rechts
	1.1	Stück	1014766	0	Armlehne komplett mit Tischaufnahme Gr. 0, rechts
	1.1	Stück	1016141	1	Armlehne komplett mit Tischaufnahme Gr. 1, rechts
	1.1	Stück	1014776	2	Armlehne komplett mit Tischaufnahme Gr. 2, rechts
	1.2	Stück	1021464	Mini	Armlehne komplett mit Tischaufnahme Gr. Mini, links
	1.2	Stück	1021463	0	Armlehne komplett mit Tischaufnahme Gr. 0, links
	1.2	Stück	1017434	1	Armlehne komplett mit Tischaufnahme Gr. 1, links
	1.2	Stück	1017439	2	Armlehne komplett mit Tischaufnahme Gr. 2, links
	1.3	Stück	1018918	Mini	Armlehne komplett ohne Tischaufnahme Gr. Mini, links
	1.3	Stück	1016139	0	Armlehne komplett ohne Tischaufnahme Gr. 0, links
	1.3	Stück	1016142	1	Armlehne komplett ohne Tischaufnahme Gr. 1, links
	1.3	Stück	1016140	2	Armlehne komplett ohne Tischaufnahme Gr. 2, links

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

7.1 Armlehne - ALTE VERSION

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse


Besteller

Datum


Seriennummer

Kommission

2

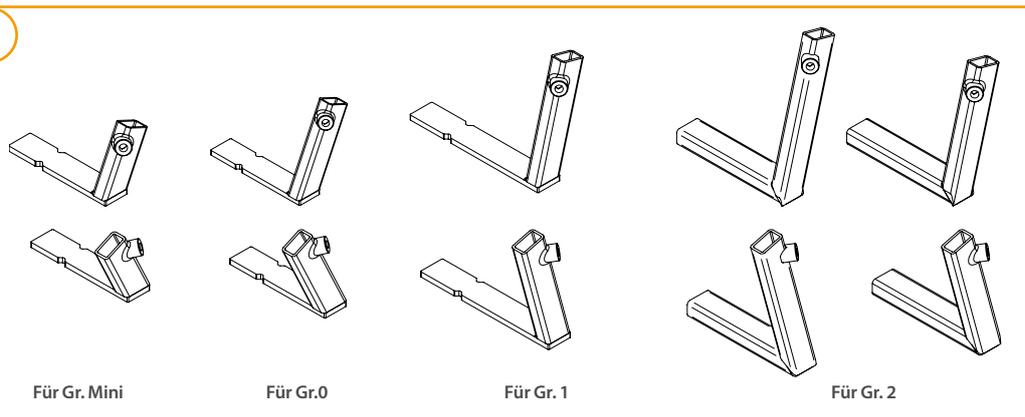

3

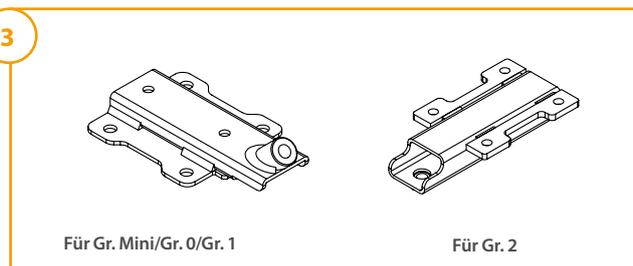

7.1 Armlehne-ALTE VERSION

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	2	Stück	1017343	Mini	Armlehnenhalterung rechts Gr. Mini inkl. Flügelschraube
	2	Stück	1017340	Mini	Armlehnenhalterung links Gr. Mini inkl. Flügelschraube
	2	Stück	1015275	0	Armlehnenhalterung rechts inkl. Flügelschraube
	2	Stück	1014771	0	Armlehnenhalterung links inkl. Flügelschraube
	2	Stück	1014628	1	Armlehnenhalterung rechts inkl. Flügelschraube
	2	Stück	1014770	1	Armlehnenhalterung links inkl. Flügelschraube
	2	Stück	1015169	2	Armlehnenhalterung rechts inkl. Flügelschraube
	2	Stück	1014802	2	Armlehnenhalterung links inkl. Flügelschraube
	2	Stück	1016518	2	Armlehnenhalterung rechts inkl. Flügelschraube M8x20 (Nur für die Verwendung von einem Rücken kurz Gr. 1 bei einer Nele Gr. 2)
	2	Stück	1016517	2	Armlehnenhalterung links inkl. Flügelschraube M8x20 (Nur für die Verwendung von einem Rücken kurz Gr. 1 bei einer Nele Gr. 2)
	3	Stück	1009567	Mini/0/1	Anschraubhalterung für Armlehnenhalterung mit 4 Lochbohrungen inkl. Schrauben- und Befestigungsmaterial
	3	Stück	1014805	3	Anschraubhalterung für Armlehnenhalterung mit 4 Lochbohrungen inkl. Schrauben- und Befestigungsmaterial

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99**, info@rehatec.com, www.rehatec.com

7.1 Armlehne - ALTE VERSION

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

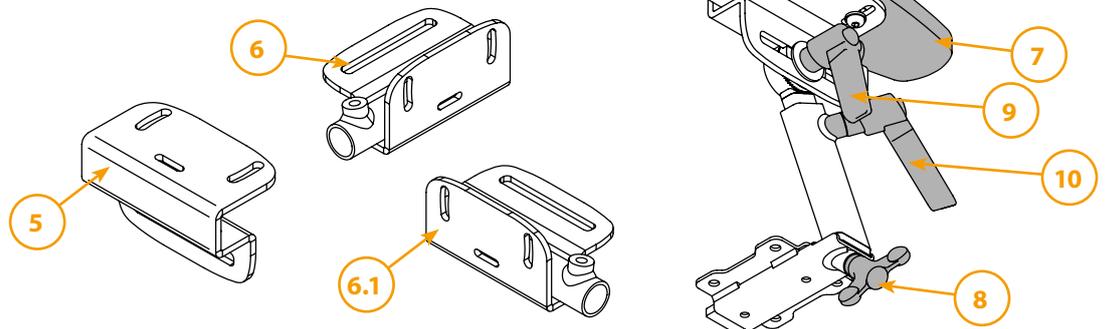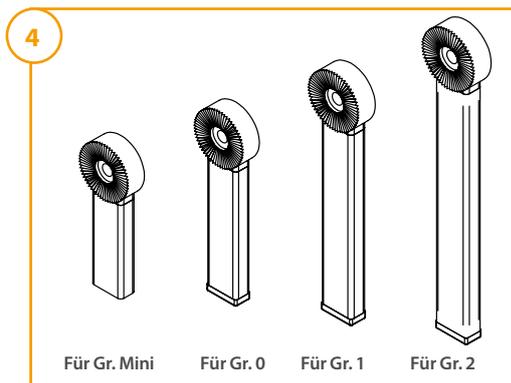

7.1 Armlehne-ALTE VERSION

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	4	Stück	1018703	Mini	Höhenverstellung für Armlehne (inkl. Zahnsegment) Gr. Mini
	4	Stück	1014773	0	Höhenverstellung für Armlehne (inkl. Zahnsegment)
	4	Stück	1014767	1	Höhenverstellung für Armlehne (inkl. Zahnsegment)
	4	Stück	1015298	2	Höhenverstellung für Armlehne (inkl. Zahnsegment)
	5	Stück	1009291	Mini-2	Tischhalterung ohne Tischaufnahme
	6	Stück	1009308	Mini-2	Tischaufnahme Armlehne komplett rechts
	6.1.	Stück	1015331	Mini-2	Tischaufnahme Armlehne komplett, links (für Tisch steckbar)
	7	Stück	1017067	Mini	Armlehne Holz Gr. Mini
	7	Stück	1009169	0	Armlehne Holz
	7	Stück	1009554	1	Armlehne Holz
	7	Stück	1009588	2	Armlehne Holz
	8	Stück	1017837	Mini-2	Flügelschraube M8x20
	9	Stück	1014668	Mini-2	Klemmhebel M8x15
	10	Stück	1015746	Mini-2	Klemmhebel M8x20

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

7.2 Armlehnen - NEUE VERSION

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse


Besteller

Datum


Seriennummer

Kommission


1.1

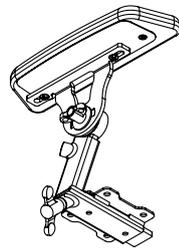


Für Gr. Mini

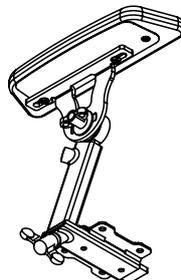

Für Gr. 0

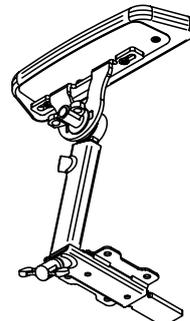


Für Gr. 1

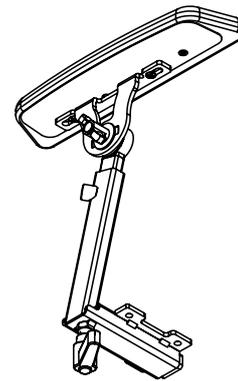


Für Gr. 2


1.2

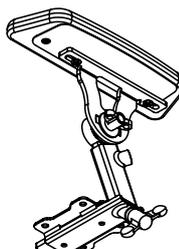


Für Gr. Mini

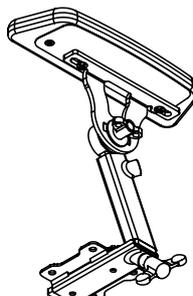

Für Gr. 0

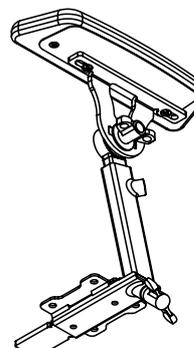

Für Gr. 1

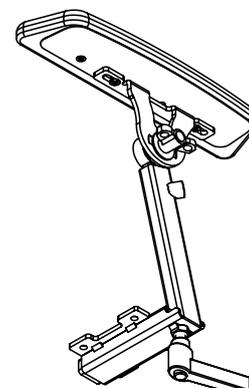

Für Gr. 2

7.2 Armlehnen - NEUE VERSION

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1.1.	Stück	1026827	Mini	Armlehne komplett Gr. Mini, rechts
	1.2.	Stück	1026828	Mini	Armlehne komplett Gr. Mini, links
	1.1.	Stück	1026837	0	Armlehne komplett Gr. 0, rechts
	1.2.	Stück	1026838	0	Armlehne komplett Gr. 0, links
	1.1.	Stück	1026857	1	Armlehne komplett Gr. 1, rechts
	1.2.	Stück	1026858	1	Armlehne komplett Gr. 1, links
	1.1.	Stück	1026866	2	Armlehne komplett Gr. 2, rechts
	1.2.	Stück	1026865	2	Armlehne komplett Gr. 2, links

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

7.2 Armlehnen - NEUE VERSION

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse


Besteller

Datum


Seriennummer

Kommission


2

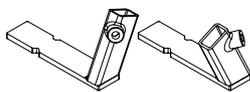


Für Gr. Mini

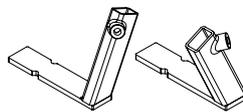

Für Gr. 0

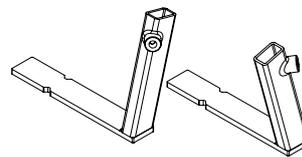


Für Gr. 1

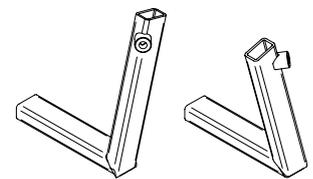


Für Gr. 2

3

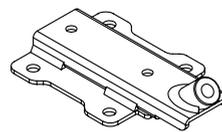

Für Gr. Mini/Gr. 0/Gr. 1

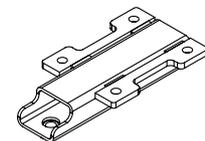

Für Gr. 2

7.2 Armlehnen - NEUE VERSION

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	2	Stück	1017343	Mini	Armlehnenhalterung rechts Gr. Mini inkl. Flügelschraube M8x20
	2	Stück	1017340	Mini	Armlehnenhalterung links Gr. Mini inkl. Flügelschraube M8x20
	2	Stück	1015275	0	Armlehnenhalterung rechts inkl. Flügelschraube M8x20
	2	Stück	1014771	0	Armlehnenhalterung links inkl. Flügelschraube M8x20
	2	Stück	1014628	1	Armlehnenhalterung rechts inkl. Flügelschraube M8x20
	2	Stück	1014770	1	Armlehnenhalterung links inkl. Flügelschraube M8x20
	2	Stück	1015169	2	Armlehnenhalterung rechts inkl. Flügelschraube M8x20
	2	Stück	1014802	2	Armlehnenhalterung links inkl. Flügelschraube M8x20
	3	Stück	1009567	Mini-1	Anschraubhalterung für Armlehnenhalterung mit 4 Lochbohrungen inkl. Schrauben- und Befestigungsmaterial
	3	Stück	1014805	2	Anschraubhalterung für Armlehnenhalterung mit 4 Lochbohrungen inkl. Schrauben- und Befestigungsmaterial

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

7.2 Armlehnen - NEUE VERSION

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse


Besteller

Datum


Seriennummer

Kommission


4

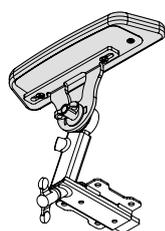


Für Gr. Mini

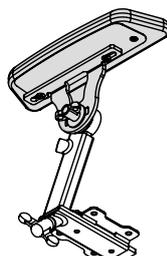


Für Gr. 0

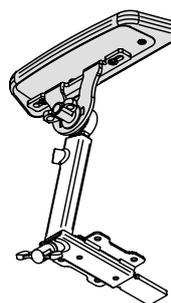


Für Gr. 1

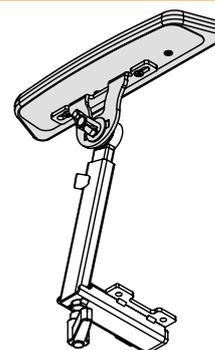


Für Gr. 2

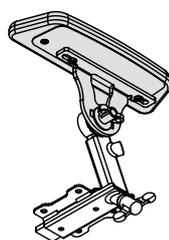


Für Gr. Mini

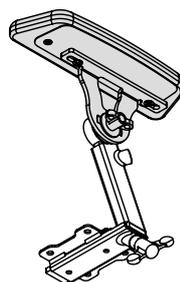

Für Gr. 0

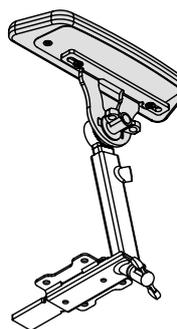

Für Gr. 1

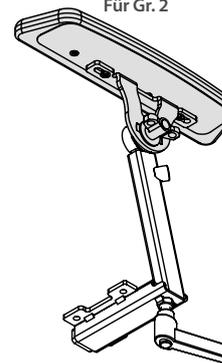

Für Gr. 2

7.2 Armlehnen - NEUE VERSION

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	4	Stück	1026827-E	Mini	Umrüst-KIT Gr. Mini, rechte Seite von alter Version auf neue Version (ohne Armlehnenhalterung, Höhenverstellung und Anschraubhalterung)
	4	Stück	1026828-E	Mini	Umrüst-KIT Gr. Mini, linke Seite von alter Version auf neue Version (ohne Armlehnenhalterung, Höhenverstellung und Anschraubhalterung)
	4	Stück	1026838-E	0	Umrüst-KIT Gr. 0, rechte Seite, von alter Version auf neue Version (ohne Armlehnenhalterung, Höhenverstellung und Anschraubhalterung)
	4	Stück	1026837-E	0	Umrüst-KIT Gr. 0, linke Seite, von alter Version auf neue Version (ohne Armlehnenhalterung, Höhenverstellung und Anschraubhalterung)
	4	Stück	1026857-E	1	Umrüst-KIT Gr. 1, rechte Seite, von alter Version auf neue Version (ohne Armlehnenhalterung, Höhenverstellung und Anschraubhalterung)
	4	Stück	1026858-E	1	Umrüst-KIT Gr. 1, linke Seite, von alter Version auf neue Version (ohne Armlehnenhalterung, Höhenverstellung und Anschraubhalterung)
	4	Stück	1026866-E	2	Umrüst-KIT Gr. 2, rechte Seite, von alter Version auf neue Version (ohne Armlehnenhalterung, Höhenverstellung und Anschraubhalterung)
	4	Stück	1026865-E	2	Umrüst-KIT Gr. 2, linke Seite, von alter Version auf neue Version (ohne Armlehnenhalterung, Höhenverstellung und Anschraubhalterung)

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

7.2 Armlehnen - NEUE VERSION

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung




Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

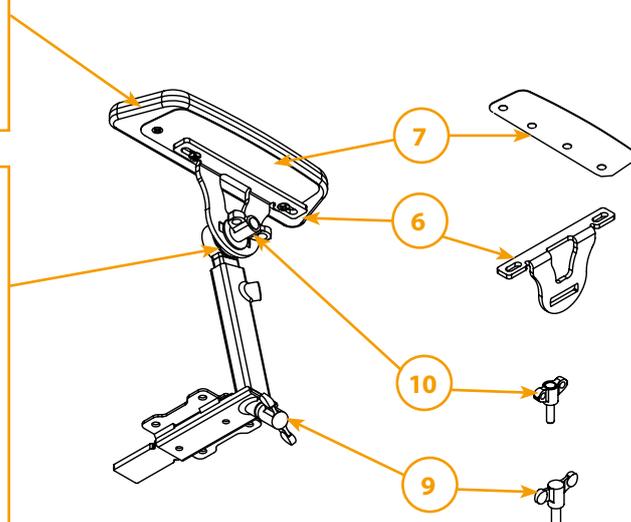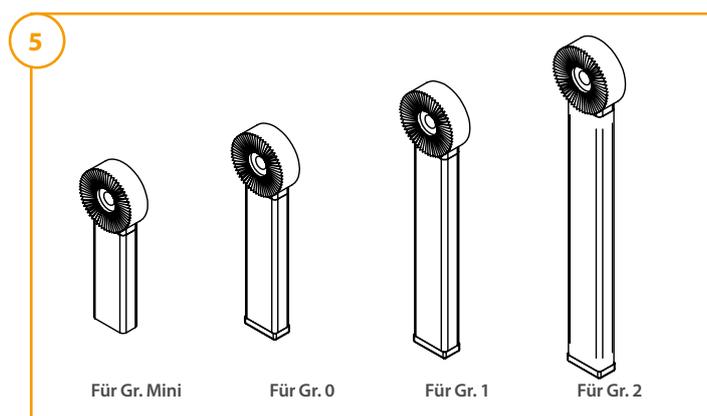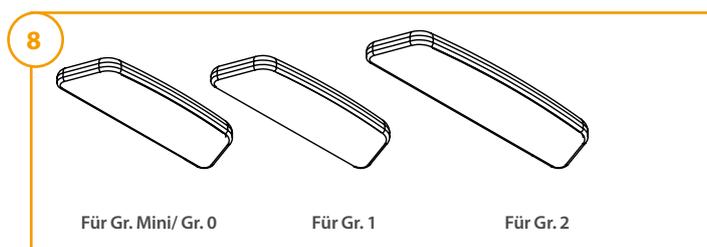

7.2 Armlehnen - NEUE VERSION

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	5	Stück	1018703	Mini	Höhenverstellung für Armlehne (inkl. Zahnsegment) Gr. Mini
	5	Stück	1014773	0	Höhenverstellung für Armlehne (inkl. Zahnsegment)
	5	Stück	1014767	1	Höhenverstellung für Armlehne (inkl. Zahnsegment)
	5	Stück	1015298	2	Höhenverstellung für Armlehne (inkl. Zahnsegment)
	6*	Stück	1025889	Mini-2	Tischaufnahme mit Armpolsterträger
	7**	Stück	1027052	Mini/0	Unterlegplatte
	7**	Stück	1027053	1	Unterlegplatte
	7**	Stück	1026952	2	Unterlegplatte
	8**	Stück	1024686	Mini/0	Armlehne Holz Gr. Mini
	8**	Stück	1024658	1	Armlehne Holz
	8**	Stück	1024669	2	Armlehne Holz
	9	Stück	1017837	Mini-2	Flügelschraube M8x20
	10	Stück	1025550	Mini-2	Flügelschraube M6x20

***Hinweis: Positionen 5, 6 und 7 sind nur in Kombination mit den neuen Armlehnen möglich!**

****Hinweis: Die Größe der Holzarmlehne und der Unterlegplatte wird entsprechend der Sitztiefe gewählt!**

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.


Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com**

8. Therapietisch

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

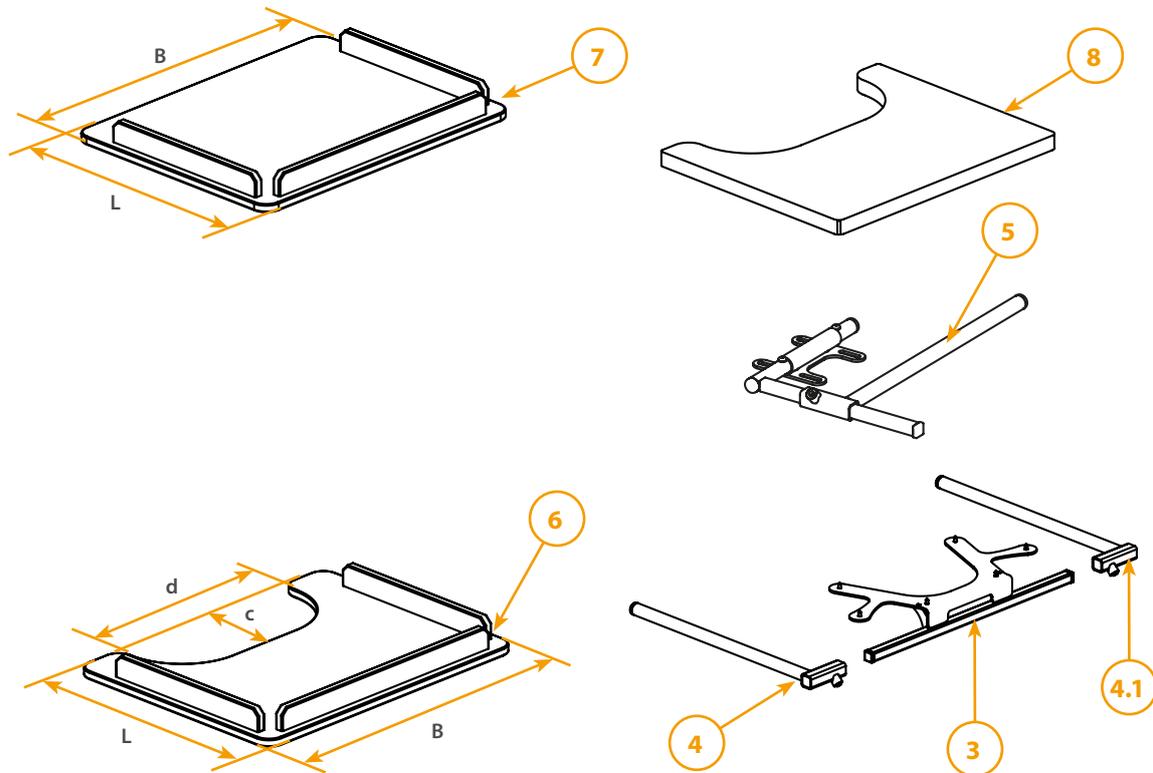

Tisch ohne Ausschnitt

Gr.	L (Tiefe)	B (Breite)
0	40 cm	45 cm
1	39 cm	50 cm
2	45 cm	60 cm

Tisch mit Ausschnitt

Gr.	L (Tiefe)	B (Breite)	c (Tiefe Ausschnitt)	d (Breite Ausschnitt)
0	40 cm	45 cm	14 cm	30 cm
1	39 cm	50 cm	13 cm	33 cm
2	45 cm	60 cm	15 cm	35 cm

8.1 Therapietisch - ALTE VERSION

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1016774-ET	Mini/0	Therapietisch mit Tischumrandung und Ausschnitt komplett - abklappbar (Pos. 5+6)
	1	Stück	1016775-ET	1	Therapietisch mit Tischumrandung und Ausschnitt komplett - abklappbar (Pos. 5+6)
	1	Stück	1016776-ET	2	Therapietisch mit Tischumrandung und Ausschnitt komplett - abklappbar (Pos. 5+6)
	1.1	Stück	1016774-S-ET	Mini/0	Therapietisch mit Tischumrandung ohne Ausschnitt komplett - abklappbar (Pos. 5+7)
	1.1	Stück	1016775-S-ET	1	Therapietisch mit Tischumrandung ohne Ausschnitt komplett - abklappbar (Pos. 5+7)
	1.1	Stück	1016776-S-ET	2	Therapietisch mit Tischumrandung ohne Ausschnitt komplett - abklappbar (Pos. 5+7)

Fortsetzung auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

8. Therapietisch

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

***Hinweis: Bei Nachrüstung der Version mit Schlitzzeisen, müssen neue Löcher gebohrt werden. Alternativ muss ein neuer Tisch mitbestellt werden.**

8.1 Therapietisch - ALTE VERSION

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	2	Stück	1016671-ET	Mini/0	Therapietisch mit Tischumrandung und Ausschnitt komplett - steckbar (Pos. 3+4+4.1+6)
	2	Stück	1016672-ET	1	Therapietisch mit Tischumrandung und Ausschnitt komplett - steckbar (Pos. 3+4+4.1+6)
	2	Stück	1016673-ET	2	Therapietisch mit Tischumrandung und Ausschnitt komplett - steckbar (Pos. 3+4+4.1+6)
	2.1	Stück	1016671-S-ET	Mini/0	Therapietisch mit Tischumrandung ohne Ausschnitt komplett - steckbar (Pos. 3+4+4.1+7)
	2.1	Stück	1016672-S-ET	1	Therapietisch mit Tischumrandung ohne Ausschnitt komplett - steckbar (Pos. 3+4+4.1+7)
	2.1	Stück	1016673-S-ET	2	Therapietisch mit Tischumrandung ohne Ausschnitt komplett - steckbar (Pos. 3+4+4.1+7)
	3	Stück	1015219	Mini-1	Anschraubflasche für Tischhalterung (steckbar)
	3	Stück	1015526	2	Anschraubflasche für Tischhalterung (steckbar)
	4	Stück	1015311	Mini-2	Halterung, rechts (steckbar)
	4.1	Stück	1015131	Mini-2	Halterung, links (steckbar)
	5	Stück	1025567-ET	Mini	Tischhalterung, mittig / abklappbar*
	5	Stück	1016783-ET	0-2	Tischhalterung, mittig / abklappbar*
	6	Stück	1025907	Mini/0	Therapietisch mit Tischumrandung und Ausschnitt, ohne Halterung
	6	Stück	1025911	1	Therapietisch mit Tischumrandung und Ausschnitt, ohne Halterung
	6	Stück	1025913	2	Therapietisch mit Tischumrandung und Ausschnitt, ohne Halterung
	7	Stück	1021235	Mini/0	Therapietisch mit Tischumrandung ohne Aussparung und Halterung
	7	Stück	1021243	1	Therapietisch mit Tischumrandung ohne Aussparung und Halterung
	7	Stück	1021245	2	Therapietisch mit Tischumrandung ohne Aussparung und Halterung
	8	Stück	1018009-schwarz-ET	Mini/0	Therapietischpolster (Bezugsfarbe: Kunstleder schwarz) Nur für Tisch mit Ausschnitt möglich
	8	Stück	1018010-schwarz-ET	1	Therapietischpolster (Bezugsfarbe: Kunstleder schwarz) Nur für Tisch mit Ausschnitt möglich
	8	Stück	1018011-schwarz-ET	2	Therapietischpolster (Bezugsfarbe: Kunstleder schwarz) Nur für Tisch mit Ausschnitt möglich
		Stück	1018006-schwarz	Mini/0	Bezug Therapietischpolster (Bezugsfarbe: Kunstleder schwarz)
		Stück	1018007-schwarz	1	Bezug Therapietischpolster (Bezugsfarbe: Kunstleder schwarz)
		Stück	1018008-schwarz	2	Bezug Therapietischpolster (Bezugsfarbe: Kunstleder schwarz)

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99**, info@rehatec.com, www.rehatec.com

8. Therapietisch

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse






Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

8.2 Therapietisch NEUE VERSION

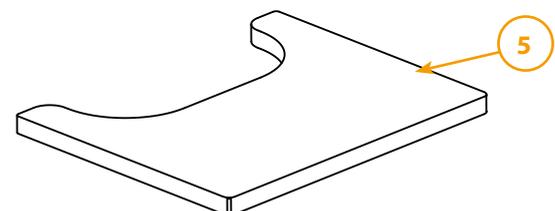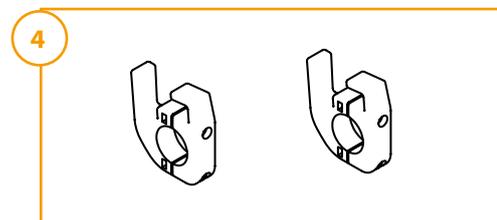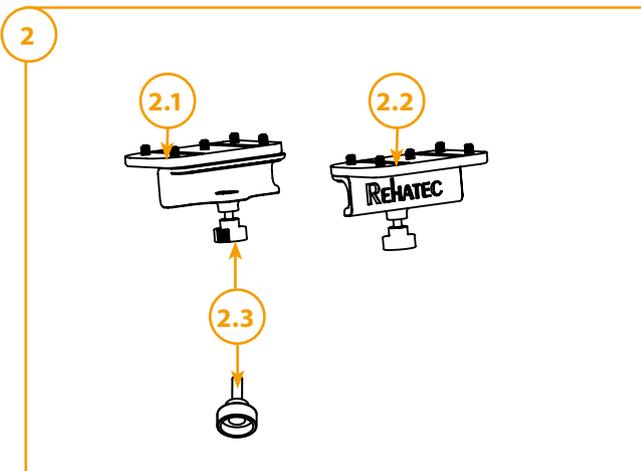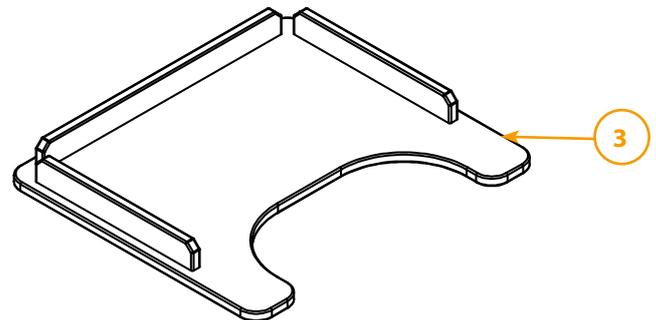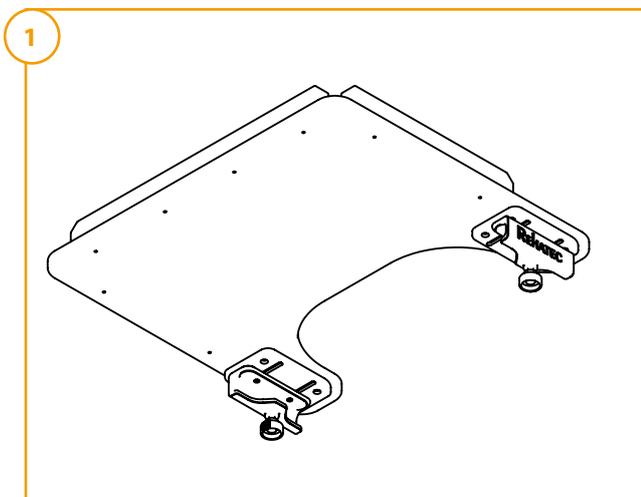

Zeichnung auf vorheriger Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

8. Therapietisch

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Tabelle auf nachfolgender Seite

Hinweis: Der Therapietisch ist nur mit neuer Armlehne möglich

8.2 Therapietisch - NEUE VERSION					
Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1026016-ET	Mini / 0	Therapietisch mit Tischumrandung und Ausschnitt komplett mit Tischhalterung, aufschiebbar
	1	Stück	1026019-ET	1	Therapietisch mit Tischumrandung und Ausschnitt komplett mit Tischhalterung, aufschiebbar
	1	Stück	1026020-ET	2	Therapietisch mit Tischumrandung und Ausschnitt komplett mit Tischhalterung, aufschiebbar
	2	Stück	1026763	Mini - 2	Tischhalterung komplett
	2.1.	Stück	1026006	Mini - 2	Tischhalterung rechts
	2.2.	Stück	1026762	Mini - 2	Tischhalterung links
	2.3.	Stück	1027081	Mini - 2	Rändelhohlschraube
	3	Stück	1025907	Mini / 0	Therapietisch mit Tischumrandung und Ausschnitt, ohne Halterung
	3	Stück	1025911	1	Therapietisch mit Tischumrandung und Ausschnitt, ohne Halterung
	3	Stück	1025913	2	Therapietisch mit Tischumrandung und Ausschnitt, ohne Halterung
	4	Stück	1027337-ET	Mini - 2	Tischhalterung am Rahmen zur Ablage des Therapietisches
	5	Stück	1018009-schwarz-ET	Mini / 0	Therapietischpolster (Bezugsfarbe: Kunstleder schwarz)
	5	Stück	1018010-schwarz-ET	1	Therapietischpolster (Bezugsfarbe: Kunstleder schwarz)
		Stück	1018011-schwarz-ET	2	Therapietischpolster (Bezugsfarbe: Kunstleder schwarz)
		Stück	1018006-schwarz	Mini / 0	Bezug Therapietischpolster (Bezugsfarbe: Kunstleder schwarz) - Nur für Tisch mit Ausschnitt möglich -
		Stück	1018007-schwarz	1	Bezug Therapietischpolster (Bezugsfarbe: Kunstleder schwarz) - Nur für Tisch mit Ausschnitt möglich -
		Stück	1018008-schwarz	2	Bezug Therapietischpolster (Bezugsfarbe: Kunstleder schwarz) - Nur für Tisch mit Ausschnitt möglich -

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9.1 Fußbank

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

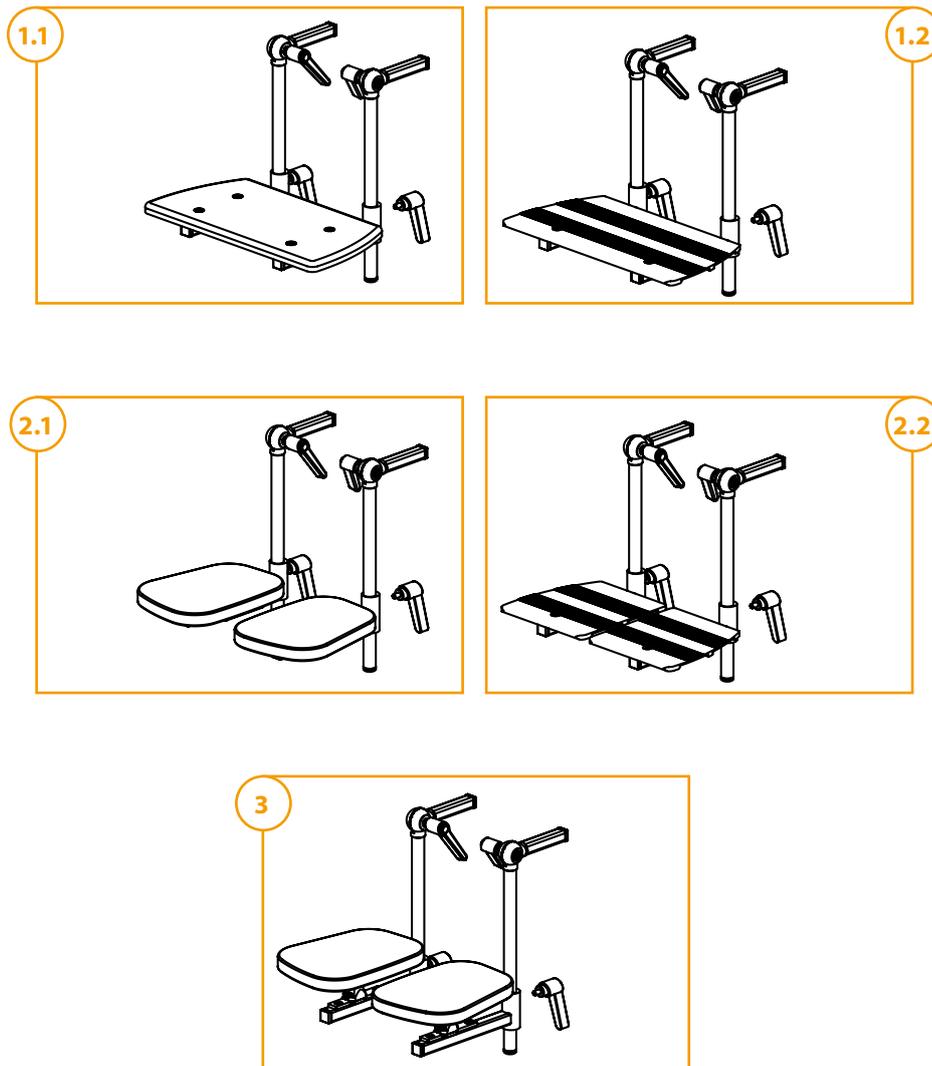


Tabelle auf nachfolgender Seite

9.1 Fußbank

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

9.1 Fußbank					
Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1.1	Stück	1010308-ET	Mini – 1	Fußbank durchgehend, Holz komplett inkl. Kniewinkel verstellbar und Fußwinkel und Klemmhebel
	1.1	Stück	1009600-ET	2	Fußbank durchgehend, Holz komplett inkl. Kniewinkel verstellbar und Fußwinkel und Klemmhebel
	1.2	Stück	1010308-ET	Mini – 1	Fußbank durchgehend, Metall komplett inkl. Kniewinkel verstellbar und Fußwinkel und Klemmhebel
	1.2	Stück	1009600-ET	2	Fußbank durchgehend, Metall komplett inkl. Kniewinkel verstellbar und Fußwinkel und Klemmhebel
	2.1	Paar	1010309-ET	Mini – 1	Fußbank geteilt, Holz komplett inkl. Kniewinkel verstellbar und Fußwinkel und Klemmhebel
	2.1	Paar	1010700-ET	2	Fußbank geteilt, Holz komplett inkl. Kniewinkel verstellbar und Fußwinkel und Klemmhebel
	2.2	Paar	1010309-ET	Mini – 1	Fußbank geteilt, Metall komplett inkl. Kniewinkel verstellbar und Fußwinkel und Klemmhebel
	2.2	Paar	1010700-ET	2	Fußbank geteilt, Metall komplett inkl. Kniewinkel verstellbar und Fußwinkel und Klemmhebel
	3	Paar	1010310-ET	Mini – 1	Fußbank geteilt mit Kugelgelenken (dreidimensional verstellbar), Holz komplett inkl. Kniewinkel verstellbar und Fußwinkel und Klemmhebel
	3	Paar	1010703-ET	2	Fußbank geteilt mit Kugelgelenken (dreidimensional verstellbar), Holz komplett inkl. Kniewinkel verstellbar und Fußwinkel und Klemmhebel

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99**, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9.2 Fußbrett

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

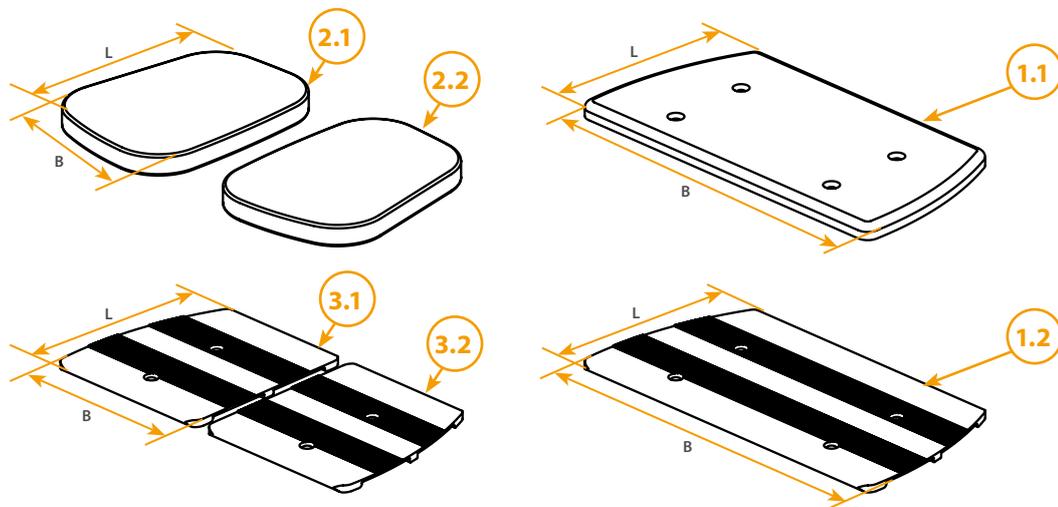

Fußbrett durchgehend, Metall

Gr.	L (Tiefe)	B (Breite)
1	16 cm	31 cm
2	24 cm	39 cm

Fußbrett durchgehend, Holz

Gr.	L (Tiefe)	B (Breite)
1	16 cm	34 cm
2	24 cm	39 cm

Fußbrett geteilt, Holz

Gr.	L (Tiefe)	B (Breite)
1	21 cm	15 cm
2	25 cm	17 cm

Fußbrett geteilt, Metall

Gr.	L (Tiefe)	B (Breite)
1	16 cm	18 cm
2	24 cm	18 cm

9.2 Fußbrett

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1.1	Stück	1009616	Mini – 1	Fußbrett durchgehend, Holz
	1.1	Stück	1010701	2	Fußbrett durchgehend, Holz
	1.2	Stück	1010507	Mini – 1	Fußbrett durchgehend, Metall
	1.2	Stück	1010988	2	Fußbrett durchgehend, Metall
	2.1	Stück	1009556	Mini – 1	Fußbrett geteilt Holz, rechts
	2.1	Stück	1009603	2	Fußbrett geteilt Holz, rechts
	2.2	Stück	1009555	Mini – 1	Fußbrett geteilt Holz, links
	2.2	Stück	1009602	2	Fußbrett geteilt Holz, links
	3.1	Stück	1010503	Mini – 1	Fußbank geteilt Metall, rechts
	3.1	Stück	1015770	2	Fußbank geteilt Metall, rechts
	3.2	Stück	1010504	Mini – 1	Fußbrett geteilt Metall, links
	3.2	Stück	1015771	2	Fußbrett geteilt Metall, links

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9.3 Fußbankpolster

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

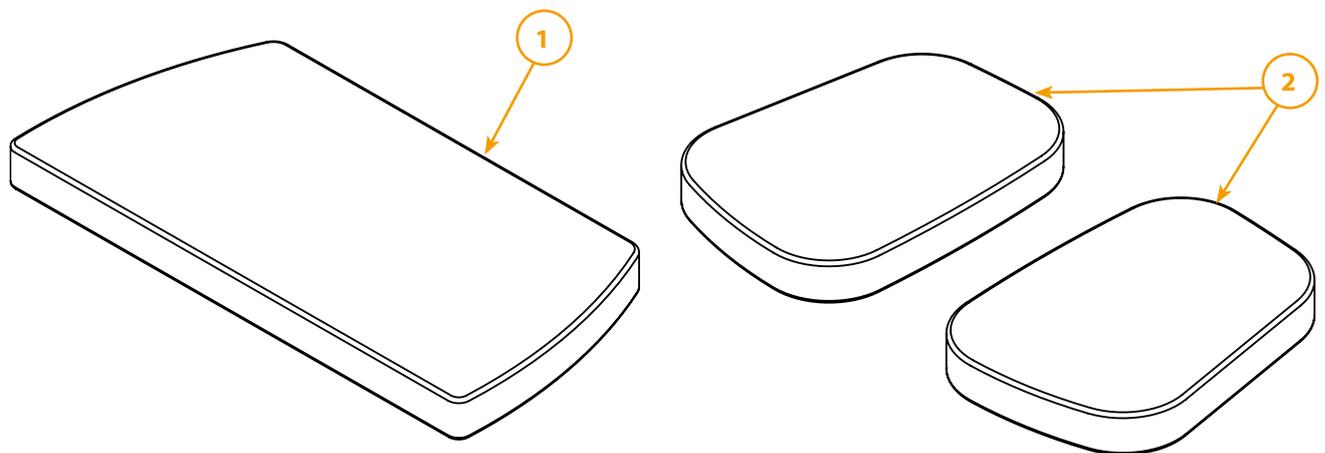

9.3 Fußbankpolster

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1017849-ET	Mini - 1	Fußbankpolster, durchgehend Gr. 1 - Kunstleder schwarz
	1	Stück	1017855-ET	2	Fußbankpolster, durchgehend Gr. 1 - Kunstleder schwarz
		Stück	1017844-schwarz	Mini - 1	Bezug Fußbankpolster durchgehend (Kunstleder schwarz)
		Stück	1017850-schwarz	2	Bezug Fußbankpolster durchgehend (Kunstleder schwarz)
	2	Paar	1017920-ET	Mini - 1	Fußbankpolster, geteilt - Kunstleder schwarz
	2	Paar	1017921-ET	2	Fußbankpolster, geteilt - Kunstleder schwarz
		Paar	1017917-schwarz	Mini - 1	Bezug Fußbankpolster geteilt (Kunstleder schwarz) - rechte Seite
		Paar	1017918-schwarz	2	Bezug Fußbankpolster geteilt (Kunstleder schwarz) - rechte Seite
		Paar	1017914-schwarz	Mini - 1	Bezug Fußbankpolster geteilt (Kunstleder schwarz) - linke Seite
		Paar	1017915-schwarz	2	Bezug Fußbankpolster geteilt (Kunstleder schwarz) - linke Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99**, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9.4 Kniewinkel

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

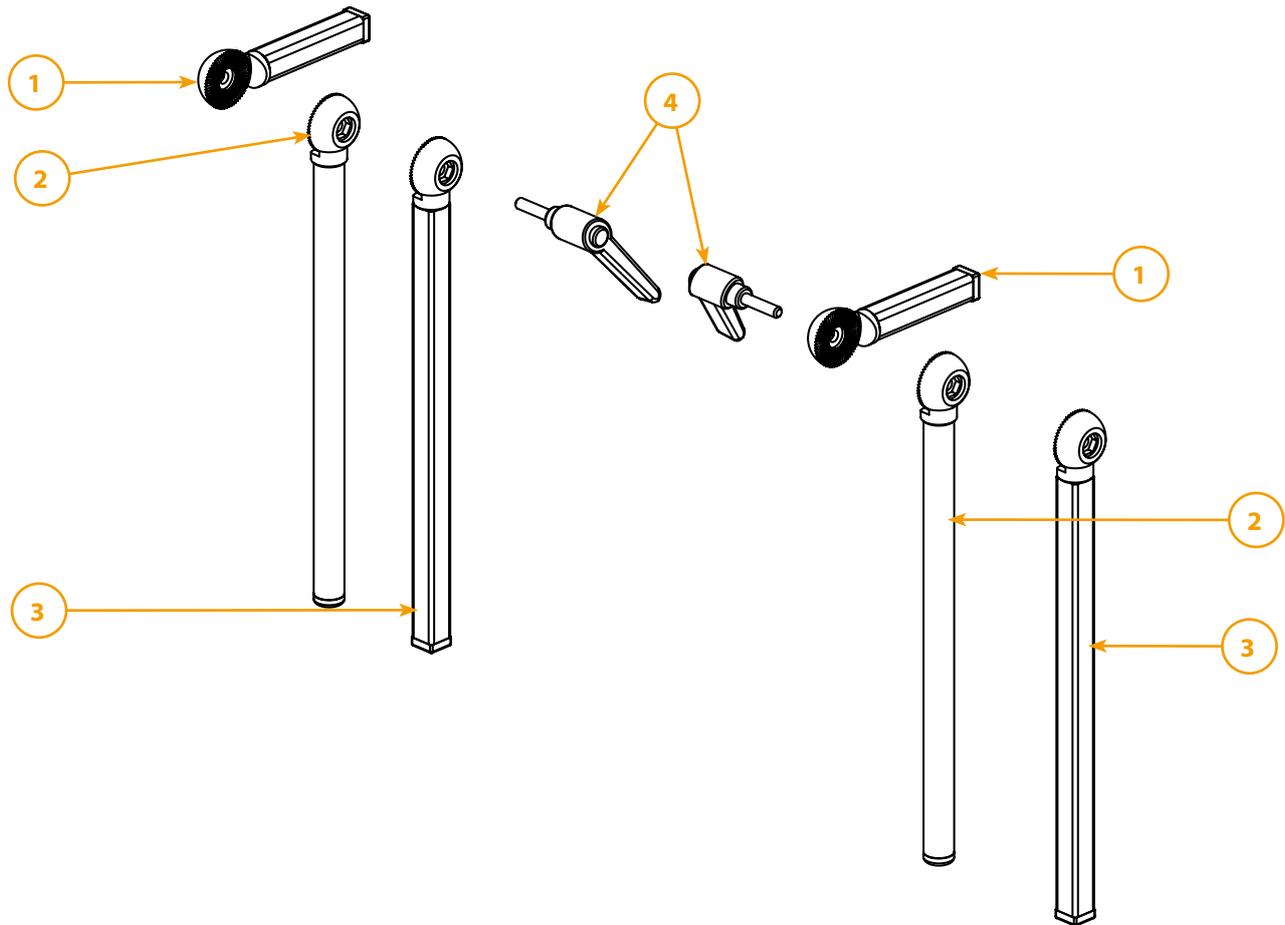

9.4 Kniewinkel

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1006912	Mini - 1	Kniewinkel oben (70 mm), Vierkantrohr für Nele Gr. Mini - 1 mit Standardstuhltiefe
	1	Stück	1014600	1/2	Kniewinkel oben (150 mm), Vierkantrohr Gr. 1 mit verlängerter Stuhltiefe und Gr. 2 mit Standard- und verlängerter Stuhltiefe
	2	Stück	1025372	Mini	Kniewinkel unten (200 mm), Rundrohr für Nele Gr. Mini
	2	Stück	1006906	0/1	Kniewinkel unten (250 mm), Rundrohr für Nele Gr. 0+1
	2	Stück	1009605	2	Kniewinkel unten (350 mm), Rundrohr für Nele Gr. 2
	3	Stück	1025559	Mini	Kniewinkel unten (200 mm), Vierkantrohr für Nele Gr. Mini
	3	Stück	1016947	0/1	Kniewinkel unten (250 mm), Vierkantrohr für Nele Gr. 0+1
	3	Stück	1017043	2	Kniewinkel unten (350 mm), Vierkantrohr für Nele Gr. 2
	4	Stück	1007656	Mini - 2	Klemmhebel M6x25

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.


Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9.5 Wadenpolster

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

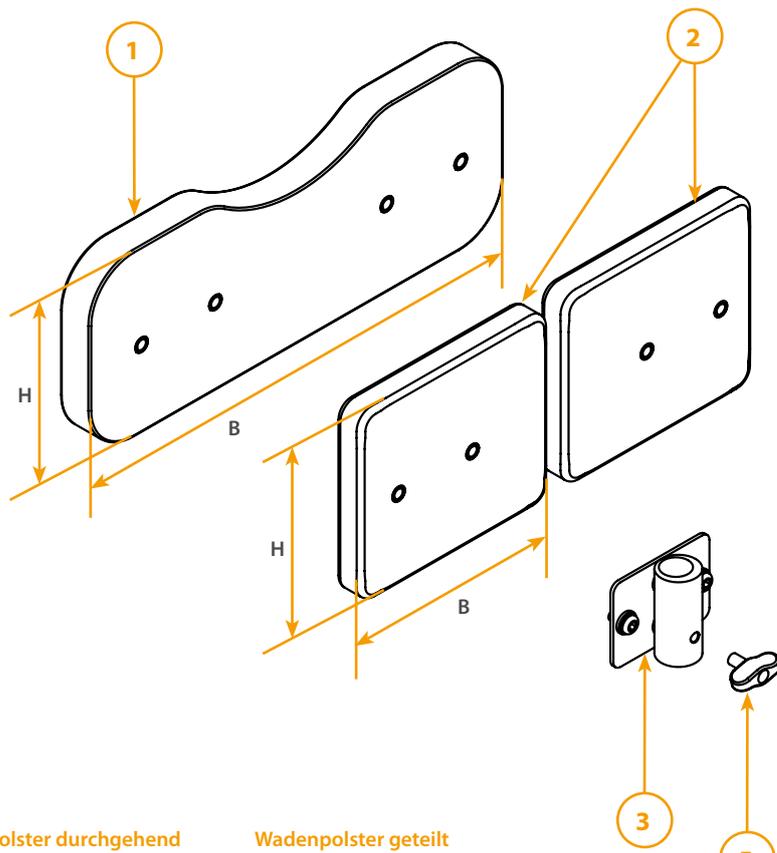

Bitte beachten Sie die minimal erforderliche Unterschenkel-länge von 18 cm in Verbindung mit einer Fersenkante!

Wadenpolster durchgehend

Für Gr.	Unterschenkel-länge	H	B
Mini-1	18-30 cm	11 cm	30 cm
2	21-41 cm	13 cm	33 cm

Wadenpolster geteilt

Für Gr.	Unterschenkel-länge	H	B
Mini-1	18-30 cm	11 cm	15 cm
2	24-41 cm	16 cm	18 cm

Tabelle auf nachfolgender Seite

9.5 Wadenpolster

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

9.5 Wadenpolster					
Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1010280-ET	Mini-1	Wadenpolster durchgehend, komplett (in Bezugsfarbe)*
		Stück	1019151	Mini-1	Bezug Wadenpolster durchgehend (in Bezugsfarbe)*
	1	Stück	1010705-ET	2	Wadenpolster durchgehend, komplett (in Bezugsfarbe)*
		Stück	1019152	2	Bezug Wadenpolster durchgehend (in Bezugsfarbe)*
	2	Paar	1010837-ET	Mini-1	Wadenpolster geteilt, komplett (in Kunstleder schwarz)
		Stück	1014209-ET	Mini-1	Bezug Wadenpolster geteilt (in Kunstleder schwarz)
	2	Paar	1010314-ET	2	Wadenpolster geteilt, komplett (in Kunstleder schwarz)
		Stück	1014206-ET	2	Bezug Wadenpolster geteilt (in Kunstleder schwarz)
	3	Stück	1011611	Mini-2	Unihalter für Kniewinkel fest, Rundrohr 16 mm inkl. Miniwing M6x10
	4	Stück	1009439	Mini-2	Unihalter für Kniewinkel fest, Vierkantrohr 15x15 mm inkl. Miniwing M8x15
	5	Stück	1007557	Mini-2	Miniwing M6x10
	6	Stück	1005054	Mini-2	Miniwing M8x15

* Geben Sie bitte die Stofffarbe auf Seite 2 an!

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99**, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9.6 Fußwinkel

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

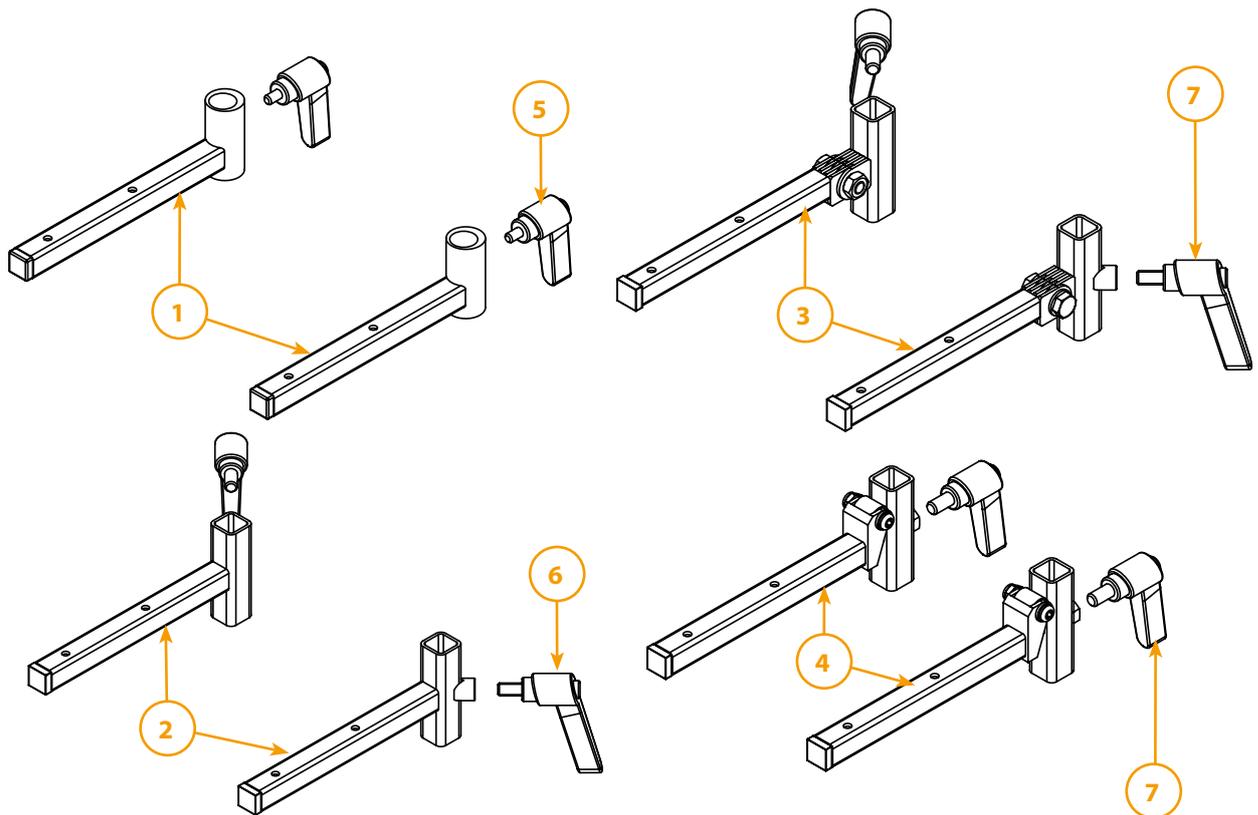

9.6 Fußwinkel

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Paar	1016945	Mini – 2	Fußwinkel fest, Rundrohr 16 mm inkl. Schraubenmaterial
	2	Paar	1017017	Mini – 2	Fußwinkel fest, Vierkantrrohr inkl. Schraubenmaterial
	3	Paar	1017018-ET-KIT	Mini – 2	Fußwinkel winkelverstellbar KIT inkl. Kniewinkel Unterteile Vierkantrrohr für die Umrüstung von Fußwinkel fest (Rundrohr) auf Winkelverstellung (4-Kant)
	3.1.	Paar	1017018-ET	Mini – 2	Fußwinkel winkelverstellbar inkl. Schraubenmaterial für vorhandene Fußwinkelverstellung/Hochklappmechanik (4-Kant)
	4	Paar	1021152-ET-KIT	Mini – 2	Fußwinkel hochklappbar KIT inkl. Kniewinkel Unterteile Vierkantrrohr für die Umrüstung von Fußwinkel fest (Rundrohr) auf Winkelverstellung (4-Kant)
	4.1.	Paar	1021152-ET	Mini – 2	Fußwinkel hochklappbar inkl. Schraubenmaterial für vorhandene Fußwinkelverstellung/Hochklappmechanik (4-Kant)
	5	Stück	1005032	Mini – 2	Klemmhebel M6x10 (Kniewinkel fest, Rundrohr)
	6	Stück	1014668	Mini – 2	Klemmhebel M8x15 (für feste Fußwinkel, Vierkantrrohr)
	7	Stück	1014668	Mini – 2	Klemmhebel M8x15 (für verstellbare und hochklappbare Fußwinkel)

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9.7 Fersenkante

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

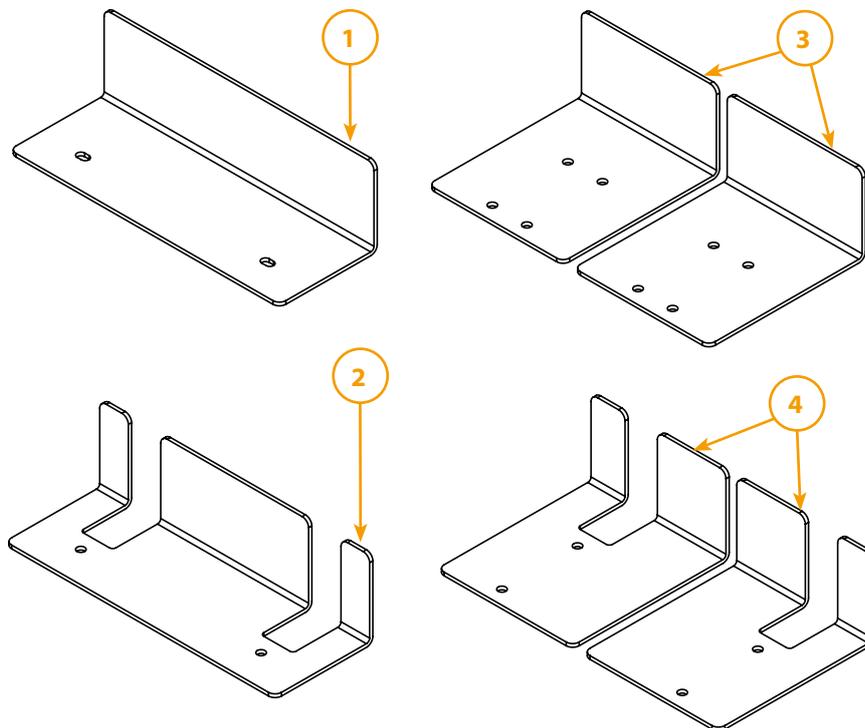

9.7 Fersenkante

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1004929	Mini - 1	Fersenkante durchgehend
	1	Stück	1005967	2	Fersenkante durchgehend
	2	Stück	1004928	Mini - 1	Fersenkante durchgehend, Fußwinkelverstellung/Hochklappmechanik
	2	Stück	1005968	2	Fersenkante durchgehend, Fußwinkelverstellung/Hochklappmechanik
	3	Stück	1014134	Mini - 1	Fersenkante geteilt
	3	Stück	1014135	2	Fersenkante geteilt
	4	Stück	1014133	Mini - 2	Fersenkante geteilt, Fußwinkelverstellung/ Hochklappmechanik

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9.8 Fußschalen

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

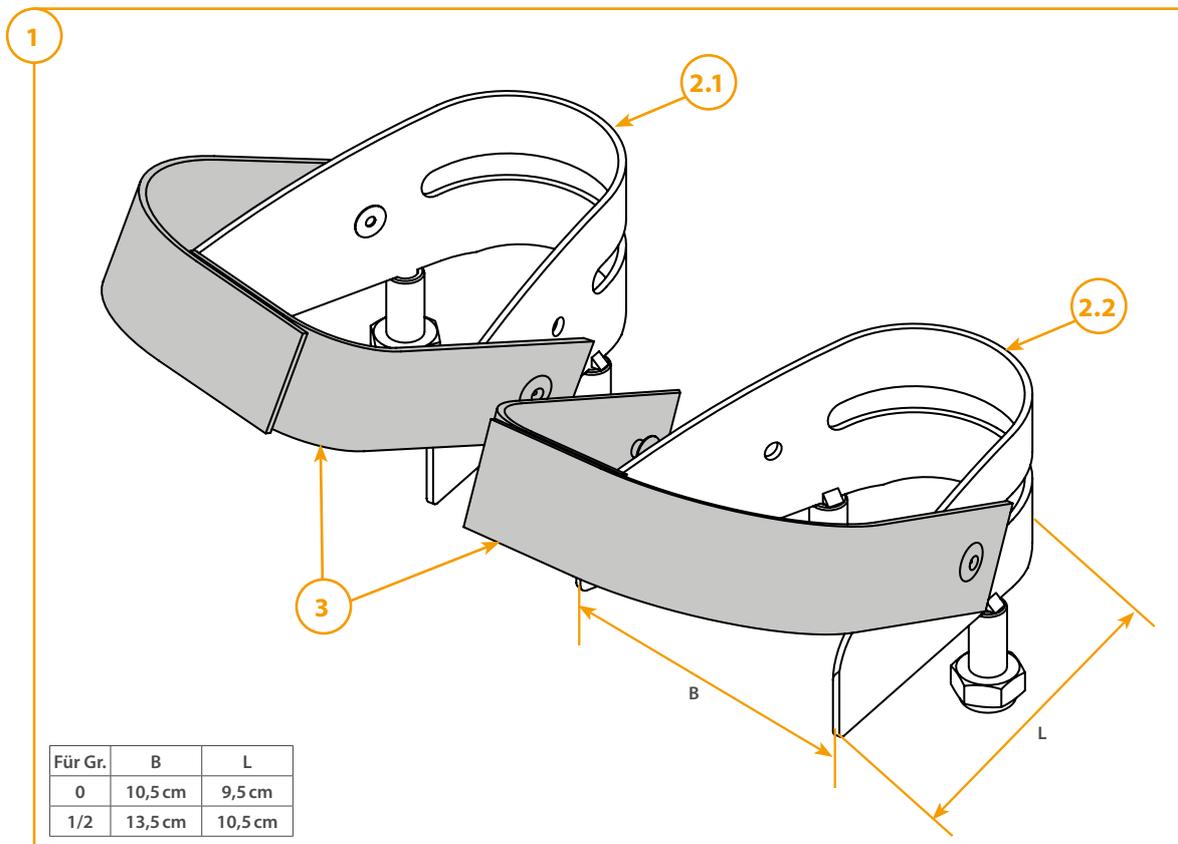

9.8 Fußschalen

Menge	Pos.	Einheit	Code	für Gr.	Bezeichnung
	1	Paar	1014598	Mini/0	Fußschalen verschraubbar inkl. Fußriemen
	1	Paar	1014599	1/2	Fußschalen verschraubbar inkl. Fußriemen
	2.1	Stück	1004397	Mini/0	Fußschale verschraubbar, rechts
	2.1	Stück	1004399	1/2	Fußschale verschraubbar, rechts
	2.2	Stück	1004396	Mini/0	Fußschale verschraubbar, links
	2.2	Stück	1004398	1/2	Fußschale verschraubbar, links
	3	Stück	1014394-ET	Mini/0	Fußriemen
	3	Stück	1014395-ET	1/2	Fußriemen

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

10.1 Begurtungssystem

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

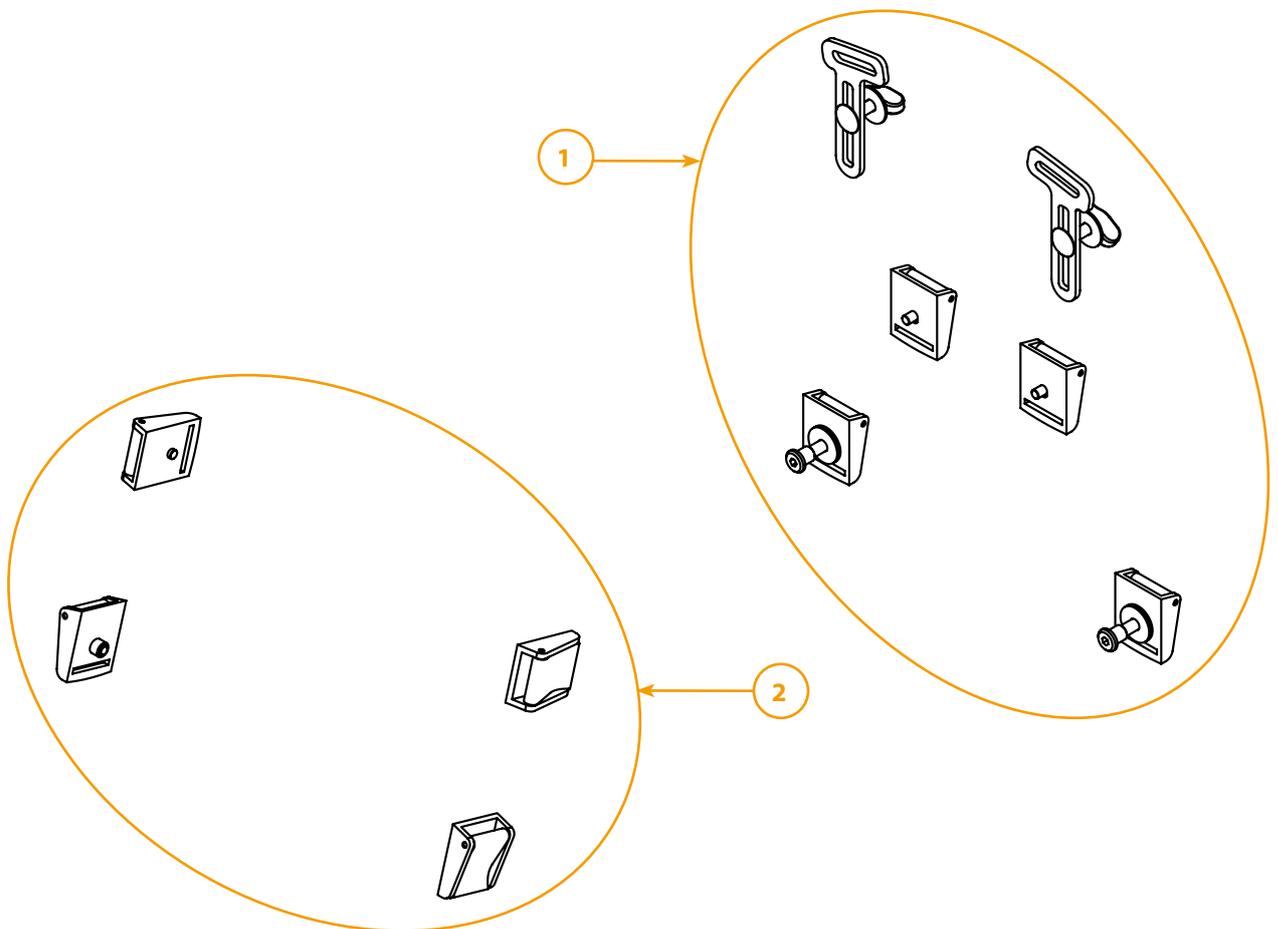

10.1 Begurtungssystem

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Satz	1021086-ET	Mini – 2	Begurtungsmontagesatz für den Rückenbereich
	2	Satz	1021107-ET	Mini – 2	Begurtungsmontagesatz für den Sitzbereich

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

10.2 Gurte für Brust- & Schulterbereich REHATEC®

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller


Datum

Seriennummer


Kommission

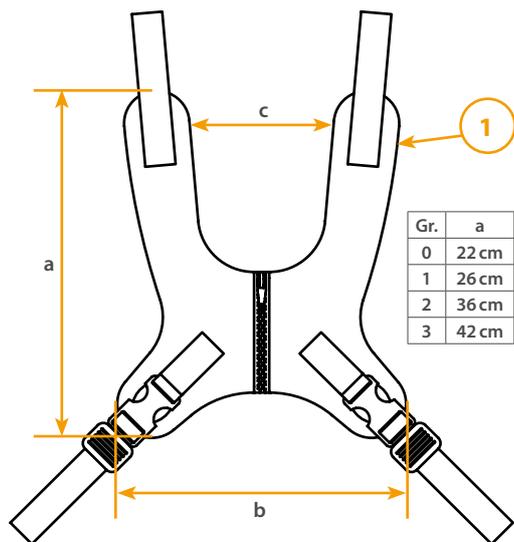


Gr.	a	b	c
0	22 cm	18 cm	7 cm
1	26 cm	21 cm	9 cm
2	36 cm	25 cm	11 cm
3	42 cm	29 cm	17 cm

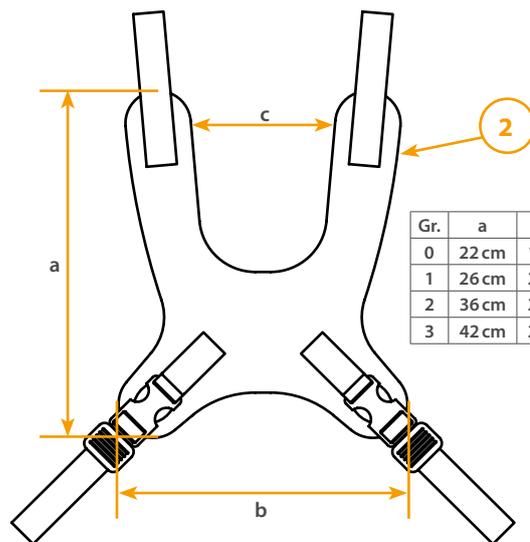

Gr.	a	b	c
0	22 cm	18 cm	7 cm
1	26 cm	21 cm	9 cm
2	36 cm	25 cm	11 cm
3	42 cm	29 cm	17 cm

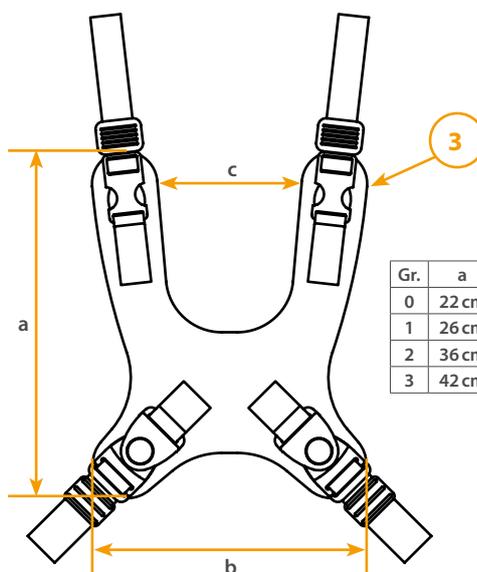

Gr.	a	b	c
0	22 cm	18 cm	7 cm
1	26 cm	21 cm	9 cm
2	36 cm	25 cm	11 cm
3	42 cm	29 cm	17 cm

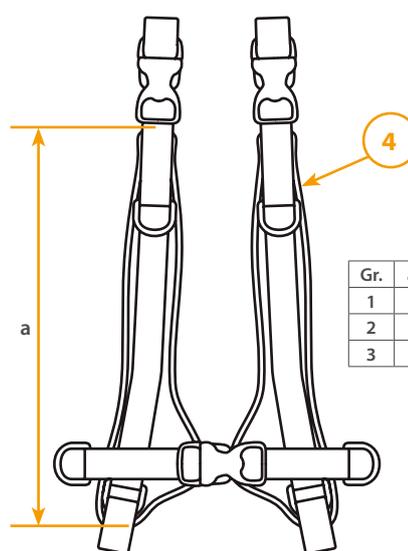

Gr.	a (Polsterlänge)
1	21 cm
2	34 cm
3	37 cm

Montage ist nur mit Begurtungs-Montagesatz (Rücken) möglich!

Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

10.2 Gurte für Brust- & Schulterbereich REHATEC®

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

10.2 Gurte für Brust- & Schulterbereich					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1013494-ET	Mini – 2	Leibchen Gr. 0, feste Gurte im Schulterbereich, Steckschnallen im Beckenbereich (Kunstleder Schwarz)
	1	Stück	1013493-ET	Mini – 2	Leibchen Gr. 0, feste Gurte im Schulterbereich, Steckschnallen im Beckenbereich (Neopren)
	1	Stück	1013490-ET	Mini – 2	Leibchen Gr. 1, feste Gurte im Schulterbereich, Steckschnallen im Beckenbereich (Kunstleder Schwarz)
	1	Stück	1013488-ET	Mini – 2	Leibchen Gr. 1, feste Gurte im Schulterbereich, Steckschnallen im Beckenbereich (Neopren)
	1	Stück	1012990-ET	Mini – 2	Leibchen Gr. 2, feste Gurte im Schulterbereich, Steckschnallen im Beckenbereich (Kunstleder Schwarz)
	1	Stück	1008883-ET	Mini – 2	Leibchen Gr. 2, feste Gurte im Schulterbereich, Steckschnallen im Beckenbereich (Neopren)
	1	Stück	1013486-ET	Mini – 2	Leibchen Gr. 3, feste Gurte im Schulterbereich, Steckschnallen im Beckenbereich (Kunstleder Schwarz)
	1	Stück	1004885-ET	Mini – 2	Leibchen Gr. 3, feste Gurte im Schulterbereich, Steckschnallen im Beckenbereich (Neopren)
	2	Stück	1013492-ET	Mini – 2	Brustschultergurt Gr. 0, feste Gurte im Schulterbereich, Steckschnallen im Beckenbereich (Kunstleder Schwarz)
	2	Stück	1013491-ET	Mini – 2	Brustschultergurt Gr. 0, feste Gurte im Schulterbereich, Steckschnallen im Beckenbereich (Neopren)
	2	Stück	1010372-ET	Mini – 2	Brustschultergurt Gr. 1, feste Gurte im Schulterbereich, Steckschnallen im Beckenbereich (Kunstleder Schwarz)
	2	Stück	1010373-ET	Mini – 2	Brustschultergurt Gr. 1, feste Gurte im Schulterbereich, Steckschnallen im Beckenbereich (Neopren)
	2	Stück	1010374-ET	Mini – 2	Brustschultergurt Gr. 2, feste Gurte im Schulterbereich, Steckschnallen im Beckenbereich (Kunstleder Schwarz)
	2	Stück	1010375-ET	Mini – 2	Brustschultergurt Gr. 2, feste Gurte im Schulterbereich, Steckschnallen im Beckenbereich (Neopren)
	2	Stück	1012989-ET	Mini – 2	Brustschultergurt Gr. 3, feste Gurte im Schulterbereich, Steckschnallen im Beckenbereich (Kunstleder Schwarz)
	2	Stück	1011918-ET	Mini – 2	Brustschultergurt Gr. 3, feste Gurte im Schulterbereich, Steckschnallen im Beckenbereich (Neopren)
	3	Stück	1021871-ET	Mini – 2	Brustschultergurt Gr. 0, Steckschnallen im Schulterbereich, Drehverschluß im Beckenbereich (Kunstleder Schwarz)
	3	Stück	1021872-ET	Mini – 2	Brustschultergurt Gr. 0, Steckschnallen im Schulterbereich, Drehverschluß im Beckenbereich (Neopren)
	3	Stück	1021874-ET	Mini – 2	Brustschultergurt Gr. 1 Steckschnallen im Schulterbereich, Drehverschluß im Beckenbereich (Kunstleder Schwarz)
	3	Stück	1021875-ET	Mini – 2	Brustschultergurt Gr. 1, Steckschnallen im Schulterbereich, Drehverschluß im Beckenbereich (Neopren)
	3	Stück	1021877-ET	Mini – 2	Brustschultergurt Gr. 2, Steckschnallen im Schulterbereich, Drehverschluß im Beckenbereich (Kunstleder Schwarz)
	3	Stück	1021878-ET	Mini – 2	Brustschultergurt Gr. 2, Steckschnallen im Schulterbereich, Drehverschluß im Beckenbereich (Neopren)
	3	Stück	1021881-ET	Mini – 2	Brustschultergurt Gr. 3, Steckschnallen im Schulterbereich, Drehverschluß im Beckenbereich (Kunstleder Schwarz)
	3	Stück	1021882-ET	Mini – 2	Brustschultergurt Gr. 3, Steckschnallen im Schulterbereich, Drehverschluß im Beckenbereich (Neopren)
		Stück	1010361-ET	Mini – 2	4-Punkt-Oberkörpergurt Gr. 1
		Stück	1010362-ET	Mini – 2	4-Punkt-Oberkörpergurt Gr. 2
		Stück	1010363-ET	Mini – 2	4-Punkt-Oberkörpergurt Gr. 3

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

10.3 Gurte für Beckenbereich

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

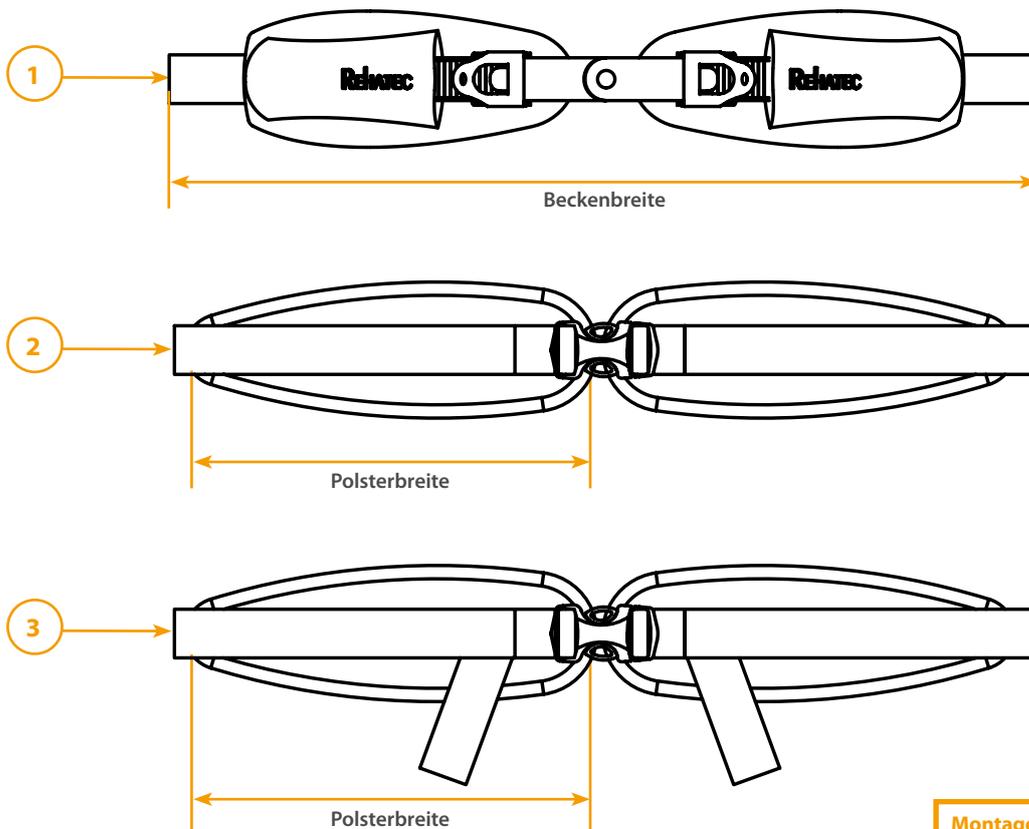

Montage ist nur mit Be-
gurtungs-Montagesatz
(Sitz) möglich!

10.3 Gurte für Beckenbereich					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	E910939-3D	Mini – 2	Pelvi.Loc.-Beckengurt Gr. XXXS, 3D, Beckenbreite 8-16 cm
	1	Stück	E910935-3D	Mini – 2	Pelvi.Loc.-Beckengurt Gr. XXS, 3D, Beckenbreite 12-20 cm
	1	Stück	E910752-3D	Mini – 2	Pelvi.Loc.-Beckengurt Gr. XS, 3D, Beckenbreite 16-24 cm
	1	Stück	E910249-3D	Mini – 2	Pelvi.Loc.-Beckengurt Gr. S, 3D, Beckenbreite 20-32 cm
	1	Stück	E910819-3D	Mini – 2	Pelvi.Loc.-Beckengurt Gr. M, 3D, Beckenbreite 30-40 cm
	2	Stück	1010364-ET	Mini – 2	2-Punkt-Beckengurt Gr. 1, Polsterbreite 10,5 cm
	2	Stück	1010365-ET	Mini – 2	2-Punkt-Beckengurt Gr. 2, Polsterbreite 13 cm
	3	Stück	1010366-ET	Mini – 2	4-Punkt-Beckengurt Gr. 1, Polsterbreite 10,5 cm
	3	Stück	1010367-ET	Mini – 2	4-Punkt-Beckengurt Gr. 2, Polsterbreite 13 cm

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

10.4 Sitzhose

Ersatzteilliste Therapiestuhl Nele, Nele Mini, Nele Classic und Nele Classic Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

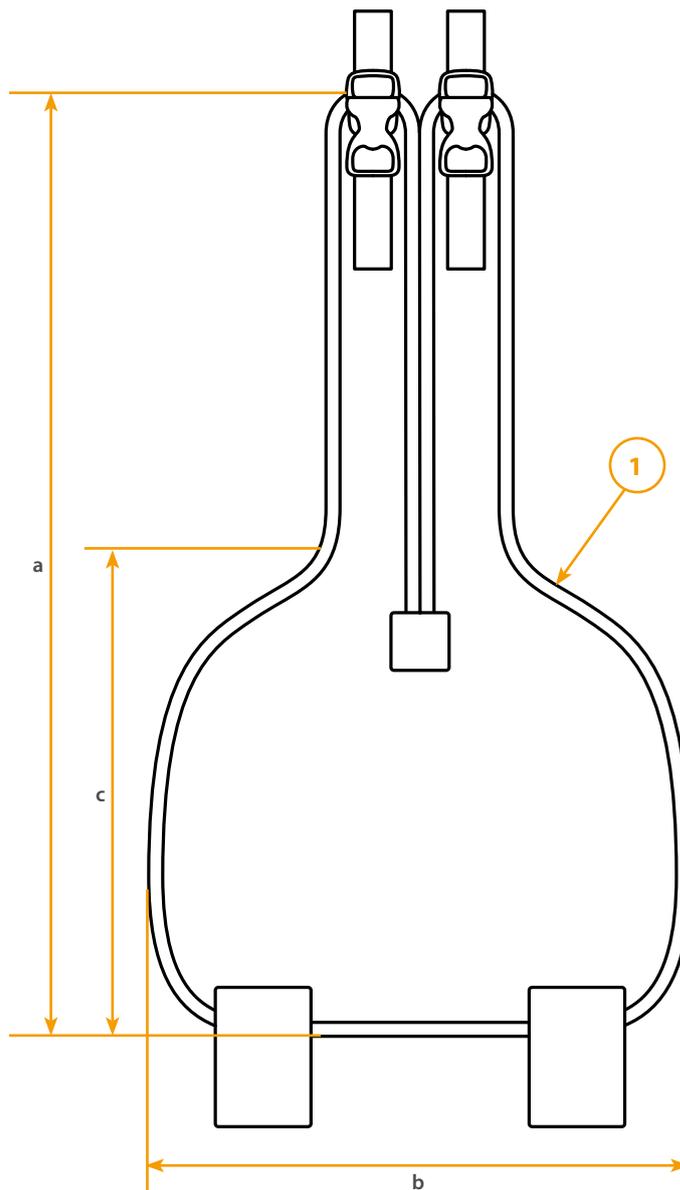

Gr.	a	b	c
1	37 cm	21 cm	15 cm
2	44 cm	26 cm	21 cm
3	52 cm	29 cm	26 cm

Montage ist nur mit Be-
gurtungs-Montagesatz
(Sitz) möglich!

10.4 Sitzhose					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1010369-ET	Mini-2	Sitzhose, Gr. 1
	1	Stück	1010370-ET	Mini-2	Sitzhose, Gr. 2
	1	Stück	1010371-ET	Mini-2	Sitzhose, Gr. 3

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

