


Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe Mini

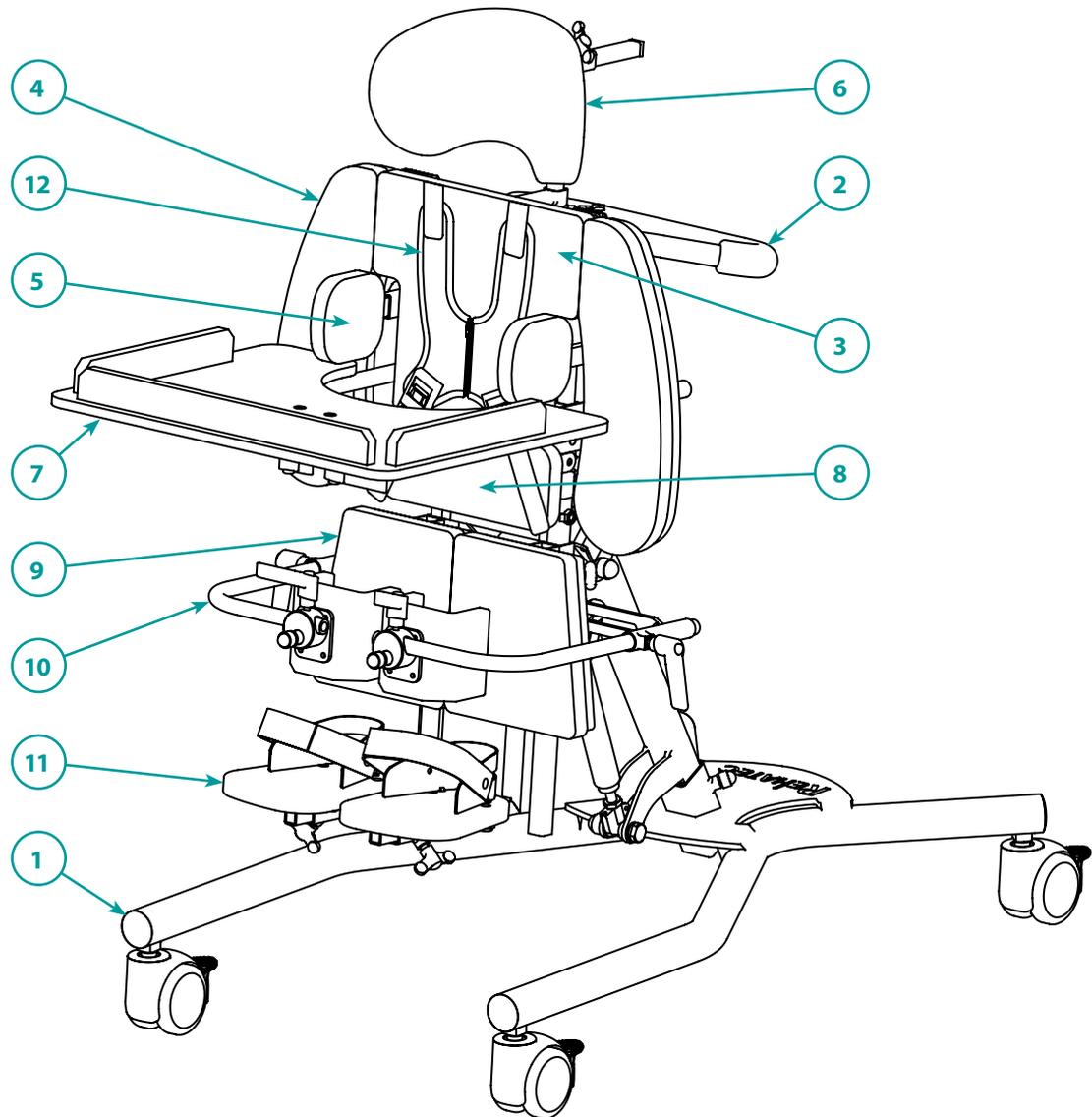

Baugruppen			
Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
1	Untergestell	7	Therapietisch
2	Schiebebogen	8	Beckenplatte
3	Rücken	9	Beinauflagen
4	Armauflagen	10	Kniepelotten
5	Seitenführungspelotten	11	Fußplatten
6	Kopfstütze	12	Begurtung

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Stoff- und Gestellfarben	3
1. Untergestell	4
2. Schiebebogen	9
3. Rücken	10
4. Armauflagen	11
5. Seitenführungspelotten	12
6. Kopfstütze	14
7. Therapietisch	15
8. Beckenplatte	16
9. Beinauflagen	17
10. Kniepelotten	18
11. Fußplatten	19
12. Begurtung	20
Notizen	21

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

**Bitte geben Sie bei Bestellungen von Rahmenteilen
immer die Gestellfarbe und bei Bezügen die Stofffarbe an!**

Gestellfarben

 Reinweiß	(RAL 9010)	 Bordeauxviolett	(RAL 4004)	 Leuchtgrün	(RAL 6038)
 Narzissengelb	(RAL 1007)	 Ultramarinblau	(RAL 5002)	 Anthrazitgrau matt	(RAL 7016m)
 Leuchtgelb	(RAL 1026)	 Verkehrsblau	(RAL 5017)	 Silber metallic*	
 Reinorange	(RAL 2004)	 Perlnachtblau matt	(RAL 5026)	 Anthrazit metallic*	
 Leuchtorange	(RAL 2005)	 Wasserblau	(RAL 5021)	 Graphitschwarz matt	(RAL 9011m)
 Rubinrot	(RAL 3003)	 Lichtgrün	(RAL 6027)	 Tiefschwarz glanz	(RAL 9005g)
 Perlrubinrot matt	(RAL 3032)	 Gelbgrün	(RAL 6018)		
 Erikaviolett	(RAL 4003)	 Perlgrün matt	(RAL 6035)		

Farbdarstellungen nur als Übersicht. Alle Farbdetails auf www.rehatec.com

Bezugsfarben

**Bezug Auflagefläche / Rand
(Hochwertiger Trevira® CS Bezug,
universalgestrickt)**

	Gelb / Grau	(GU700-S709)
	Pink / Grau	(GU702-S709)
	Rot / Grau	(GU703-S709)
	Apfelgrün / Grau	(GU705-S709)
	Hellblau / Grau	(GU707-S709)
	Schwarz / Grau	(GU710-S709)

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

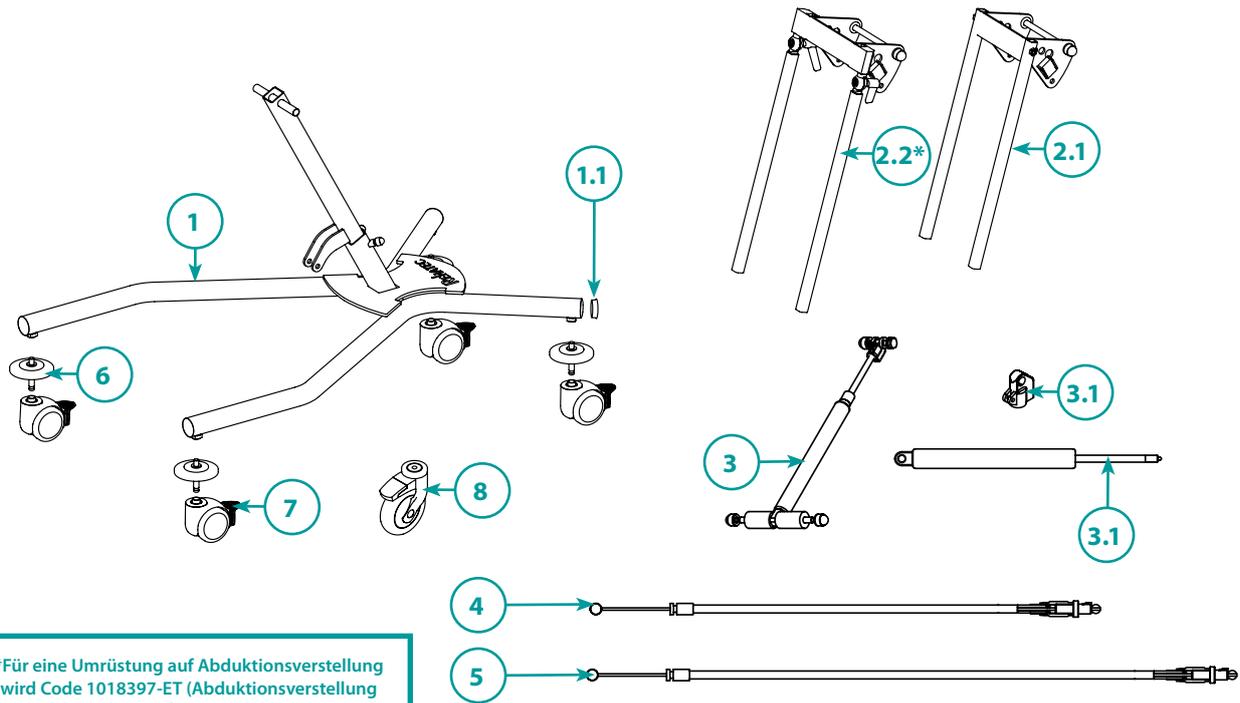

*Für eine Umrüstung auf Abduktionsverstellung wird Code 1018397-ET (Abduktionsverstellung komplett) auf Seite 17 benötigt

1.1 Untergestell Standard

Menge	Pos.	Einheit	Code	Bezeichnung
	1	Stück	1018852	Untergestell mit Einschub und Aufnahmelaschen, ohne Zubehör
	1.1	Stück	1007622	Gleiter/Stopfen für Untergestell
	2.1	Stück	1018885	Beinteil - Standard inkl. Befestigungsmaterial
	2.2	Stück	1018886	Beinteil - Abduktion inkl. Befestigungsmaterial*
	3	Stück	1018858	Gasdruckfeder KIT inkl. Gasdruckfeder, Auslösekopf und Befestigungsmaterial
	3.1	Stück	1018947	Gasdruckfeder 300 N für die Schrägverstellung, ohne Auslösekopf und Befestigungsmaterial
	3.2	Stück	1011999	Auslösekopf für Gasdruckfeder
	4	Stück	1008173	Bowdenzug für die Schrägverstellung ohne Schiebebogen (1 m)
	5	Stück	1008176	Bowdenzug für die Schrägverstellung mit Schiebebogen (1,10 m)
	6	Satz	1018607-ET	Wand- und Möbelschutz für 75 mm Rollen
	6	Satz	1022293-ET	Wand- und Möbelschutz für 100 mm Rollen
	7	Stück	1005593-ET	Transportrolle 75 mm mit Feststeller
	8	Stück	1022143-ET	Transportrolle 100 mm mit Totalfeststellung

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse



Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

***Hinweis: Die entsprechende Baugruppe ist auf der nächsten Seite ersichtlich!**

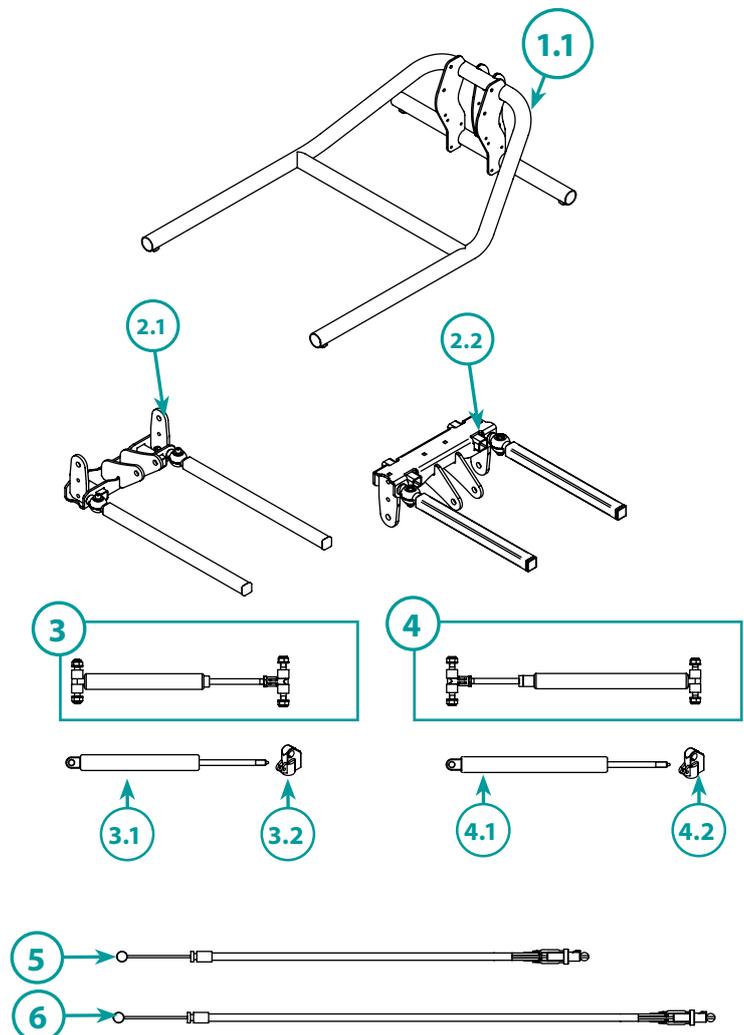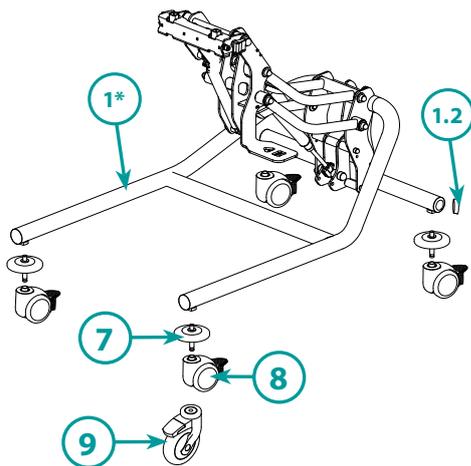

Weitere Tabellen auf der folgenden Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

1.2 Untergestell mit Gasfeder Höhenverstellung				
Menge	Pos.	Einheit	Code	Bezeichnung
	1	Stück	1022049	Untergestell für Gasfeder Höhenverstellung KIT (für die Umrüstung von Lasse auf Lasse 2020) inkl. Untergestell für Höhenverstellung mit Gasdruckfeder, Transportrollen 75 mm, Beinteil Standard oder Abduktion (Hinweis: Es wird zwingend zusätzlich eine Griffhalterung (Code 1023149) oder ein Schiebebogen (Code 1022666-ET) benötigt!)
	1.1.	Stück	1022045	Untergestell für Gasfeder Höhenverstellung KIT (für vorhandenes Lasse Modell 2020), ohne weiteres Zubehör
	1.2.	Stück	1007622	Gleiter/Stopfen für Untergestell
	2.1.	Stück	1022307	Beinteil - Standard inkl. Befestigungsmaterial
	2.2.	Stück	1023434	Beinteil - Abduktion inkl. Befestigungsmaterial
	3	Stück	1022064	Gasdruckfeder 300 N KIT für Schrägverstellung inkl. Gasdruckfeder, Auslösekopf und Befestigungsmaterial
	3.1.	Stück	1022038	Gasdruckfeder 300 N für die Schrägverstellung, ohne Auslösekopf und Befestigungsmaterial
	3.2.	Stück	1011999	Auslösekopf für Gasdruckfeder
	4	Stück	1022054	Gasdruckfeder 1200 N KIT für Höhenverstellung inkl. Gasdruckfeder, Auslösekopf und Befestigungsmaterial
	4.1.	Satz	1020565	Gasdruckfeder 1200 N für die Höhenverstellung, ohne Auslösekopf und Befestigungsmaterial
	4.2.	Stück	1011999	Auslösekopf für Gasdruckfeder
	5	Satz	1008173	Bowdenzug für die Schrägverstellung (1 m)
	6	Stück	1008183	Bowdenzug für die Höhenverstellung (1, 30 m)
	7.1.	Stück	1018607-ET	Wand- und Möbelschutz für 75 mm Rollen
	7.2.	Stück	1022293-ET	Wand- und Möbelschutz für 100 mm Rollen
	8	Stück	1005593-ET	Transportrolle 75 mm mit Feststeller
	9	Stück	1022143-ET	Transportrolle 100 mm mit Totalfeststellung

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99**, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse




Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

***Hinweis: Die entsprechende Baugruppe ist auf der nächsten Seite ersichtlich!**

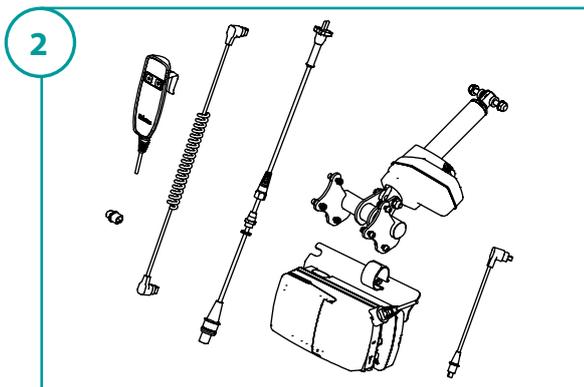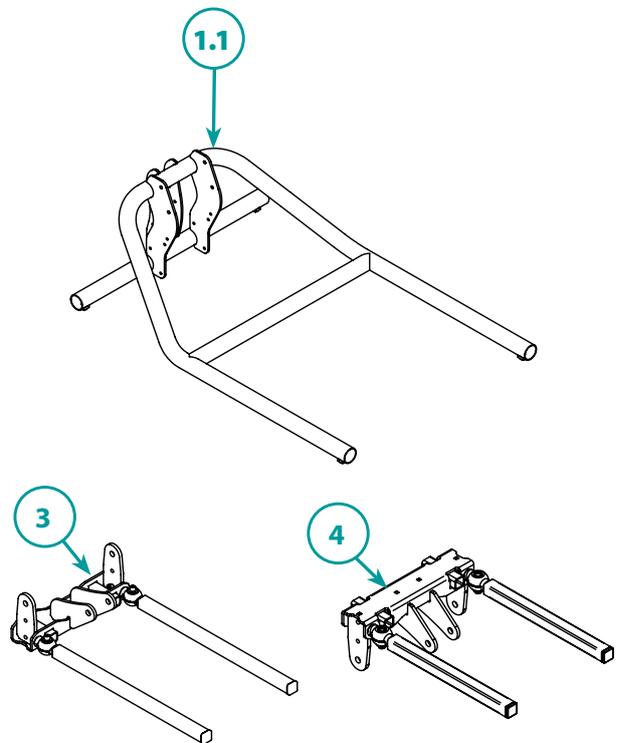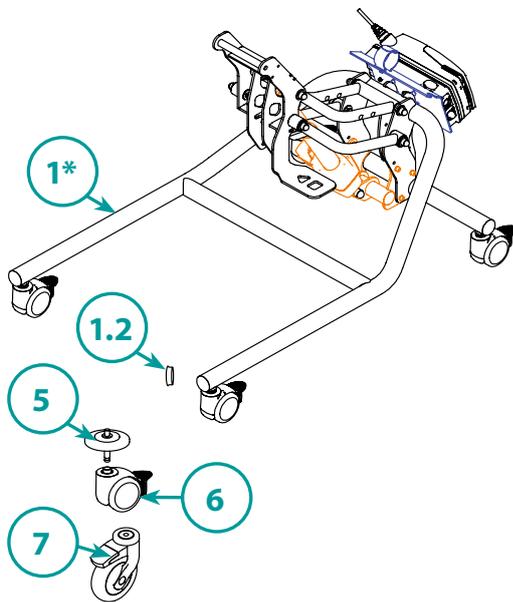

Weitere Tabellen auf der folgenden Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

1.3 Untergestell mit elektrischer Höhenverstellung				
Menge	Pos.	Einheit	Code	Bezeichnung
	1	Stück	1022670	Untergestell für elektrische Höhenverstellung KIT (für die Umrüstung von Lasse auf Lasse 2020), Transportrollen 75 mm, Beinteil Standard oder Abduktion (Hinweis: Es wird zwingend zusätzlich eine Griffhalterung (Code 1023149) oder ein Schiebebogen (Code 1022666-ET) benötigt!)
	1.1	Stück	1022045	Untergestell für elektrische Höhenverstellung KIT (für vorhandenes Lasse Modell 2020), ohne weiteres Zubehör
	1.2	Stück	1007622	Gleiter/Stopfen für Untergestell
	2	Stück	1023838	Elektrische Höhenverstellung KIT bestehend aus: Motor, Steuerung+Halterung, Ladegerät und Handbedienung
		Stück	1023836	Motor KIT
		Stück	1023414	Halterung KIT
		Stück	1023038	Handbedienung
		Stück	1026018	Akku
		Stück	1022940-1	Steuerung
		Stück	1025250	Batterieanschlußkabel
		Satz	1023363	Netzkabel
		Satz	1023383	Motorkabel
		Stück	1023429	Blindstopfen
	3	Stück	1022307	Beinteil - Standard inkl. Befestigungsmaterial
	4	Stück	1023434	Beinteil - Abduktion inkl. Befestigungsmaterial
	5	Stück	1018607-ET	Wand- und Möbelschutz für 75 mm Rollen
	5	Stück	1022293-ET	Wand- und Möbelschutz für 100 mm Rollen
	6	Stück	1005593-ET	Transportrolle 75 mm mit Feststeller
	7	Stück	1022143-ET	Transportrolle 100 mm mit Totalfeststellung

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

2. Schiebebogen

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung




Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

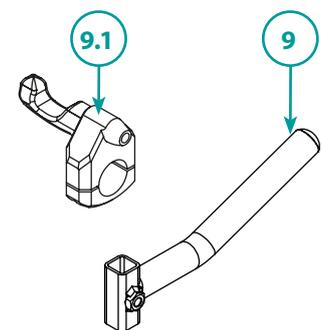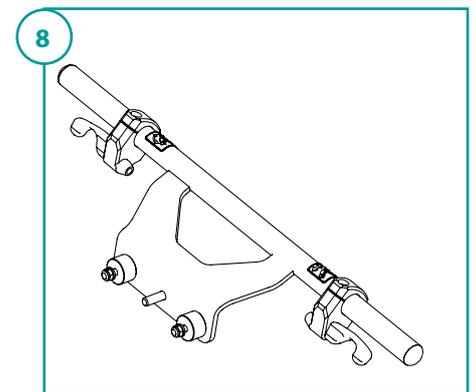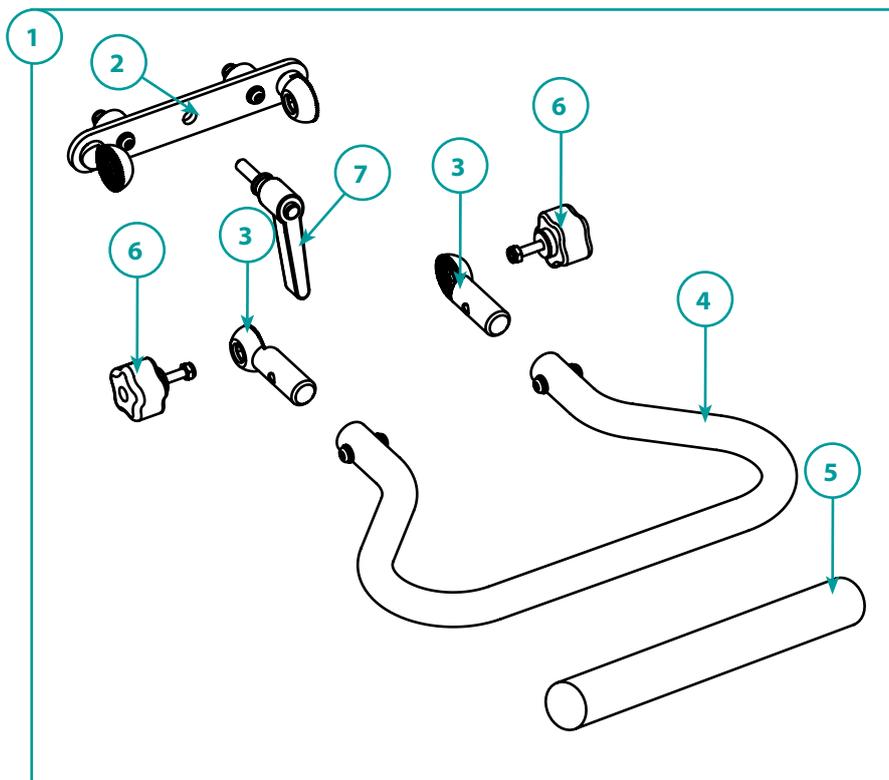

2. Schiebebogen

Menge	Pos.	Einheit	Code	Bezeichnung
	1	Stück	1025555-ET	Schiebebogen komplett für Lasse ohne Höhenverstellung
	1	Stück	1022666-ET	Schiebebogen komplett für Lasse mit Höhenverstellung
	2	Stück	1022402	Schiebebogenhalterung inkl. Klemmhebel M8x30 (für Lasse ohne Höhenverstellung)
	3	Stück	1004194	Rastergelenk Schiebebogen
	4	Stück	1001533	Schiebebogen (Biegeteil)
	5	Stück	1019336	Schiebebogenüberzug PVC (260 mm) (Es wird 1 Stück benötigt, nur für Lasse ohne Höhenverstellung)
	6	Stück	1003309	Fünfsterngriff - Soft M6x25
	7	Stück	1005034	Klemmhebel M8x30
	8	Stück	1023149	Griffhalterung komplett inkl. Auslösehebel für Lasse ohne Schiebebogen (Hinweis: Nur für Lasse mit Höhenverstellung - Modell 2020)
	9	Stück	1007160	Schiebegriff ohne Auslösehebel für Lasse ohne Höhenverstellung
	9.1.	Stück	1000862	Auslösehebel für Gasdruckfeder

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

3. Rücken

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

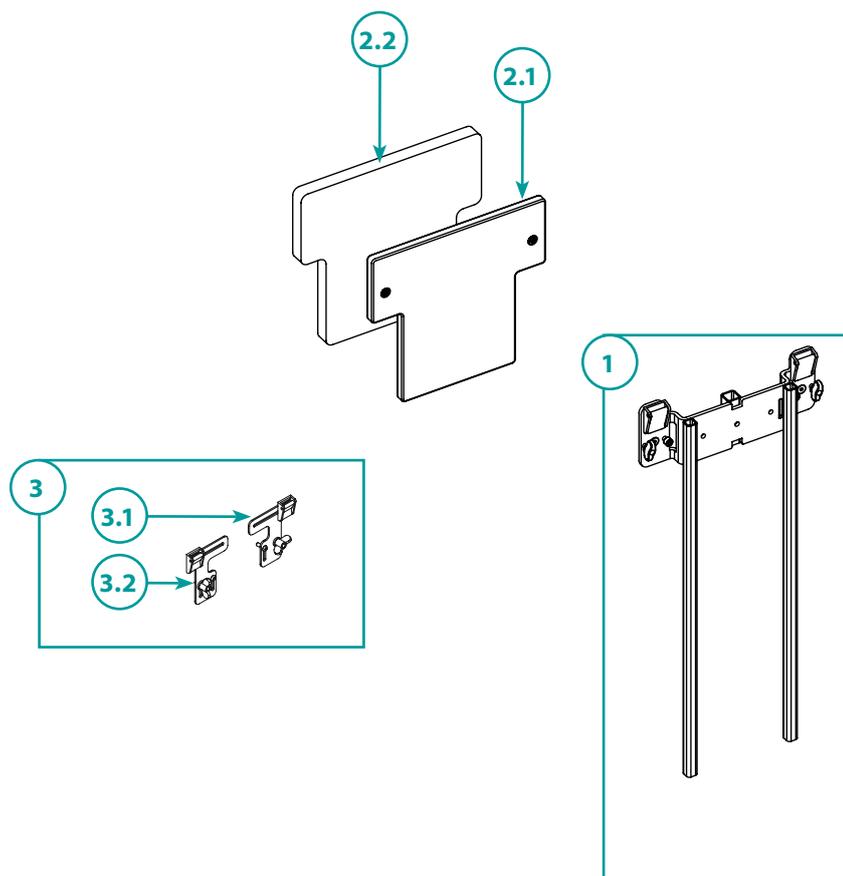

3. Rücken				
Menge	Pos.	Einheit	Code	Bezeichnung
	1	Stück	1022500	Oberteil / Aufnahme Rücken inkl. Schraubenmaterial
	2.1	Stück	1014060	Rückenauflage (Holz)
	2.2	Stück	1014257	Polster für Rückenauflage
		Stück	1021522	Bezug für Rückenauflage
	3	Paar	1025893	Schultergurtführung, höhen- und breitenverstellbar - KIT
	3.1.	Stück	1005222	Klappschnalle, 25 mm
	3.2.	Stück	1025549	Flügelschraube M6x16

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

4. Armauflagen

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

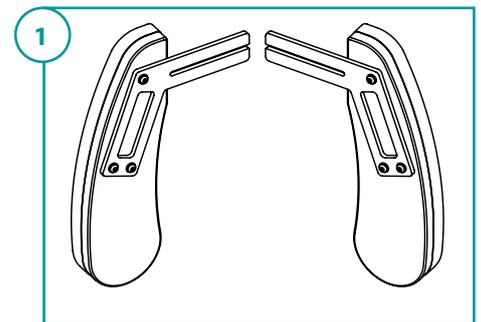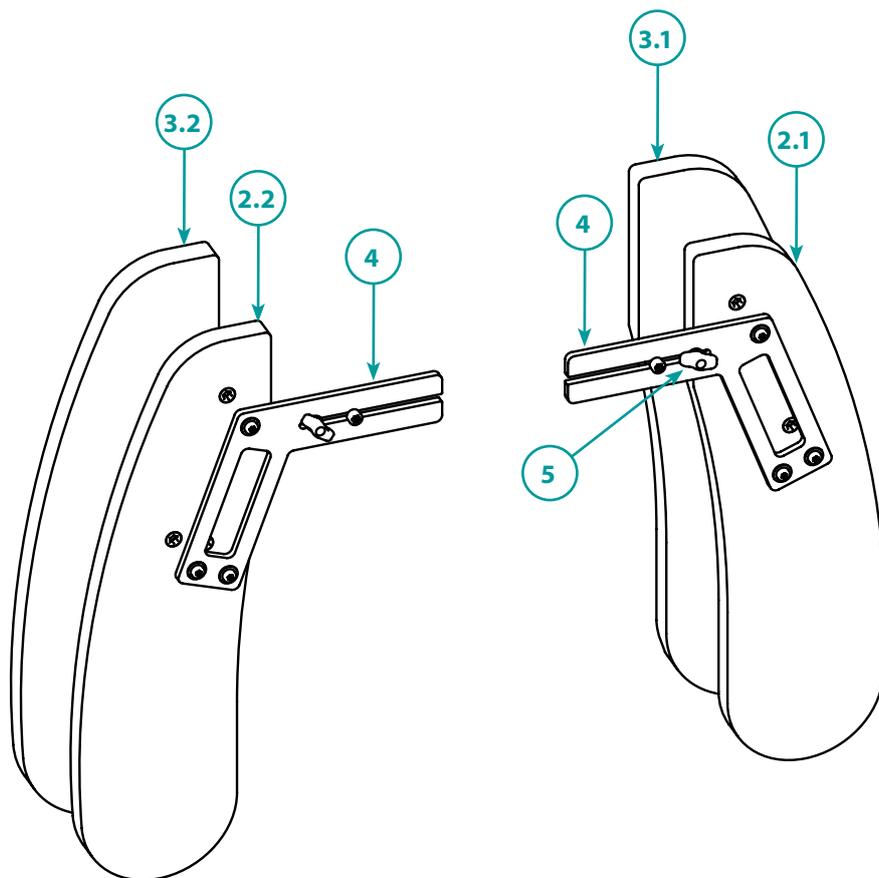

4. Armauflagen, abnehmbar

Menge	Pos.	Einheit	Code	Bezeichnung
	1	Paar	1018407-ET	Armauflagen abnehmbar komplett inkl. Holz, Lasche, Miniwing, Polster und Bezug
	2.1	Stück	1014072	Armauflage (Holz), rechts
	2.2	Stück	1013847	Armauflage (Holz), links
	3.1	Stück	1014258	Polster Armauflage rechts
		Stück	1021528	Bezug Armauflage rechts
	3.2	Stück	1014258	Polster Armauflage links
		Stück	1021530	Bezug Armauflage links
	4	Stück	1001791	Lasche Armauflage links/rechts inkl. Miniwing M8x15
	5	Stück	1005701	Miniwing M6x15

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

5. Seitenführungspelotten

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

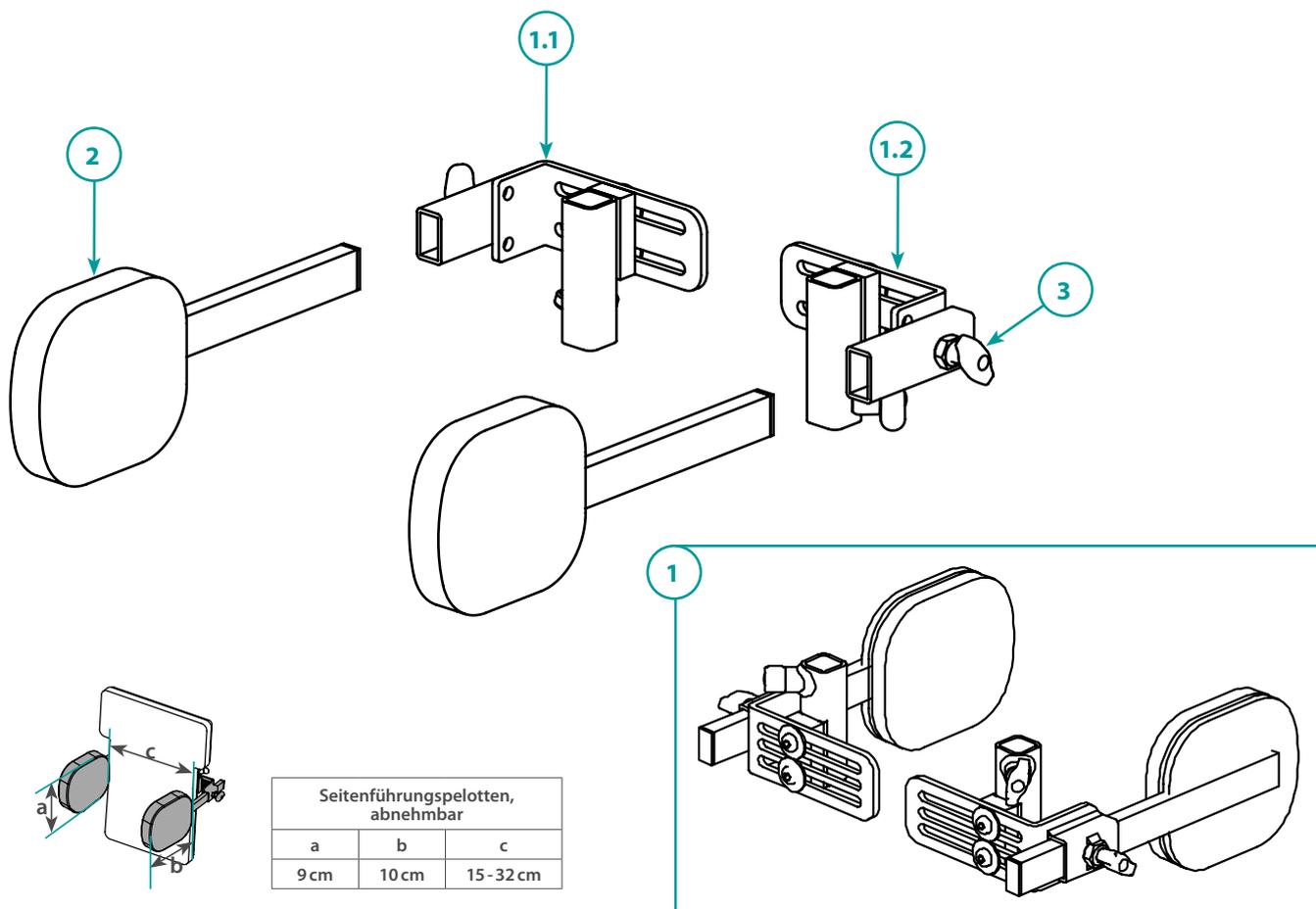

5. Seitenführungspelotten, abnehmbar

Menge	Pos.	Einheit	Code	Bezeichnung
	1	Paar	1025261-ET	Seitenführungspelotten abnehmbar komplett inkl. Halterung, gerader Halter, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Polster und Bezug
	1.1	Stück	1018878	Halterung abnehmbar (steckbar), rechts, inkl. Miniwing
	1.2	Stück	1018877	Halterung abnehmbar (steckbar), links, inkl. Miniwing
	2	Stück	1018896	Seitenführungspelotte inkl. gerader Halter für Brustkorbbreite 15-32 cm, Blech und Polster - ohne Bezug
		Stück	1021531	Bezug Seitenführungspelotte rechts
		Stück	1021532	Bezug Seitenführungspelotte links
	3	Stück	1005054	Miniwing M8x15

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

5. Seitenführungspelotten

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

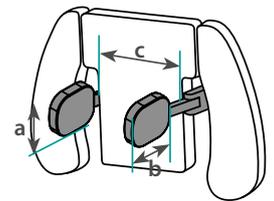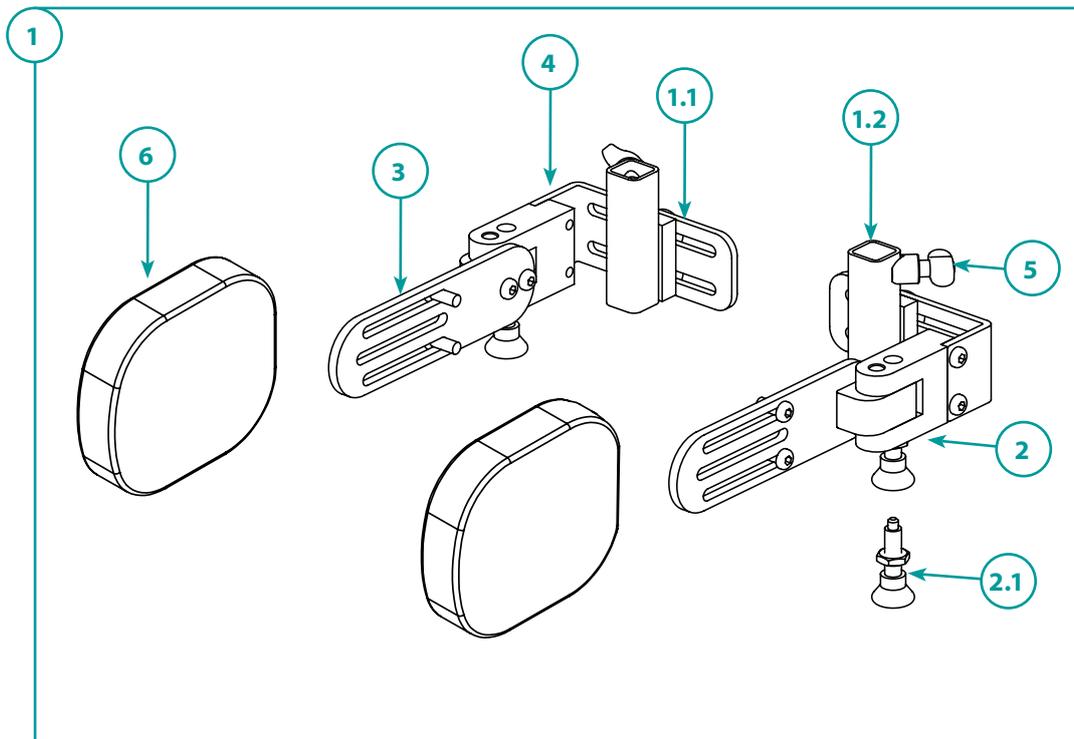

Seitenführungspelotten, abschwengbar		
a	b	c
9 cm	10 cm	15 - 32 cm

5. Seitenführungspelotten, abschwengbar

Menge	Pos.	Einheit	Code	Bezeichnung
	1	Paar	1025339-ET	Seitenführungspelotten abschwengbar komplett inkl. Halterung, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Polster und Bezug
	1.1	Stück	1018875	Halterung abschwengbar rechts, inkl. Schraubenmaterial
	1.2	Stück	1018874	Halterung abschwengbar links, inkl. Schraubenmaterial
	2	Stück	1007854	Abschwengmechanismus - ohne Arretierbolzen
	2.1	Stück	1007576	Arretierbolzen/Zugschnäpper M8 - Form B
	3	Stück	1001827	Halter für Seitenführungspelotte
	4	Stück	1026542	Winkel für Seitenführungspelotten
	5	Stück	1005054	Miniwing M8x15
	6	Stück	1024810	Seitenführungspelotte inkl. Blech und Polster - ohne Bezug
		Stück	1021531	Bezug Seitenführungspelotte rechts
		Stück	1021532	Bezug Seitenführungspelotte links

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

6. Kopfstütze

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller


Datum

Seriennummer


Kommission

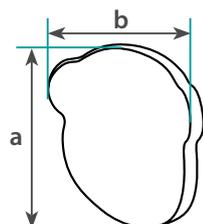





Kopfstütze „Bär“		
	a	b
	24 cm	26 cm

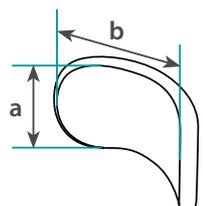

Kopfstütze, Muschelform		
Größe	a	b
1	16 cm	28 cm

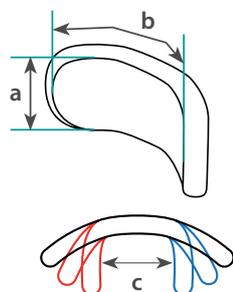

Kopfstütze, verstellbar			
Gr.	a	b	c
Mini	10 cm	34 cm	9 cm

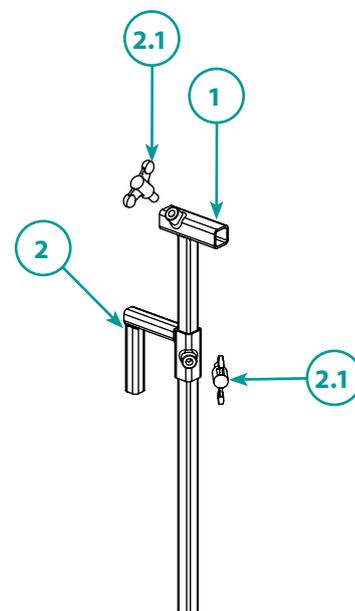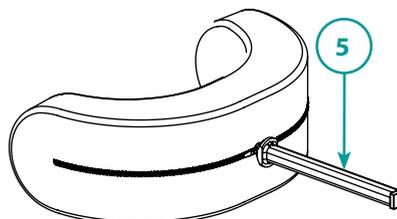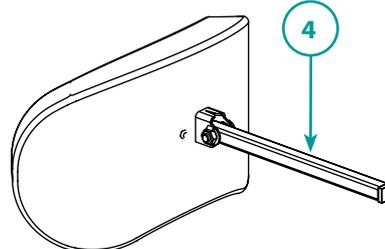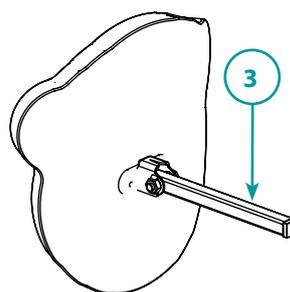

6. Kopfstütze

Menge	Pos.	Einheit	Code	Bezeichnung
	1	Stück	1014068	Kopfstützenhalter 300 mm, gerade inkl. Flügelschraube
	2	Stück	1007669-ET	Rückesetzadapter inkl. Flügelschraube
	2.1	Stück	1007657	Flügelschraube M8x15
	3	Stück	1007201-ET	Kopfstütze Bär inkl. Winkel, Tiefenverstellrohr, Blech, Polster und Bezug
		Stück	1021520	Bezug Kopfstütze Bär
	4	Stück	1018336-ET	Kopfstütze muschelform Gr. 1 inkl. Winkel, Tiefenverstellrohr, Blech, Polster und Bezug
		Stück	1017676	Bezug Kopfstütze muschelform
	5	Stück	1018345-ET	Kopfstütze verstellbar Gr. Mini inkl. Tiefenverstellrohr mit Kugelkopf, Blech, Polster und Bezug
		Stück	1018344	Bezug verstellbare Kopfstütze Gr. Mini, schwarz Neopren

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

7. Therapietisch

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

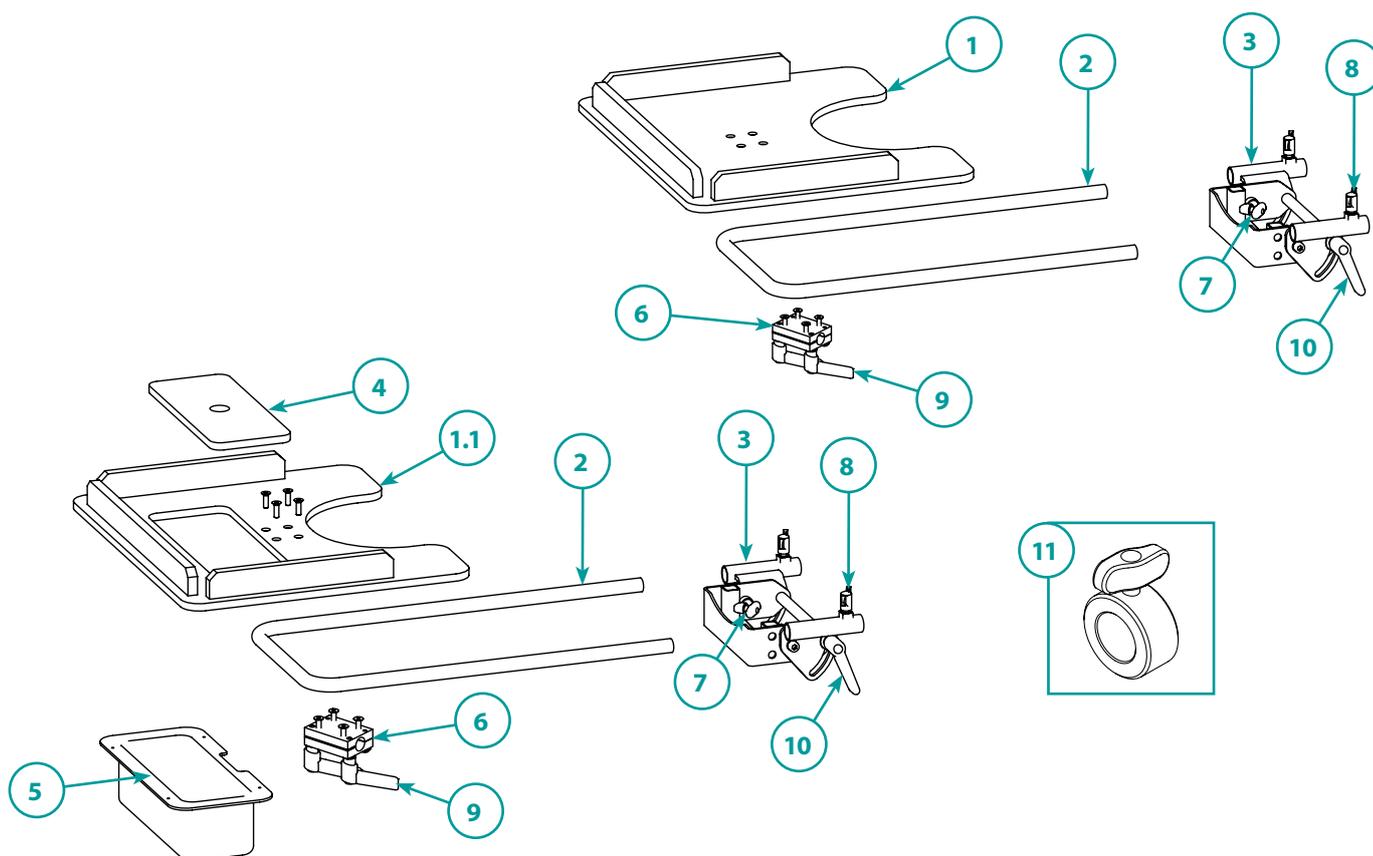

7. Therapietisch

Menge	Pos.	Einheit	Code	Bezeichnung
	1	Stück	1011596-ET	Therapietisch mit Tischumrandung - ohne Zubehör
	1.1	Stück	1014547-ET	Therapietisch mit Muldenausschnitt und Tischumrandung - ohne Zubehör
	2	Stück	1014057	Tischbügel
	3	Stück	1014075	Tischhalterung komplett
	4	Stück	1014548	Deckel für Therapiemulde
	5	Stück	1016225	Therapiemulde
	6	Stück	1018767	Tischbügel-Aufnahme inkl. Schraubenmaterial
	7	Stück	1005054	Miniwing M8x15
	8	Stück	1005188	Flügelschraube M8x12
	9	Stück	1007549	Klemmhebel M8x25
	10	Stück	1000733	Klemmhebel M8
	11	Paar	1023148-ET	Anschlag (Stelling) für Tischtiefenverstellung KIT

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

8. Beckenplatte

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

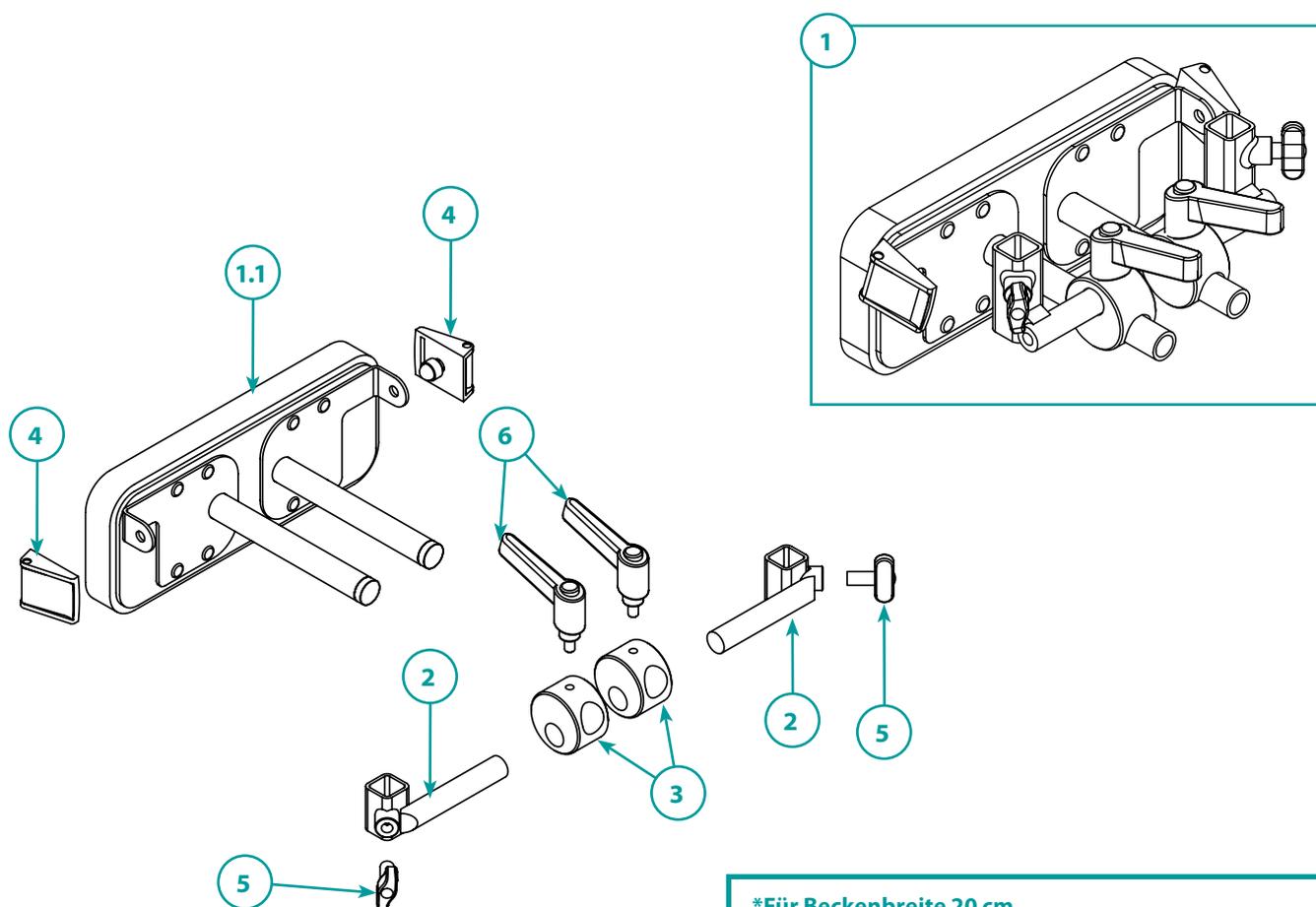

*Für Beckenbreite 20 cm.
Kombination mit Pelvi.Loc Beckengurt empfehlen.

8. Beckenplatte				
Menge	Pos.	Einheit	Code	Bezeichnung
	1	Stück	1018382-ET	Beckenplatte Gr. Mini komplett inkl. Beckengrundplatte, Halter, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnallen, Blech, Polster und Bezug
	1.1	Stück	1018888	Beckenplatte Gr. Mini inkl. Halter, Blech und Polster - ohne Bezug
		Stück	1021524	Bezug Beckenplatte
	2	Stück	1001951	Beckenpelottenhalter inkl. Miniwing
	3	Stück	1006004	Klemmverstellung dreifach inkl. Klemmhebel
	4	Stück	1005222	Klappschnalle
	5	Stück	1005054	Miniwing M8x15
	6	Stück	1005032	Klemmhebel M6x10

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9. Beinauflagen

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

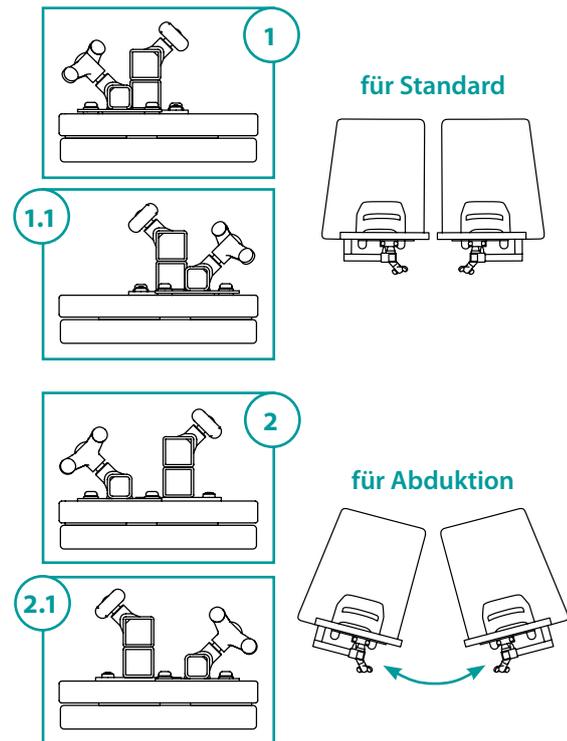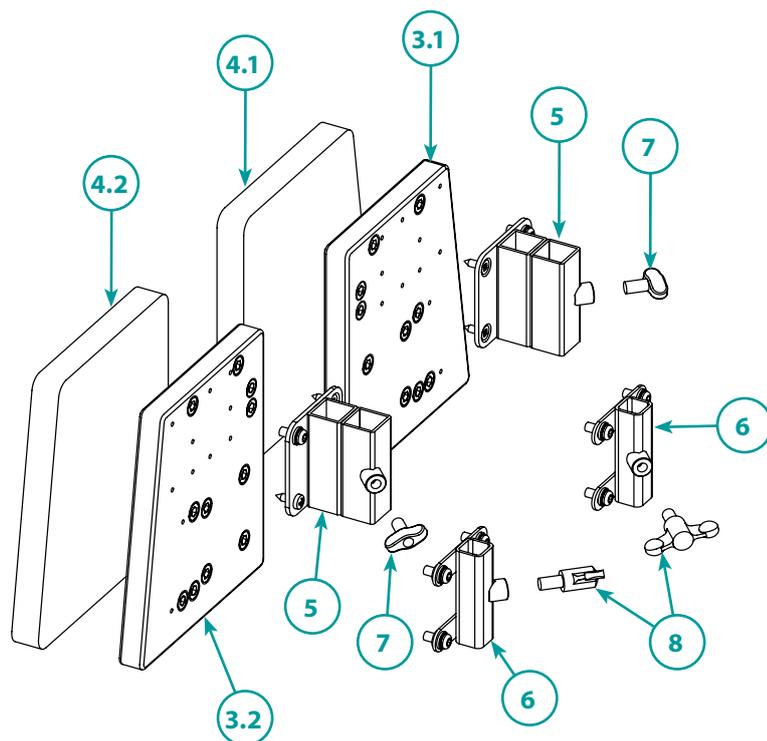

9. Beinauflagen				
Menge	Pos.	Einheit	Code	Bezeichnung
	1	Stück	1019284	Beinauflage rechts komplett Standard - ohne Polster und Bezug
	1.1	Stück	1019283	Beinauflage links komplett Standard - ohne Polster und Bezug
	2	Stück	1019285	Beinauflage rechts für Abduktion komplett - ohne Polster und Bezug
	2.1	Stück	1019286	Beinauflage links für Abduktion komplett - ohne Polster und Bezug
	3.1	Stück	1009010	Beinauflage Holz, rechts inkl. Eindrehmuttern
	3.2	Stück	1009008	Beinauflage Holz, links inkl. Eindrehmuttern
	4.1	Stück	1001819	Polster Beinauflage, rechts
	4.2	Stück	1001819	Polster Beinauflage, links
		Stück	1021525	Bezug Beinauflage, rechts
		Stück	1021526	Bezug Beinauflage, links
	5	Stück	1014469	Unihalter zweifach 25x25 mm, rechts/links inkl. Miniwing
	6	Stück	1009420-ET	Unihalter 20x20 mm, rechts/links inkl. Flügelschraube
	7	Stück	1005054	Miniwing M8x15
	8	Stück	1007657	Flügelschraube M8x15
		Stück	1018397-P	Abduktionsverstellung komplett - inklusive Beinauflagen (rechts und links, ohne Bezug und Polster), Beinteil mit Abduktion (Zahnsegment) und Befestigungsmaterial

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

10. Kniepelotten

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller


Datum

Seriennummer


Kommission

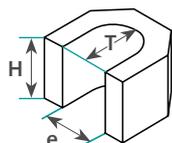

Kniepelotte Standard				
Code	Breite (e)	Polsterdicke	Höhe (H)	Tiefe (T)
1023532-6-2	5-6 cm	2cm	9 cm	5 cm
1023532-7-1	7-8 cm	1 cm	9 cm	5 cm

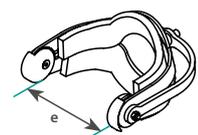

Code	Breite (e)
1023533-8	8 cm

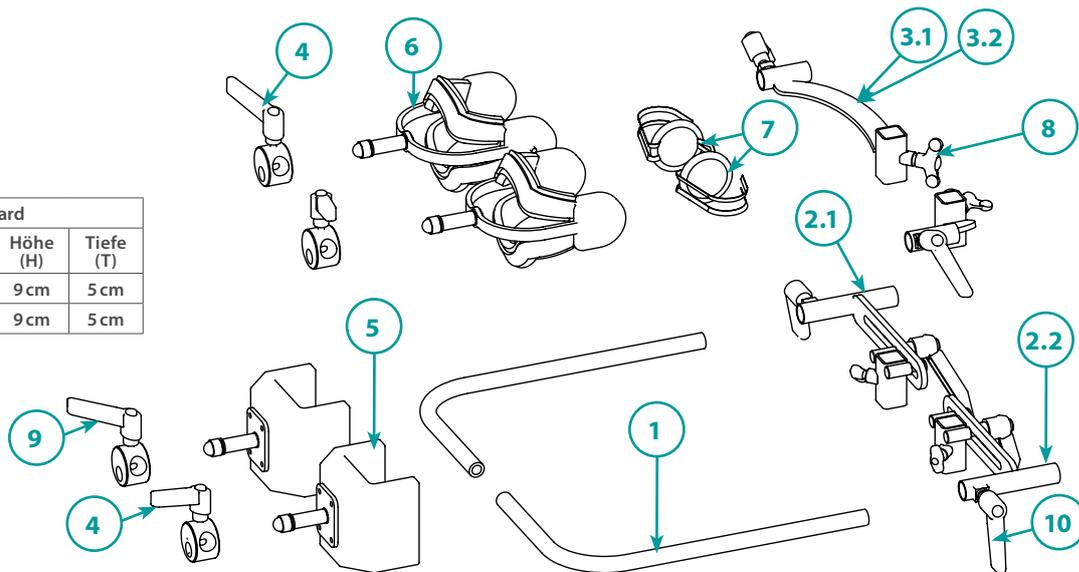

10. Kniepelotten				
Menge	Pos.	Einheit	Code	Bezeichnung
	1	Stück	1001781	Kniebogen Standard, 180 x 320 mm
	2.1.	Stück	1018889	Kniepelottenhalter Standard, rechts inkl. Befestigungsmaterial
	2.2.	Stück	1018890	Kniepelottenhalter Standard, links inkl. Befestigungsmaterial
	3.1.	Stück	1001961	Kniepelottenhalter Abduktion, rechts inkl. Befestigungsmaterial
	3.2.	Stück	1007220	Kniepelottenhalter Abduktion, links inkl. Befestigungsmaterial
	4	Stück	1006004	Knieverstellung dreifach inkl. Klemmhebel M6x10
	5	Stück	1025432-6-2	Kniepelotte Standard für Kniebreite 6 cm, rechts/links inkl. Blech, Polster, Bezug, Anschraubbolzen, Knieverstellung dreifach mit Klemmhebel
	5.1.	Stück	1025432-7-1	Kniepelotte Standard für Kniebreite 7 cm, rechts/links inkl. Blech, Polster, Bezug, Anschraubbolzen, Knieverstellung dreifach mit Klemmhebel
		Stück	1014733	Bezug Kniepelotte Standard für Kniebreite 6 cm
		Stück	1018296	Bezug Kniepelotte Standard für Kniebreite 7 cm
	6	Stück	1018782	Kniepelotte anatomisch (8 cm) , rechts/links inkl. Polster, Bezug, Anschraubbolzen und Knieverstellung dreifach inkl. Klemmhebel
		Satz	1023254	4x Bezüge 8 cm für anatomische Kniepelotten (Oben, unten) in Einzelanfertigung, Bezug: schwarz Neopren
	7	Satz	1018713-ET	4x Abpolsterung für Drehgelenke der anatomischen Kniepelotten (Stoff: Schwarz Neopren) Hinweis: Es werden 2 Stück pro Seite benötigt!
	8	Stück	1005054	Miniwing M8x15
	9	Stück	1005032	Klemmhebel M6x10
	10	Stück	1018399	Klemmhebel M8x12
		Paar	1023378-ET	Anschlag (Stelling) für Knievertiefenverstellung KIT

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

11. Fußplatten

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe Mini

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

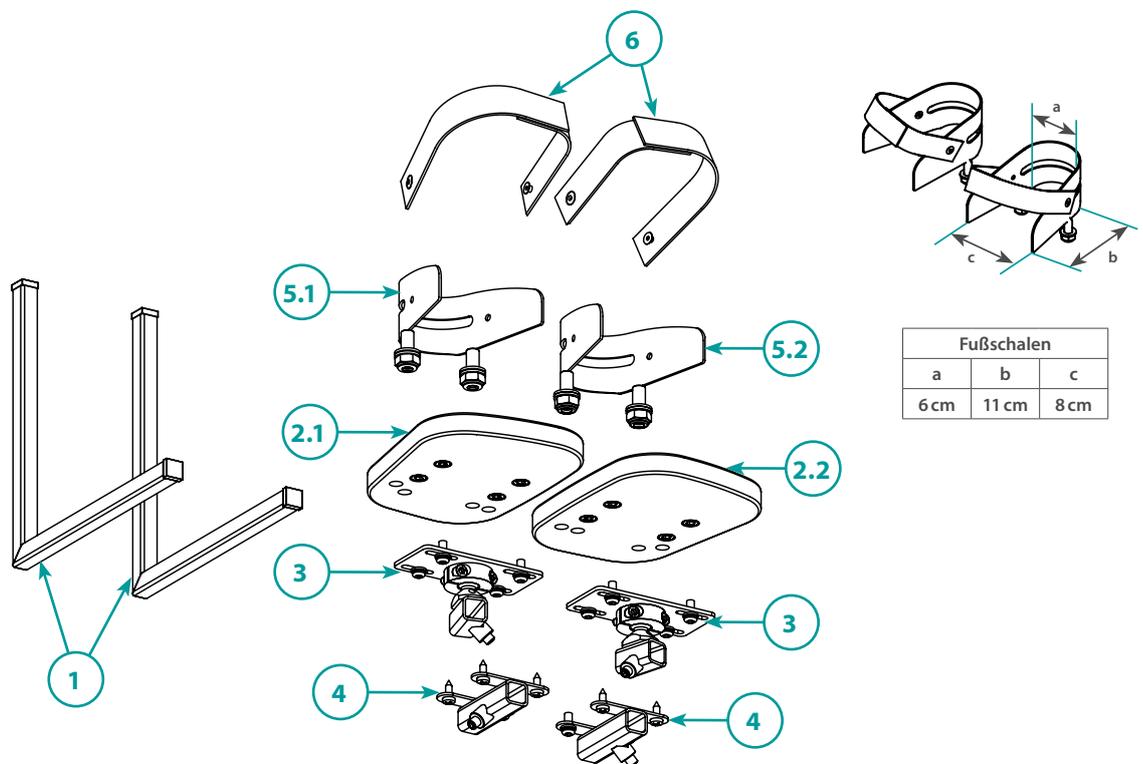

Fußschalen		
a	b	c
6 cm	11 cm	8 cm

11. Fußplatten				
Menge	Pos.	Einheit	Code	Bezeichnung
	1	Stück	1010896	Fußwinkel gerade, rechts/links
	2.1	Stück	1009255	Fußplatte Standard, rechts
	2.2	Stück	1009254	Fußplatte Standard, links
	3	Stück	1022320-ET	Kugelgelenke dreidimensional verstellbar (Kugelgelenke und Aufnahme für Fußplatte)
	4	Stück	1009420-ET	Unihalter Standard für Fußplatten
	5.1	Stück	1004397	Fußschale verschraubbar Gr. 0, rechts inkl. Mutter und Scheibe
	5.2	Stück	1004396	Fußschale verschraubbar Gr. 0, links inkl. Mutter und Scheibe
	6	Stück	1014394-ET	Fußriemen, kurz

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

12. Begurtung

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe Mini

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

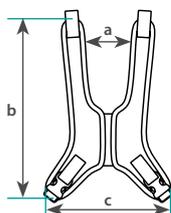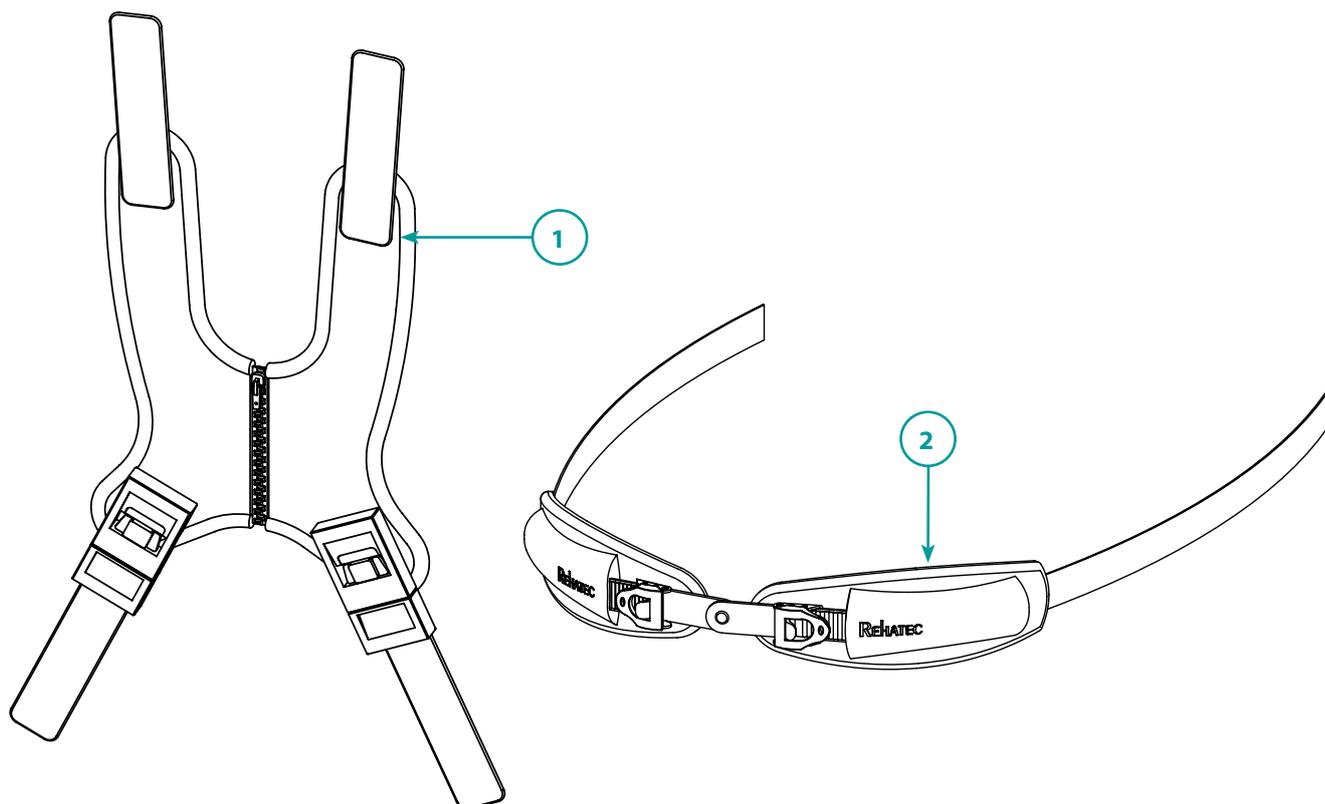

Leibchen		
a	b	c
14,5 cm	27,5 cm	19 cm

Pelvi.Loc Beckengurt		
Gr.	Beckenbreite	Code
XXXS	8 - 16 cm	E910939-3D
XXS	12 - 20 cm	E910935-3D
XS	16 - 24 cm	E910752-1

12. Begurtung				
Menge	Pos.	Einheit	Code	Bezeichnung
	1	Stück	1008880-1-ET	Leibchen Gr. 1 in Bezugsfarbe
	1	Stück	1008880-ET	Leibchen Gr. 1 in schwarz Neopren
	2	Stück	E910939-3D	Pelvi.Loc-Beckengurt Gr. XXXS für Beckenbreite 8 - 16 cm
	2	Stück	E910935-3D	Pelvi.Loc-Beckengurt Gr. XXS für Beckenbreite 12 - 20 cm
	2	Stück	E910752-1	Pelvi.Loc-Beckengurt Gr. XS für Beckenbreite 16 - 24 cm

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

