


Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

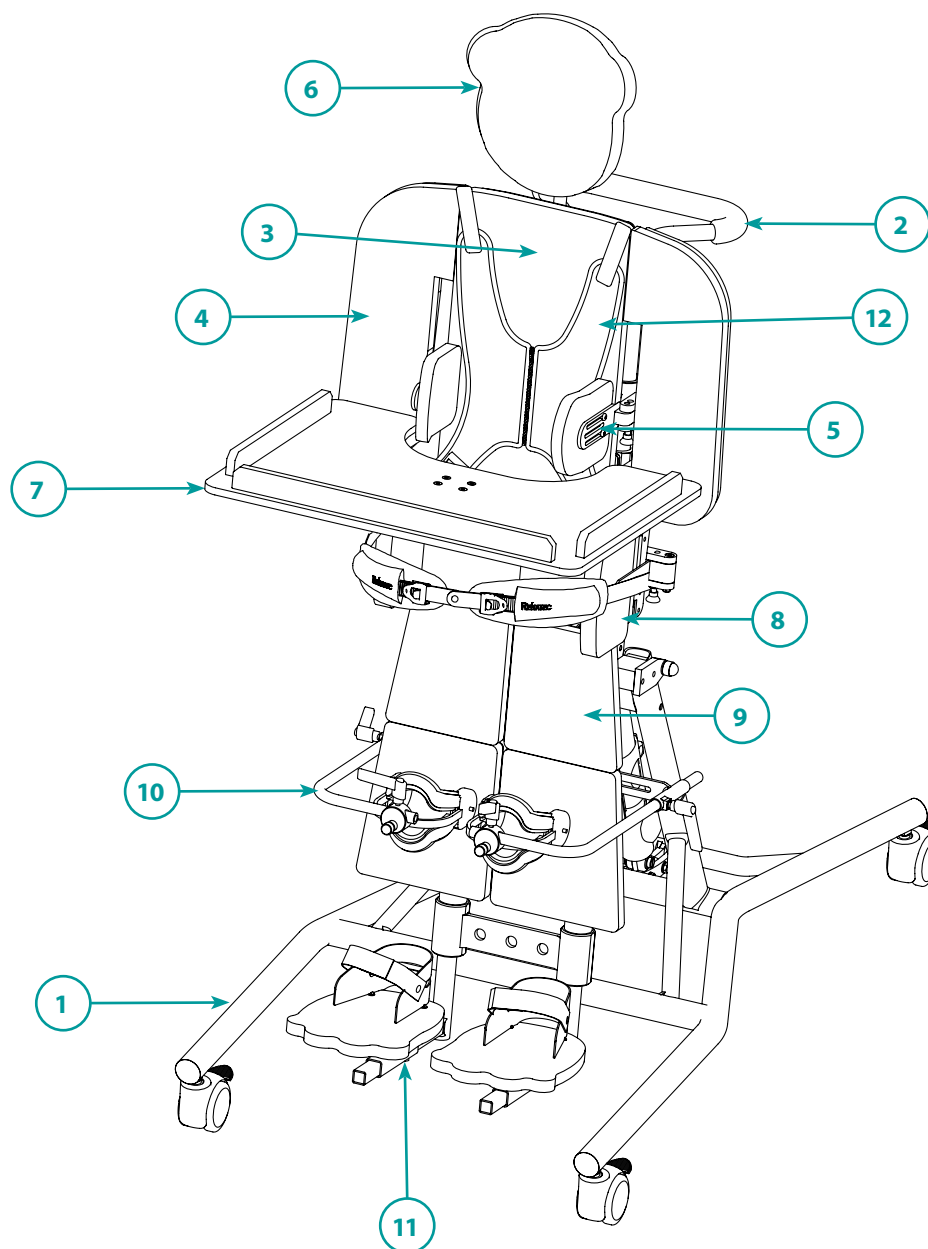

Baugruppen			
Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
1	Untergestell	7	Therapietisch
2	Schiebebogen	8	Beckenplatte
3	Rücken	9	Beinauflagen
4	Armauflagen	10	Kniepelotten
5	Seitenführungspelotten	11	Fußplatten
6	Kopfstütze	12	Begurtung

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Stoff- und Gestellfarben	3
1. Untergestell	4
2. Schiebebogen	10
3. Rücken	11
4. Armauflagen	12
5. Seitenführungspelotten	14
6. Kopfstütze	16
7. Therapietisch	18
8. Beckenplatte	19
9. Beinauflage	23
10. Kniepelotten	27
11. Fußplatten	29
12. Begurtung	30
Notizen	31

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

**Bitte geben Sie bei Bestellungen von Rahmenteilen
immer die Gestellfarbe und bei Bezügen die Stofffarbe an!**

Gestellfarben

 Reinweiß	(RAL 9010)	 Bordeauxviolett	(RAL 4004)	 Leuchtgrün	(RAL 6038)
 Narzissengelb	(RAL 1007)	 Ultramarinblau	(RAL 5002)	 Anthrazitgrau matt	(RAL 7016m)
 Leuchtgelb	(RAL 1026)	 Verkehrsblau	(RAL 5017)	 Silber metallic*	
 Reinorange	(RAL 2004)	 Perlnachtblau matt	(RAL 5026)	 Anthrazit metallic*	
 Leuchtorange	(RAL 2005)	 Wasserblau	(RAL 5021)	 Graphitschwarz matt	(RAL 9011m)
 Rubinrot	(RAL 3003)	 Lichtgrün	(RAL 6027)	 Tiefschwarz glanz	(RAL 9005g)
 Perl Rubinrot matt	(RAL 3032)	 Gelbgrün	(RAL 6018)		
 Erikaviolett	(RAL 4003)	 Perlgrün matt	(RAL 6035)		

Farbdarstellungen nur als Übersicht. Alle Farbdetails auf www.rehatec.com

Bezugsfarben

**Bezug Auflagefläche / Rand
(Hochwertiger Trevira® CS Bezug,
universalgestrickt)**

	Gelb / Grau	(GU700-S709)
	Pink / Grau	(GU702-S709)
	Rot / Grau	(GU703-S709)
	Apfelgrün / Grau	(GU705-S709)
	Hellblau / Grau	(GU707-S709)
	Schwarz / Grau	(GU710-S709)

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

1.1 Untergestell mit elektrischer Schrägverstellung -DEWERT

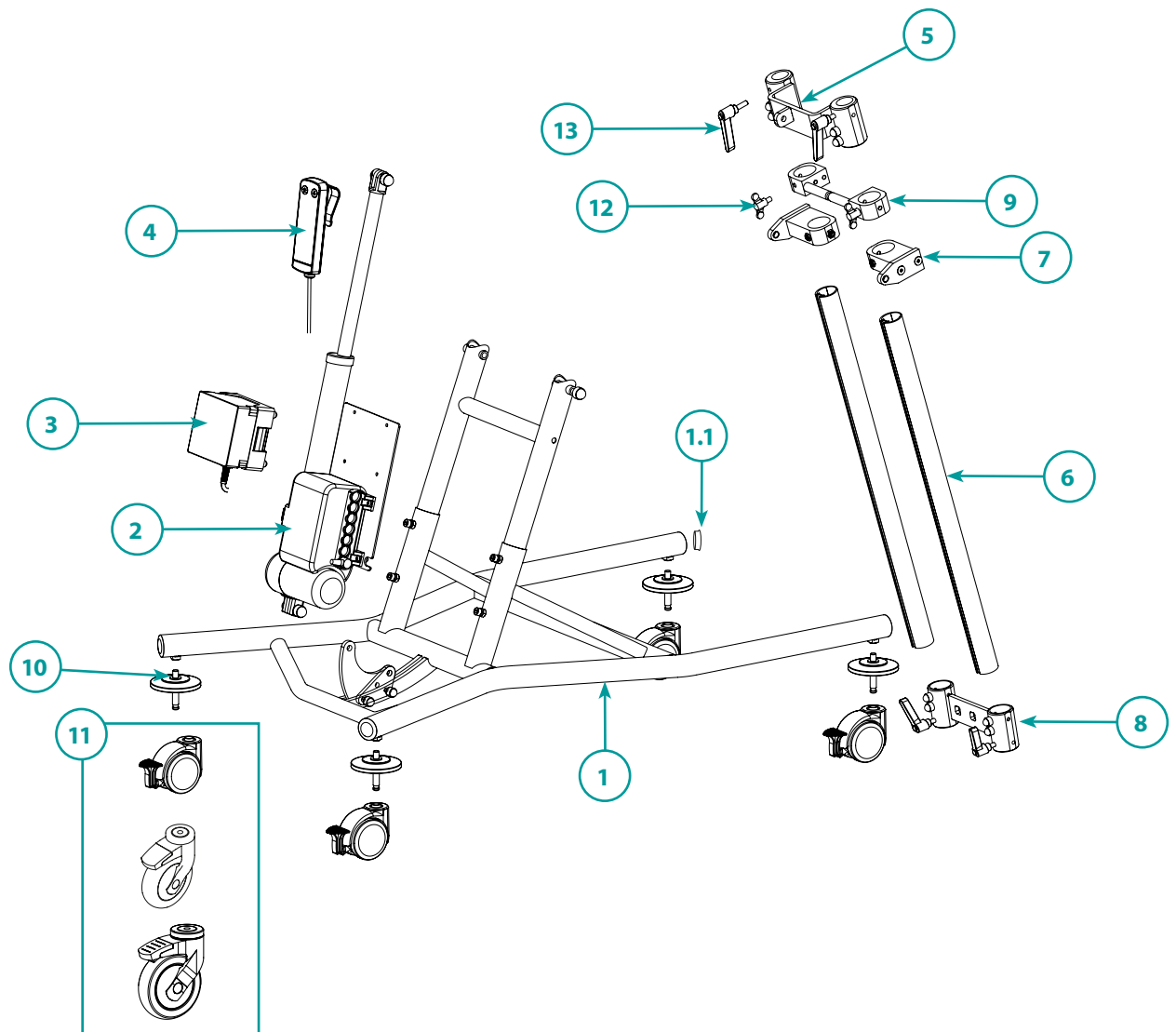


Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

REHATEC®

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

1.1 Untergestell mit elektrischer Schrägverstellung-DEWERT

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1018758	3	Untergestell mit Einschub und Aufnahmelasche, ohne weiteres Zubehör
	1	Stück	1007622	4	Untergestell mit Einschub und Aufnahmelasche, ohne weiteres Zubehör
	1.1	Stück	1007622	3/4	Gleiter/Stopfen für Untergestell
	2	Stück	1018760	3/4	Motor-Steuerung mit Aufnahmeplatte
		Stück	1018524	3/4	Motor
		Stück	1018486	3/4	Steuerung
		Stück	1022210	3/4	Netzkabel
		Stück	1022921	3/4	Brückenstecker für Steuerung
	3	Stück	1018761	3/4	Akku mit Aufnahmegehäuse und Schrauben
	4	Stück	1022972	3/4	Handscharter mit Kabel
	5	Stück	1010135	3	Motoraufnahme oben inkl. Schraubenmaterial
	5	Stück	1010064	4	Motoraufnahme oben inkl. Schraubenmaterial
	6	Stück	1008200	3	Beinteil Alu-Profil
	6	Stück	1007364	4	Beinteil Alu-Profil
	7	Stück	1008675	3/4	Lasche für Motor (mit Drehpunkt)
	8	Stück	1007313	3/4	Aufnahme Beinteil Alu-Profil (Anschlag unten) inkl. Schraubenmaterial
	9	Stück	1007527	3/4	Muffe mit Bolzen inkl. Schraubenmaterial
	10	Satz	1018607-ET	3/4	Wand- und Möbelschutz für 75 mm Rollen
	10	Satz	1022293-ET	3/4	Wand- und Möbelschutz für 100 mm Rollen
	10	Satz	1018698-ET	3/4	Wand- und Möbelschutz für 125 mm Rollen
	11	Stück	1005593-ET	3/4	Transportrolle 75 mm mit Feststeller
	11	Stück	1022143-ET	3/4	Transportrolle 100 mm mit Totalfeststellung
	11	Stück	1014946-ET	3/4	Transportrolle 125 mm mit Feststeller
	12	Stück	1005188	3/4	Flügelschraube M8x12
	13	Stück	1007549	3/4	Klemmhebel M8x25

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 5

06.03.2025

1024163_3.9

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

1.1 Untergestell mit elektrischer Schrägverstellung-LINAK

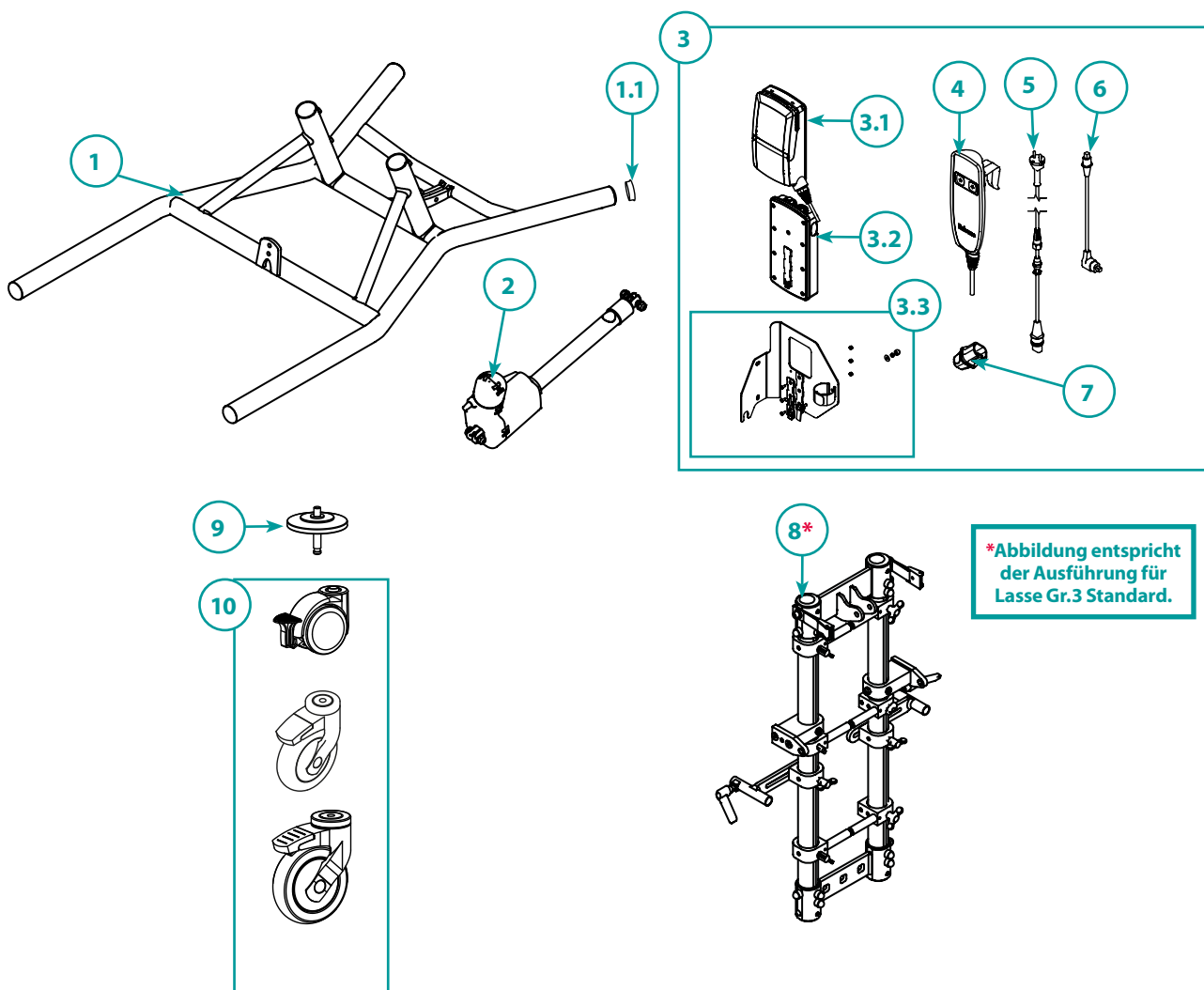


Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

REHATEC®

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

1.1 Untergestell mit elektrischer Schrägverstellung-LINAK

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1023202-ET	3	Untergestell mit Einschub und Aufnahmelasche, ohne weiteres Zubehör
	1	Stück	1023491-ET	4	Untergestell mit Einschub und Aufnahmelasche, ohne weiteres Zubehör
	1.1	Stück	1007622	3 / 4	Gleiter/Stopfen für Untergestell
	2	Stück	1023699	3 / 4	Motor mit Anschlußkabel
	3	Stück	1023487	3 / 4	Steuerung KIT inkl. Halterung und Netzkabel - ohne Akku
	3	Stück	1023487-A	3 / 4	Steuerung KIT inkl. Halterung und Netzkabel - mit Akku
	3.1.	Stück	1022940-2	3 / 4	Steuerung
	3.2.	Stück	1026018	3 / 4	Akku
	3.3.	Stück	1026035	3 / 4	Halterung
	4	Stück	1023038	3 / 4	Handscharter mit Kabel
	5	Stück	1023363	3 / 4	Netzkabel
	6	Stück	1025250	3 / 4	Batterieanschlusskabel
	7	Stück	1023429	3 / 4	Blindstopfen
	8	Satz	1023313	3	Beinteil Standard (KIT) für Beckenmitte unter 65 cm
		Satz	1023313-C	3	Beinteil Standard (KIT) für Beckenmitte über 65 cm
		Satz	1023405	4	Beinteil Standard (KIT) für Beckenmitte über 65 cm
		Satz	1023313-A	3	Beinteil für Abduktionsverstellung (KIT) für Beckenmitte unter 65 cm
		Satz	1023313-C-A	3	Beinteil für Abduktionsverstellung (KIT) für Beckenmitte über 65 cm
		Satz	1023405-A	4	Beinteil für Abduktionsverstellung (KIT) für Beckenmitte über 65 cm
		Satz	1023313-G	3	Beinteil für geteilte Beinführung ohne Abduktionsverstellung (KIT)
		Satz	1023405-G	4	Beinteil für geteilte Beinführung ohne Abduktionsverstellung (KIT)
		Satz	1023313-G-A	3	Beinteil für geteilte Beinführung mit Abduktionsverstellung (KIT)
		Satz	1023405-G-A	4	Beinteil für geteilte Beinführung mit Abduktionsverstellung (KIT)
	9	Satz	1018607-ET	3 / 4	Wand- und Möbelschutz für 75 mm Rollen
	9	Satz	1022293-ET	3 / 4	Wand- und Möbelschutz für 100 mm Rollen
	9	Satz	1018698-ET	3 / 4	Wand- und Möbelschutz für 125 mm Rollen
	10	Stück	1005593-ET	3 / 4	Transportrolle 75 mm mit Feststeller
	10	Stück	1022143-ET	3 / 4	Transportrolle 100 mm mit Totalfeststellung
	10	Stück	1014946-ET	3 / 4	Transportrolle 125 mm mit Feststeller

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 7

06.03.2025

1024163_3.9

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

REHATEC®

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

1.2 Untergestell mit Gasfederverstellung

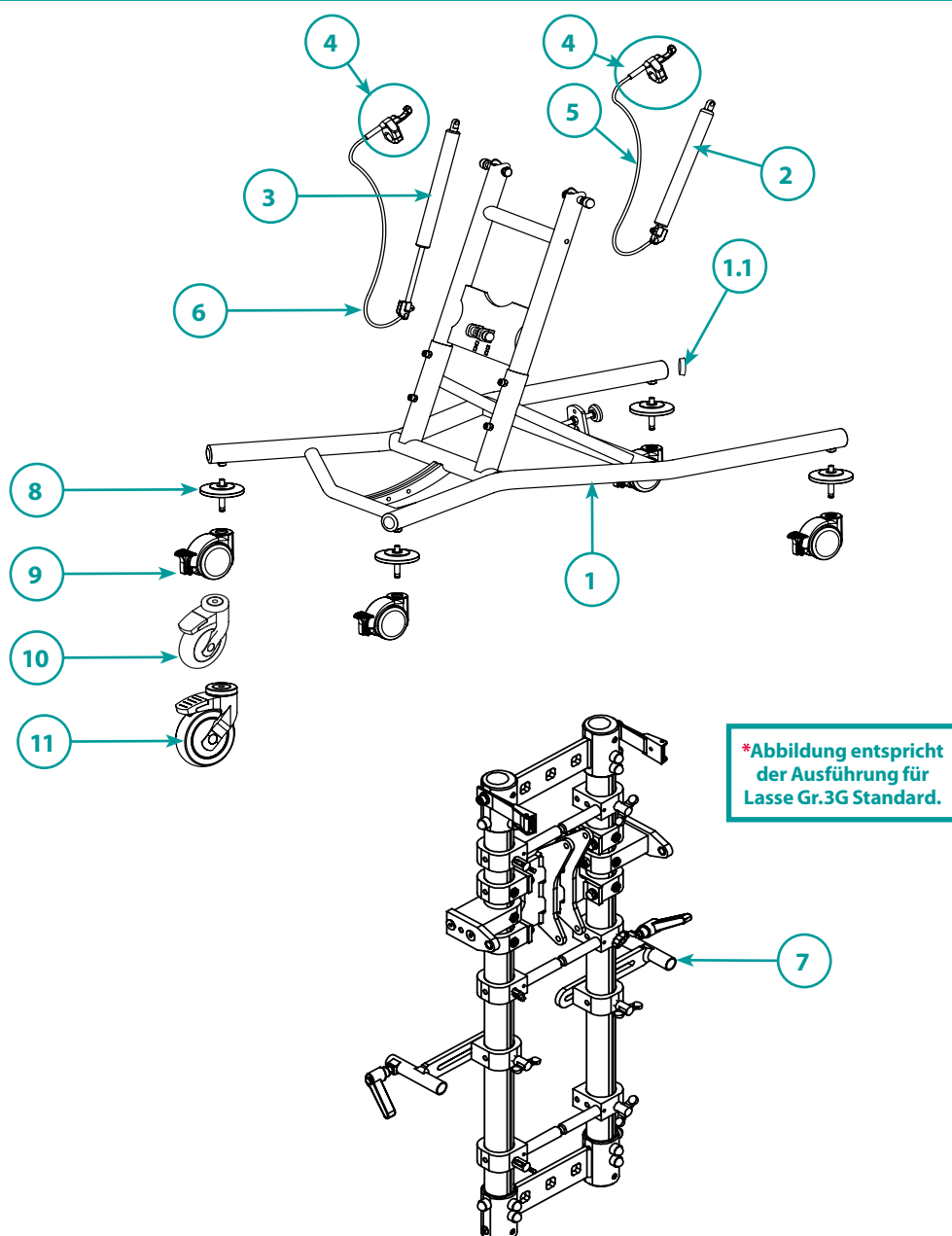


Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 8

06.03.2025

1024163_3.9

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

REHATEC®

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

1.2 Untergestell mit Gasfederverstellung

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1016284-ET	3G	Untergestell mit Einschub und Aufnahmeplatte, ohne weiteres Zubehör
	1.1	Stück	1007622	3G	Gleiter/Stopfen für Untergestell
	2	Stück	1016349	3G	Gasdruckfeder vorne, 1150 N
	3	Stück	1016314	3G	Gasdruckfeder hinten, 600 N
	4	Stück	1000862	3G	Auslösehebel für Gasdruckfeder
	5	Stück	1008176	3G	Bowdenzug für Gasdruckfeder, vorne (1,10 m)
	6	Stück	1008173	3G	Bowdenzug für Gasdruckfeder, hinten (1 m)
	7	Satz	1023584	3G	Beinteil Standard (KIT)
	7.1.	Satz	1023584-A	3G	Beinteil für Abduktionsverstellung (KIT)
	7.2.	Satz	1023584-G	3G	Beinteil für geteilte Beinführung ohne Abduktionsverstellung (KIT)
	7.3.	Satz	1023584-G-A	3G	Beinteil für geteilte Beinführung mit Abduktionsverstellung (KIT)
	8	Satz	1018607-ET	3G	Wand- und Möbelschutz für 75 mm Rollen
	8	Satz	1022293-ET	3G	Wand- und Möbelschutz für 100 mm Rollen
	8	Satz	1018698-ET	3G	Wand- und Möbelschutz für 125 mm Rollen
	9	Stück	1005593-ET	3G	Transportrolle 75 mm mit Feststeller
	10	Stück	1022143-ET	3G	Transportrolle 100 mm mit Totalfeststellung
	11	Stück	1014946-ET	3G	Transportrolle 125 mm mit Feststeller

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, **Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99**, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 9

06.03.2025

1024163_3.9

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse



Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

1.3. Untergestell mit elektrischer Höhen- und Neigungsverstellung

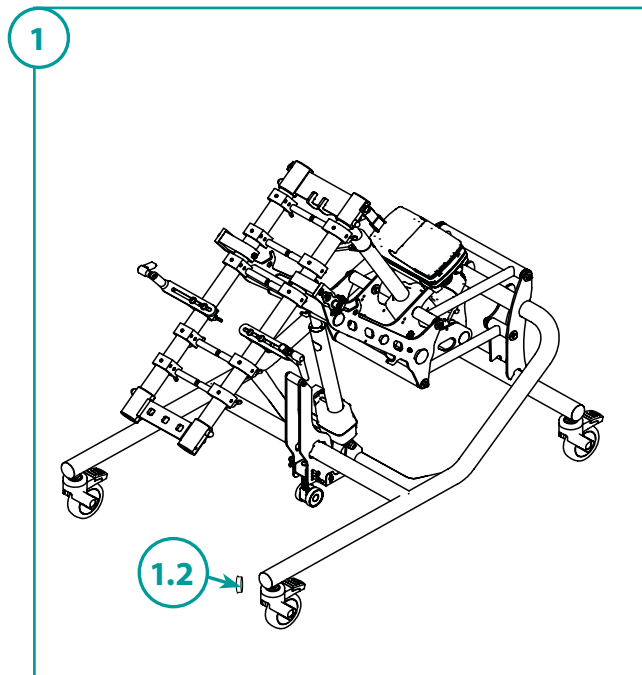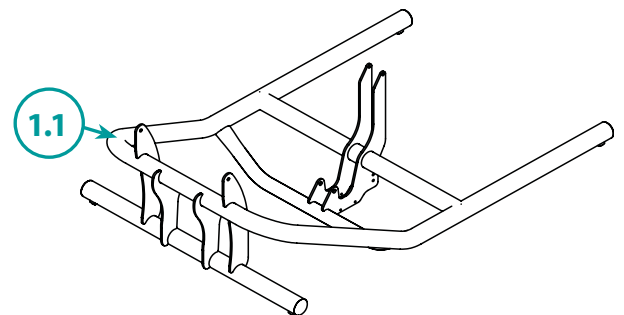

*Abbildung entspricht der Ausführung für Lasse Gr.3 Standard.

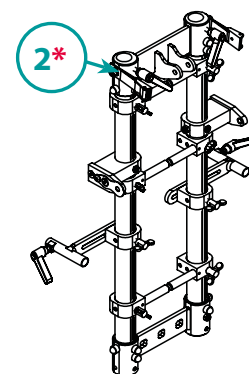


Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

REHATEC®

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

1.3. Untergestell mit elektrischer Höhen- und Neigungsverstellung

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1024412-KIT	3	"Umrüst-KIT Untergestell mit elektrischer Höhen- und Neigungsverstellung bestehend aus: - Untergestell für Höhenverstellung, elektrische Höhenverstellung inkl. Akku für Lasse, Gr. 3 (bitte RAL-Nummer angeben) - Lenkrollen 100 mm mit Totalfeststellung (nicht mit Transportrollen 75 mm und 125 mm möglich) - Umrüstung (Demontage/Montage) - Sichtkontrolle - Einstellung auf Körpergröße (falls angegeben) zzgl. Rückversand Hinweis: Die Umrüstung muss im Werk Schönau erfolgen! Der Lasse Gr. 3G kann nicht mit einer Höhenverstellung realisiert werden."
	1	Stück	1024925-KIT	4	"Umrüst-KIT Untergestell mit elektrischer Höhen- und Neigungsverstellung bestehend aus: - Untergestell für Höhenverstellung, elektrische Höhenverstellung inkl. Akku für Lasse, Gr. 3 (bitte RAL-Nummer angeben) - Lenkrollen 100 mm mit Totalfeststellung (nicht mit Transportrollen 75 mm und 125 mm möglich) - Umrüstung (Demontage/Montage) - Sichtkontrolle - Einstellung auf Körpergröße (falls angegeben) zzgl. Rückversand Hinweis: Die Umrüstung muss im Werk Schönau erfolgen! Der Lasse Gr. 3G kann nicht mit einer Höhenverstellung realisiert werden."
	1.1.	Stück	1022954	3/4	Untergestell für Höhenverstellung (für vorhandenes Lasse Modell 2020)
	1.2.	Stück	1023433	3/4	Gleiter/Stopfen für Untergestell
	2	Satz	1022983	3	Beinteil Standard (KIT) für Beckenmitte unter 65 cm
		Satz	1022983-C	3	Beinteil Standard (KIT) für Beckenmitte über 65 cm
		Satz	1023013	4	Beinteil Standard (KIT) für Beckenmitte über 65 cm
		Satz	1022983-A	3	Beinteil für Abduktionsverstellung (KIT) für Beckenmitte unter 65 cm
		Satz	1022983-C-A	3	Beinteil für Abduktionsverstellung (KIT) für Beckenmitte über 65 cm
		Satz	1023013-A	4	Beinteil für Abduktionsverstellung (KIT) für Beckenmitte über 65 cm
		Satz	1022983-G	3	Beinteil für geteilte Beinführung ohne Abduktionsverstellung
		Satz	1023013-G	4	Beinteil für geteilte Beinführung ohne Abduktionsverstellung
		Satz	1022983-G-A	4	Beinteil für geteilte Beinführung mit Abduktionsverstellung (KIT)
		Satz	1023013-G-A	4	Beinteil für geteilte Beinführung mit Abduktionsverstellung (KIT)

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 11

06.03.2025

1024163_3.9

1. Untergestell

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse


Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

1.3. Untergestell mit elektrischer Höhen- und Neigungsverstellung

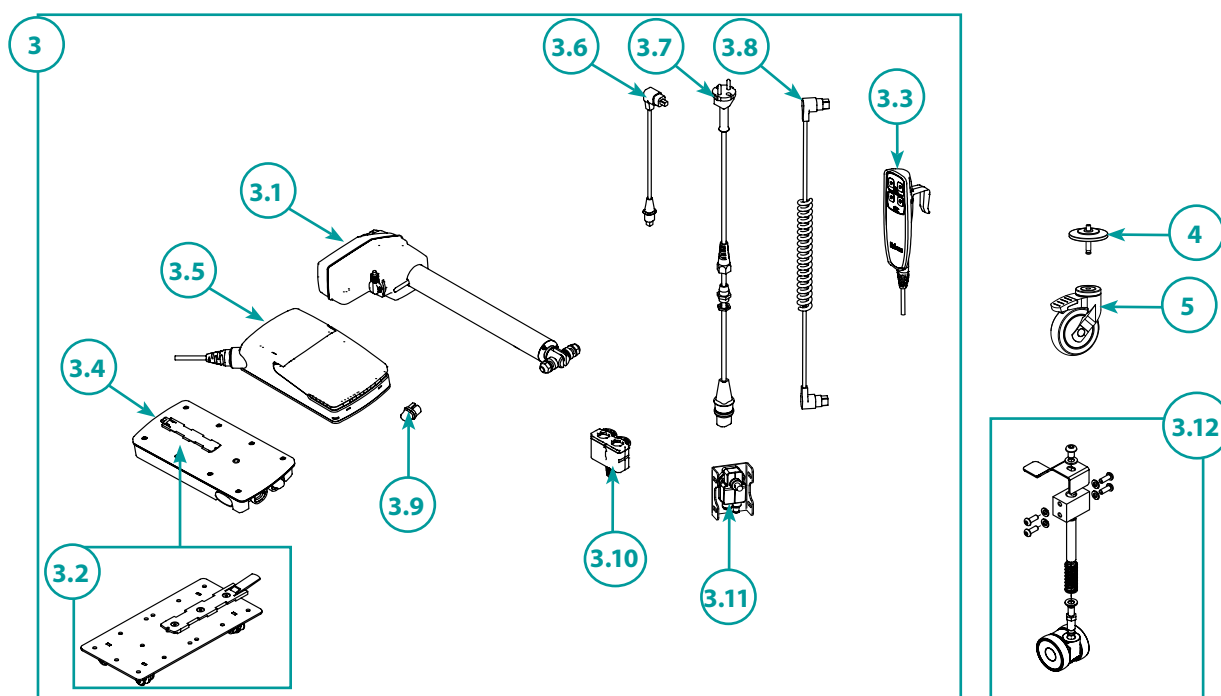

1.3. Untergestell mit elektrischer Höhen- und Neigungsverstellung

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	3	Stück	1027085	3/4	Elektrische Höhenverstellung KIT bestehend aus allen nachfolgend aufgeführten Komponenten:
	3.1.	Satz	1022978	3/4	Motor KIT
	3.2.	Satz	1024414	3/4	Halterung KIT
	3.3.	Satz	1022992	3/4	Handscharter mit Kabel
	3.4.	Satz	1026018	3/4	Akku
	3.5.	Stück	1022940-3	3/4	Steuerung
	3.6.	Stück	1025250	3/4	Batterieanschlußkabel
	3.7.	Stück	1023363	3/4	Netzkabel
	3.8.	Stück	1023383	3/4	Motorkabel
	3.9.	Stück	1023429	3/4	Blindstopfen
	3.10.	Stück	1024389	3/4	Verteilerbox
	3.11.	Satz	1024151	3/4	Endschalter (KIT)
	3.12.	Satz	1024152	3/4	Druckrolle (KIT)
	4	Stück	1022293-ET	3/4	Wand- und Möbelschutz für 100 mm Rollen
	5	Stück	1022143-ET	3/4	Transportrolle 100 mm mit Totalfeststellung

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

2. Schiebebogen

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

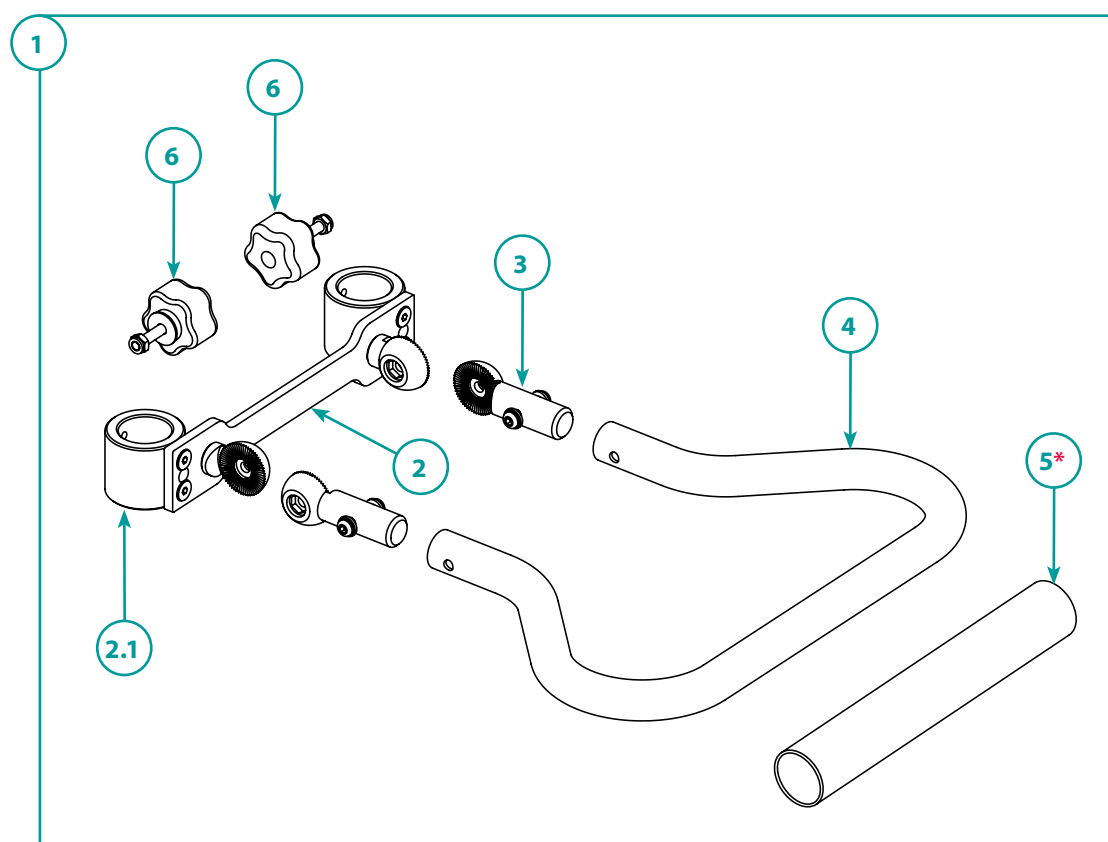

*Es wird 1 Stück benötigt

2. Schiebebogen

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1010846-ET	3 / 4	Schiebebogen komplett für Lasse ohne Höhenverstellung
	1	Stück	1010846-H-ET	3 / 4	Schiebebogen komplett für Lasse mit Höhenverstellung
	1	Stück	1010846-G-ET	3G	Schiebebogen komplett für Lasse mit Gasfederverstellung
	2	Stück	1018791	3 / 4	Schiebebogenhalterung inkl. Buchsen
	2.1	Stück	1010844	3 / 4	Buchse für Schiebebogenhalterung Lasse Gr. 3+4
	3	Stück	1004194	3 / 4	Rastergelenk Schiebebogen
	4	Stück	1001533	3 / 4	Schiebebogen (Biegeteil)
	5	Stück	1019336	3 / 4	Schiebebogenüberzug PVC (260 mm)*
	6	Stück	1003309	3 / 4	Fünfsterngriff - Soft M6x25

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

3. Rücken

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

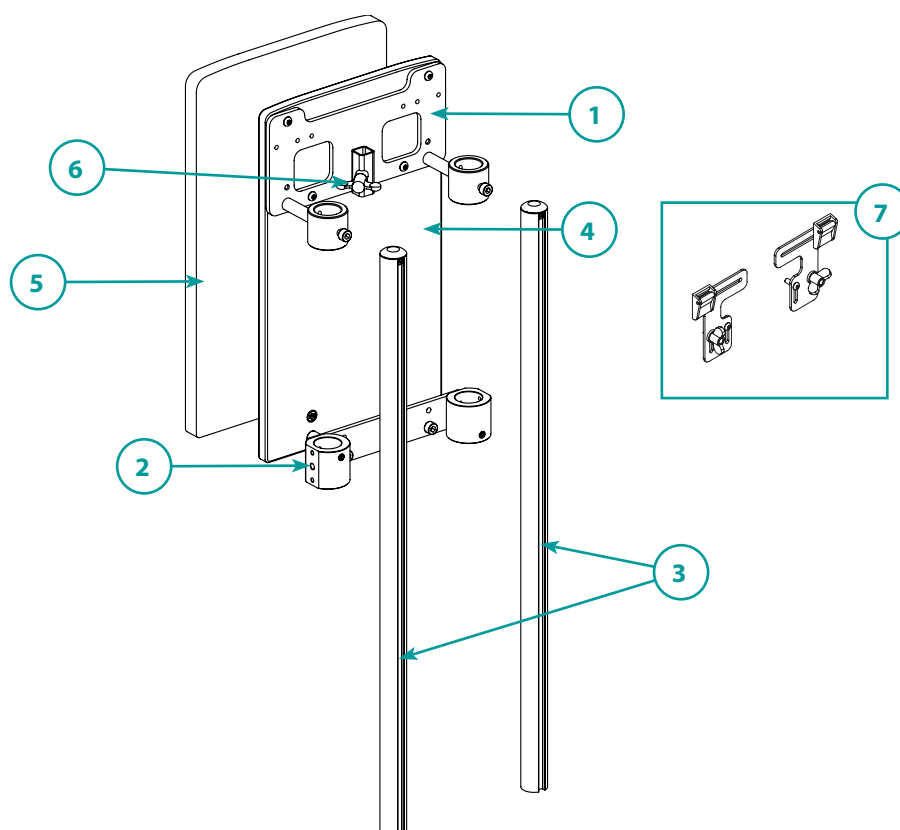

3. Rücken

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1006116-H	3 / 4	Rückenaufnahme oben (ohne Holz) inkl. Schraubenmaterial
	2	Stück	1018766	3 / 4	Rückenaufnahme unten
	3	Stück	1008201	3	Rückenrohre Alu-Profil
	3	Stück	1010452	4	Rückenrohre Alu-Profil
	4	Stück	1006119	3	Rückenauflage (Holz)
	4	Stück	1010192	4	Rückenauflage (Holz)
	5	Stück	1007010	3	Polster für Rückenauflage
	5	Stück	1010262	4	Polster für Rückenauflage
		Stück	1022446	3	Bezug für Rückenauflage
		Stück	1022450	4	Bezug für Rückenauflage
	6	Stück	1005701	3 / 4	Miniwing M6x15
	7	Paar	1025893	3 / 4	Schultergurtführung, höhen- und breitenverstellbar - KIT

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

4. Armauflagen

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung




Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

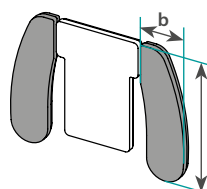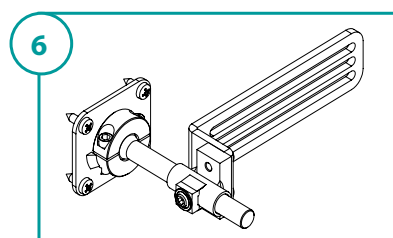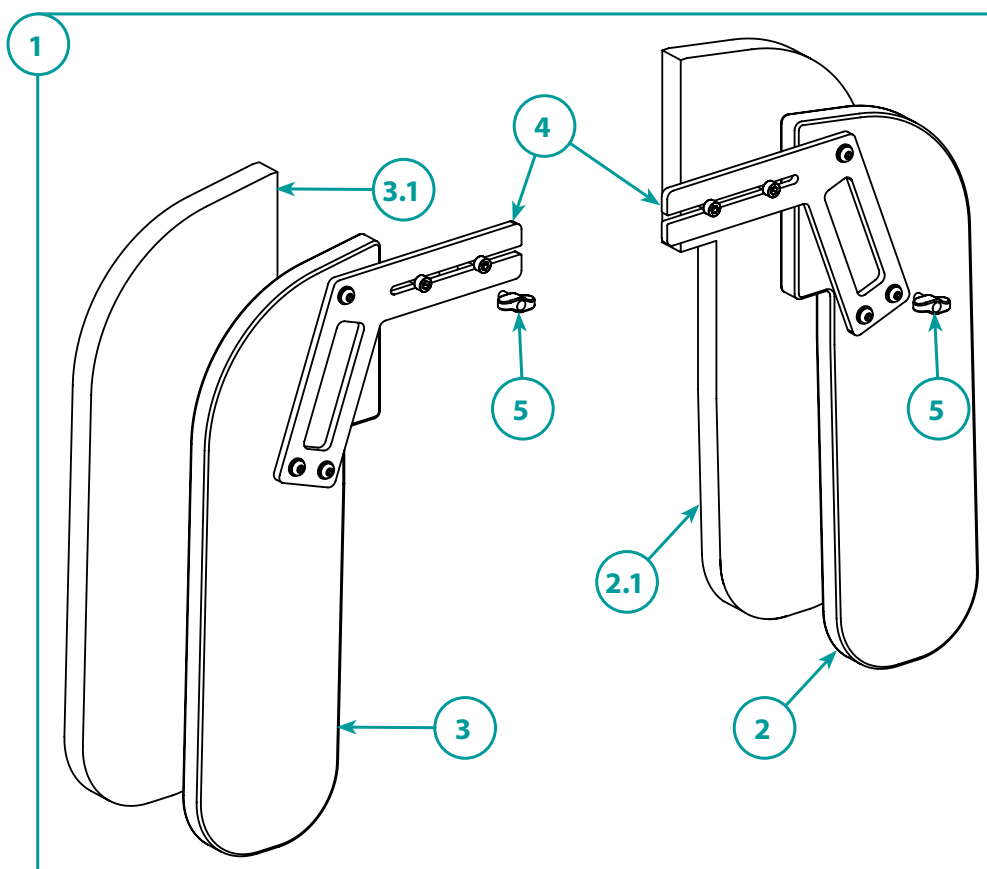

Lasche verlängert ab einer Brustbreite von 37 cm erforderlich!

Armauflage, abnehmbar			
Code	Für Gr.	a	b
1025518	3 ⁽¹⁾	42 cm	16 cm
1025519	4	37 cm	16 cm

Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

4. Armauflagen

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

4. Armauflagen

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1025518-ET	3	Armauflagen abnehmbar komplett inkl. Holz, Lasche, Miniwing, Polster und Bezug*
	1	Stück	1025519-ET	4	Armauflagen abnehmbar komplett inkl. Holz, Lasche, Miniwing, Polster und Bezug

*Ab einer Beckenbreite (f) von 30 cm, werden bei Lasse Gr. 3 die Armauflagen von Gr. 4 montiert

	2	Stück	1006120	3	Armauflage (Holz), rechts
	2	Stück	1010012	4	Armauflage (Holz), rechts
	3	Stück	1006124	3	Armauflage (Holz), links
	3	Stück	1010015	4	Armauflage (Holz), links
	2.1	Stück	1007008	3	Polster Armauflage rechts
	2.1	Stück	1001780	4	Polster Armauflage rechts
		Stück	1020789	3	Bezug Armauflage rechts
		Stück	1022451	4	Bezug Armauflage rechts
	3.1	Stück	1007008	3	Polster Armauflage links
	3.1	Stück	1001780	4	Polster Armauflage links
		Stück	1020787	3	Bezug Armauflage links
		Stück	1022452	4	Bezug Armauflage links
	4	Stück	1001791	3 / 4	Lasche Armauflage links/rechts inkl. Schraubenmaterial
	4.1	Stück	1010871-ET	3 / 4	Lasche Armauflage links/rechts verlängert inkl. Schraubenmaterial**

**Ab einer Brustkorbbreite von 37 cm erforderlich und nur in Verbindung mit Code 1013993 - Seite 11 - möglich

	5	Stück	1005701	3 / 4	Miniwing M6x15
	6	Paar	1025645-ET	3 / 4	3D-Verstellung

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

5. Seitenführungspelotten

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller


Datum

Seriennummer

Kommission

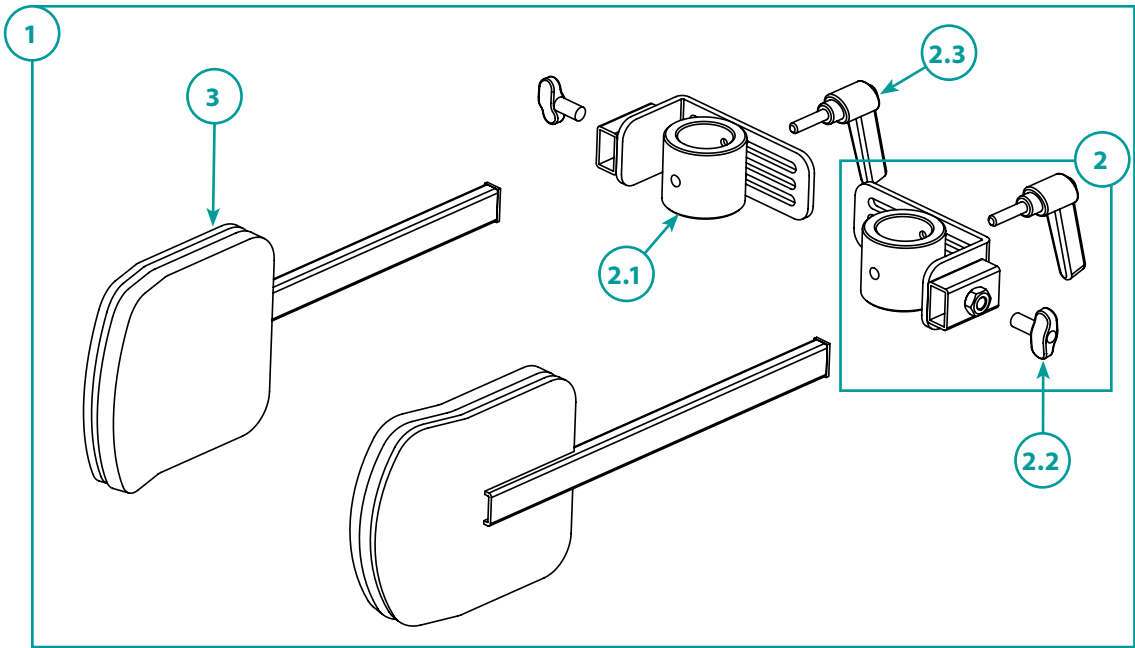

Seitenführungspelotten, abnehmbar			
Code	a	b	c
1013168	12 cm	14 cm	22 - 36 cm

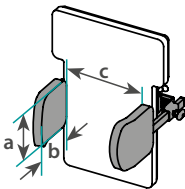

5.1 Seitenführungspelotten, abnehmbar					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Paar	1013168-ET	3 / 4	Seitenführungspelotten abnehmbar komplett inkl. Halterung, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Halter, Polster und Bezug
	2	Stück	1018786	3 / 4	Halterung abnehmbar (steckbar), rechts inkl. Haltebuchse und Schraubenmaterial
	2	Stück	1018786	3 / 4	Halterung abnehmbar (steckbar), links inkl. Haltebuchse und Schraubenmaterial
	2.1	Stück	1006844	3 / 4	Haltebuchse Rücken
	2.2	Stück	1005054	3 / 4	Miniwing M8x15
	2.3	Stück	1007656	3 / 4	Klemmhebel M6x25
	3	Stück	1018787	3 / 4	Seitenführungspelotte inkl. gerader Halter für Brustkorbbreite 22-36 cm, Blech und Polster - ohne Bezug
		Stück	1020790	3 / 4	Bezug für Seitenführungspelotte rechts
		Stück	1021543	3 / 4	Bezug für Seitenführungspelotte links

5. Seitenführungspelotten

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum


Seriennummer

Kommission

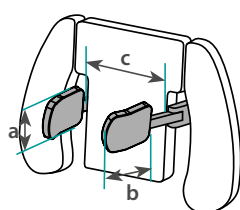

Seitenführungspelotten,
abschwenkbar

Code	a	b	c
1025241	12 cm	14 cm	22 - 36 cm

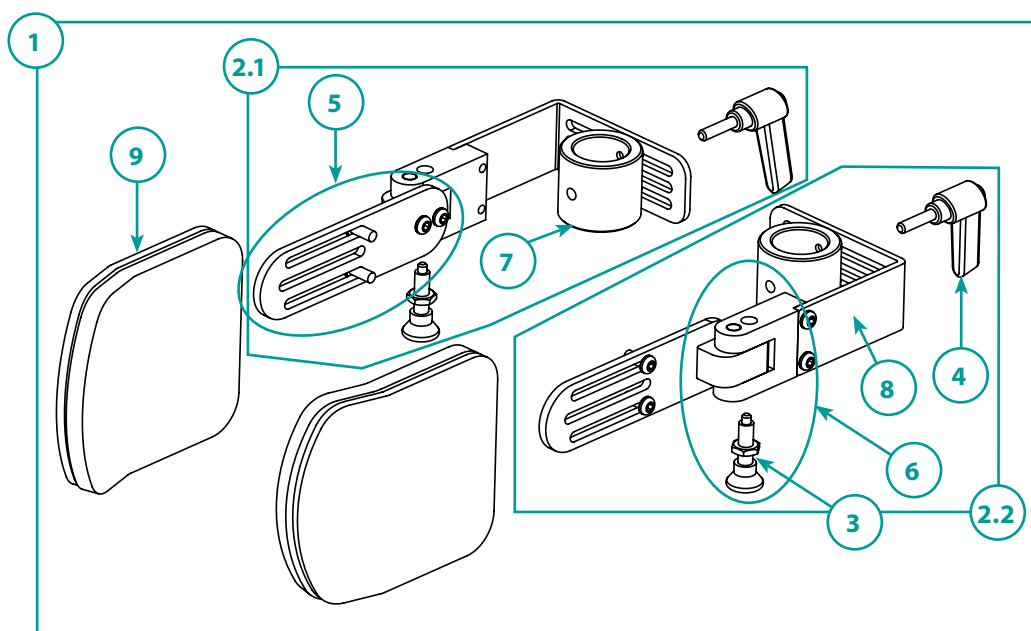

5.2 Seitenführungspelotten, abschwenkbar

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Paar	1025241-ET	3 / 4	Seitenführungspelotten abschwenkbar komplett inkl. Halterung, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Halter, Polster und Bezug
	2.1	Stück	1018790	3 / 4	Halterung abschwenkbar gerade komplett , rechts inkl. Schraubenmaterial
	2.2	Stück	1018789	3 / 4	Halterung abschwenkbar gerade komplett , links inkl. Schraubenmaterial
	3	Stück	1007576	3 / 4	Arretierbolzen/Zugschnäpper Form B
	4	Stück	1007656	3 / 4	Klemmhebel M6x25
	5	Stück	1001827	3 / 4	Seitenführungspelottenhalter gerade inkl. Schraubenmaterial für Brustkorbbreite 22-36 cm
		Stück	1013993	3 / 4	Seitenführungspelottenhalter abgewinkelt inkl. Schraubenmaterial für Brustkorbbreite 30-44 cm
	6	Stück	1007854	3 / 4	Abschwenkmechanismus inkl. Zugschnäpper
	7	Stück	1006844	3 / 4	Haltebuchse Rücken
	8	Stück	1006848	3 / 4	Winkel 90° für Seitenführungspelotten
	9	Stück	1024713	3 / 4	Seitenführungspelotte inkl. Blech und Polster - ohne Bezug
		Stück	1020790	3 / 4	Bezug für Seitenführungspelotte rechts
		Stück	1021543	3 / 4	Bezug für Seitenführungspelotte links

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

6. Kopfstütze

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller


Datum

Seriennummer


Kommission

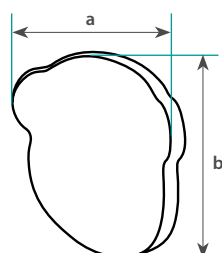

Kopfstütze „Bär“	
a	b
24 cm	26 cm

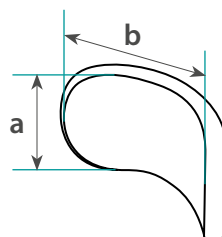

Kopfstütze, Muschelform			
Code	Gr.	a	b
1018336	1	16 cm	28 cm
1018337	2	20 cm	33 cm

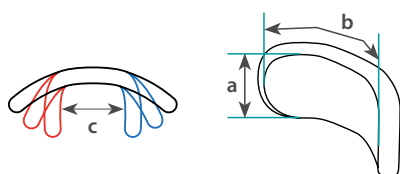

Code	Gr.	a	b	c
1018338	1	10 cm	42 cm	10 cm
1018343	2	14 cm	51 cm	12 cm

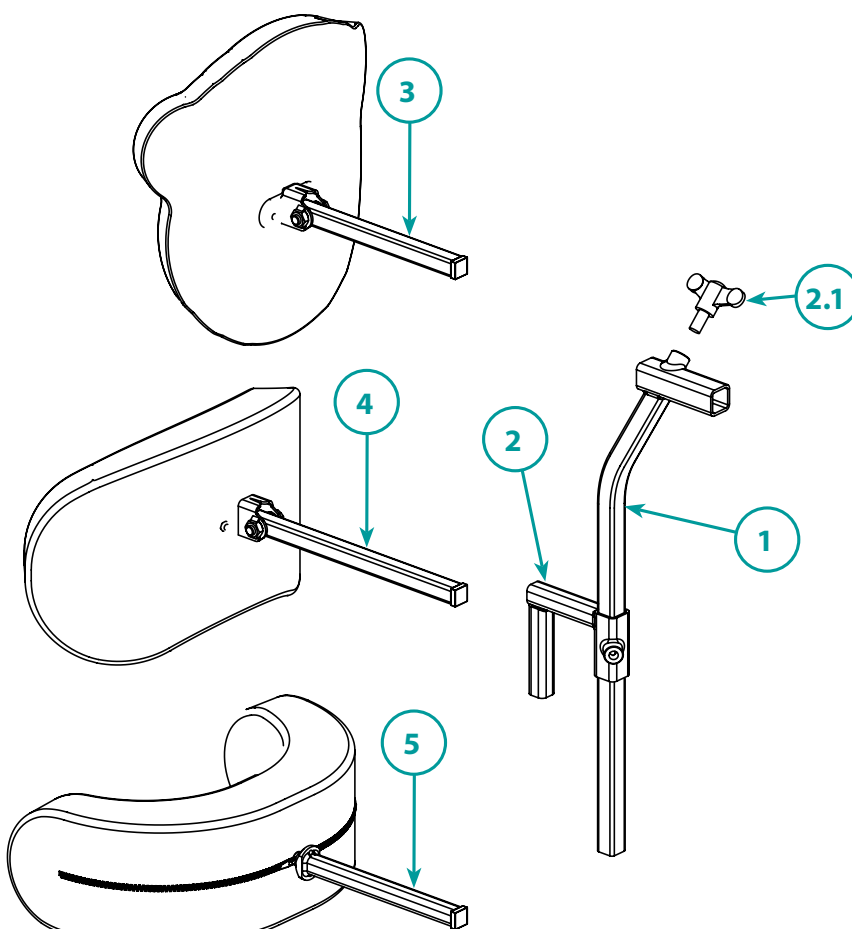


Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

6. Kopfstütze

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

REHATEC®

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

6. Kopfstütze					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1005395	3 / 4	Kopfstützenhalter abgekröpft inkl. Flügelschraube, chrom
	2	Stück	1007669-ET	3 / 4	Rückesetzadapter inkl. Flügelschraube
	2.1	Stück	1007657	3 / 4	Flügelschraube M8x15
	3	Stück	1007201-ET	3 / 4	Kopfstütze Bär inkl. Winkel, Tiefenverstellrohr, Blech, Polster und Bezug
		Stück	1021520	3 / 4	Bezug Kopfstütze Bär
	4	Stück	1018336-ET	3 / 4	Kopfstütze muschelform inkl. 1 Winkel, Tiefenverstellrohr, Blech, Polster und Bezug
		Stück	1017676	3 / 4	Bezug Kopfstütze muschelform Gr. 1
		Stück	1018337-ET	3 / 4	Kopfstütze muschelform inkl. 2 Winkel, Tiefenverstellrohr, Blech, Polster und Bezug
		Stück	1016743	3 / 4	Bezug Kopfstütze muschelform Gr. 2
	5	Stück	1018345-ET	3 / 4	Kopfstütze verstellbar Gr. Mini inkl. Tiefenverstellrohr mit Kugelkopf, Blech, Polster und Bezug
		Stück	1018344	3 / 4	Bezug verstellbare Kopfstütze Gr. Mini, schwarz Neopren
	5	Stück	1018338-ET	3 / 4	Kopfstütze verstellbar Gr. 1 inkl. Tiefenverstellrohr mit Kugelkopf, Blech, Polster und Bezug
		Stück	1017784	3 / 4	Bezug verstellbare Kopfstütze Gr. 1, schwarz Neopren
	5	Stück	1018343-ET	3 / 4	Kopfstütze verstellbar Gr. 2 inkl. Tiefenverstellrohr mit Kugelkopf, Blech, Polster und Bezug
		Stück	1017787	3 / 4	Bezug verstellbare Kopfstütze Gr. 2, schwarz Neopren

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 20

06.03.2025

1024163_3.9

7. Therapietisch

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

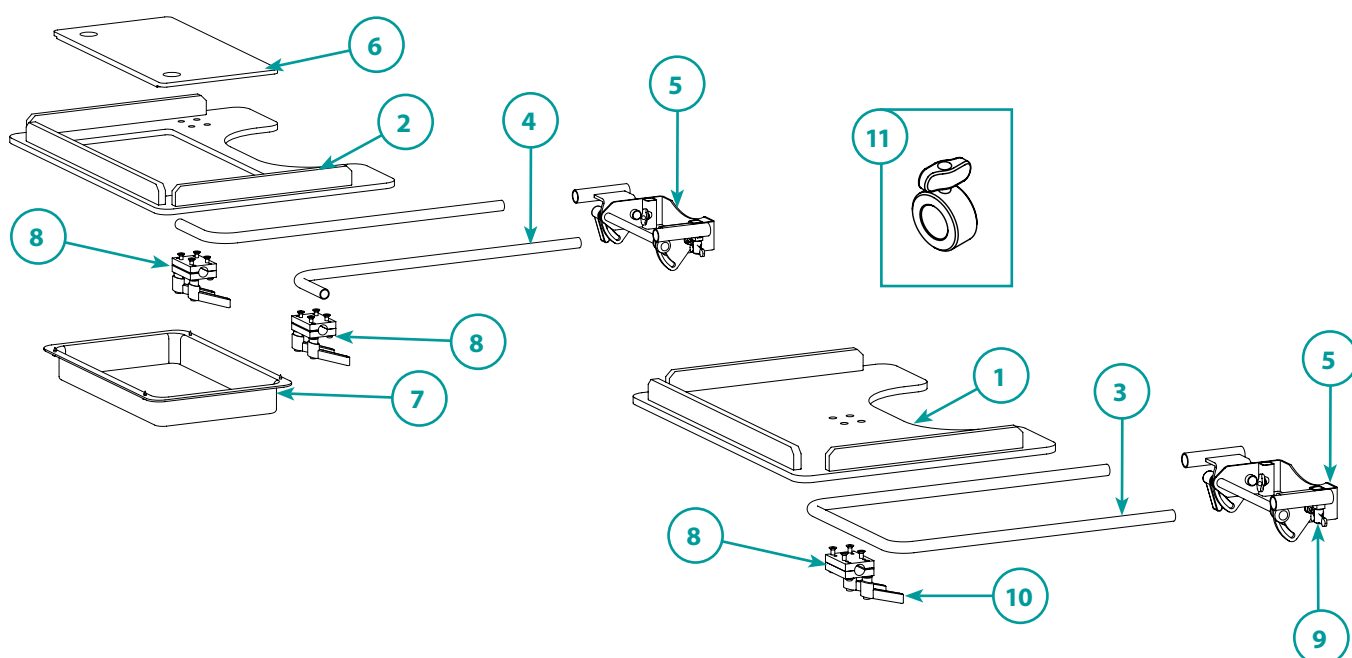

7. Therapietisch					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1007227-ET	3	Therapietisch mit Tischumrandung - ohne Zubehör*
	1	Stück	1007378-ET	4	Therapietisch mit Tischumrandung - ohne Zubehör
	2	Stück	1009915-ET	3	Therapietisch mit Muldenausschnitt und Tischumrandung*
	2	Stück	1010529-ET	4	Therapietisch mit Muldenausschnitt und Tischumrandung
	3	Stück	1001836	3	Bügel für Standardtisch*
	3	Stück	1007380	4	Bügel für Standardtisch
	4	Stück	1016841	3 / 4	Geteilter Bügel für Therapietisch mit Mulde (Bei Verwendung einer Therapiemulde werden 2 Stück benötigt)
	5	Stück	1018528	3	Tischhalterung komplett*
	5	Stück	1007586	4	Tischhalterung komplett
*Ab einer Beckenbreite (f) von 30 cm, wird bei Lasse Gr. 3 der Therapietisch von Gr. 4 montiert					
	6	Stück	1009917	3 / 4	Deckel für Therapiemulde
	7	Stück	1004572	3 / 4	Therapiemulde
	8	Stück	1018767	3 / 4	Tischbügel-Aufnahme inkl. Schraubenmaterial (Bei Verwendung einer Therapiemulde werden 2 Stück benötigt)
	9	Stück	1005188	3 / 4	Flügelschraube M8x12
	10	Stück	1007549	3 / 4	Klemmhebel M8x25
	11	Stück	1023148-ET	3 / 4	Anschlag (Stelling) für Tischtiefenverstellung KIT

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

8. Beckenplatte

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender/Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse


Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

8.1 Beckenplatte, geteilt

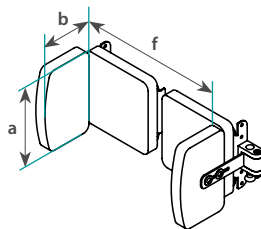

abgewinkelte Pelottenhalter 50 mm

Code	a	b	f
1026222-A50	19 cm	12 cm	20 - 25 cm

abgewinkelte Pelottenhalter 25 mm

Code	a	b	f
1026222-A25	19 cm	12 cm	25 - 30 cm

gerade Pelottenhalter

Code	a	b	f
1026222	19 cm	12 cm	30 - 35 cm

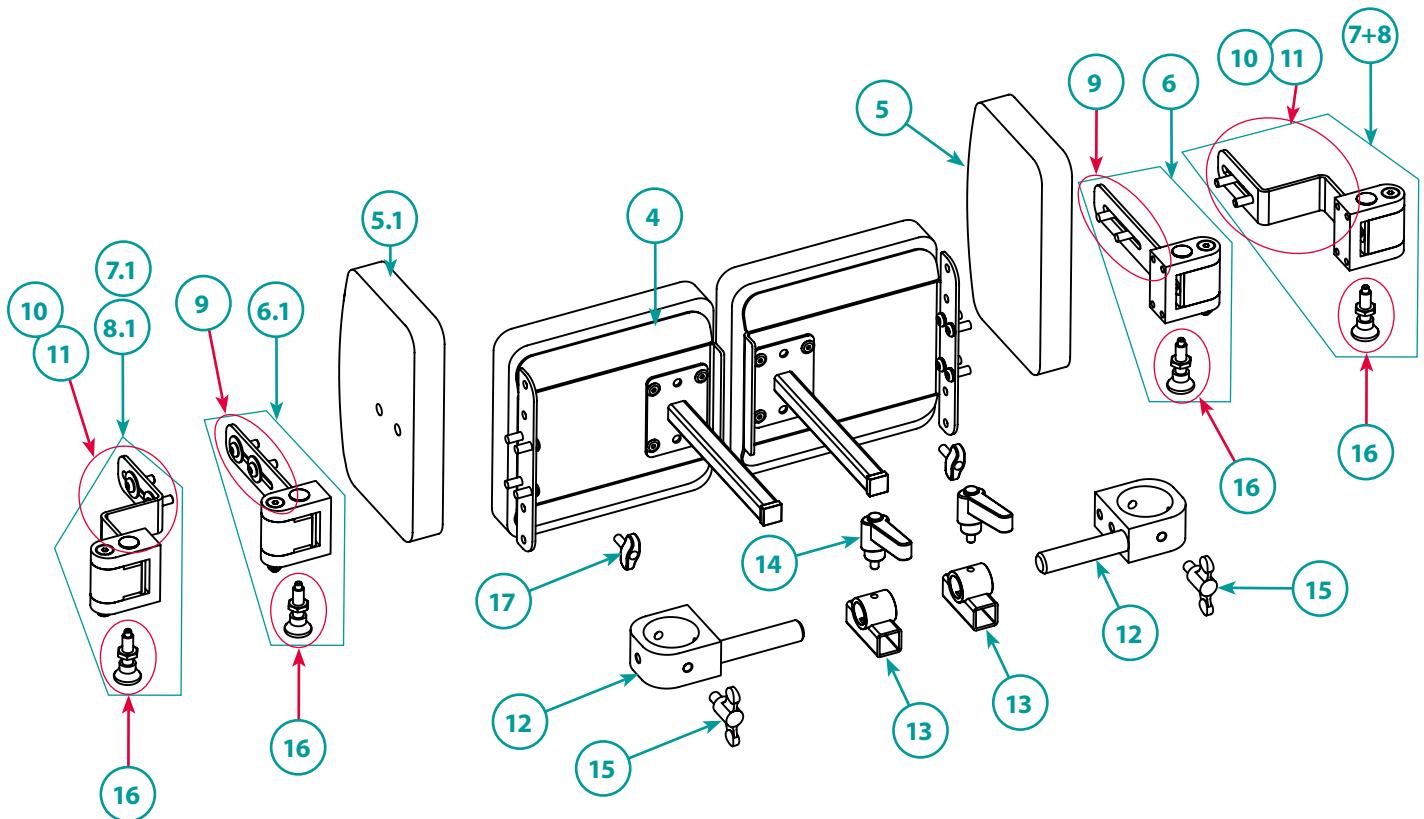
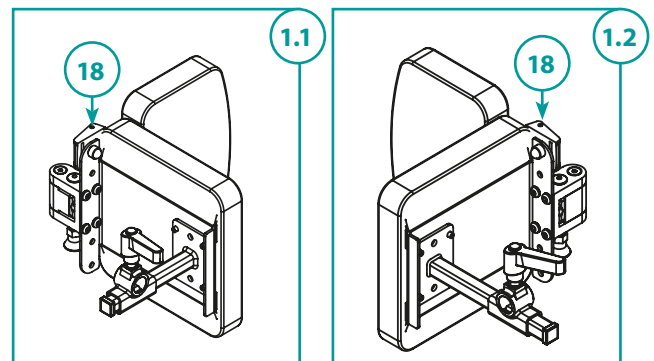


Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

8. Beckenplatte

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

8.1 Beckenplatte, geteilt

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1.1.	Stück	1007530	3 / 4	Beckenplatte geteilt, mit abschwenkbaren Beckenpelotten, gerader Pelottenhalter komplett rechts*
	1.2.	Stück	1007531	3 / 4	Beckenplatte geteilt, mit abschwenkbaren Beckenpelotten, gerader Pelottenhalter komplett links*
		Stück	1007530-A25	3 / 4	Beckenplatte geteilt, mit abschwenkbaren Beckenpelotten, abgewinkelter Pelottenhalter 25 mm komplett rechts*
		Stück	1007531-A25	3 / 4	Beckenplatte geteilt, mit abschwenkbaren Beckenpelotten, abgewinkelter Pelottenhalter 25 mm komplett links*
		Stück	1007530-A50	3 / 4	Beckenplatte geteilt, mit abschwenkbaren Beckenpelotten, abgewinkelter Pelottenhalter 50 mm komplett rechts*
		Stück	1007531-A50	3 / 4	Beckenplatte geteilt, mit abschwenkbaren Beckenpelotten, abgewinkelter Pelottenhalter 50 mm komplett links*

***inkl. Grundplatte, Halter, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnallen, Blech, Polster und Bezug**

	4	Stück	1018768	3 / 4	Beckenplatte geteilt Unterteil, links/rechts komplett inkl. Halterung, Blech und Polster - ohne Bezug
		Stück	1021560	3 / 4	Bezug Beckenplatte Unterteil
	5	Stück	1018769	3 / 4	Abschwenkbare Beckenpelotte rechts*
	5.1	Stück	1018769	3 / 4	Abschwenkbare Beckenpelotte links*

***inkl. Blech, Polster - ohne Halter und Bezug**

		Stück	1021552	3 / 4	Bezug Beckenpelotte für Beckenplatte, rechts
		Stück	1020791	3 / 4	Bezug Beckenpelotte für Beckenplatte, links
	6	Stück	1018771	3 / 4	Abschwenkbarer Pelottenhalter gerade, rechts komplett
	6.1	Stück	1018770	3 / 4	Abschwenkbarer Pelottenhalter gerade, links komplett
	7	Stück	1024250	3 / 4	Abschwenkbarer Pelottenhalter, abgewinkelt 25 mm, rechts komplett
	7.1	Stück	1024251	3 / 4	Abschwenkbarer Pelottenhalter, abgewinkelt 25 mm, links komplett
	8	Stück	1018773	3 / 4	Abschwenkbarer Pelottenhalter, abgewinkelt 50 mm, rechts komplett
	8.1	Stück	1018772	3 / 4	Abschwenkbarer Pelottenhalter, abgewinkelt 50 mm, links komplett
	9	Stück	1000138	3 / 4	Pelottenhalter gerade inkl. Schraubenmaterial
	10	Stück	1024245	3 / 4	Pelottenhalter abgewinkelt, 25 mm inkl. Schraubenmaterial
	11	Stück	1008652	3 / 4	Pelottenhalter abgewinkelt, 50 mm inkl. Schraubenmaterial
	12	Stück	1007527	3 / 4	Aufnahme für Beckenpelottenhalter inkl. Flügelschraube
	13	Stück	1000370	3 / 4	Klemmverstellung / Aufnahme Beckenplatte inkl. Klemmhebel M8x15
	14	Stück	1014668	3 / 4	Klemmhebel M8x15
	15	Stück	1005188	3 / 4	Flügelschraube M8x16
	16	Stück	1007576	3 / 4	Arretierbolzen/Zugschnäpper Form B
	17	Stück	1005054	3 / 4	Miniwing M8x15
	18	Stück	1005222	3 / 4	Klappschnalle 25 mm

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

8. Beckenplatte

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

8.2 Beckenplatte, durchgehend mit abschwinkbaren Beckenpelotten

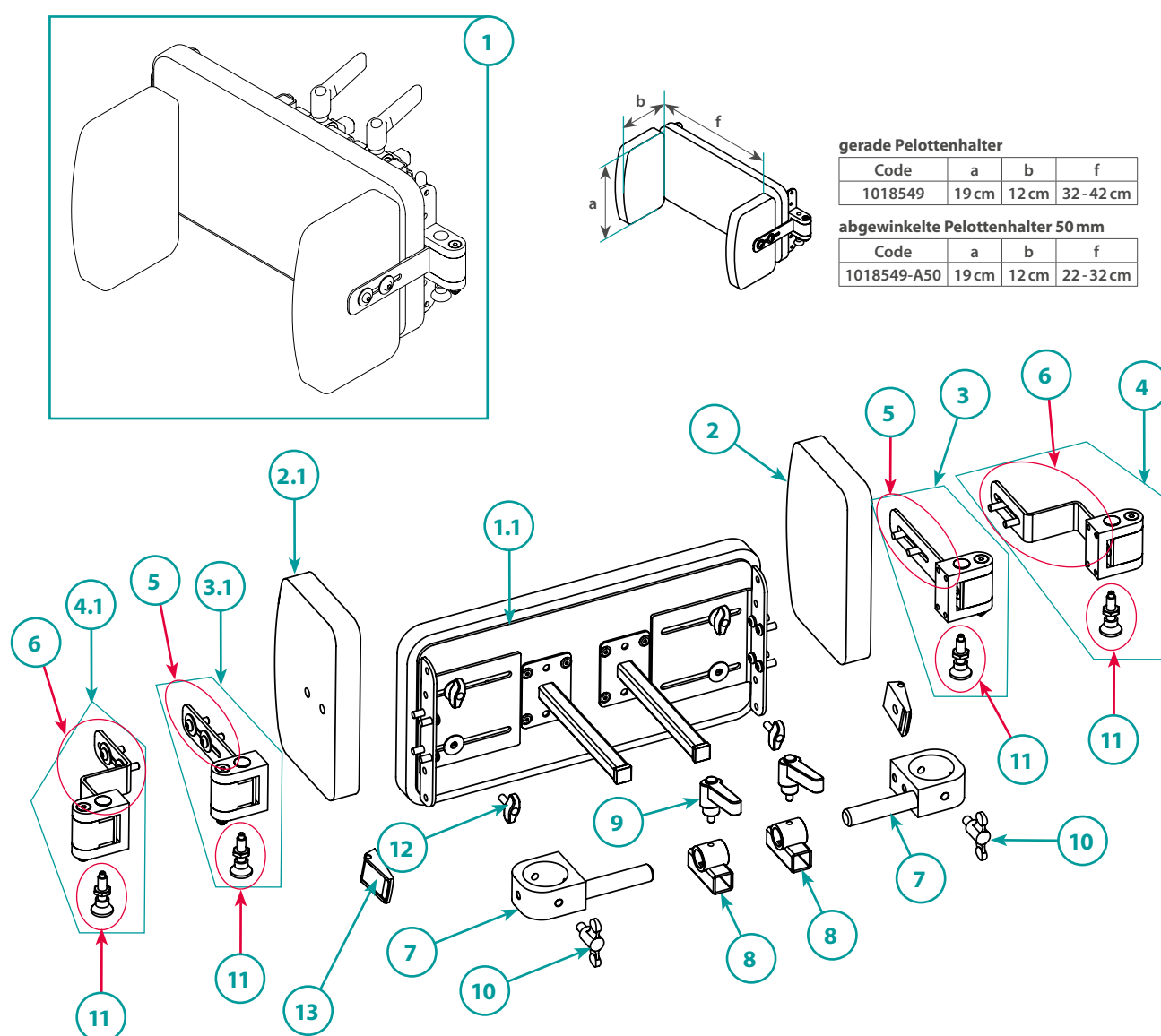


Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

8. Beckenplatte

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

Beckenplatte mit abschwenkbaren Beckenpelotten

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1018549-ET	3 / 4	Beckenplatte durchgehend mit abschwenkbaren Beckenpelotten, gerade Pelottenhalter komplett*
	1	Stück	1018549-A50-ET	3 / 4	Beckenplatte durchgehend mit abschwenkbaren Beckenpelotten, abgewinkelte Pelottenhalter 50 mm komplett*

* inkl. Grundplatte, Halterung, Schrauben- und Befestigungsmaterial, Klappschnallen, Blech, Polster und Bezug

	1.1	Stück	1018774	3 / 4	Beckenplatte durchgehend für abschwenkbare Beckenpelotten inkl. Grundplatte, Blech und Polster - ohne Bezug
	2	Stück	1018769	3 / 4	Abschwenkbare Beckenpelotte rechts inkl. Blech und Polster - ohne Bezug
	2.1	Stück	1018769	3 / 4	Abschwenkbare Beckenpelotte links inkl. Blech und Polster - ohne Bezug
		Stück	1021554	3 / 4	Bezug Beckenplatte
		Stück	1021552	3 / 4	Bezug Beckenpelotte für Beckenplatte, rechts
		Stück	1020791	3 / 4	Bezug Beckenpelotte für Beckenplatte, links
	3	Stück	1018771	3 / 4	Abschwenkbarer Pelottenhalter gerade, rechts komplett
	3.1	Stück	1018770	3 / 4	Abschwenkbarer Pelottenhalter gerade, links komplett
	4	Stück	1018773	3 / 4	Abschwenkbarer Pelottenhalter, abgewinkelt 50 mm, rechts komplett
	4.1	Stück	1018772	3 / 4	Abschwenkbarer Pelottenhalter, abgewinkelt 50 mm, links komplett
	5	Stück	1000138	3 / 4	Pelottenhalter gerade inkl. Schraubenmaterial
	6	Stück	1008652	3 / 4	Pelottenhalter abgewinkelt, 50 mm
	7	Stück	1007527	3 / 4	Aufnahme für Beckenpelottenhalter inkl. Flügelschraube
	8	Stück	1000370	3 / 4	Klemmverstellung / Aufnahme Beckenplatte inkl. Klemmhebel M8x15
	9	Stück	1014668	3 / 4	Klemmhebel M8x15
	10	Stück	1007657	3 / 4	Flügelschraube M8x16
	11	Stück	1007576	3 / 4	Arretierbolzen/Zugschnäpper Form B
	12	Stück	1005054	3 / 4	Miniwing M8x15
	13	Stück	1005222	3 / 4	Klappschnalle 25 mm

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9. Beinauflage

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

9.1 Beinauflage, rechts

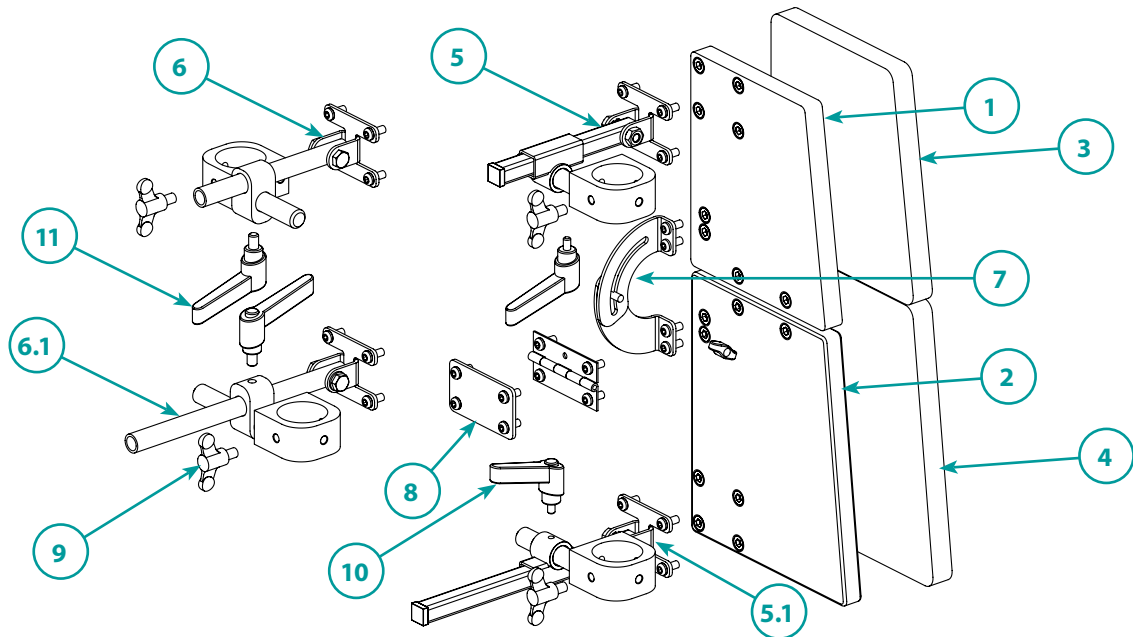


Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9. Beinauflage

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

REHATEC®

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

9.1 Beinauflage, rechts

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1006351	3	Beinteil rechts oben, inkl. Eindrehmuttern
	1	Stück	1010189	3G /4	Beinteil rechts oben, inkl. Eindrehmuttern
	2	Stück	1006357	3/3G /4	Beinteil rechts unten, inkl. Eindrehmuttern
	3	Stück	1007020	3	Polster rechts oben
	3	Stück	1010263	3G /4	Polster rechts oben
	4	Stück	1007021	3/3G /4	Polster rechts unten
		Stück	1022453	3	Bezug Beinteil oben, rechts
		Stück	1022444	3G /4	Bezug Beinteil oben, rechts
		Stück	1022455	3/3G /4	Bezug Beinteil unten, rechts
	5	Stück	1018776	3/3G /4	Vierkanthalter Beinauflagen oben, ohne Abduktion - rechts/links komplett
	6	Stück	1018777	3/3G /4	Rundrohrhalter Beinauflagen oben mit Abduktion - rechts/links komplett
	5.1	Stück	1018778	3 3G /4	Vierkanthalter Beinauflagen unten ohne Abduktion - rechts/links komplett
	6.1	Stück	1018779	3/3G /4	Rundrohrhalter Beinauflagen unten mit Abduktion - rechts/links komplett
		Paar	1025493-P	3	Beinführung winkelverstellbar, komplett für Lasse Gr. 3*
		Paar	1025500-P	3G	Beinführung winkelverstellbar, komplett für Lasse Gr. 3G*
		Paar	1025504-P	4	Beinführung winkelverstellbar, komplett*

*inklusive Beinauflagen (Rechts und links, ohne Bezug und Polster), Scharniere und Kniewinkelverstellung montiert und Befestigungsmaterial

	7	Paar	1024928	3/3G /4	Winkelverstellung - ohne Beinauflagen inkl. Knieverstellung, Scharniere sowie Schrauben und Befestigungsmaterial
		Paar	1025494-P	3	Abduktionsverstellung komplett**
		Paar	1025501-P	3G /4	Abduktionsverstellung komplett**

**inklusive Beinauflagen (rechts und links, ohne Bezug und Polster), Fußhalterungen verlängert, Halterohre und Befestigungsmaterial

	8	Stück	1008649	3/3G /4	Verbindungsplatte für Standardbein ohne Beinführung winkelverstellbar
	9	Stück	1007657	3/3G /4	Flügelschraube M8x15
	10	Stück	1005032	3/3G /4	Klemmhebel M6x10
	11	Stück	1018399	3/3G /4	Klemmhebel M8x12

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 27

06.03.2025

1024163_3.9

9. Beinauflage

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

9.2 Beinauflage, links

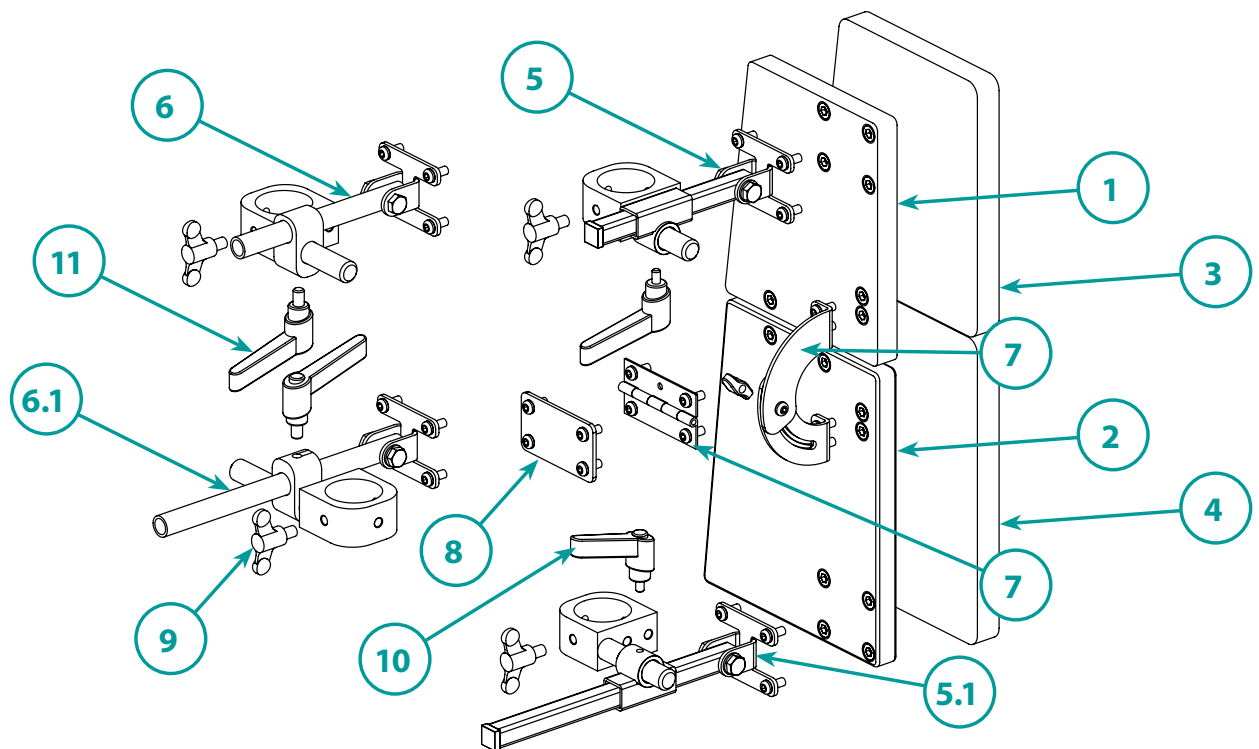


Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

9. Beinauflage

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

REHATEC®

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

9.2 Beinauflage, links

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1006358	3	Beinteil links oben, inkl. Eindrehmuttern
	1	Stück	1010191	3G/4	Beinteil links oben, inkl. Eindrehmuttern
	2	Stück	1006359	3/3G/4	Beinteil links unten, inkl. Eindrehmuttern
	3	Stück	1007020	3	Polster links oben
	3	Stück	1010263	3G /4	Polster links oben
	4	Stück	1007021	3/3G /4	Polster links unten
		Stück	1022454	3/3G	Bezug Beinteil oben, links
		Stück	1022445	4	Bezug Beinteil oben, links
		Stück	1022456	3/3G /4	Bezug Beinteil unten, links
	5	Stück	1018776	3/3G /4	Vierkanthalter Beinauflagen oben, ohne Abduktion - rechts/links komplett
	6	Stück	1018777	3/3G /4	Rundrohrhalter Beinauflagen oben mit Abduktion - rechts/links komplett
	5.1	Stück	1018778	3/3G /4	Vierkanthalter Beinauflagen unten ohne Abduktion - rechts/links komplett
	6.1	Stück	1018779	3/3G /4	Rundrohrhalter Beinauflagen unten mit Abduktion - rechts/links komplett
		Paar	1025493-P	3	Beinführung winkelverstellbar komplett für Lasse Gr. 3, komplett*
		Paar	1025500-P	3G	Beinführung winkelverstellbar komplett für Lasse Gr. 3G, komplett*
		Paar	1025504-P	4	Beinführung winkelverstellbar, komplett*

*inklusive Beinauflagen (Rechts und links, ohne Bezug und Polster), Scharniere und Kniewinkelverstellung montiert und Befestigungsmaterial

	7	Paar	1024928	3/3G /4	Winkelverstellung - ohne Beinauflagen - inkl. Knieverstellung, Scharniere sowie Schrauben- und Befestigungsmaterial
		Paar	1025494-P	3	Abduktionsverstellung komplett**
		Paar	1025501-P	3 G /4	Abduktionsverstellung komplett**

**inklusive Beinauflagen (rechts und links, ohne Bezug und Polster), Fußhalterungen verlängert, Halterohre und Befestigungsmaterial

	8	Stück	1008649	3/3G /4	Verbindungsplatte für Standardbein ohne Beinführung winkelverstellbar
	9	Stück	1007657	3/3G /4	Flügelschraube M8x15
	10	Stück	1005032	3/3G /4	Klemmhebel M6x10
	11	Stück	1018399	3/3G /4	Klemmhebel M8x12

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 29

06.03.2025

1024163_3.9

10. Kniepelotten

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung



Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

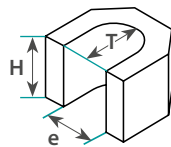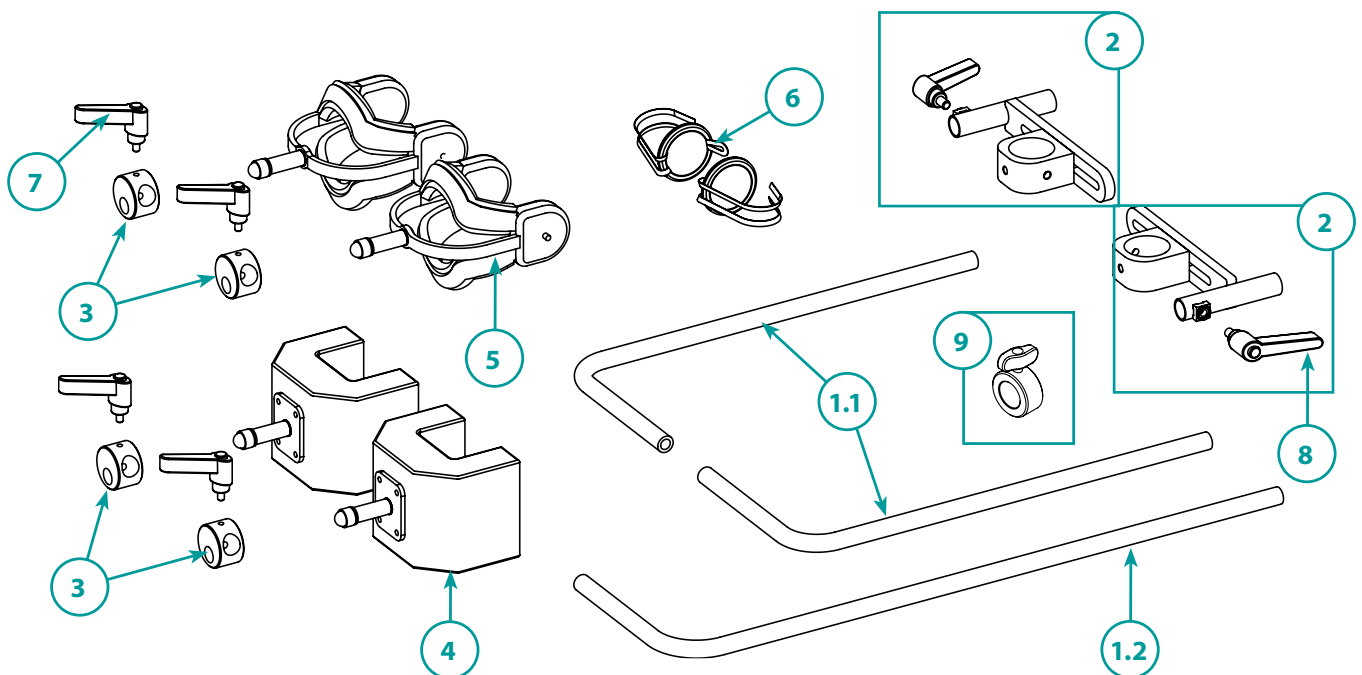

Code	Breite (e)	Polsterdicke	Höhe (H)	Tiefe (T)
1018545-7-3	7-8 cm	3 cm	9,5 cm	6,5 cm
1018545-9-3	9 cm	3 cm	11 cm	7 cm
1018545-10-3	10-12 cm	3 cm	12 cm	10 cm
1018545-13-3	13-14 cm	3 cm	12 cm	10,5 cm
1023530-15-3	15 cm	3 cm	12 cm	10,5 cm

Tabelle auf nachfolgender Seite

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

10. Kniepelotten

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

REHATEC®

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

Zeichnung auf vorheriger Seite

10. Kniepelotten					
Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1.1	Stück	1006182	3/4	Kniebogen Standard 430x180 mm
	1.2	Stück	1014453	3/4	Kniebogen verlängert 620x170 mm
	2	Stück	1018780	3/4	Kniepelottenhalter Standard KIT rechts/links inkl. Schrauben- und Befestigungsmaterial
	2.1	Stück	1024941	3/4	Kniepelottenhalter für Abduktionsverstellung KIT rechts/links inkl. Schrauben- und Befestigungsmaterial
	3	Stück	1006004	3/4	Knieverstellung dreifach inkl. Klemmhebel
	4	Stück	1025432-7-3	3/4	Kniepelotte Standard für Kniebreite 7+8 cm, rechts/links KIT*
	4	Stück	1025432-9-3	3/4	Kniepelotte Standard 9 cm, rechts/links KIT*
	4	Stück	1025432-10-3	3/4	Kniepelotte Standard für Kniebreite 10+11+12 cm, rechts/links KIT*
	4	Stück	1025432-13-3	3/4	Kniepelotte Standard für Kniebreite 13+14 cm, rechts/links KIT*
*inkl. Blech, Polster, Bezug, Anschraubbolzen, Knieverstellung dreifach und Klemmhebel					
		Stück	1014734	3/4	Bezug Kniepelotte Standard 7+8 cm
		Stück	1014736	3/4	Bezug Kniepelotte Standard 9 cm
		Stück	1014737	3/4	Bezug Kniepelotte Standard 10+11+12 cm
		Stück	1025442	3/4	Bezug Kniepelotte Standard 13+14 cm
	5	Stück	1018782	3/4	Kniepelotte anatomisch 8 cm*
	5	Stück	1018784	3/4	Kniepelotte anatomisch 11,5 cm*
	5	Stück	1018785	3/4	Kniepelotte anatomisch 13 cm*
*inkl. Polster, Bezug, Anschraubbolzen, Knieverstellung dreifach und Klemmhebel					
		Stück	1023254	3/4	Bezug für anatomische Kniepelotten 8 cm
		Stück	1026795	3/4	Bezug für anatomische Kniepelotten 11,5 cm
		Stück	1026796	3/4	Bezug für anatomische Kniepelotten 13 cm
	6	Satz	1018713-ET	3/4	4x Abpolsterung für Drehgelenke der anatomischen Kniepelotten (Stoff: Schwarz Neopren) Hinweis: Es werden 2 Stück pro Seite benötigt!
	7	Stück	1005032	3/4	Klemmhebel M6x10
	8	Stück	1018399	3/4	Klemmhebel M8x12
	9	Paar	1023378-ET	3/4	Anschlag (Stelling) für Knievertiefungsverstellung KIT

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Seite 31

06.03.2025

1024163_3.9

11. Fußplatten

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller

Datum

Seriennummer

Kommission

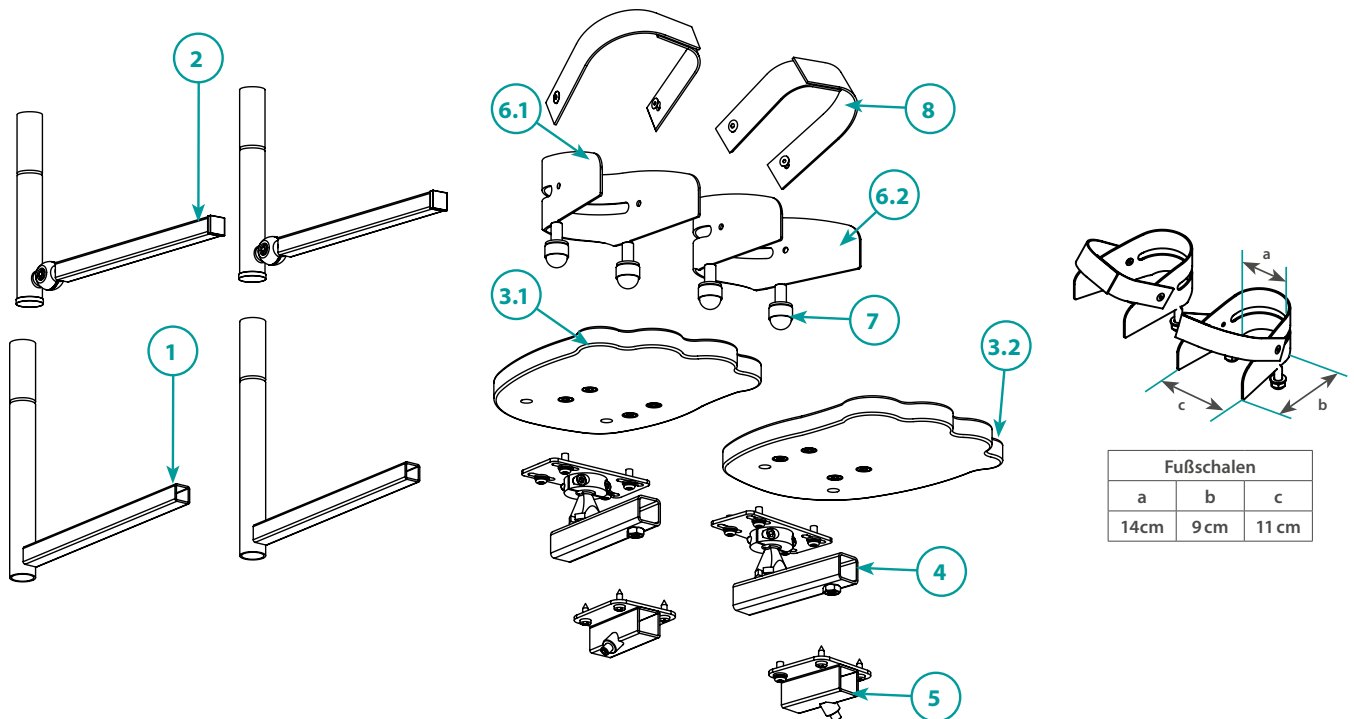

11. Fußplatten

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1006204	3/4	Fußwinkel, Standard (300 mm)
	1.1.	Stück	1014452	3/4	Fußwinkel für Abduktionsverstellung
	2	Paar	1020344-ET	3/4	Fußhalterung winkelverstellbar, rechts/links
	3.1	Stück	1001841	3/4	Fußplatte Standard, rechts
	3.2	Stück	1001842	3/4	Fußplatte Standard, links
	4	Paar	1022350-ET	3/4	Kugelgelenke dreidimensional verstellbar (Kugelgelenke und Aufnahme für Fußplatte)
	5	Stück	1005156-c	3/4	Unihalter Standard
	6.1	Stück	1004399	3/4	Fußschale verschraubbar Gr. 1, rechts inkl. Mutter und Scheibe
	6.2	Stück	1004398	3/4	Fußschale verschraubbar Gr. 1, links inkl. Mutter und Scheibe
	7	Stück	E910601-2	3/4	Halbhohe Mutter M10x1 für verschraubbare Fußschalen
	8	Stück	1014395-ET	3/4	Fußriemen, lang

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

12. Begurtung

Ersatzteilliste Heidelberger Liegebär Lasse Größe 3, 3G und 4

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung


Versandadresse

Besteller


Datum

Seriennummer

Kommission

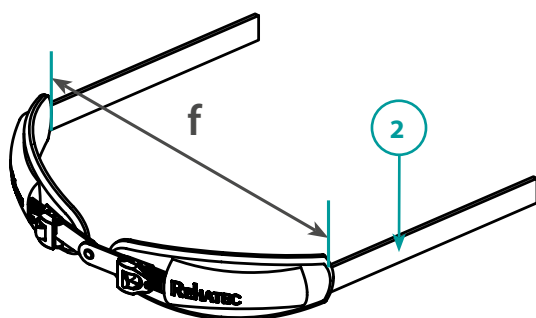

Gr.	f (Beckenbreite)	Code
XS	16 - 24 cm	E910752-1
S	20 - 32 cm	E910249-1
M	30 - 40 cm	E910819-1
L	36 - 46 cm	E910248-1

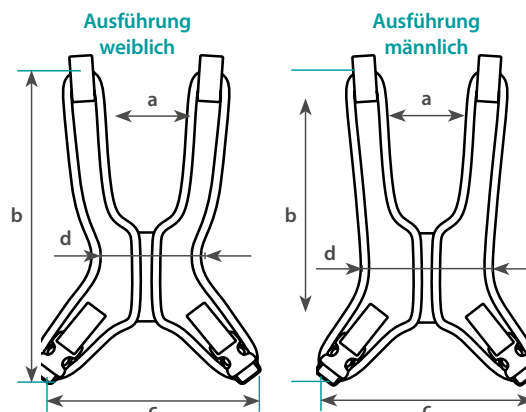

Ausführung weiblich						
Gr.	Code	a	b	c	d	Farbe
2	1008876	18,5 cm	41 cm	22 cm	8 cm	Neopren schwarz
2	1008876	18,5 cm	41 cm	22 cm	8 cm	Bezugsfarbe
3	1008878	23 cm	46,5 cm	25,5 cm	8 cm	Neopren schwarz
3	1008878	23 cm	46,5 cm	25,5 cm	8 cm	Bezugsfarbe

Ausführung männlich						
Gr.	Code	a	b	c	d	Farbe
2	1008877	18,5 cm	41 cm	22,5 cm	14 cm	Neopren schwarz
2	1008877	18,5 cm	41 cm	22,5 cm	14 cm	Bezugsfarbe
3	1008879	23 cm	48,5 cm	27 cm	18 cm	Neopren schwarz
3	1008879	23 cm	48,5 cm	27 cm	18 cm	Bezugsfarbe

12. Begurtung

Menge	Pos.	Einheit	Code	Für Gr.	Bezeichnung
	1	Stück	1008876	3 / 4	Leibchen Gr. 2 lang, weiblich, schwarz Neopren
	1	Stück	1008876-1	3 / 4	Leibchen Gr. 2 lang, weiblich, Bezugsfarbe
	1	Stück	1008877	3 / 4	Leibchen Gr. 2 lang, männlich, schwarz Neopren
	1	Stück	1008877-1	3 / 4	Leibchen Gr. 2 lang, männlich, Bezugsfarbe
	1	Stück	1008878	3 / 4	Leibchen Gr. 3, weiblich, schwarz Neopren
	1	Stück	1008878-1	3 / 4	Leibchen Gr. 3, weiblich, Bezugsfarbe
	1	Stück	1008879	3 / 4	Leibchen Gr. 3, männlich, schwarz Neopren
	1	Stück	1008879-1	3 / 4	Leibchen Gr. 3, männlich, Bezugsfarbe
	2	Stück	E910752-1	3 / 4	Pelvi.Loc. Beckengurt Gr. XS, 16-24 cm
	2	Stück	E910249-1	3 / 4	Pelvi.Loc. Beckengurt Gr. S, 20-32 cm
	2	Stück	E910819-1	3 / 4	Pelvi.Loc. Beckengurt Gr. M, 30-40 cm
	2	Stück	E910248-1	3 / 4	Pelvi.Loc. Beckengurt Gr. L, 36-46 cm

Weitere technische Daten finden Sie auf www.rehatec.com -> Downloads. Oder fordern Sie diese einfach per eMail, FAX oder Post an!

© Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Rehatec® GmbH erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.rehatec.com.

Mit einer Bestellung bestätigen Sie automatisch unsere AGB gelesen und akzeptiert zu haben.

Rehatec® GmbH, In den Kreuzwiesen 35, 69250 Schönau, Tel. (06228) 9136-0, Fax. (06228) 9136-99, info@rehatec.com, www.rehatec.com

Kostenvoranschlag

Absender / Rechnungsadresse

Bestellung

Versandadresse

Bestseller

Datum

□ □ □ □ □

Seriennummer

Kommission

Zeichnung

[illegible]